


Фотографические изображения

**Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов и модулей
биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer COBAS
INTEGRA)**

...иствующих для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer COBAS INTEGRA)

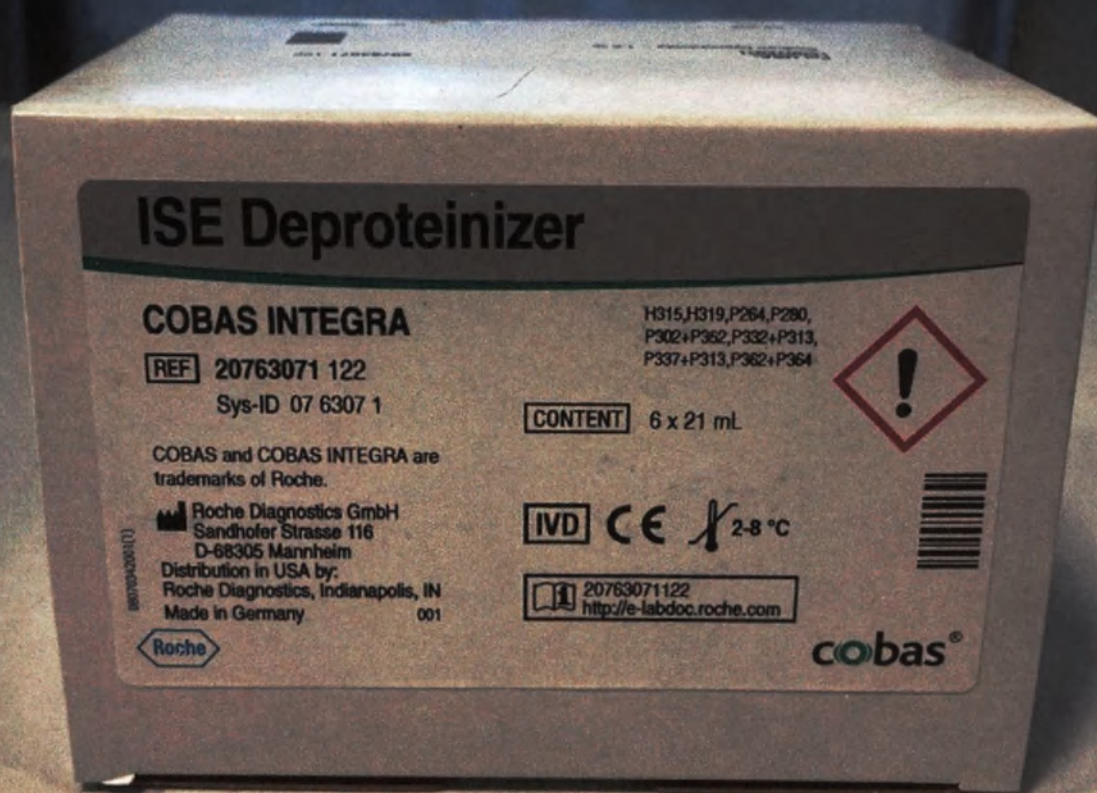


...для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE
...inizer COBAS INTEGRA)



proteinizer COBAS INTEGRA)





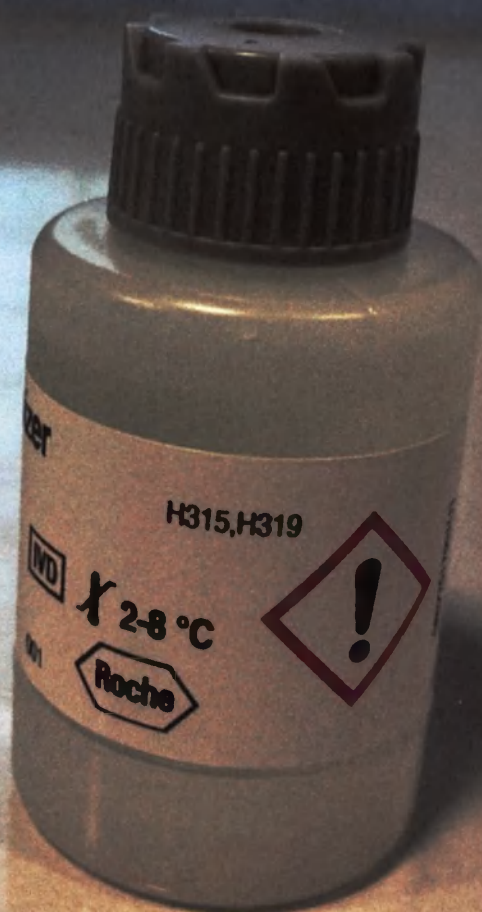

раствор чистящий для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer COBAS INTEGRA)

Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer COBAS INTEGRA), в составе:

1. Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer), флакон, объем 21 мл, – 6 шт.;
2. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2
Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64
E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат номер 20763071122

Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов и модулей биохимических COBAS INTEGRA и cobas c (ISE Deproteinizer), флакон, объем 21 мл, – 6 шт.

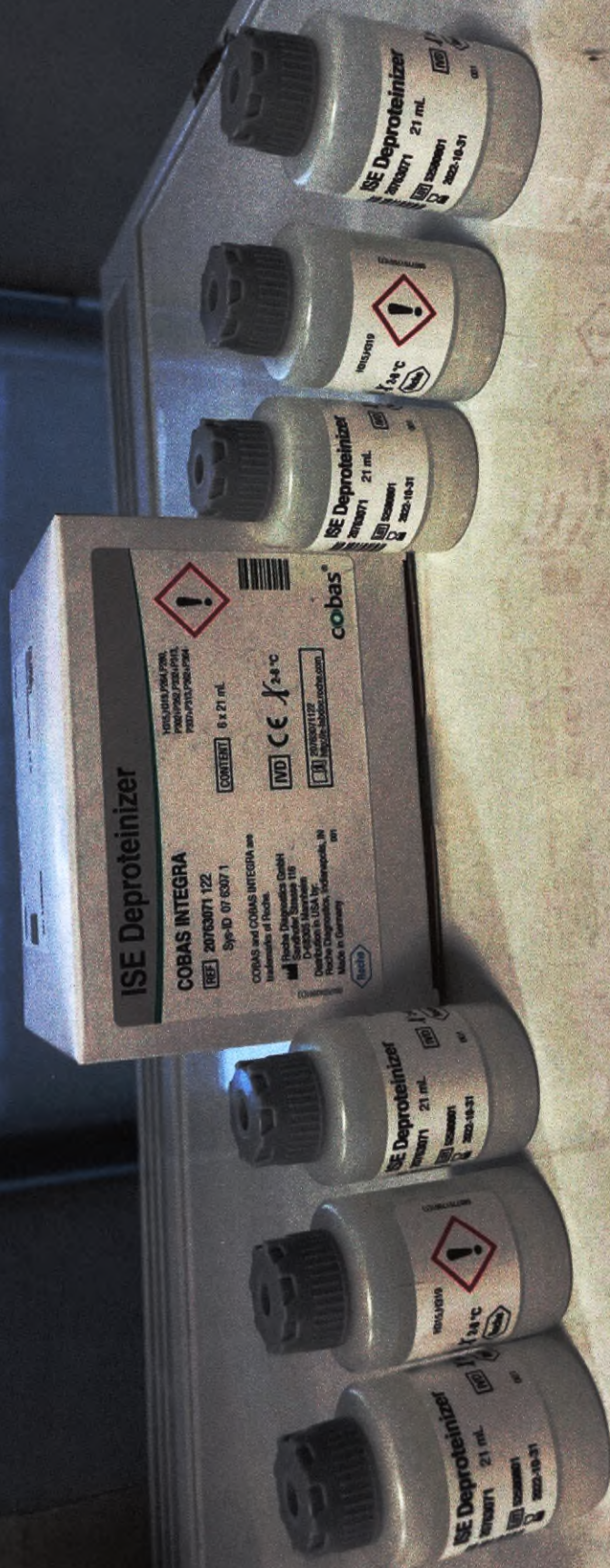



ISE Deproteinizer

Références de commande

REF	CONTENT
20763071 122	ISE Deproteinizer (6 x 21 mL)
04838181 001	ISE Deproteinizer (2 x 11 mL)

Français

Domaine d'utilisation

ISE Deproteinizer est une solution détergente pour le rinçage des électrodes sélectives d'ions sur les modules ISE des analyseurs COBAS INTEGRA et cobas c 111 et pour le rinçage interne de l'ISE des systèmes cobas c.

Caractéristiques

ISE Deproteinizer est une solution détergente pour le rinçage des électrodes sélectives d'ions, de la station de mélange et des tubulures au cours de la maintenance. La solution est également utilisée pour le rinçage de la (des) pipette(s) échantillon.

Réactifs - composition et concentrations

Hypochlorite de sodium (NaClO): environ 1.2 %

Précautions d'emploi et mises en garde

Pour diagnostic in vitro.

Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire. L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux dispositions légales.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Pour les USA : Mise en garde : La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur prescription médicale.

Ce coffret contient des substances classées de la manière suivante selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 :



Mise en garde

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Prévention :

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Réponse :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

L'étiquetage de sécurité du produit est conforme à la réglementation EU GHS.

Contact tél.: tous pays: +49-621-7590, USA: 1-800-428-2336

Préparation des réactifs

Prêt à l'emploi.

Analyseur COBAS INTEGRA 400 plus :

Placer la solution ISE Deproteinizer sur le rack ISE.

cobas®

Analyseur(s) compatible(s) avec les réactifs

Systèmes COBAS INTEGRA 400 plus et cobas c

cobas c 111

Analyseur cobas c 111 :

Placer les aliquotes de ISE Deproteinizer sur la zone échantillons comme affiché sur l'écran tactile de l'analyseur.

Systèmes cobas c :

Utiliser la solution ISE Deproteinizer conformément aux instructions du manuel d'utilisation du cobas c.

Conservation et stabilité

COBAS INTEGRA 400 plus :

Avant ouverture, entre 2 et 8 °C :

Voir date de péremption sur l'étiquette.

À bord, en cours d'utilisation et réfrigéré sur l'analyseur :

4 semaines

Une alerte signale quand le flacon doit être remplacé. Éliminer les résidus de solution.

Analyseur cobas c 111 :

Avant ouverture, entre 2 et 8 °C : Voir date de péremption sur l'étiquette.

après ouverture : 8 semaines entre 2 et 8 °C ou jusqu'à la date de péremption indiquée (selon la première échéance)

Systèmes cobas c :

Avant ouverture, entre 2 et 8 °C : Voir date de péremption sur l'étiquette.

La solution ISE Deproteinizer destinée à la procédure de maintenance des systèmes cobas c doit être fraîchement préparée.

Matériel fourni

Voir paragraphe « Réactifs - composition et concentrations ».

Matériel auxiliaire nécessaire

La liste du matériel auxiliaire nécessaire figure dans les fiches techniques et le manuel de l'utilisateur appropriés.

Équipement habituel de laboratoire

Mode opératoire

Pour garantir le bon fonctionnement du test, se conformer aux instructions relatives à l'analyseur utilisé indiquées dans le présent document. Pour les instructions spécifiques de l'analyseur, se référer au manuel d'utilisation approprié.

Dans cette fiche technique, le séparateur décimal pour distinguer la partie décimale de la partie entière d'un nombre décimal est un point. Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.

Symboles

Roche Diagnostics utilise les signes et les symboles suivants en plus de ceux de la norme ISO 15223-1 (pour les USA : voir dialog. Roche.com pour la définition des symboles utilisés) :

CONTENT	Contenu du coffret
REAGENT	Réactif
→	Volume après reconstitution ou homogénéisation
GTIN	Code article international

Les ajouts, modifications ou suppressions sont signalés par une barre verticale dans le marge.
© 2019, Roche Diagnostics



«Рос
Диагностика
Рус»
Тихомир

по доверенности
от 04.02.2021