

10. Утилизация

Тележка-каталка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка-каталка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Сертификат о приемке

Тележка-каталка медицинская (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.111 ТУ и признана годной для эксплуатации.

☐ Код 00000000 Тележка-каталка медицинская (мод.1) вариант поставки 1 - с матрасом

☐ Код 00000000 Тележка-каталка медицинская (мод.1) вариант поставки 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com


Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

КОПИЯ
ВЕРНА



ЕЛАМЕД

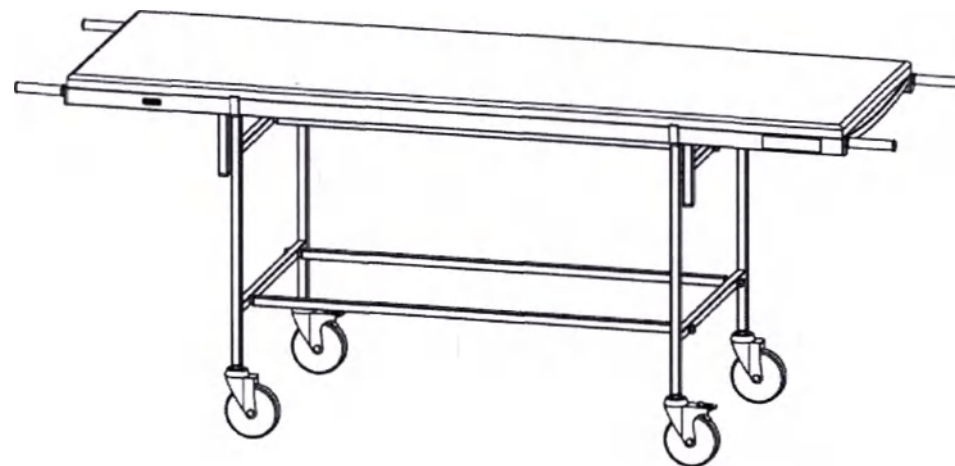

ТЕЛЕЖКИ-КАТАЛКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.111 ТУ

вариант исполнения

Тележка-каталка медицинская (мод.1) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИКС.942814.106, -01 РЗ

Тележка-каталка медицинская (мод.1) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - тележка-каталка), предназначена для транспортировки и размещения пациентов в пределах медицинской организации при оказании первичной и специализированной медицинской помощи, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки и размещения пациентов в пределах медицинской организации при оказании первичной и специализированной медицинской помощи, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки-каталки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвигание тележки-каталки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку-каталку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделий:

вариант поставки 1: 23,2±2,32 кг.

вариант поставки 2: 21,5±2,15 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2040х639х810)±10%.

1.3 Размеры рабочей поверхности лежа (длина х ширина) мм: (1800х600)±5.

1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1800х600)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тележки-каталки при равномерном распределении нагрузки:

- на матрасное ложе – 150 кг;

- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 170 кг.

2.3 Тележка-каталка варианта поставки 1 поставляется с односекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1800(±10)х600(±10)х20(±15), массой кг: 1,7±0,17.

2.4 Тележка-каталка установлена на 4 колёсные опоры диаметром 125 мм, не регулируемые по высоте, вращающиеся вокруг вертикальной оси. 2 колеса снабжены стопором.

2.5 Усилие, необходимое для передвижения тележки-каталки на колёсных опорах не должно превышать 100 Н.

2.6 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 150 Н.

2.7 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки-каталки должно быть 150 мм.

2.8 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.9 Минимальный радиус разворота – 1064 мм.

2.10 При эксплуатации тележка-каталка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.11 Каркас изделия изготовлен из стального прямоугольного профиля с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 4 ручки, решетчатое металлическое ложе из сварной сетки. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Вариант поставки 1 комплектуется мягким односекционным матрасом из поролона толщиной 20мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Тележка-каталка медицинская (мод.1) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

* вариант поставки определяет заказчик.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка-каталка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка-каталка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки-каталки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки-каталки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки-каталки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки-каталки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки-каталки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки-каталки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки-каталки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки-каталки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки-каталки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки-каталки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки-каталки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки-каталки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки-каталки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки-каталки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки-каталки.

- очистку от загрязнений поверхностей тележки-каталки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки-каталки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки-каталки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки-каталки.

10. Утилизация

Тележка-каталка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка-каталка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.111 ТУ и признана годной для эксплуатации.

☐ Код 00000000 Тележка-каталка медицинская (мод.2) вариант поставки 1 - с матрасом

☐ Код 00000000 Тележка-каталка медицинская (мод.2) вариант поставки 2 - без матраса

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com


Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

КОПИЯ
ВЕРНА



ЕЛАМЕД

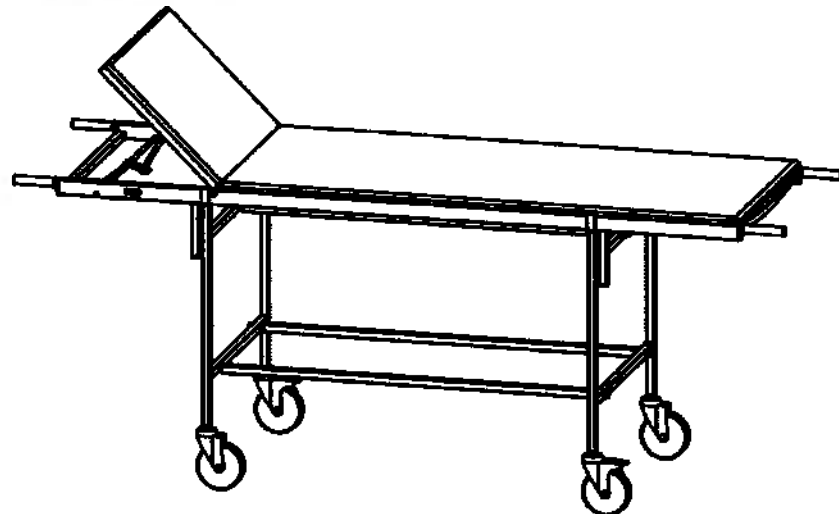

ТЕЛЕЖКИ-КАТАЛКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.111 ТУ

вариант исполнения

Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942814.107, -01 РЭ

Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2 (в дальнейшем - тележка-каталка), предназначена для транспортировки и размещения пациентов в пределах медицинской организации при оказании первичной и специализированной медицинской помощи, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки и размещения пациентов в пределах медицинской организации при оказании первичной и специализированной медицинской помощи, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки-каталки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! При опускании головной секции следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между основанием тележки-каталки и подъёмной секцией !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки-каталки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку-каталку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделий:

- вариант поставки 1: 26,3±2,63 кг.
вариант поставки 2: 24,6±2,46 кг.
1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (2040х639х810)±10%.
1.3 Размеры рабочей поверхности лежа (длина х ширина) мм: (1800х600)±5.
1.4 Размеры рабочей поверхности для установки матраса (длина х ширина) мм: (1800х600)±5.
1.5 Угол между горизонталью и головной секцией регулируется в пределах (°): (от 0 до 45)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тележки-каталки при равномерном распределении нагрузки:

- на спинную секцию – 150 кг;
- на головную секцию – 20 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 170 кг.

2.3 Тележка-каталка варианта поставки 1 поставляется с односекционным мягким матрасом размером (длина х ширина х высота) мм: 1800(±10)х600(±10)х20(±15), массой кг: 1,7±0,17.

2.4 Тележка-каталка установлена на 4 колёсные опоры диаметром 125 мм, не регулируемые по высоте, вращающиеся вокруг вертикальной оси. 2 колеса снабжены стопором.

2.5 Усилие, необходимое для передвижения тележки-каталки на колёсных опорах не должно превышать 100 Н.

2.6 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 150 Н.

2.7 Усилие, прилагаемое к основанию головной секции для изменения угла положения между горизонталью, не должно превышать 150 Н.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки-каталки должно быть 150 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.10 Минимальный радиус разворота – 1064 мм.

2.11 При эксплуатации тележка-каталка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.12 Каркас изделия изготовлен из стального прямоугольного профиля с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 4 ручки, решетчатое металлическое ложе из сварной сетки. Ложе разделено на 2 секции. Регулировка подъёма головной секции от 0° до 45° – при помощи бесступенчатого самозаклинивающегося механизма, спинная секция возможности регулировки не имеет. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Вариант поставки 1 комплектуется мягким односекционным матрасом из поролона толщиной 20мм, обтянутого винилискожей. В комплект варианта поставки 2 матрас не входит. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
- Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2	1*
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка-каталка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка-каталка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки-каталки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки-каталки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки-каталки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки-каталки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки-каталки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки-каталки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки-каталки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях тележки-каталки, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности тележки-каталки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.


7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки-каталки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки-каталки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

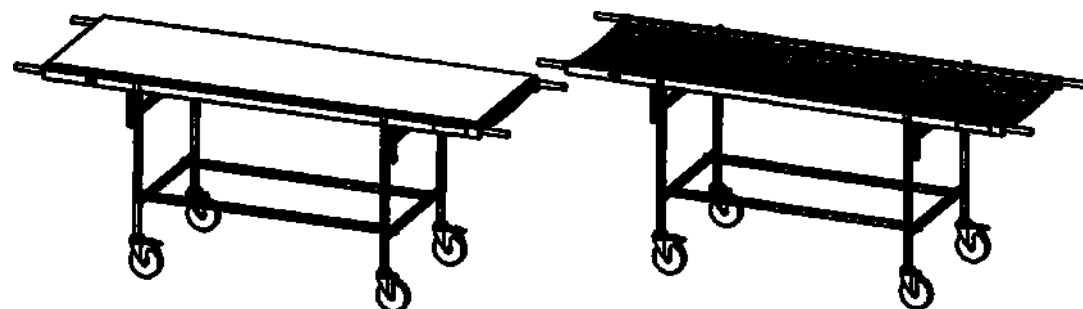Тележки-каталки медицинские по ГИКС.942810.111 ТУТележка-каталка медицинская (мод.1)в вариантах поставки 1, 2
☐ Код товара 00000000

☐ Код товара 00000000

Условные обозначения:

1. А-Г : детали и сборочные единицы

2. [1] - [8] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (10) : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложе	1
Б	Передвижная опора каркаса ложа	2
В	Труба продольная передвигного каркаса	3
Г*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кодов товара:

00000000

00000000

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	6	Болт М10х30	
2	4	Болт М10х25	
3	6	Шайба 10	
4	10	Шайба-гровер 10	
5	4	Ручка резиновая	
6	4	Колёсная опора	
7	4	Заглушки пластиковые	
8	1	Надпись ЕЛАМЕД	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

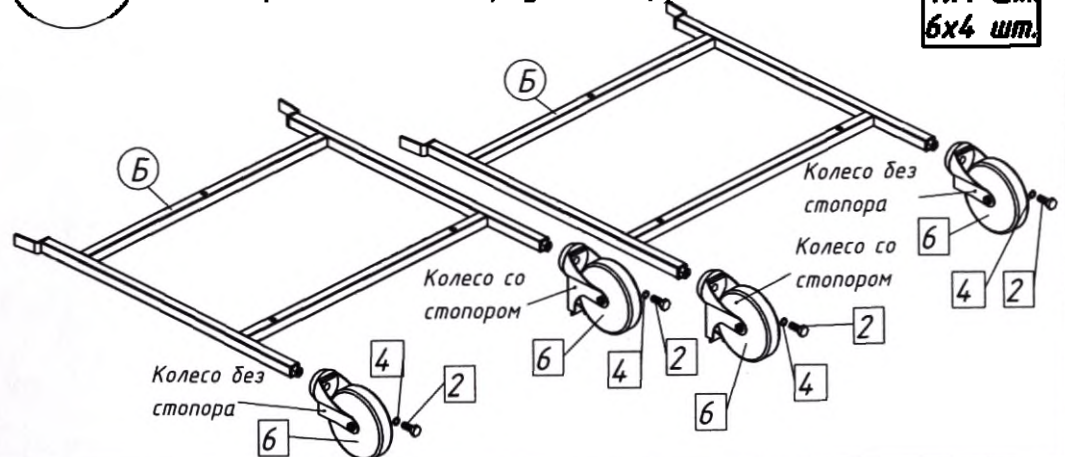


Схема сборки изделия

1 этап

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборки изделия. Произведите сборку 2-х передвижных опор


- Бх2 шт.
- 2х4 шт.
- 4х4 шт.
- 6х4 шт.



2 этап

Произведите сборку передвижного каркаса


- Бх2 шт.
- Вх3 шт.
- 1х6 шт.
- 3х6 шт.
- 4х6 шт.

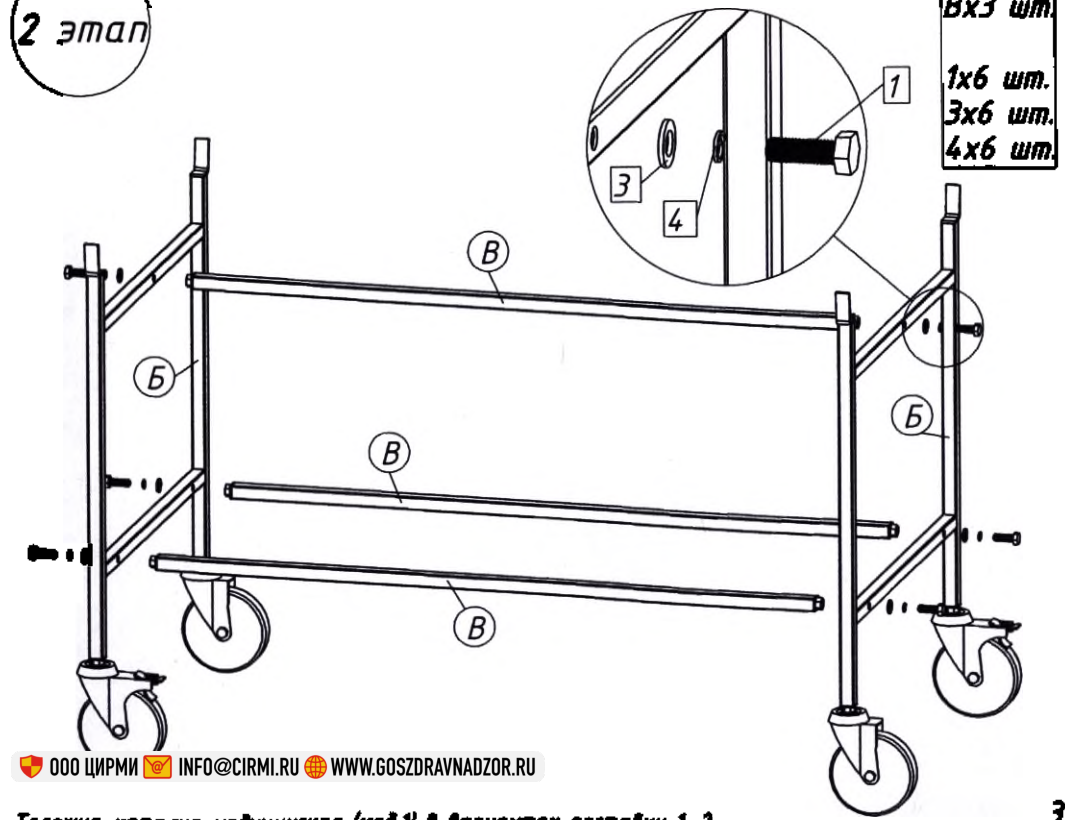

3 этап

Установите ручки и 4 заглушки


- Ах1 шт.
- 5х4 шт.
- 7х4 шт.

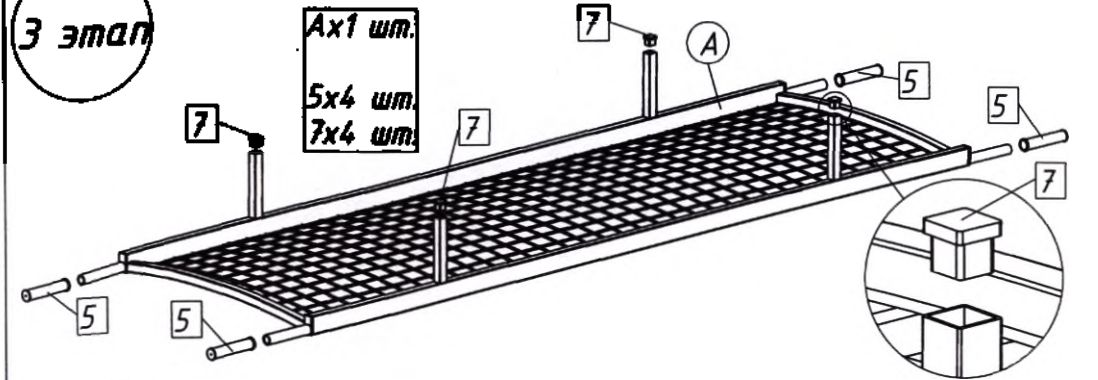

4 этап


После сборки изделия произведите установку надписи ЕЛАМЕД В

Надпись ЕЛАМЕД В должна располагаться на одной стороне с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке

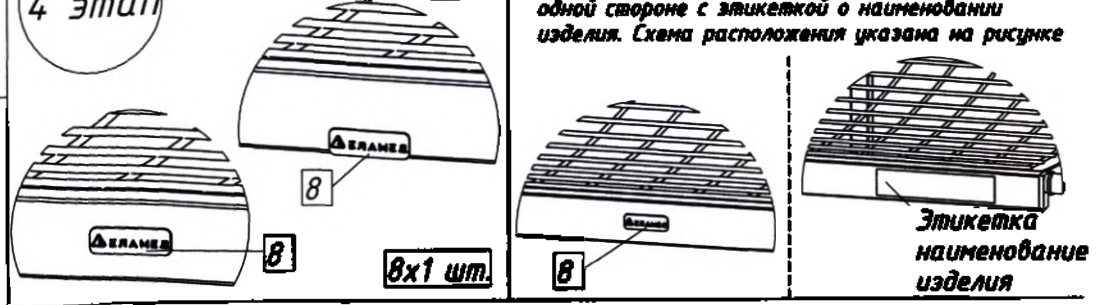


5 этап

После полной сборки изделия произведите установку ложа на передвижной каркас, а так же положите на ложе матрас Г, если он предусмотрен вариантом поставки

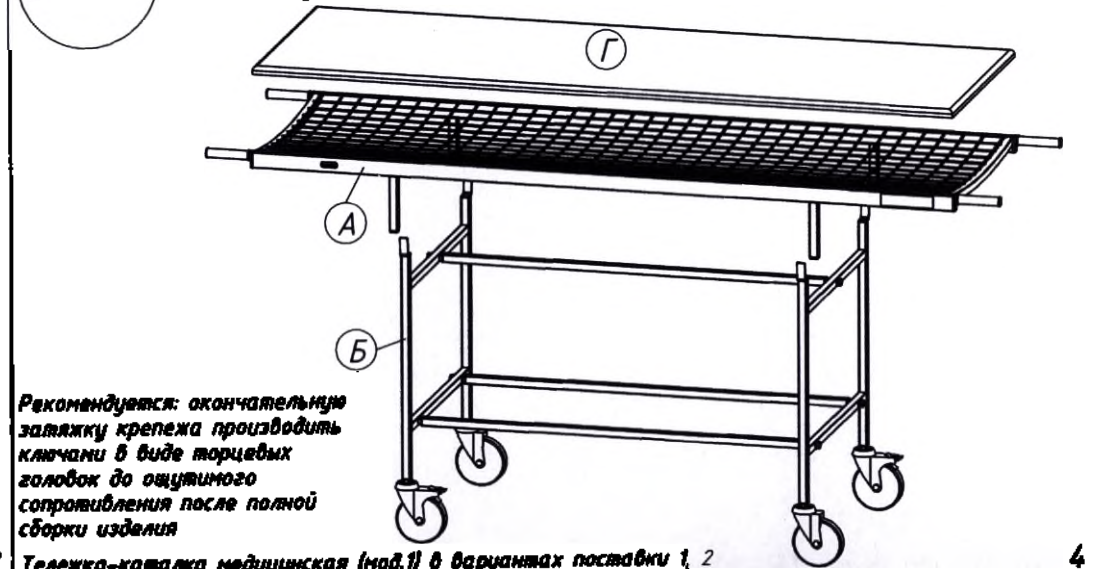

Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

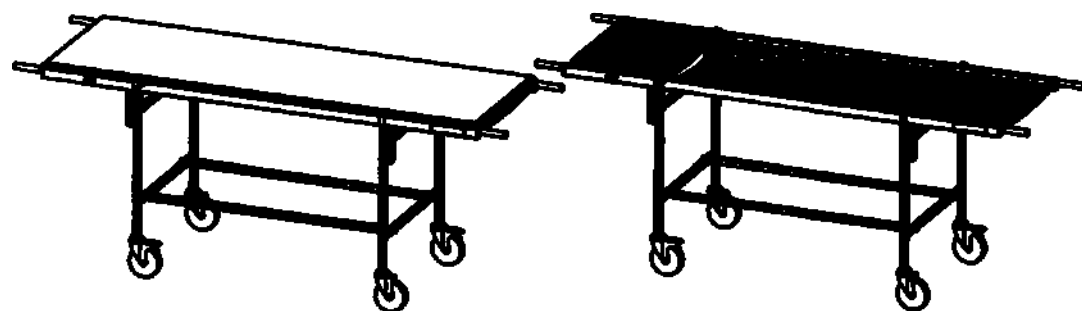
☐ Код товара 00000000

☐ Код товара 00000000

Условные обозначения:

1. А-Е : детали и сборочные единицы

2. [1] - [12] : крепёж и фурнитура

3. (1) - (10) : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Ложё	1
Б	Передвижная опора каркаса ложа	2
В	Труба продольная передвигного каркаса	3
Г	Стопор механизма фиксации	1
Д	Механизм фиксации	1
Е*	Матрас	1

*Деталь входит в комплект поставки только для кодов товара:
00000000
00000000

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	6	Болт М10х30	
2	4	Болт М10х25	
3	6	Шайба 10	
4	10	Шайба-гровер 10	
5	5	Винт М3х16	
6	10	Шайба 3	
7	5	Шайба-гровер 3	
8	5	Гайка М3	
9	4	Ручка резиновая	
10	4	Колёсная опора	
11	6	Заглушки пластиковые	
12	1	Надпись ЕЛАМЕД	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности


OM 29.842.00

Схема сборки изделия

Рекомендации для сборки: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на ней производите сборку изделия. Произведите сборку 2-х передних опор

1 этап


5x2 шт.
2x4 шт.
4x4 шт.
10x4 шт.

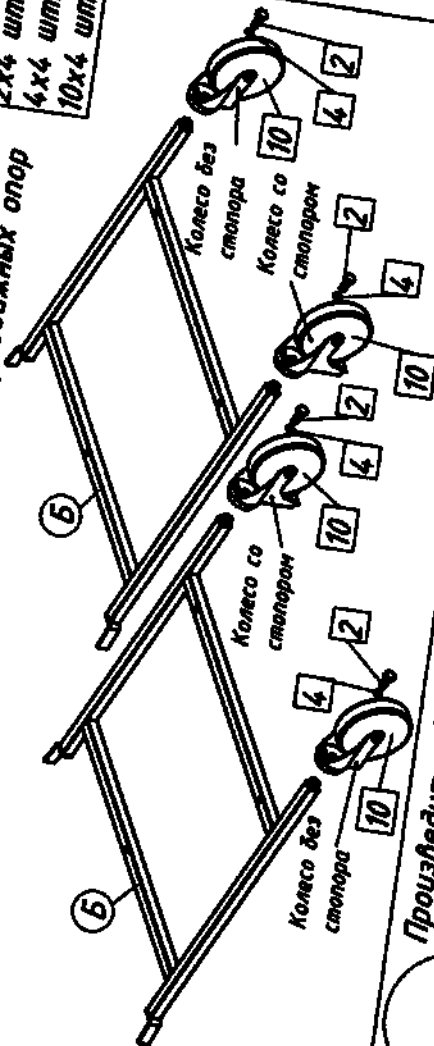

Произведите сборку переднего каркаса

2 этап


5x2 шт.
8x3 шт.
1x6 шт.
3x6 шт.
4x6 шт.

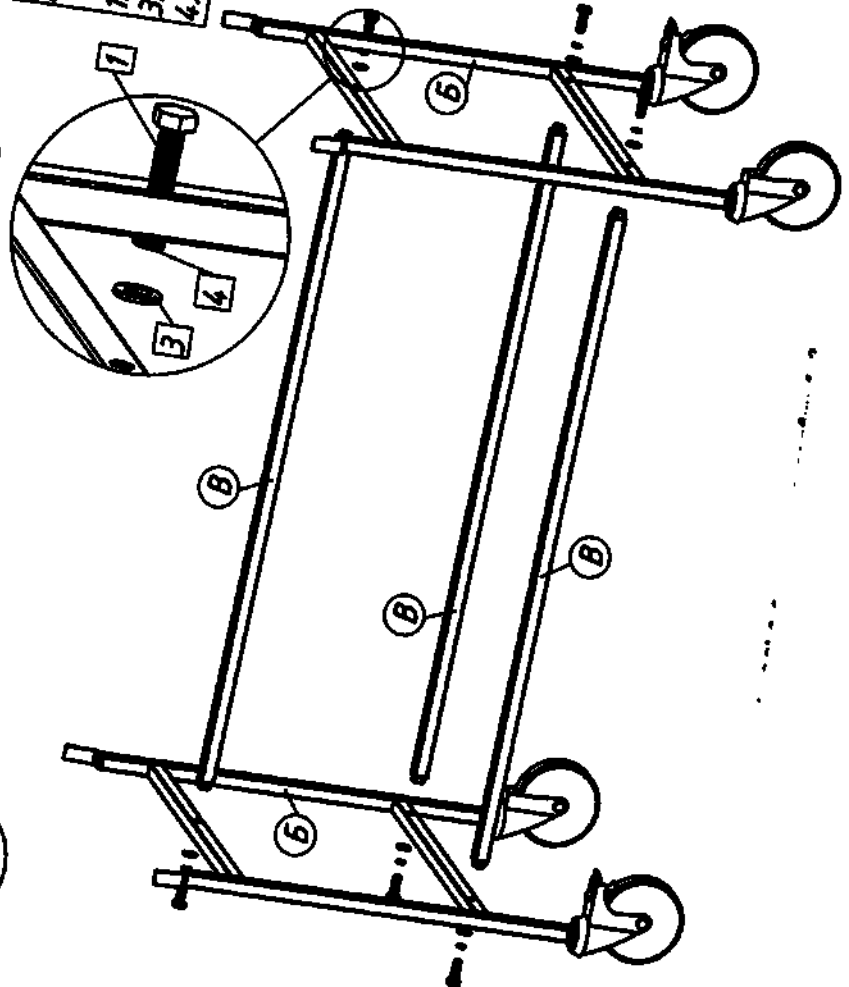

Установите стопор механизма фиксации и 4 заглушки

3 этап


Ax1 шт.
Гx1 шт.
11x4 шт.

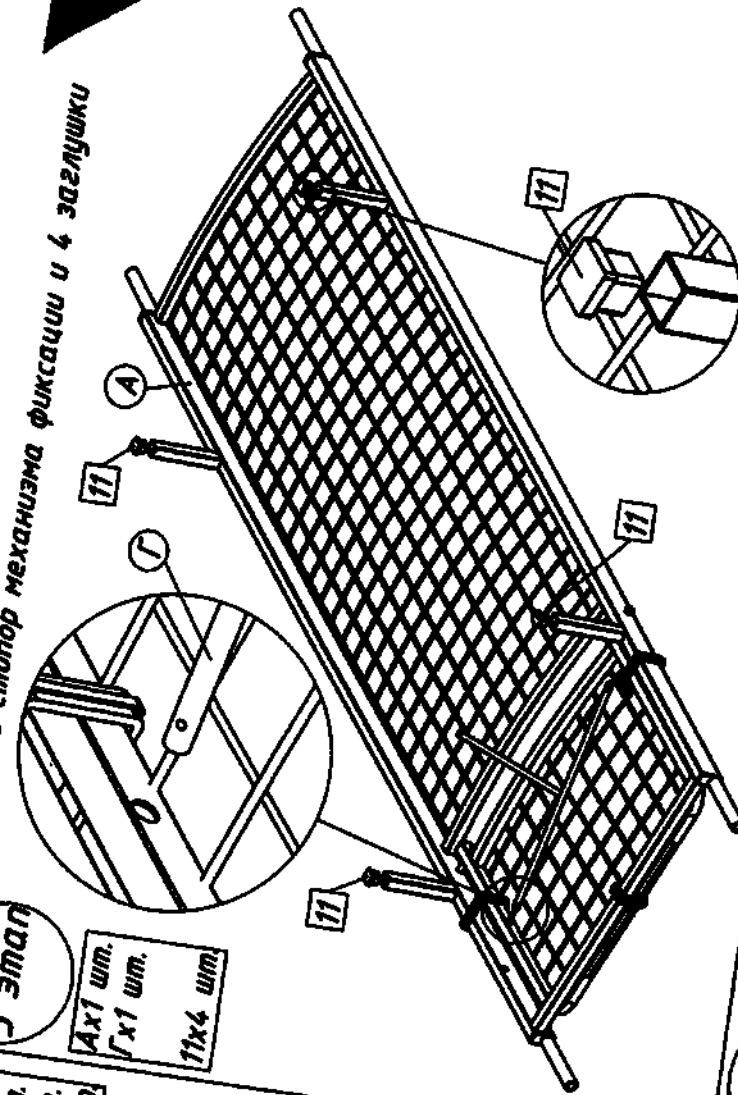

Зафиксируйте стопор механизма фиксации

4 этап

Ax1 шт.
Гx1 шт.
5x2 шт.
6x4 шт.
7x2 шт.
8x2 шт.


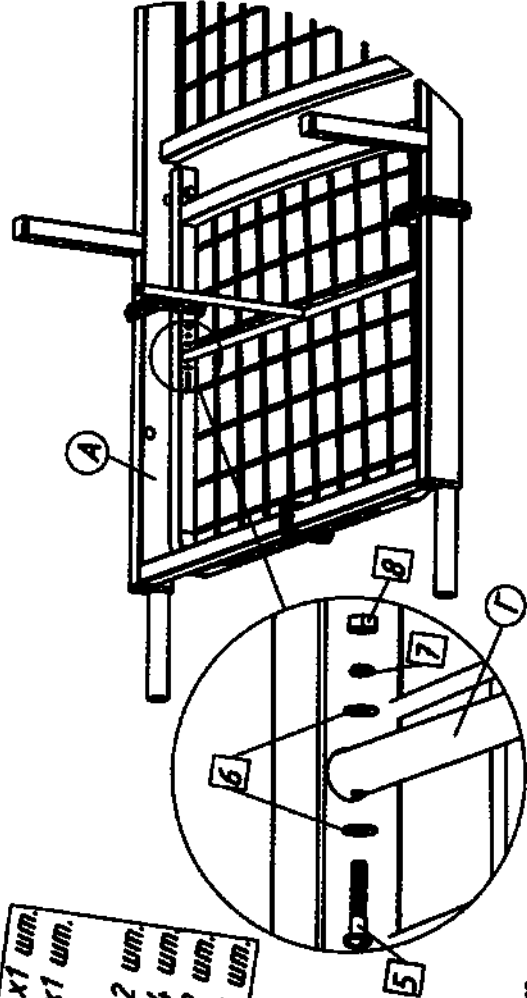


7 Тамбур-шлюз медицинский (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

842.00 Произведите установку механизма фиксации в отверстия на ложе тележки-каталки

5 этап

Ax1 шт.
Дx1 шт.

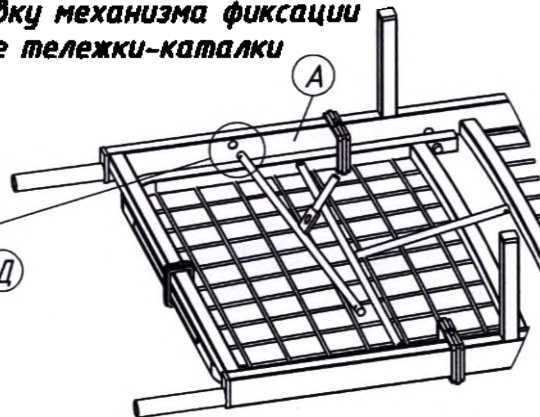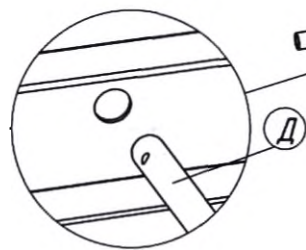


Зафиксируйте механизм фиксации

6 этап

Ax1 шт.
Дx1 шт.

5x2 шт.
6x4 шт.
7x2 шт.
8x2 шт.

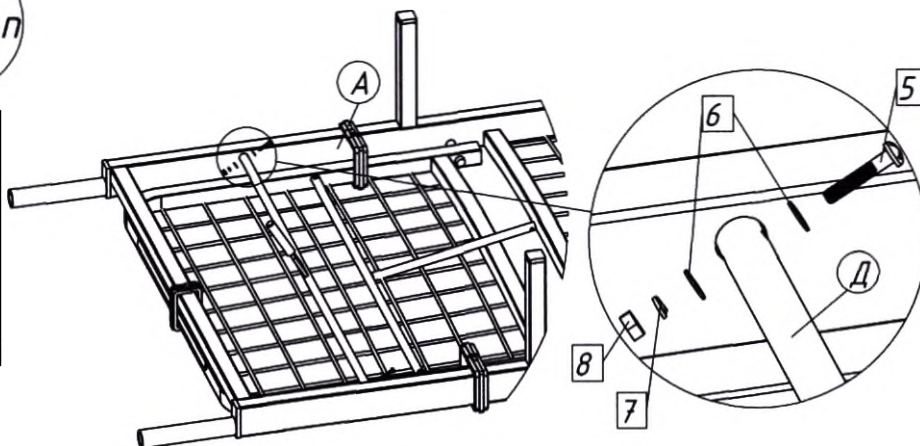


Завершив установку механизма фиксации, затяните все ранее установленные болты до ощутимого сопротивления

Установите ложе на опоры

Обрезать

Ax1 шт.

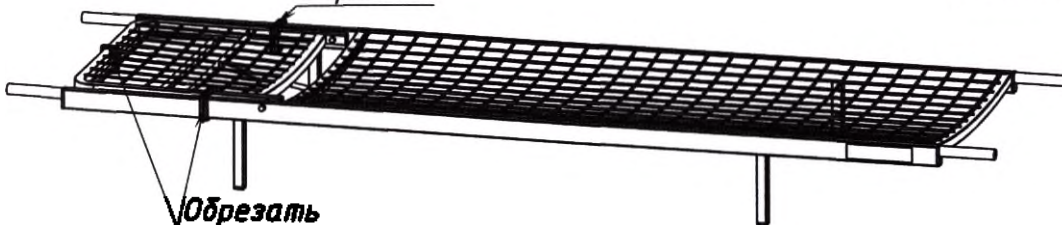



Установив ложе тележки-каталки (A) на горизонтальную поверхность (как показано на рисунке) и обрежьте стяжки,
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Борки

Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

7 этап

Подняв на необходимый угол головную секцию, а затем опуская, вставьте стопор в отверстие установленного механизма фиксации

Гx1 шт.
Дx1 шт.
11x2 шт.

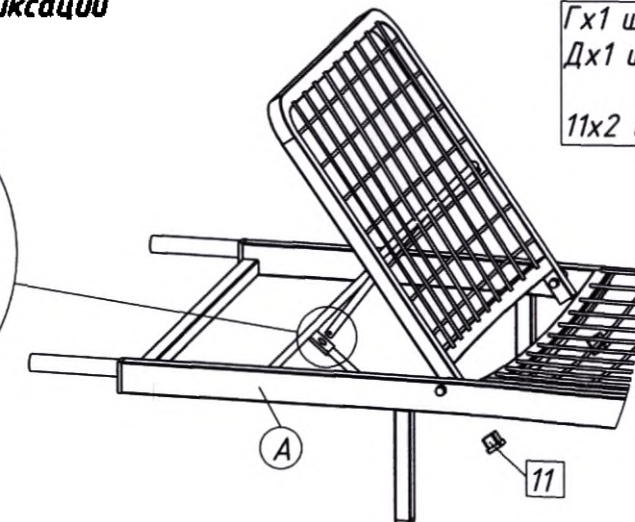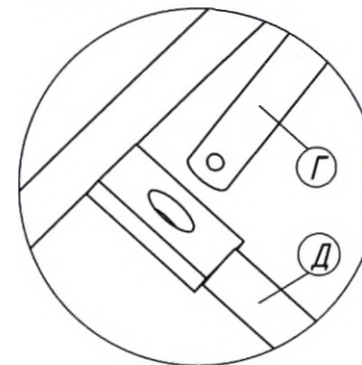


8 этап

Произведите установку фиксирующего винта на стопор механизма фиксации

Ax1 шт.
Дx1 шт.

5x1 шт.
6x2 шт.
7x1 шт.
8x1 шт.

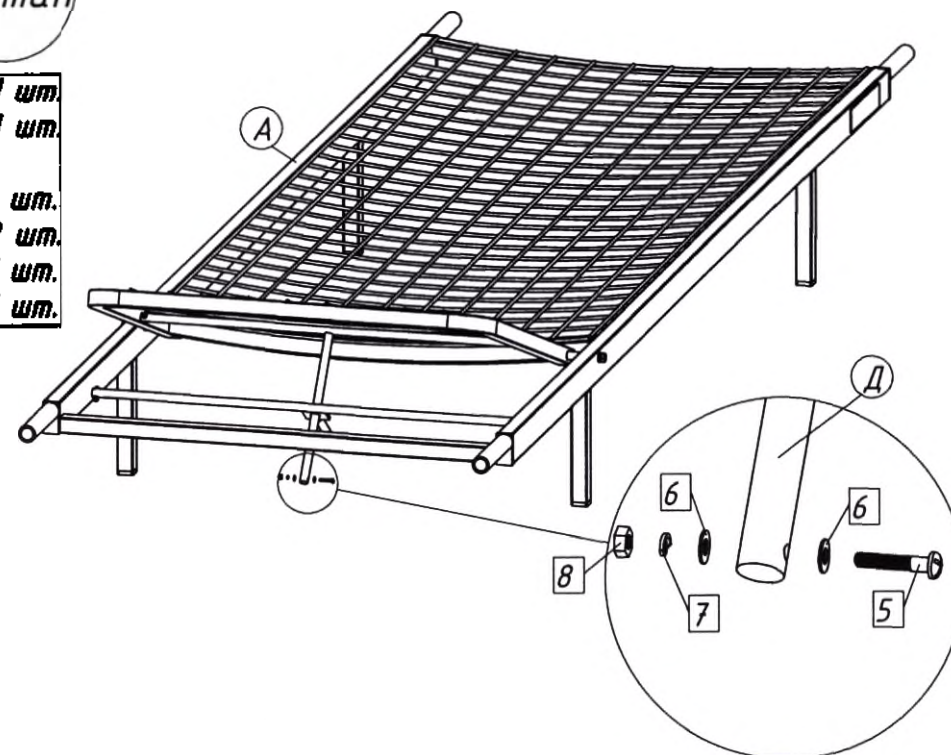


5 Тележка-каталка медицинская (мод.2) в вариантах поставки 1, 2

6

ОМ 29.842.00 Произведите установку ручек


9 этап

Ax1 шт.
9x4 шт.

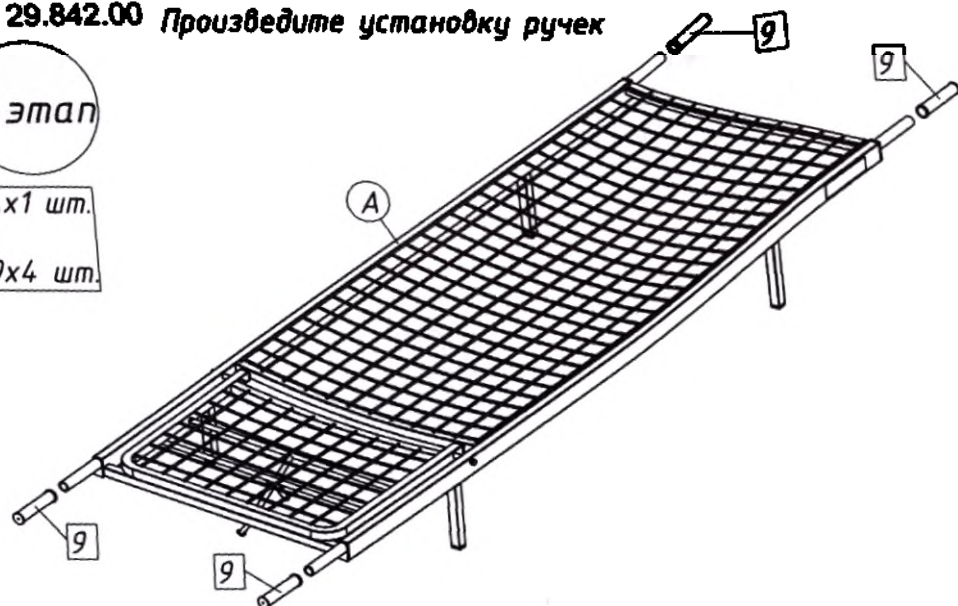


Произведите установку ложа на передвижной каркас

10 этап

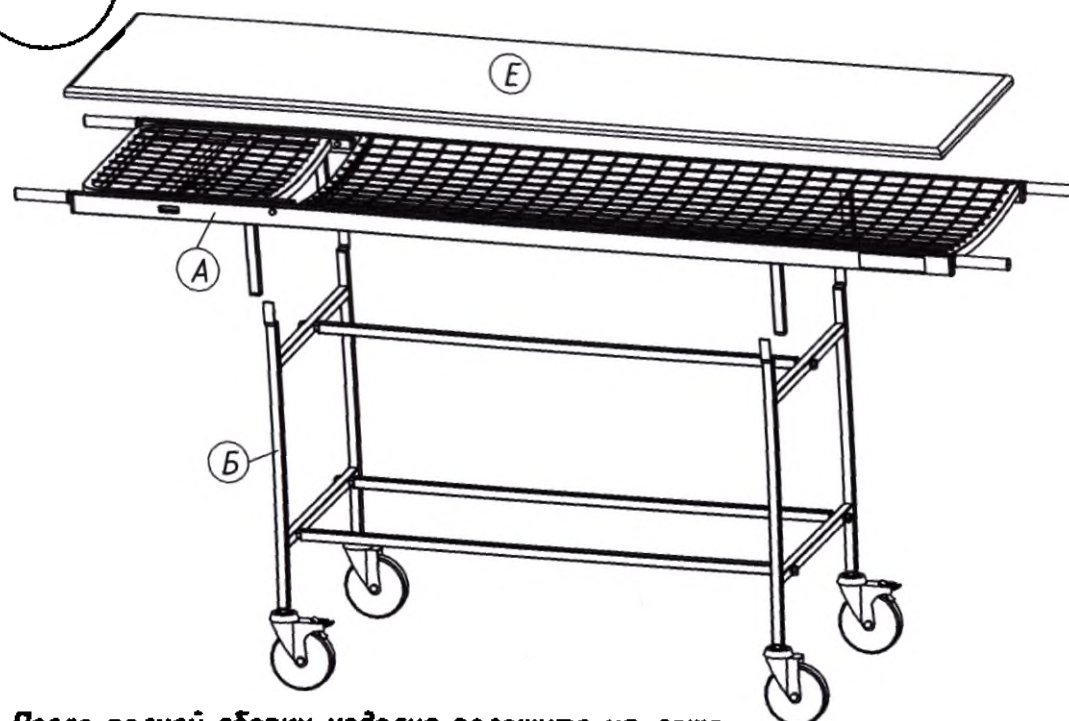


После сборки изделия произведите установку надписи ЕЛАМЕД 12


12x1 шт.

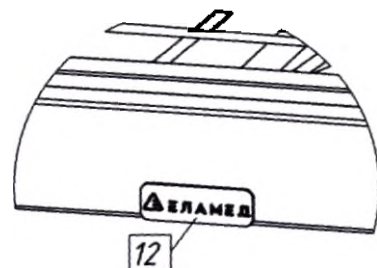


Надпись ЕЛАМЕД 12 должна располагаться на одной стороне с этикеткой о наименовании изделия. Схема расположения указана на рисунке

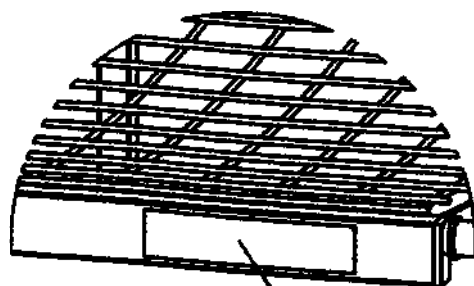

Этикетка наименование изделия

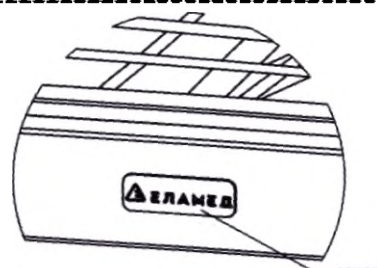


Рекомендуется: окончательную затяжку крепежа производить ключами в виде торцевых головок до ощутимого сопротивления после полной сборки изделия

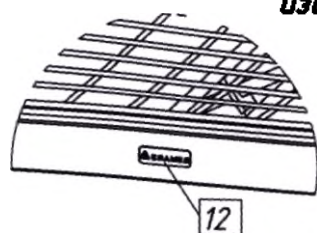

После полной сборки изделия положите на ложе матрас (Е), если он предусмотрен вариантом поставки

Собранное изделие

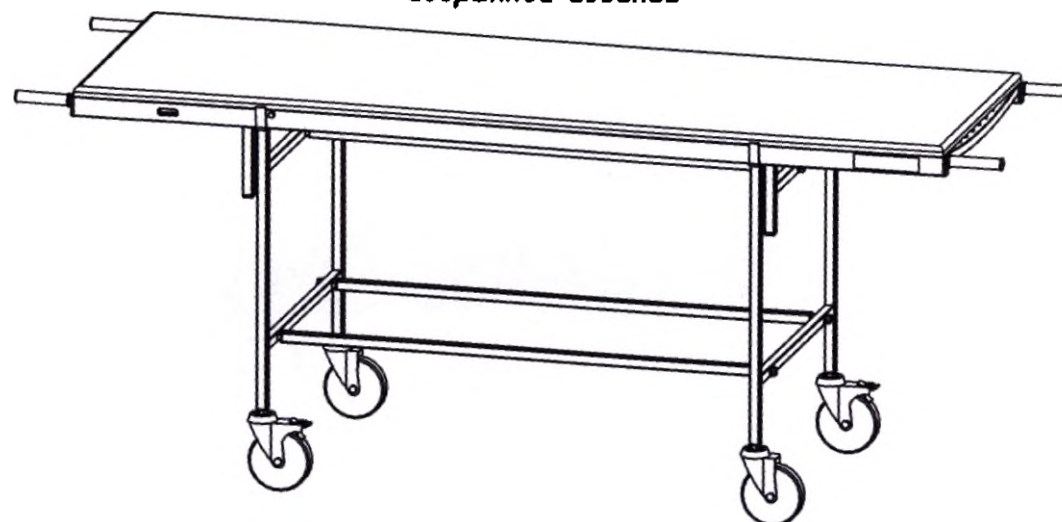

скреплено печатью 3 листа(ов).

КОПИЯ
ВЕРНА

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.



«13» 12 2021