

OGNA LAB S.R.L. (ОНЬЯ ЛАБ С.Р.Л.)
Via Figini 41 – 20835 Muggio (MB) – Italy
Тел: +390392782954, Факс: +390392782958
e-mail: ognalab@ognalabotatori.it, www.ognalaboratori.it

Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов BIOSEAL NORMAL

Производитель:

OGNA LAB S.R.L. – Italy

ОНЬЯ ЛАБ С.Р.Л. – Италия

Via Figini 41 – 20835 Muggio (MB) – Italy

Инструкция по применению

1. Состав

Порошок: оксид цинка, смола мастикового дерева, гидроксид кальция, сульфат бария, синтетический гидроксиапатит, двуйодистый тимол, ацетат цинка

Жидкость: очищенный Канадский бальзам, бидистиллированный эвгенол

2. Упаковка

- флакон с порошком (10 г)
- флакон с жидкостью (6 мл)

Принадлежности:

- мерная ложечка
- пипетка
- блок пластин для замешивания
- инструкция по применению

3. Свойства

Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов BIOSEAL NORMAL плотно прилегает к стенкам корневого канала зуба. BIOSEAL NORMAL обладает высокой текучестью, что позволяет ему должным образом заполнить весь корневой канал. Материал не раздражает периапикальные ткани. Входящий в состав синтетический гидроксиапатит значительно увеличивает биосовместимость материала.

4. Назначение

Постоянное пломбирование корневых каналов в сочетании с гуттаперчевыми штифтами или только одним материалом

5. Применение

Для оптимизации текучести и адгезивных свойств препарата BIOSEAL NORMAL рекомендуется смешать 120/130 мг порошка (1 мерная ложечка) с 1-2 каплями жидкости. Для извлечения необходимого количества порошка и жидкости используйте принадлежности материала: мерную ложечку и пипетку. Замешивайте материал на блоке пластин для замешивания до достижения гомогенной консистенции. После замешивания рабочее время составляет 10-15 мин при температуре 23° С. Время окончательного затвердевания – 90 мин. Затем приступайте к obturации корневого канала при помощи каналонаполнителя или гуттаперчевого штифта.

6. Особые указания

Для достижения оптимальных физических характеристик рекомендуется следовать инструкциям относительно пропорций замешивания порошок/жидкость. Не выводите материал за верхушку зуба. Перед obturацией убедитесь, что канал очищен от остатков пульпы. Для оптимизации адгезивных свойств тщательно просушите канал перед obturацией.

7. Меры предосторожности

Не используйте после истечения срока годности

8. Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам материала.

Негативные реакции на материал зарегистрированы не были.

9. Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до 45 С и относительной влажности от 10 до 80%, беречь от избыточной влаги и излишнего тепла.

Хранить в месте, труднодоступном для детей.

10. Срок годности

Указан на упаковке

11. Стерилизация

Материал не является стерильным, поэтому при производстве не проходит процесс стерилизации.

12. Применение

Предназначен для использования исключительно в стоматологической практике

13. Сведения об утилизации (уничтожении)

BIOSEAL NORMAL не представляет эпидемиологической, токсикологической или радиационной опасности, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, таким образом нет необходимости в дезинфекции/нейтрализации данного изделия в целях утилизации. Утилизация/уничтожение данного материала на территории Российской Федерации должно проводиться в соответствии с правилами об утилизации медицинских отходов, действующих на территории Российской Федерации, принимая во внимание его эпидемиологическую, токсикологическую и радиационную безопасность.

Генеральный директор

OGNA LAB S.R.L.

Подпись: Луиджи Брамбилла

Дата: 02.12.2013

Печать: OGNA LAB S.R.L.