

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ – «КРЕЙТ»»**

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для фиксации внутренних органов брюшной полости при опущении почек, печени, кишечника и других органов брюшной полости конституционного либо приобретенного характера вследствие исхудания, ослабления мышц брюшной стенки и таза, для нормализации внутрибрюшного давления, а также для удержания и профилактики грыж средней линии живота.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Опущение почек, печени, кишечника;

Прогрессирующее истощение;

Сильная физическая нагрузка;

Выпадение прямой кишки и профилактика рецидивов.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж при опущении внутренних органов - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия Б-610

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-610
№2	60-75	225,6
№ 3	70-90	282,7
№ 4	85-110	327,7
№ 5	105-125	365,1
№ 6	120-140	395,3
№ 7	135-155	425,5
№ 8	150-160	455,7
№ 9	155-175	485,9

Таблица 2 -Размерный ряд и масса изделия Б-620

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-620
№ 3	60-80	202,5
№ 4	80-100	228,1
№ 5	100-120	275,5
№ 6	120-140	309,6
№ 7	140-160	343,7
№ 8	160-180	377,8

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия Б-670

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г
		Б-670
№ 1	86-90	83,9
№ 2	90-94	93,8
№ 3	94-98	103,7
№ 4	98-102	113,6
№ 5	102-106	123,5
№ 6	106-110	133,4
№7	110-114	143,3
№ 8	114-118	153,2
№ 9	118-122	163,1
№ 10	122-126	173,0
№ 11	126-130	182,9
№ 12	130-134	192,8

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия Б-672

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-672
№ 1	78-82	80,3
№ 2	82-86	85,2
№ 3	86-90	88,2
№ 4	90-94	92,2
№ 5	94-98	96,1
№ 6	98-102	99,7
№ 7	102-106	104,7
№ 8	106-110	109,7
№ 9	110-114	114,7
№ 10	114-118	119,7
№ 11	118-122	124,7
№ 12	122-126	129,7

7.2. Состав основных материалов изделия указан на этикетке

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- 8.2. Надеть бандаж в положении лежа на спине, плотно зафиксировать застежку бандажа на животе (Б-610, Б-620).
- 8.3. Для бандажа Б-670, Б-672 вставить трубчатый аппликатор в хлопчатобумажный чехол, надеть аппликатор на внутреннюю деталь бандаж, надеть бандаж и расположить аппликатор в области ануса.
- 8.4. **СТИРКА И УХОД.**
 - 8.4.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
 - 8.4.2. Отбеливание запрещено.
 - 8.4.3. Не применять барабанную сушилку.
 - 8.4.4. Глажение запрещено.
 - 8.4.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- 9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- 9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- 9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Использованные изделия складываются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- 11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ПРИ ОПУЩЕНИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА – «КРЕЙТ»»**

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, женщинам при опущении органов малого таза: опущение стенок влагалища, опущение шейки матки, выпадение и опущение матки.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Выпадение и опущение шейки матки;

Слабость мышц стенок влагалища, в том числе после операций.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж при опущении органов малого таза - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий Б-631, Б-636, Б-637

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г	Обхват бедер, см	Масса, г	
		Б-631		Б-636	Б-637
№ 1	87-90	96,6	88-92	111,5	124,6
№ 2	91-94	101,7	92-96	115,5	132,1

№ 3	95-99	102,7	96-100	121,4	139,6
№ 4	100-103	103,5	100-104	129,8	147,1
№ 5	104-108	107,9	104-108	135,5	156,2
№ 6	109-114	118,6	108-112	139,2	165,9
№ 7	115-121	126,4	112-116	148,2	174,9
№ 8	122-128	135,7	116-120	157,2	188,2
№ 9	128-134	145,0	120-124	166,2	200,1
№ 10	134-140	154,3	124-128	175,2	212,0
№ 11	140-146	163,6	128-132	184,2	223,9
№ 12	146-152	172,9	132-136	193,2	235,8

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий Б-638

Размер	Обхват бедер без учета выступа живота, см	Масса, г
		Б-638
№ 1	88-92	150,8
№ 2	92-96	162,0
№ 3	96-100	173,2
№ 4	100-104	184,4
№ 5	104-108	195,6
№ 6	108-112	210,6
№ 7	112-116	219,3
№ 8	116-120	227,6
№ 9	120-124	249,1
№ 10	124-128	261,3
№ 11	128-132	265,1
№ 12	132-136	276,0
№ 13	136-140	299,7
№ 14	140-144	304,1
№ 15	144-148	308,5
№ 16	148-152	312,9

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия Б-639

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г
		Б-639
№ 1	88-92	104,8
№ 2	93-97	112,1
№ 3	98-102	119,2
№ 4	103-107	117,0
№ 5	108-112	123,7
№ 6	113-117	139,1
№ 7	118-122	154,5
№ 8	123-127	169,9
№ 9	128-132	185,3
№ 10	133-137	200,7
№ 11	138-142	216,1
№ 12	143-147	231,5
№ 13	148-152	104,8

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия Б-640

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г
		Б-640
№ 1	91-95	60,3
№ 2	96-100	65,2
№ 3	101-105	68,2
№ 4	106-110	72,2
№ 5	111-115	76,1
№ 6	116-120	79,7
№ 7	121-125	84,7
№ 8	126-130	89,7

№ 9	131-135	94,7
№ 10	136-140	99,7
№ 11	141-145	104,7
№ 12	146-150	109,7

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- 8.2. Бандаж надеть на тело и зафиксировать эластичными стяжками. Разместить аппликаторы в кармашках в проекции мягких тканей, застегнуть поддерживающие части с необходимой компрессией (*кроме Б-640*).
- 8.3. СТИРКА И УХОД.
- 8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- 8.3.2. Отбеливание запрещено.
- 8.3.3. Не применять барабанную сушилку.
- 8.3.4. Глажение запрещено.
- 8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- 9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- 9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- 9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- 11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крейт»

Кривицкая И.А.

07 апреля 2022 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ – «КРЕЙТ»»
НЕСТЕРИЛЬНО**

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для поддержания брюшной стенки в послеоперационный период, для создания необходимой фиксации послеоперационного шва, для удержания и профилактики послеоперационных грыж.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Операции на органах брюшной полости и стенки, в т.ч. липосакции и пластической хирургии;

Профилактика образования послеоперационных грыж и патологических полостей.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж послеоперационный - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-10.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделий Б-330, Б-331, Б-332, Б-333, Б-334, Б-357, Б-358, Б-359

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г							
		Б-330	Б-331/ Б-332	Б-333	Б-3333	Б-334	Б-357	Б-358	Б-359
№ 3	60-80	204,8	178,0	234,8	267,3	260,5	89,8	203,8	260,5
№ 4	80-100	239,0	212,3	276,8	297,1	298,4	102,2	224,7	298,4
№ 5	100-120	273,2	238,8	307,8	333,7	337,1	113,1	239,8	337,1
№ 6	120-140	307,4	270,1	350,1	356,6	380,3	123,7	261,1	380,3
№ 7	140-160	341,6	301,4	356,5	386,9	423,5	134,3	282,4	423,5
№ 8	160-180	375,8	332,7	362,9	410,5	466,7	144,9	303,7	466,7
№ 9	180-200	-	-	-	-	260,5	155,5	-	-

Таблица 2 - Размерный ряд и масса изделий Б-335, Б-360, Б-361

Размер	Обхват грудной клетки, см	Масса изделия, г		
		Б-335	Б-360	Б-361
№ 3	60-80	236,2	226,8	255,9
№ 4	80-100	266,0	253,7	288,5
№ 5	100-120	279,3	280,6	311,7
№ 6	120-140	326,7	307,5	338,6
№ 7	140-160	374,1	334,4	365,5
№ 8	160-180	421,5	361,3	392,4
№ 9	180-200	468,9	388,2	419,3

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделий Б-340, Б-345

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г	
		Б-340	Б-345
№ 3	60-80	119,8	170,8
№ 4	80-100	155,8	211,8
№ 5	100-120	185,6	248,0
№ 6	120-140	204,9	283,5
№ 7	140-150	224,2	319,0
№ 8	150-160	243,5	354,5
№ 9	160-170	262,8	390,0
№ 10	170-180	282,1	425,5
№ 11	180-190	301,4	461,0

Таблица 4- Размерный ряд и масса изделий Б-346, Б-347, Б-339/70, Б-339/90

Размер	Обхват талии, см	Масса, г			
		Б-346	Б-347	Б-339/70	Б-339/90
№ 1	60-70	199,7	164,1	144,1	142,2
№ 2	70-80	214,7	182,5	162,5	152,0
№ 3	80-90	228,5	184,0	164,0	164,0
№ 4	90-100	235,4	192,5	172,5	174,3
№ 5	100-110	256,1	203,1	183,1	181,1
№ 6	110-120	272,6	216,0	196,0	191,2
№ 7	120-130	283,1	224,1	204,1	210,6
№ 8	130-140	293,6	234,5	214,5	219,9
№ 9	140-150	304,1	244,9	224,9	229,2
№ 10	150-160	314,6	255,3	235,3	238,5
№ 11	160-170	325,1	265,7	245,7	247,8
№ 12	170-180	335,6	276,1	256,1	257,1
№ 13	180-190	346,1	286,5	266,5	266,4
№ 14	190-200	356,6	296,9	276,9	275,7

Таблица 5 - Размерный ряд и масса изделий Б-336, Б-337, Б-338

Размер	Обхват под грудью, см	Масса изделия, г		
		Б-336	Б-337	Б-338
№ 1	55-65	-	-	161,9
№ 2	65-75	169,3	169,3	184,8

№ 3	75-85	178,5	178,5	207,7
№ 4	85-95	187,7	187,7	230,6
№ 5	95-105	198,7	198,7	245,1
№ 6	105-115	213,7	213,7	259,6
№ 7	115-125	228,0	228,0	274,1
№ 8	125-135	251,2	251,2	288,6
№ 9	135-145	272,1	272,1	-
№ 10	145-155	293,0	293,0	-
№ 11	155-165	313,9	313,9	-
№ 12	165-175	334,8	334,8	-

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия Б-305

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г
		Б-305
№ 1	50-65	85,2
№ 2	65-80	110,9
№ 3	80-95	136,6

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделий Б-341, Б-342, Б-343, Б-356

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г			
		Б-341	Б-342	Б-343	Б-356
№ 1	91-95	75,5	131,3	75,0	102,8
№ 2	96-100	84,3	137,6	83,8	110,9
№ 3	101-105	91,4	143,9	90,9	113,5
№ 4	106-110	96,0	150,2	95,5	124,4
№ 5	111-115	100,6	156,5	100,1	137,5
№ 6	116-120	105,2	162,8	104,7	150,5
№ 7	121-125	109,8	169,1	109,3	171,4
№ 8	126-130	114,4	175,4	113,9	178,1
№ 9	131-135	119,0	181,7	118,5	171,5
№ 10	136-140	123,6	188,0	123,1	178,2
№ 11	141-145	128,2	194,3	127,7	171,6
№ 12	146-150	132,8	200,6	132,3	178,3

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделий Б-344

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г
		Б-344
№ 1	88-92	89,0
№ 2	92-96	93,5
№ 3	96-100	99,8
№ 4	100-104	106,1
№ 5	104-108	112,4
№ 6	108-112	118,7
№ 7	112-116	125,0
№ 8	117-121	131,3
№ 9	122-126	137,6
№ 10	127-131	143,9
№ 11	132-136	150,2
№ 12	137-141	156,5

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделий Б-350

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г
		Б-350
№ 1	56-88	86,5
№ 2	88-120	123,9
№ 3	120-132	161,3
№ 4	132-144	198,7

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделий Б-355

Размер	Обхват талии, см	Масса изделия, г
		Б-355

№ 1	56-88	136,4
№ 2	88-120	170,9
№ 3	120-152	205,4
№ 4	152-184	239,9

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Надеть бандаж в положении лежа на спине, плотно зафиксировать застежку бандажа на животе.

8.2.1. Бандажи Б-346, Б-347, Б-339/70, Б-339/90 рекомендуется надевать в положении лежа перед подъемом с постели (*Отверстие под стому в бандаже Б-346 необходимо вырезать самостоятельно, предварительно произведя замеры расположения стомы на теле*). Бандажное полотно без отверстия расположить в области спины, на животе расположить панель с отверстием, застегнуть бандаж с помощью застежек, чтобы отверстие оказалось в области стомы. Через отверстие бандажа вывести емкость приемника или дренажа наружу. Зафиксировать положение приемника или бандажа дополнительным фиксирующим элементом.

8.2.2. Бандаж Б-350 рекомендуется надевать через ноги.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 лист(ов)

Руководитель организации

