



SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen

Tel. +41 71 272 40 00
Fax +41 71 272 40 01
www.sigvaris.com

КОПИЯ
SIGVARIS
GROUP

УТВЕРЖДАЮ
SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария


Juergen Sigg
CEO

Инструкция по применению
в соответствии с приказом МЗ РФ 11н

ред.2

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland
«СИГВАРИС АГ»
Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен,
Швейцария

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland
«СИГВАРИС АГ»
Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен,
Швейцария

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 1 из 60

Наименование медицинского изделия:

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения:

- **Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин AMA (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2:**
 - Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин AMA (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2 – 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:**
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:**
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:**
 - Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:**
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2:**
 - Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- **- Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис, MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS:**
 - Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис, MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS - 2 шт.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 2 из 60

- Инструкция по применению – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:
 - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2:
 - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
 SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

- Упаковка – 1 шт.
- - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 – 1 шт.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
 SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

- Инструкция по применению – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

«СИГВАРИС АГ»

Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

«СИГВАРИС АГ»

Греблиштрассе 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия:

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения предназначены для использования медицинским персоналом и населением в возрасте от 16 до 100 лет.

Назначение медицинского изделия и принципы действия:

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения, производства SIGVARIS AG, Швейцария предназначены для профилактики и лечения варикозного расширения вен, лимфovenозной недостаточности разных видов, тромбофлебита, тромбоза.

Принципы действия медицинского изделия

- Гольфы «Сигварис» «Актив Маскулин» AMA (Джеймс) (Active MASCULINE AMA (James):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Классификация

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Active MASCULINE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

- Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, (Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Бесшовные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential CLASSICAL классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

- Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2 (Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Бесшовные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential COMFORTABLE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

- Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссенциал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, (Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Беспровные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру.

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential COMFORTABLE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
ОКПД2: 14.31.10.249

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 154040

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2
(Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Беспровные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential COMFORTABLE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейде для мужчин /для женщин Сигварис
(MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS):

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 7 из 60

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Беспровные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру.

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential COMFORTABLE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2 (DynaVen CLASSIC DCL CCL2):

При медикаментозной компрессионной терапии на конечности или другие части тела надеваются эластичные изделия для оказания на них контролируемого давления. Тем самым изделие сжимает стенки вен и улучшает скорость кровообращения. Медицинская компрессия также помогает уменьшить отек и воссоздает условия, эффективные для лечения хронических воспалительных заболеваний.

Беспровные трикотажные чулки с наибольшим давлением в области щиколотки и постепенно уменьшающимся к бедру.

Классификация

В соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/45, приложением VIII, изделие Essential COMFORTABLE классифицируется как медицинское изделие 1-го класса (Правило 1).

Показания, противопоказания к применению медицинского изделия:

Область применения – Компрессионные чулки служат вспомогательным средством при компрессионной терапии. Изделия предназначены для длительной терапии, а также для компрессии и сужения диаметра вен. Изделие предназначено для многократного использования на ногах (малоберцовая кость, бедро, вся нога).

Показания.

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS, для всех вариантов исполнения:

- Функциональные нарушения, такие как чувство тяжести и усталости в ногах, без варикоза (C0)°

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 8 из 60

- Лёгкая стадия варикоза с субъективными проявлениями (небольшое расширение кожных вен, ретикулярный варикоз) (C1-C2)°
- Варикоз во время беременности без отёка (C2)°
- Варикоз во время беременности с отёком (C3)°
- Отёки по вечерам по индивидуальным причинам (венозные) (C3)°
- Первичный варикоз с отёком (C3)°
- Запущенный первичный варикоз с отёком (расширение стволов и ветвей) (C3)°
- Хроническая венозная недостаточность (C6)°
- - I степени* (C3)* флебэктатическая корона
- - II степени* (C4)* хронический отёк**, экзема**, эритема**, гиподерматоз**, дерматосклероз, белая атрофия кожи
- - IIIa* степени (C5)* вылеченные трофические язвы (профилактика обострения)
- *Согласно Widmer & Marshall **После завершения базовой терапии
- Профилактика тромбообразования/эмболии
- Тромбофлебит или варикотромбоз (тромбоз поверхностных вен), вероятный отёк
- Тромбофлебит (тромбоз глубоких вен)
- Посттромбофлебитический отёк с или без последующим контролем в динамике
- Поддерживающая терапия:
 - а) после склеротерапии б) после амбулаторного селективного хирургического лечения варикоза с) после флебэктомии
- До склеротерапии или до операции по предотвращению отёков
- Профилактика и лечение язв
- Послеоперационный отёк
- Посттравматический отёк после завершения базовой терапии
- Обратимая лимфедема после комплексной противоотёчной физиотерапии

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
 SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

- Необратимая лимфедема с ярко выраженной индурацией после комплексной противоотёчной физиотерапии
- Жировой отёк II степени и выше
- Циклический отёк неясного происхождения
- Застойные явления, вызванные неподвижностью (артрогенный застойный синдром, парез и неполный парез конечностей)
- Ангиодисплазия

Противопоказания

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS, для всех вариантов исполнения:

Абсолютные противопоказания

Запущенная стадия окклюзионной болезни периферических артерий, застойная сердечная недостаточность, септический флебит (воспаление вен, вызванное микроорганизмами), циркуляторная венозная гангрена.

Относительные противопоказания

Мокнувший дерматит, непереносимость материала компрессионных изделий, потеря чувствительности в конечностях, запущенная стадия периферической нейропатии (например, сахарный диабет), ревматоидный артрит (РА). Компрессионные гольфы SIGVARIS нельзя носить при открытых ранах на коже

Способ применения:

Как надевать изделия медицинские компрессионные SIGVARIS (относится ко всем вариантам исполнения):

Лучше всего изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения надевать утром до появления возможного отека ног. Ноги должны быть сухими, желательно слегка присыпать ступни тальком разрешённым к применению в РФ.

- 1 Начните надевать изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения со следа стопы (для всех моделей с открытым мыском).
- 2 Расправьте изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения вверх по голени, используя при этом резиновые перчатки. 3/4 Не тяните за верхнюю часть

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 10 из 60

гольфов.

3/4 Используя резиновые перчатки, расправьте материал ровно по поверхности ноги, проводя ладонью вверх по направлению к колену. Если вы надеваете чулки, такими же движениями расправьте чулки по поверхности бедра по направлению вверх. Стопа изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения должна начинаться от мыска. Пальцы ног при этом остаются свободными (для всех моделей с открытым мыском). Убедитесь, что изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения правильно надеты в области стопы.


5 Вытяните след стопы.

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения, если:

- верхняя резинка гольфа располагается сразу под коленом;
- верхняя резинка чулка располагается в паховой зоне.

Как снимать изделия медицинские компрессионные SIGVARIS (относится ко всем вариантам исполнения):

Снимать изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения намного легче, используя резиновые перчатки. Возьмитесь за верхний край изделия и стяните его по направлению к голеностопу. Ладонями расправьте изделие по направлению вниз от голеностопа и снимите гольфы.

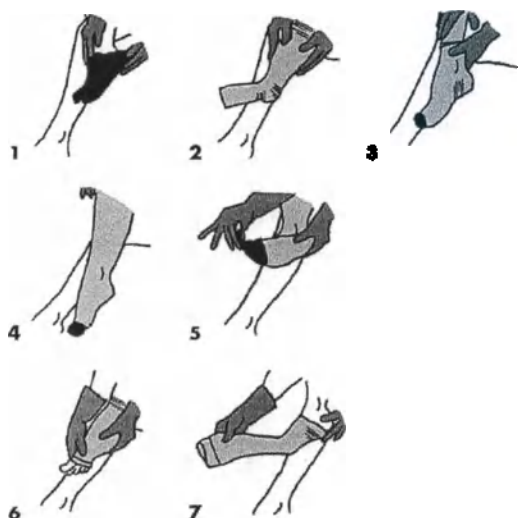

Важно:

Длинные ногти, кольца и браслеты могут повредить компрессионное изделие. Рекомендуется использовать резиновые перчатки, когда вы снимаете или надеваете изделия! Не тяните и не срезайте какие-либо нитки на изнаночной стороне изделия. При производстве изделий SIGVARIS используется синтетический эластичный материал (эластан). Мазь, маслянистые жидкости, жир и прямые солнечные лучи могут иногда повреждать материал, из которого изготовлены компрессионные изделия. Регулярные

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 11 из 60

осмотры у врача необходимы для успешного лечения. В редких случаях возможны аллергические реакции на материал, из которого изготовлены компрессионные изделия. В случае появления боли или раздражения на коже во время ношения гольфов или чулок, немедленно обратитесь к врачу.

Важная информация

- При использовании по рекомендации врача и правильном подборе размера, изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения обычно не имеют побочных эффектов.
- Пациенты с невропатическими болями могут не заметить наминов, вызванных компрессионным давлением в области нарушения кровообращения. Следовательно, рекомендуется контролировать состояние ног несколько раз в день на наличие наминов, следов нарушения кровообращения или новых кожных повреждений, в случае обнаружения которых необходимо обязательно снять гольфы. Также необходимо проконсультироваться с врачом.

Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения противопоказаний!

Условия применения

изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения следует использовать при температуре от $+5^{\circ}$ до $+27^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха 0~50%, давлении от 850 до 1060 Гпа и на высоте <3000м над уровнем моря.

Можно использовать на борту самолета, но не во время взлета и посадки.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

- Не носите изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения на открытых ранах.

Применять только после консультации со специалистом!

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

- Индивидуальная непереносимость материалов, применяемых при изготовлении медицинского изделия
- При неправильном использовании изделий медицинских компрессионных SIGVARIS в

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 12 из 60

вариантах исполнения могут стать причиной повреждения кожи и ухудшения артериального кровообращения.

Гарантия на изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения составляет 6 месяцев при правильном использовании.

При строгом соблюдении инструкций изготовителя побочные эффекты при компрессионной терапии отсутствуют!

Компания производитель гарантирует при соблюдении рекомендаций, трикотаж сохраняет лечебный эффект в течение 6 месяцев (при ежедневной носке и стирке), далее его нужно заменить на новый, поэтому и гарантия дается на 6 месяцев.

Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

- не оказывает влияния

Основные функциональные элементы медицинского изделия:

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения:

- Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин AMA (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2.
- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3.
- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2.
- Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2.
- Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2.
- Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.
- Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис, MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS.
- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1,

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария**

Страница 13 из 60

класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3.

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2.

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2.

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2.

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.

- Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3.

- Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2.

- Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3.

- Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2.

- Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2

- Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2

- Колготы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2.

- Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.

Комплектность поставки медицинского изделия:

Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения:

• Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин АМА (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2:

- Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин АМА (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2 – 2 шт.

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария**

Страница 14 из 60

- Инструкция по применению – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:
 - Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2:
 - Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 - 2 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис,

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
 SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS:

- Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис,

MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS - 2 шт.

- Инструкция по применению – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

• - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, **Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:**

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, **Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 - 2 шт.**

- Инструкция по применению – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

• - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, **Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:**

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, **Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 - 2 шт.**

- Инструкция по применению – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

• - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, **Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:**

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, **Style SEMITRSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 - 2 шт.**

- Инструкция по применению – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

• - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, **Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:**

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, **Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 - 2 шт.**

- Инструкция по применению – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

• - Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, **Dynaven**

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG**

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 16 из 60

CLASSIC DCL CCL2:

- Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 - 2 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3:
 - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

- - Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2:
 - Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2, Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- - Колготы «Сигварис» «Эссенциал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Эссенциал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
- Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2:
 - Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2 – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.

Описание принадлежностей медицинского изделия:

Поставляется без принадлежностей

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 18 из 60

Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающий в непосредственный или опосредованный контакт с телом человека.

	Материал	Контакт с телом человека
Гольфы «Сигварис» «Актив Маскулин» AMA (Джеймс) (Active MASCULINE AMA (James)).	81% Полиамид 19% Эластан Цвет: черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, (Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2)	68% Полиамид 32% Эластан Цвет: карамель 25 краситель марки 86DGC Dominik Georg Luh TECHNOGRAFIT GmbH, Германия черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2 (Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2)	65% Полиамид 35% Эластан Цвет: карамель 25 краситель марки 86DGC Dominik Georg Luh TECHNOGRAFIT GmbH, Германия черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, (Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3)	52% Полиамид 34% Эластан 14% Хлопок Цвет: телесный 76 краситель: марки 86DGC Dominik Georg Luh TECHNOGRAFIT GmbH, Германия черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», колготы	61% Полиамид 39% Эластан Цвет	Контакт с неповрежденным

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2 (Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2)	карамель 25 краситель марки 86DGC Dominik Georg Luh TECHNOGRAFIT GmbH, Германия черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для женщин Сигварис (MICROFIBER SHADES for women by SIGVARIS)	87 % Полиамид 13 % Эластан Цвет: платина краситель белый марки 74 DGC Dominik Georg Luh 19% производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия (70%) краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия (30%)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин Сигварис (MICROFIBER SHADES for men by SIGVARIS)	87 % Полиамид 13 % Эластан Цвет графит краситель белый марки 74 DGC Dominik Georg Luh 19% производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия (20%) краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия (80%)	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов
Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2 (Dynaven CLASSIC DCL CCL2)	61% Полиамид 39% Эластан Цвет Беж. 66 Краситель марки 86DGC Dominik Georg Luh TECHNOGRAFIT GmbH, Германия черный 99 краситель черный марки 12 BLG Dominik Georg Luh производства: TECHNOGRAFIT GmbH, Германия	Контакт с неповрежденным кожным покровом до 18 часов

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Первичная упаковка	Полиэтиленовая пленка	Полиэтиленовая пленка PET/PE (35709-G)	Опосредованный контакт
Вторичная упаковка	Двусторонний мелованный складной картон	Двусторонний мелованный складной картон FBB (Frovi white FBB)	Опосредованный контакт

Гольфы «Сигварис» «Актив Маскулин» АМА (Джеймс) (Active MASCULINE AMA (James)):


Модели	Форма стопы	Резинка	Индекс компрессии	Цвет
A – D	закрытый	Трикотажный пояс	2	Черный

Обхват в см												
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
СТ	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-48	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 21 из 60

CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

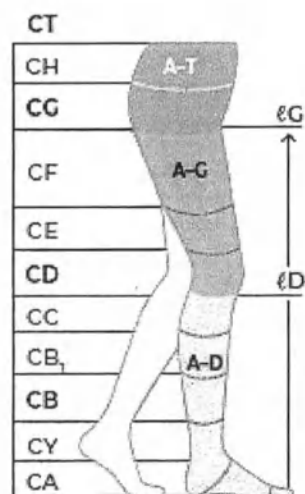

Длина в см	
короткие	31-34
нормальной длины	35-40
длинные	41-45

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы
 Circumference in cm = Окружность ноги в см
 Without grip top = без утягивающего верха
 With grip top = с утягивающим верхом

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
 SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария



зона движения

Эффективная компрессия! Чулок со скрытой ребристой структурой и влагорегулирующей тесьмой удобен в носке и обеспечивает поддержку при любых динамических движениях. Комфортная манжета обеспечивает идеальную фиксацию на ноге.

зона максимальной фиксации

Область стопы анатомически разработана специально для мужчин и обеспечивает максимальную свободу движений. Давление в каждой отдельной области делает надевание легким и быстрым.

зона амортизации

Комбинация усиленной пятки, бесшовной части носка и полной амортизации подошвы обеспечивает свободную и надежную опору для ног без давления штанов. Покрытие цинком, позволяет сохранить свежесть ног, даже при активном движении.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 23 из 60

**Скрытая ребристая
структура**



Ребристая структура
Masculine подходит для
ношения как для
повседневной, так и для
рабочей одежды.

**Маркировка -
левая/правая - в области
стопы**



Область стопы
анатомически разработана
специально для мужчин и
обеспечивает

**Полная амортизация
подошвы**



Обеспечивает
оптимальный комфорт
стопы и защищает ее в
обуви.

Комфортная манжета
Гарантирует идеальную
фиксацию на ноге.



Усиленная пятка



Крепкая и прочная
усиленная пятка для
большей защиты во
время движения.

Бесшовная часть носка



Особенно удобно для
максимального комфорта
ног.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 24 из 60

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, класс2, (Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1, CCL2):

Модели	Форма стопы		Резинка	Индекс компрессии	Цвет
A – D	открытая	закрытая	мягкий верх	1 / 2	карамель ь черные
A – F	открытая	закрытая	верх с вставкой	2	карамель ь черные
A – G	открытая	закрытая	верх с вставкой	1 / 2	карамель ь черные
A – T	открытая	закрытая	мягкий верх	1 / 2	карамель ь черные


Обхват в см						
	S	S PLUS	M	M PLUS	L	L PLUS
СТ	до 80	до 80	до 80	до 90	до 100	до 100
CH	до 110	до 110	до 120	до 120	до 130	до 130
CG	32 – 52	50 – 60	50 – 60	58 – 68	58 – 68	66 – 76
CF	41 – 50	45 – 54	48 – 57	53 – 62	55 – 64	61 – 70
CE	32 – 37	36 – 41	35 – 40	40 – 45	38 – 43	44 – 49
CD	28 – 34	32 – 38	31 – 37	36 – 42	34 – 40	40 – 46
CC	31 – 36	35 – 40	34 – 39	39 – 44	37 – 42	43 – 48
CB ₁	24 – 29	24 – 29	29 – 32	29 – 32	32 – 36	32 – 36
CB	17 – 23	17 – 23	23 – 26	23 – 26	26 – 29	26 – 29

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария


Страница 25 из 60

CY	28 – 32	28 – 32	32 – 35	32 – 35	35 – 38	35 – 38
CA	19 – 23	19 – 23	23 – 26	23 – 26	26 – 29	26 – 29

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы

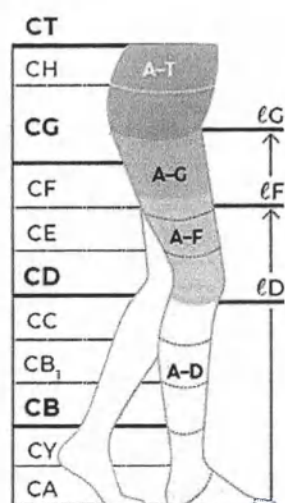

Длина в см							
короткие	33 – 37	короткие	56 – 60	короткие	61 – 70	короткие	61 – 70
длинные	38 – 44	длинные	61 – 70	длинные	71 – 80	длинные	71 – 80

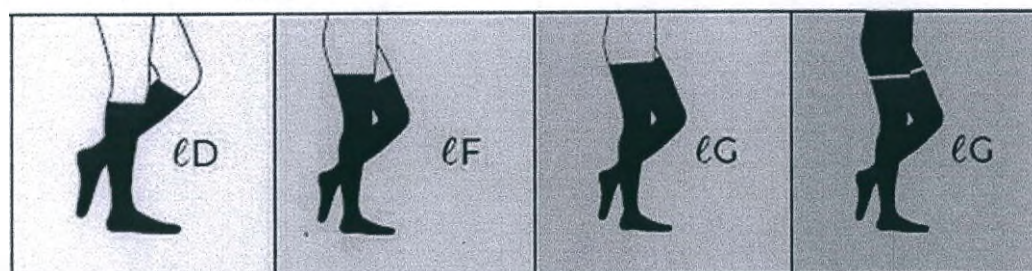

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 26 из 60



Мягкий трикотаж

Обработанная микрофибра обеспечивает приятный комфорт при ношении и приятно ложится на кожу.



Верх с кружевной вставкой

Этот верх с вставкой отличается удобством при ношении и создает ощущение женского прикосновения.



Верх с улаченной вставкой

Круглые пипочки особенно приятно ощущаются на коже и не оставляют следов, имея сверху мягкий защитный шов.



простые в использовании

Удобные:

легко надевать и снимать



приятный комфорт при ношении

Комфортные:

повышенная комфортность при ношении



непросвечивающие

Визуально красивые:

непрозрачные,

отлично скрывают проблемные зоны с венами на ногах

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 27 из 60



Комфортный мягкий верх, прилегающий к голени
Особенно эластичный верх носка, прилегающий к голени.



Очень удобный шов на носке

Особенно тонкий и плоский шов на носке для максимального комфорта стопы.



Очень мягкий шов на носке

Прекрасный удобный верх с открытым носком.



Высококачественная усиленная пятка

Усиленная пятка как можно меньше по размеру, как можно сильнее по фиксации. Она точно покрывает область, подверженную большей нагрузке.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 28 из 60

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, класс2 (Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1, CCL2):


Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер	
A – D	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	Карамель Черный	XXS	короткие нормальной длины длинные
	открытый/закрытый	верх с вставкой	2	Карамель Черный	XXS PLUS XS	
A – G	открытый/закрытый	мягкий верх верх с вставкой	1 / 2	Карамель Черный	XS PLUS S	
	открытый/закрытый	с поясом	2	Карамель Черный	S PLUS M	
A – T	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	Карамель Черный	M PLUS L	
A – T для беременных	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	Карамель Черный	L PLUS	
A – T для поддержания формы тела	открытый/закрытый	мягкий верх	2	Карамель Черный	XL XL PLUS	

Обхват в см												
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
СТ	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-48	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы

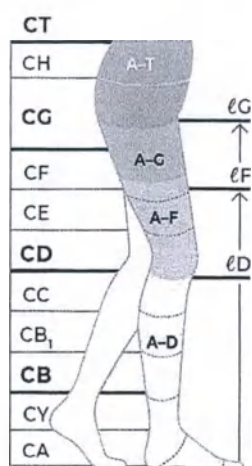

Длина в см					
короткие	31-34	короткие	56-64	короткие	56-64
нормальной длины	35-40	нормальной длины	65-74	нормальной длины	65-74
длинные	41-45	длинные	75-84	длинные	75-84



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 30 из 60



**Колготки с мягкой
основной частью**

Очень удобно и приятно
носить.

Верх с вставкой Sensinova

Двухкомпонентный верх с
вставкой без соскальзывания
и ограничения движений. Не
оставляет следов на коже, не
создавая дополнительный
объем.



**Верх с уплотненной
вставкой Quadrinova**

Квадратные шишечки
особенно приятны на коже и
практически не оставляют
следов. С мягким защитным
швом сверху.



простые в
использовании
Удобные:
легко надевать
и снимать



непросвечивающие
Визуально красивые:
непрозрачные,
отлично скрывают
проблемные зоны с
венами на ногах



сидят идеально
Комфортные:
сидят идеально
для нее и для него

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 31 из 60



Комфортный мягкий верх, прилегающий к голени
Особенно эластичный верх носка, прилегающий к голени.



Очень удобный шов на носке
Особенно тонкий и плоский шов на носке для максимального комфорта стопы.



Очень мягкий шов на носке
Прекрасный удобный верх с открытым носком.



Высококачественная усиленная пятка
Усиленная пятка как можно меньше по размеру, как можно сильнее по фиксации. Она точно покрывает область, подверженную большей нагрузке.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 32 из 60

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, чулок «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый), колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, класс2, класс3, (Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1, CCL2, CCL3):


Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер	
A – D	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 3	черные телесные	XXS	короткие нормальной длины длинные
	открытый/закрытый	мягкий верх	2	черные	XXS PLUS	
	открытый/закрытый	верх с вставкой		телесные	XS	
A – G	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	черные	XS PLUS	
	открытый/закрытый	верх с вставкой		телесные	S	
	открытый/закрытый	верх с вставкой	3	черные	S PLUS	
A – T	открытый/закрытый	верх с вставкой		телесные	M	
	открытый/закрытый	верх с вставкой	1 / 2 / 3	черные	M PLUS	
	открытый/закрытый	верх с вставкой		телесные	L	
A – T	открытый/закрытый	мягкий верх	2 / 3	телесные	L PLUS	
	открытый/закрытый	с поясом		телесные	XL	
	открытый/закрытый	с поясом	1 / 2	телесные	XL PLUS	
A – T для беременных	открытый/закрытый	мягкий верх		телесные		

Обхват в см												
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
СТ	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

CG	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-48	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	21-26	21-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	15-20	15-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы

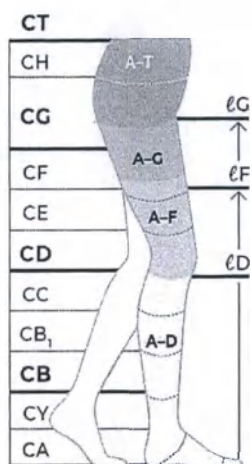

Длина в см					
короткие	31-34	короткие	56-64	короткие	56-64
нормальной длины	35-40	нормальной длины	65-74	нормальной длины	65-74
длинные	41-45	длинные	75-84	длинные	75-84



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария



Рёбристая структура

Скрытая и непросвечивающая рёбристая структура подчеркивает естественность Essential THERMOREGULATING.



Верх с вставкой Sensinova

Двухкомпонентный верх с вставкой без соскальзывания и ограничения движений. Не оставляет следов на коже, не создавая дополнительный объем.



Верх с уплотненной вставкой Quadrinova

Квадратные пипочки особенно приятны на коже и практически не оставляют следов. С мягким защитным пшвом сверху.



для чувствительной кожи

Мягкие:

также подходит для чувствительных ног благодаря содержанию 14% хлопка и мягкому верху



терморегулирующие

Охлаждение:

испарение влаги, собирающейся в хвостике, приводит к охлаждающему эффекту

Согревание:

при низкой температуре воздух в промежутках между трикотажным полотном и волокнами образует изолирующий слой



непросвечивающие

Визуально красивые:

скрытая, непрозрачная, рёбристая структура отлично скрывают проблемные зоны с венами на ногах

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG**

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 35 из 60



Комфортный мягкий верх, прилегающий к голени
Особенно эластичный верх носка, прилегающий к голени.



Очень удобный шов на носке

Особенно тонкий и плоский шов на носке для максимального комфорта стопы.



Очень мягкий шов на носке

Прекрасный удобный верх с открытым носком.



Высококачественная усиленная пятка

Усиленная пятка как можно меньше по размеру, как можно сильнее по фиксации. Она точно покрывает область, подверженную большей нагрузке.

Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис», колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, класс2 (Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL 1, CCL2):

Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер	
A – D	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	Черный карамель	XXS	короткие
	открытый/закрытый	верх с вставкой	2	Черный	XXS PLUS XS	нормальной длины
A – G	открытый/закрытый	верх с вставкой	1 / 2	карамель	XS PLUS	длинные

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG**

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария


Страница 36 из 60

А – Т	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2	Черный	S
				карамель	S PLUS
А – Т					M
					M PLUS
Для беременных	открытый/закрытый	мягкий верх	1 / 2		L
					L PLUS
					XL
					XL PLUS

Обхват в см												
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	30-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-48	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	16-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы

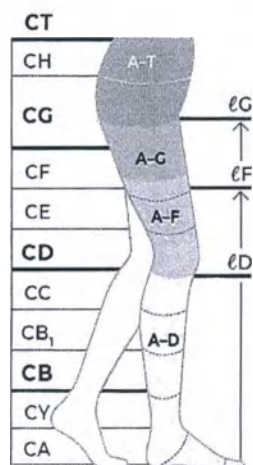

Длина в см					
короткие	31-34	короткие	56-64	короткие	56-64
нормальной длины	35-40	нормальной длины	65-74	нормальной длины	65-74
длинные	41-45	длинные	75-84	длинные	75-84



semitransparent

Тонкие:

элегантный, полупрозрачный
внешний вид



элегантные

Стильные:

женская эстетика; также доступны в
четырёх модных расцветках



идеальная форма

Визуально красивые:

оптимально подчеркивает ноги и
ягодицы



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 38 из 60



А-Т с визуально красивыми верхними частями
Высокий комфорт при ношении благодаря широкому, плотно прилегающему поясу скрытого дизайна.



А-Т с эффектом «пуш-ап»
Крой идеальной формы с легким эффектом «пуш-ап» в области ягодиц.



Верх с вставкой Sensinova
Максимальный комфорт при ношении, что создает ощущение нежного женского прикосновения. Верх с вкладкой отлично держится в любой ситуации, не создавая дополнительный объем.



Верх с уплотненной вставкой Quadrinova
Квадратные шишечки приятны на коже и практически не оставляют следов. С мягким защитным швом сверху.



А-D с удобным верхом с вставкой на голени
Благодаря своей ширине и сверхмягкой структуре верх с вставкой на голени удобно носить, т.к. он идеально облегает ногу.



Высококачественное усиление подошвы
Усиление подошвы точно покрывает область, которая подвергается большей нагрузке во время носки.



Очень удобный шов на носке
Особенно тонкий и плоский шов на носке для максимального комфорта стопы.



Новинка марта 2021 года:
дополнительная мягкая вставка
Приятно мягкая вкладка для еще большего комфорта при ношении.

Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для женщин Сигварис (MICROFIBER SHADES for women by SIGVARIS):

Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер
А – С	закрытый	мягкий верх	1	платина	XXS
	закрытый	мягкий верх верх с вставкой	1	платина	XXS PLUS
					XS
					XS PLUS
					S
					S PLUS
					M

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

M PLUS

L

L PLUS

XL

XL PLUS

Подбор размера		A	B	C
Размер для женщин	размер обуви	35-37	38-40	41-44
	окружность лодыжки	18-23 см	19-25 см	20-27 см

EU	UK	
35-37	3-5	A
38-40	5.5-7.5	B
41-44	8-10	C

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 40 из 60



Колготки с мягкой основной частью

Очень удобно и приятно носить.



Верх с вставкой Sensinova

Двухкомпонентный верх с вставкой без соскальзывания и ограничения движений. Не оставляет следов на коже, не создавая дополнительный объем.



Верх с уплотненной вставкой Quadrinova

Квадратные шишечки особенно приятны на коже и практически не оставляют следов. С мягким защитным швом сверху.



простые в использовании

Удобные:

легко надевать и снимать



приятный комфорт при ношении

Комфортные:

повышенная комфортность при ношении



непросвечивающие

Визуально красивые:

непрозрачные, отлично скрывают проблемные зоны с венами на ногах

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин Сигварис (MICROFIBER SHADES for men by SIGVARIS):

Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер	
А – С	закрытый	мягкий верх	1	графит	XXS	короткие нормальной длины длинные
					XXS PLUS	
					XS	
					XS PLUS	
	закрытый	мягкий верх верх с вставкой	1	графит	S	
					S PLUS	
					M	
					M PLUS	
					L	
					L PLUS	
					XL	
					XL PLUS	

Подбор размера		А	В	С
Размер для мужчин	размер обуви	39-41	42-44	45-48
	окружность лодыжки	19-25 см	20-27 см	21-29 см

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

EU	UK	
39-41	5.5-7.5	A
42-44	8-10	B
45-48	10.5-13	C



Колготки с мягкой основной частью

Очень удобно и приятно носить.

простые в использовании

Удобные:

легко надевать и снимать



Верх с вставкой Sensinova

Двухкомпонентный верх с вставкой без соскальзывания и ограничения движений. Не оставляет следов на коже, не создавая дополнительный объем.

приятный комфорт при ношении

Комфортные:

повышенная комфортность при ношении



Верх с уплотненной вставкой Quadrinova

Квадратные шишечки особенно приятны на коже и практически не оставляют следов. С мягким защитным швом сверху.

непросвечивающие

Визуально красивые:

непрозрачные,



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 43 из 60

**Гольфы «Сигварис», чулки «Сигварис» до паха на резинке, колготы «Сигварис»
«Дайнавен Классик DCL» класс2 (Dunaven CLASSIC DCL CCL2):**


Модель	Носок	Край	Индекс компрессии	Расцветки	Размер	
A – D	открытый/закрытый	мягкий верх	2	Бежевый Черный	XXS XXS PLUS	короткие нормальн ой длины длинные
	открытый/закрытый	верх с вставкой	2	Бежевый Черный	XS XS PLUS	
A – G	открытый/закрытый	верх с вставкой	2	Бежевый Черный	S	
A – T	открытый/закрытый	мягкий верх	2	Бежевый Черный	S PLUS M	
A – T	открытый/закрытый	мягкий верх	2	Бежевый Черный	M PLUS	
Для беременных				L		
				L PLUS		
				XL		
				XL PLUS		

**- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG**

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Обхват в см												
	XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	36-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-48	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB	16-20	16-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

A-T = колготки, A-G = чулки, A-D = гольфы

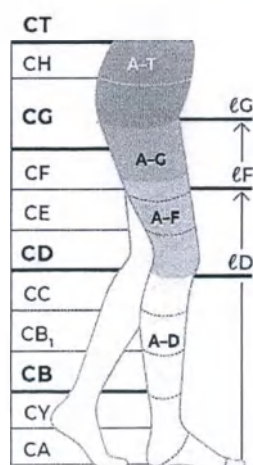

Длина в см					
короткие	31-34	короткие	56-64	короткие	56-64
нормальной длины	35-40	нормальной длины	65-74	нормальной длины	65-74
длинные	41-45	длинные	75-84	длинные	75-84



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

semitransparent
Тонкие:
элегантный, полупрозрачный
внешний вид



элегантные
Стильные:
женская эстетика; также
доступны в четырех модных
расцветках



идеальная форма
Визуально красивые:
оптимально подчеркивает
ноги и ягодицы



- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 46 из 60



А-Т с визуально красивыми верхними частями
Высокий комфорт при ношении благодаря широкому, плотно прилегающему поясу скрытого дизайна.



А-Т с эффектом «пуш-ап»
Крой идеальной формы с легким эффектом «пуш-ап» в области ягодиц.



Верх с вставкой Sensinova
Максимальный комфорт при ношении, что создает ощущение нежного женского прикосновения. Верх с вкладкой отлично держится в любой ситуации, не создавая дополнительный объем.



Верх с уплотненной вставкой Quadripova
Квадратные шишечки приятны на коже и практически не оставляют следов. С мягким защитным швом сверху.



А-D с удобным верхом с вставкой на голени
Благодаря своей ширине и сверхмягкой структуре верх с вставкой на голени удобно носить, т.к. он идеально облегает ногу.



Высококачественное усиление подошвы
Усиление подошвы точно покрывает область, которая подвергается большей нагрузке во время носки.



Очень удобный шов на носке
Особенно тонкий и плоский шов на носке для максимального комфорта стопы.



Новинка марта 2021 года:
дополнительная мягкая вставка
Приятно мягкая вкладка для еще большего комфорта при ношении.

Существуют компрессионные чулки с разной степенью сжатия, в зависимости от тяжести подлежащего лечению заболевания. Давление, оказываемое компрессионными чулками на уровне лодыжки, измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Компрессионный класс определяется в соответствии с официальными стандартами: GZG RAL стандарт в Европе.

В зависимости от заболевания врач назначает пациенту определенный компрессионный класс. Легкая компрессия соответствует классу 1 или 2, сильная компрессия — классу 3 или 4 в зависимости от применяемого стандарта.

Класс компрессии I

Уровень давления 18-21 мм.рт.ст.

Показания:

- Переходящие нарушения венозного оттока: тяжесть и усталость в ногах, отек голени и стопы к вечеру
- Телеангиэктазии и единичные внутрикожные варикозные вены
- Усиление подкожного венозного рисунка и единичные варикозные вены во время беременности

Класс компрессии II

Уровень давления 23-32 мм.рт.ст.

Показания:

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

- Варикозная болезнь без трофических нарушений кожи
- Варикозное расширение вен во время беременности
- Флебосклерозирующее лечение варикозной болезни
- Хирургическое лечение варикозной болезни
- Тромбофлебит поверхностных вен
- Отеки конечностей после травмы

Класс компрессии III

Уровень давления 34-46 мм.рт.ст.

Показания:

- Варикозная болезнь с трофическими нарушениями кожи
- Профилактика рецидива трофических язв
- Тромбоз глубоких вен
- Посттромбофлебитическая болезнь
- Профилактика рецидива тромбоза глубоких вен
- Лимфостаз
- Ортостатическая гипотензия (в зависимости от выраженности - 2 кл.компр.)

Класс компрессии IV

Уровень давления более 49 мм.рт.ст.

Показания:

- Выраженный лимфостаз
- Врожденные артерио-венозные свищи (в зависимости от выраженности - 2-3 кл.компр.)

Таблица по растяжимости, разрывной нагрузке, классу компрессии, изменению линейных размеров, остаточной деформации до и после стирки, растяжимости до и после стирки

Наименование	Растяжимость, не менее, %	Рабочая растяжимость, не менее, %	Поверхностная плотность, не менее, г/м	Разрывная нагрузка, не менее, Н /кгс	Класс компрессии	Разрывное удлинение после стирки, не более %
Гольфы «Сигварис» Актив Маскулин АМА (Джеймс) класс 2, Active MASCULINE AMA (James) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, Essential THERMOREGULAT	80	30	100	68,6/7	I (1)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

ING ETH (Cotton) CCL 1						
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс2, Essential THERMOREGULAT ING ETH (Cotton) CCL 2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс 3, Essential THERMOREGULAT ING ETH (Cotton) CCL 3	80	30	300	117,6/12	III (3)	20
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 2	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, Style SEMITRANSPAREN T SSE (Magic) CCL 1	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Гольфы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс2, Style	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

SEMITRANSSPARENT SSE (Magic) CCL2.						
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Гольфы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Гольфы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Гольфы «Сигварис» «Микрофибра Шейдс для мужчин /для женщин Сигварис, MICROFIBER SHADES for men / for women by SIGVARIS.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс 2, Essential	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL2.						
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс3, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL3.	80	30	300	117,612	III (3)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, Style SEMITRANSPARENT SSE (Magic) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс2, Style SEMITRANSPARENT	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

T SSE (Magic) CCL2.						
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Чулки «Сигварис» до паха на резинке «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Чулоч «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс 1, Essential THERMOREGULAT ING ETH (Cotton) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулоч «Сигварис» с застежкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс2, Essential THERMOREGULAT ING ETH (Cotton) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Чулоч «Сигварис» с застёжкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс3 Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL3.	80	30	300	117,612	III (3)	20
Чулоч «Сигварис» с застёжкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1.Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Чулоч «Сигварис» с застёжкой на талии (правый, левый) «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс1, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс2, Essential THERMOREGULATING ETH (Cotton)	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
 Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

CCL2.						
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Терморегулейтинг ETH» (Котон) класс3, Essential THERMOREGULAT ING ETH (Cotton) CCL3.	80	30	300	117,612	III (3)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс1, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Комфортэйбл ECF» (Комфорт) класс2, Essential COMFORTABLE ECF (Comfort) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, Style SEMITRANSPAREN T SSE (Magic) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Колготы «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс2, Style SEMITRANSPAREN T SSE (Magic) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль	80	30	100	68,6/7	I (1)	20

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс1, Style SEMITRANSPARENT SSE (Magic) CCL 1.						
Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик) класс2, Style SEMITRANSPARENT SSE (Magic) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс1, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL 1.	80	30	100	68,6/7	I (1)	20
Колготы «Сигварис» «Эссеншал Классикал ECL» (Топ Файн) класс2, Essential CLASSICAL ECL (Top Fine) CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20
Колготы «Сигварис» «Дайнавен Классик DCL» класс2, Dynaven CLASSIC DCL CCL2.	80	30	200	88,2/9	II (2)	20

Значение разрывного удлинения изделий медицинских компрессионных SIGVARIS в вариантах исполнения должно быть не менее значения растяжимости.

Значение остаточной деформации до/после стирки изделий медицинских компрессионных SIGVARIS в вариантах исполнения должно быть не более 10%.

Изменения линейных размеров (усадки) после стирки не должны превышать 20% их линейных размеров до стирки изделий медицинских компрессионных SIGVARIS в вариантах исполнения.

Маркировка и упаковка

Изделие поставляется в индивидуальной потребительской картонной упаковке и имеет

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

следующие габаритные размеры: 23.5 x 12.6 x 3.7 см/±0,5 см.

Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки на территории РФ:

- Логотип, название и адрес компании-изготовителя.
- Название изделия.
- Номер партии и размер изделия.
- Изображение изделия.
- Знак «Обратитесь к инструкции по применению».
- Символ «Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам Европейского союза».
- Соответствие требованиям стандарта Oeko-Tex 100.
- Знак, показывающий, что компания-производитель выплачивает определенную компенсацию на восстановление окружающей среды.
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Сведения об уполномоченном представителе на территории РФ
- Символ «беречь от солнечных лучей»

Макет маркировки индивидуальной (потребительской) упаковки на территории РФ:



SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик), Style SEMITRSPARENT SSE (Magic)

Класс компрессии : X

Размер: X

РУ № _____ от _____



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



XXXXX



Уполномоченный на территории РФ: ООО «Вено+» 115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG


Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 56 из 60

Маркировка на ярлыке-этикетке, нанесенном с изнаночной стороны, на шве изделия:

- Наименование производителя медицинского изделия;
- Размер медицинского изделия
- Номер лота/партии
- Сведения по уходу за медицинским изделием.

Макет маркировки на ярлыке этикетке:

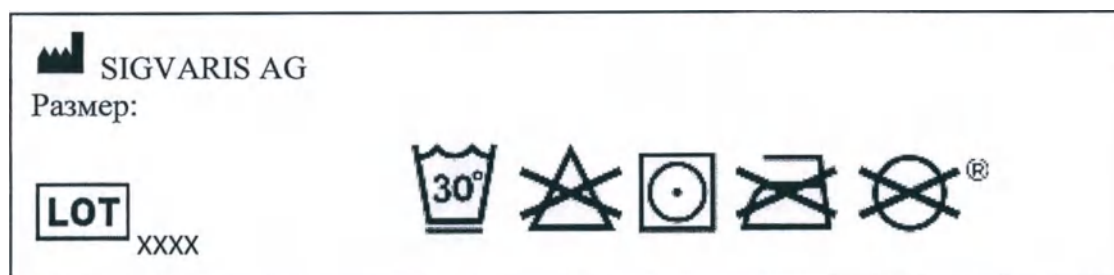

Маркировка транспортной упаковки на территории РФ:

- Логотип, название и адрес компании-изготовителя.
- Название изделия.
- Номер партии
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Количество упаковок в коробке
- Сведения об уполномоченном представителе на территории РФ
- Символ «беречь от солнечных лучей»
- Символ «беречь от воздействия влаги»

Макет маркировки транспортной упаковки на территории РФ:

 SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland

**Колготы для беременных «Сигварис» «Стиль Семитранспарент SSE» (Мэджик),
Style SEMITRANSSPARENT SSE (Magic)**

ПУ № _____ от _____
Кол-во уп.: XX

 XX.XX.XXXX  .XX.XX.XXXX

 XXXXX      

Уполномоченный на территории РФ: ООО «Вено+» 115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч

Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа рисков

На основании результатов проведённого анализа рисков установлено, что предпринимаемые меры по минимизации рисков являются эффективными и остаточный риск является приемлемым. Производителем представлен АНАЛИЗ РИСКОВ

Материалы животного или человеческого применения с указанием сведений об их биологической совместимости.

Компания производитель SIGVARIS AG, Швейцария с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» материалы животного и человеческого применения **не используются.**

Предыдущие модификации медицинского изделия или подобные модификации медицинского изделия находящиеся в обращении.

На территории Российской Федерации зарегистрированы в установленном порядке и находятся в обращении следующие модификации:

Изделия медицинские компрессионные «СИГВАРИС»: гольфы «Сигварис» «Коттон», «Традишнл», «Комфорт», «Меджик»; Чулки «Сигварис» до середины бедра, до паха: «Коттон», «Традишнл», «Комфорт», «Меджик»; «Тромбо-Сигварис. Рег. удостоверение № ФСЗ 2011/11272

Лекарственные вещества входящие в состав медицинского изделия.

Компания производитель SIGVARIS AG, Швейцария с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия с полной ответственностью заявляет, что при производстве медицинского изделия «Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения», лекарственные вещества **не применяются.**

Метод стерилизации.

Медицинское изделие поставляется **не стерильным.**

Техническое обслуживание, ремонт

Техническое обслуживание медицинского изделия «Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» **не требуется.**

Утилизация для Российской Федерации

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

«Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» по классификации опасности в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 ("Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами") должны быть утилизированы как отходы Класса А.

Транспортирование

«Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» поступают в готовом виде, упакованные в транспортную тару, транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

Температура от +5 до +27 С

Относительная влажность воздуха 0~50%,

Атмосферное давление от 850 до 1060 Гпа.

Транспортная тара устойчива к воздействию транспортной тряски с максимальным ускорением 30 м/с^2 и частотой от 2 до 3 Гц.

Сведения по уходу за медицинским изделием:

- Ежедневно стирайте изделия. Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения можно стирать в стиральной машине в мешке для стирки при температуре до 95° Цельсия.
- Используйте мягкие моющие средства без кондиционера.
- Не сушить в сушильной машине из-за опасности перегрева и образования статического электричества. Заверните компрессионные изделия в два сухих полотенца, чтобы удалить избыточную влагу и высушите в сухом, защищенном от света и вентилируемом месте. Не используйте обогреватель для сушки.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.
- Острые ногти и кольца с острыми краями могут повредить изделие. Рекомендуется надевать и снимать изделия с учетом вышесказанного.

Условия хранения

Условия хранения: «Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» от +5 до +27 С и относительной влажности воздуха 0~50%, давлении от 850 до 1060 Гпа и на высоте <3000м над уровнем моря.

Не следует использовать рядом с другим оборудованием или складировать по вертикали.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Гарантийные обязательства, срок службы медицинского изделия

На «Изделия медицинские компрессионные SIGVARIS в вариантах исполнения» предоставляется 6-месячная гарантия (с даты продажи) на случай производственных дефектов. Гарантия также не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением медицинские изделия.

Срок службы компрессионных чулок в не вскрытой упаковке составляет 3 года с даты изготовления. После начала использования колготки будут обеспечивать надлежащую силу давления в течение 6 месяцев.

Чтобы они сохранили бандажное действие в течение всего срока годности, важно соблюдать правила ухода

Лечебный эффект от ношения компрессионных изделий SIGVARIS гарантирован в течение 6 месяцев при условии их правильного использования.

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

ООО «Вено+»

115114, Москва г, Кожевническая ул, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение X, комната 1ч,2,3, помещение VI, комната 87ч, 88, 101ч

ИНН 7714804095

Телефон: +7(495) 645-33-47

venoplus@venoplus.ru

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО -
SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария

Страница 60 из 60

Inspected for legalisation of the signature of the firm SIGVARIS AG, St.Gallen, Switzerland, signed by Mr. Juergen Sigg, CEO.

St.Gallen, Switzerland, 16/03/2022

Population Services City of St.Gallen
Legalisations

Claudine Lüthi
Claudine Lüthi



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of St.Gallen
Страна: Швейцарская Конфедерация, кантон Санкт-Галлен
This public document / Данный официальный документ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 2. has been signed by | Claudine Lüthi |
| подписан | |
| 3. acting in the capacity of | legalizing officer |
| в качестве | |
| 4. bears the seal / stamp of | legalizing officer |
| имеет печать / штамп | |

Certified / Подтверждено

5. at / в Санкт-Галлен 6. the 16.03.2022


7. by / Миланка Сувајас

Legalizing officer of the Chancery of the Canton of St.Gallen
Специалистом по легализации Канцелярии кантона Санкт-Галлен

8. No. / под номером 3784

Seal / stamp
Печать / штамп

Signature
Подпись

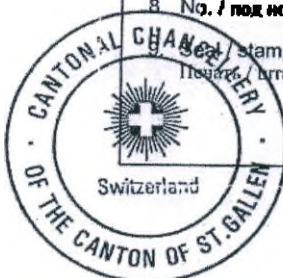

/Перевод с английского языка на русский язык/

/Печать: Специалист по легализации/

Компания «СИГВАРИС АГ»
(SIGVARIS AG)
Греблиштрассе 8
CH-9014 Санкт-Галлен
(Gröblistrasse 8 CH-9014 St.
Gallen)

Тел.: +41 71 272 40 00
Факс: +41 71 272 40 01
www.sigvaris.com

/Логотип/

«СИГВАРИС АГ» (SIGVARIS AG)
Санкт-Галлен (St. Gallen)

/подпись/

Юрген Сигг (Juergen Sigg)
Генеральный директор

Официальное заверение № cl/203

Проверено с целью легализации (подтверждения) подписи компании «СИГВАРИС АГ» (SIGVARIS AG), Санкт-Галлен, Швейцария (St. Gallen, Switzerland), предоставленной г-ном Юргеном Сиггом, генеральным директором.

Санкт-Галлен, Швейцария, 16.03.2022
(St. Gallen, Switzerland)

Отдел обслуживания населения
Санкт-Галлена
Легализация

/подпись/
Клодин Люти

/Печать: Специалист по легализации/

*/Печать: Канцелярия кантона Санкт-Галлен * Швейцария/*

АПОСТИЛЬ

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Швейцарская Конфедерация, кантон Санкт-Галлен

Данный официальный документ

2. подписан

Клодин Люти

3. в качестве

специалиста по легализации

4. имеет печать/штамп

специалиста по легализации

Подтверждено

5. в Санкт-Галлене

6. 16.03.2022

7. Миланкой Суваяц

Специалистом по легализации Канцелярии кантона Санкт-Галлена

8. под номером 3764

9. Печать/штамп


10. Подпись

/подпись/

*/Печать: Канцелярия кантона Санкт-Галлен * Швейцария/*

*/Печать: Канцелярия кантона Санкт-Галлен * Швейцария/*

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

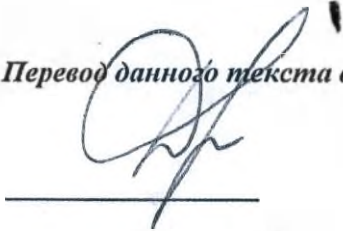

Российская Федерация

Город Москва

Первого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.


Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-15-1987

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Квитко
Ф.А. Квитко

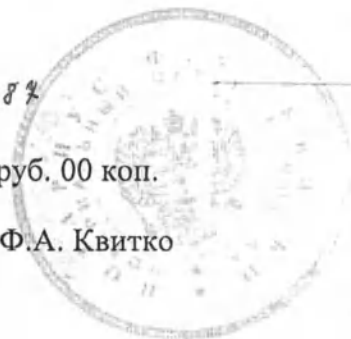

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 63 листов

Нотариус *Квитко*

Российская Федерация
Город Москва

Первого апреля две тысячи двадцать второго года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022-15-1989
Уплачено за совершение нотариального действия: 3840 руб.



Ф.А. Квитко



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 64 лист(а) (ов)

Нотариус Ф.А. Квитко

Ф.А. Квитко