

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крейт»

Кривицкая И.А.

01.09.22 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
«БАНДАЖ ДЛЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА,  
СОГРЕВАЮЩИЙ – «КРЕЙТ»»**

НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.

**2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Профилактика переохлаждения;

Радикулиты, невриты, миозиты;

Заболевания почек в неострый период.

**3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

**4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

**5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

| Наименование изделия                                                        | Кол-во, шт. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий - «Крейт» | 1           |
| Инструкция                                                                  | 1           |
| Индивидуальная потребительская упаковка                                     | 1           |

**6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

**7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Размерный ряд и масса изделия Б-702

| Размер | Обхват талии, см | Масса, г |
|--------|------------------|----------|
|        |                  | Б-702    |
| № 3    | 55-75            | 253,6    |
| № 4    | 75-95            | 299,9    |
| № 5    | 95-115           | 345,0    |
| № 6    | 115-135          | 366,2    |
| № 7    | 135-155          | 387,4    |
| № 8    | 155-175          | 408,6    |

Таблица 2- Размерный ряд и масса изделий Б-710, Б-714

| Размер | Обхват талии, см | Масса, г |       |
|--------|------------------|----------|-------|
|        |                  | Б-710    | Б-714 |
| № 1    | 60-67            | 84,6     | 94,9  |
| № 2    | 67-75            | 89,9     | 102,8 |
| № 3    | 75-81            | 95,0     | 106,1 |
| № 4    | 81-87            | 109,1    | 121,8 |
| № 5    | 87-98            | 112,6    | 132,9 |
| № 6    | 98-109           | 129,9    | 142,3 |
| № 7    | 109-120          | 139,9    | 153,2 |
| № 8    | 120-131          | 145,6    | 163,0 |
| № 9    | 131-142          | 151,3    | 172,8 |
| № 10   | 142-153          | 157,0    | 182,6 |

Таблица 3 - Размерный ряд и масса изделия Б-711

| Размер | Обхват талии, см | Масса, г |
|--------|------------------|----------|
|        |                  | Б-711    |
| № 1    | 56-68            | 97,8     |
| № 2    | 68-81            | 112,4    |
| № 3    | 81-94            | 121,1    |
| № 4    | 94-107           | 126,6    |
| № 5    | 107-120          | 137,0    |
| № 6    | 120-133          | 149,0    |
| № 7    | 133-146          | 161,0    |
| № 8    | 146-159          | 173,0    |
| № 9    | 159-172          | 185,0    |
| № 10   | 172-185          | 197,0    |

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

## 8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотно застегнуть бандаж.

8.3. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги.

8.4. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.

8.5. СТИРКА И УХОД.

8.5.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.

8.5.2. Отбеливание запрещено.

- 8.5.3. Не применять барабанную сушилку.
- 8.5.4. Глажение запрещено.
- 8.5.5. Чистка запрещена.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

## **10. УТИЛИЗАЦИЯ**

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

## **11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

11.4.

### **Изготовитель:**

ООО «Крейт», [torg@kreitspb.ru](mailto:torg@kreitspb.ru), [kreite@mail.ru](mailto:kreite@mail.ru)

**Юридический адрес:** 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: [www.kreitspb.ru](http://www.kreitspb.ru), [www.zdors.ru](http://www.zdors.ru).

прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью *т.р.и* лист *а*  
Должность: Генеральный директор ООО  
«Крейт»  
Кривицкая И.А.

Подпись *И.А. Кривицкая*  
МП

Дата:

