


«Утверждаю»
За и по поручению
Компании «Лаборатории ЖИЛЬБЕР»
На основании доверенности от 03.06.2010г.

LABORATOIRES GILBERT


928, Avenue du Général de Gaulle
14204 HÉROUVILLE-ET-CLAIR CEDEX (F)

Зенкина Алла Олеговна
«*И*» сентября 2010г.

Инструкция по применению Аспиратор назальный детский MARIMER

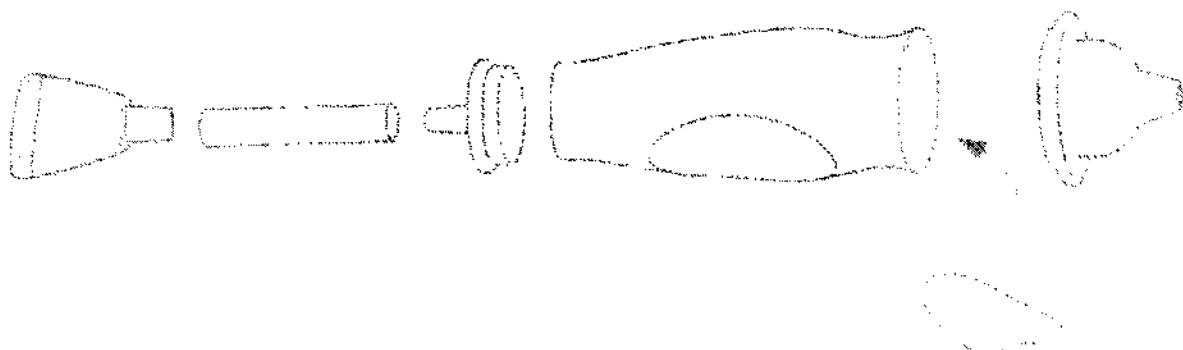

- 1 – Наконечник анатомической формы
- 2 – Ватный диск
- 3 – Корпус
- 4 – Насадка на трубку
- 5 – Гибкая трубка
- 6 – Мундштук

Почему нужно использовать аспиратор у младенцев?


Дыхание у детей в возрасте до одного года исключительно носовое. В этом возрасте ребенок еще не умеет самостоятельно избавляться от скопившихся в носу слизистых выделений, которые появляются при насморке, и его дыхание становится затрудненным. Это меняет его нормальный образ жизни, потому что с заложенным носом ребенок не может правильно дышать и плачет, перестает кушать, плохо спит и т.д. С помощью аспиратора Вы сможете помочь малышу избавиться от скопившейся слизи. У Вашего малыша восстановится нормальное дыхание, что вернет ему аппетит и хороший сон.

Способ применения Подготовьте аспиратор:

- 1 – Вымойте руки.
- 2 – Соберите аспиратор по вышеприведенной схеме.
- 3 - Положите ватный диск, который служит фильтром между наконечником и корпусом аспиратора.

Подготовьте ребенка:

- Положите ребенка на пеленальный столик и приподнимите ему голову.

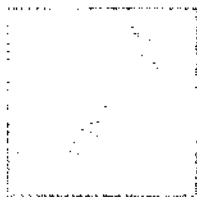

- Возьмите мундштук в рот. Утолщенный кончик мундштука позволяет зажать его между зубами.
- Вставьте наконечник в один из носовых ходов ребенка.
- Осторожно втягивайте воздух равномерными вдохами через мундштук. Слизистые выделения будут скапливаться в корпусе аспиратора.
- При необходимости повторите процедуру несколько раз.
- Повторите процедуру для другого носового хода.

Для большей эффективности перед удалением слизистых выделений с помощью аспиратора рекомендуется провести промывание носовой полости солевым, физиологическим раствором или морской водой (например, Маример, капли назальные).

Советы по уходу за аспиратором:

- После каждого использования следует разобрать аспиратор и тщательно вымыть детали теплым мыльным раствором и ополоснуть чистой водой.
- В целях гигиены перед использованием следует стерилизовать насадку холодом или паром. Не кипятить.

Перед первым использованием аспиратора:

- Разобрать и тщательно вымыть детали теплым мыльным раствором и ополоснуть чистой водой.
- Насадку простерилизовать холодом или паром.

Хранить в местах недоступных детям.