

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
02.04. 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ДОРОДОВЫЙ – «КРЕЙТ»
НЕСТЕРИЛЬНО

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для ношения с 20 – 24 недель беременности и до ее окончания с целью поддержания и предохранения живота от растяжек, а также для разгрузки мышц спины.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Беременность с 20-24 недели;
Дискомфорт или болевые ощущения, тяжесть в области поясничного отдела во время беременности.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Может стимулировать гипертонус матки во время беременности при его наличии.
Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж дородовый - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- 6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- 6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.
- 6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- 6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указана в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий

Размер	Обхват под животом, см	Масса изделия, г					
		Б-101	Б-102	Б-103	Б-104	Б-105	Б-120

№ 3	70-90	122,1	163,4	157,6	98,4	47,3	202,2
№ 4	80-105	125,8	175,9	174,3	109,5	51,3	213,9
№ 5	90-120	140,9	191,2	195,2	118,1	60,9	235,9
№ 6	100-135	153,1	214,9	218,4	131,9	64,2	260,0
№ 7	135-165	165,3	238,6	241,6	145,7	67,5	284,1
№ 8	165-195	177,5	262,3	264,8	159,5	70,8	308,2

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Надеть бандаж в положении лежа на спине, зафиксировать застежку бандажа под животом. Отрегулировать степень поддержки живота с помощью эластичной стяжки (для всех артикулов кроме Б-105).

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

