

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «МЕТ»**

Филиппов С.В.

- 2022 г.



**Инструкция по эксплуатации
МАТРАС ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ «МЕТ»
по
ТУ 31.03.12-017-11459109-2021
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**

2022

Настоящее руководство по эксплуатации на Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» по ТУ 31.03.12-017-11459109-2021 с принадлежностями (далее матрас или изделие), предназначено для ознакомления с работой, и содержит сведения по использованию, регламенту работы и технические характеристики.

1. Наименование медицинского изделия.

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» по ТУ 31.03.12-017-11459109-2021 с принадлежностями

I. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-100 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-100 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

II. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-110 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-110 – 1 шт.
2. Чехол «Кожзаменитель»- 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

III. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-120 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-120 – 1 шт.
2. Чехол «Кожзаменитель»- 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

IV. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-130 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-130 – 1 шт.
2. Чехол «Кожзаменитель»- 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

V. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-140 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-140 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

VI. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-150 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-150 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

VII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-160 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-160 – 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

VIII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-170 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-170 – 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

IX. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-180 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-180 – 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

X. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-190 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-190 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XI. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-200 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-200 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-210 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-210 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XIII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-220 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-220 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XIV. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-230 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-230 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XV. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-240 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-240 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XVI. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-250 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-250 – 1 шт.

2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XVII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-260 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-260 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XVIII. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-270 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-270 – 1 шт.

2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XIX. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-280 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый односекционный МЕТ ММ-280 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XX. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-290 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-290 – 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXI. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-300 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-300 – 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXII. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-310 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-310 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXIII. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-320 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-320 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXIV. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-330 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-330 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXV. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-340 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый двухсекционный МЕТ ММ-340 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXVI. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-350 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-350 – 1 шт.

2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXVII. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-360 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-360 – 1 шт.

2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXVIII. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-370 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-370 – 1 шт.

2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXIX. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-380 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-380 – 1 шт.

2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXX. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-390 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-390 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXI. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-400 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый трехсекционный МЕТ ММ-400 – 1 шт.

2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)

3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

-Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXII. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-410 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-410— 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXIII. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-420 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-420— 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXIV. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-430 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-430 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXV. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-440 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-440 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXVI. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-450 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-450 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXVII. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-460 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый четырехсекционный МЕТ ММ-460 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXVIII. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
МЕТ МТ-100 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства МЕТ МТ-100 - 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XXXIX. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
МЕТ МТ-110 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства МЕТ МТ-110 - 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XL. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
МЕТ МТ-120 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства МЕТ МТ-120 - 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLI. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
МЕТ МТ-130 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства МЕТ МТ-130 - 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLII. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
МЕТ МТ-140 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства МЕТ МТ-140 - 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLIII. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
MET MT-150 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-150 - 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLIV. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
MET MT-160 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-160 - 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLV. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
MET MT-170 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-170 - 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLVI. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
MET MT-180 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-180 - 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLVII. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства
MET MT-190 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-190 - 1 шт.
2. Чехол «Oxford» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLVIII. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-200 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый с отверстием для туалетного устройства MET MT-200 – 1 шт.
2. Чехол «Комфорт» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

XLIX. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP- 100 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP- 100 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

L. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 2 DENSITY в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 2 DENSITY – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LI. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 7 ZONE в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 7 ZONE – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 200 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 200 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LIII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 300 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 300 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LIV. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 400 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 400 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LV. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D VISCO в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D VISCO – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LVI. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D VISCO NEW в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D VISCO NEW – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LVII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D GEL в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 3D GEL – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LVIII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 500 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 500 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LIX. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 600 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 600 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LX. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 700 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 700 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Принадлежности:

- Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LXI. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 800 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 800 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LXII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 4SL в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET 4SL – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

LXIII. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP- 900 в составе:

1. Матрас медицинский противопролежневый многослойный MET NP 900 – 1 шт.
2. Чехол «Techmaflex» - 2 шт. (при необходимости)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Принадлежности:
 - Ремонтный комплект (клей, заплатки) - 1 шт. (при необходимости)

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

ООО «МЕТ»

142784, Россия, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г
Место производства:

1. ООО «МЕТ», г.Москва, пос.Московский, деревня Мешково, д.2, стр.2

2. ООО "ЭсДжиМедикал",

Иваново, проезд Красных Зорь, д. 1-а, лит. В.

3. HENGSHUI ZHUKANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD., Weitun Village, Weitun Town, Binhu New Area, Hengshui City, Hebei, China (ХЕНГШУЙ ЖУКАНГ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТ Ко., ЛТД., Вейтун Вилладж, Вейтун Таун, Биньху Нью Ареа, Хенгшуй Сити, Хебей, Китай)

4. MEDIKAL 2000 TIBBI CİHAZLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş., BUYUKKAYACIK OSB MAH. T. ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. FABRİKA ÜRETİM APT. D:19 A1 SELÇUKLU KONYA / TÜRKİYE (МЕДИКАЛ 2000 ТИББИ ЧИХАЗЛАР ВЕ ИЛЕРИ ТЕХНОЛОДЖИ САН. ВЕ ТИК. А.С., Буюккаясик ОСБ Ман. Т.Зияедин Акбулат Кад. Фабрика Уретим АПР. Д:19 А1 Селкуклу- Конья/Турция)

5. S.P.M. SUNGER PLASTİK VE MATERYALLERİ SANAYİ TİCARET LTD. STİ.

Yazibasi Mahallesi Sazyolu Cad. No:3 35875 Torbali –İZMİR – TURKEY (С.П.М. СУНГЕР ПЛАСТИК ВЕ МАТЕРЯЛЛЕРИ САНАЙИ ТИЦАРЕТ ЛТД. СТИ. Язибаси Махаллеси Сазёлу Цад. Но:3 35875 Торбали –ИЗМИР – ТУРЦИЯ)

3. Область применения медицинского изделия.

медицинские учреждения, лечебно-профилактические учреждения, дома престарелых, роддомах, ожоговых центрах, в стационарах, для домашнего использования в период реабилитации.

4. Показания для применения и назначение медицинского изделия.

уход за лежащими пациентами;

- для пациентов с тяжелыми стадиями онкологии;
- для пациентов с инсультом или инфарктом;
- для пациентов, которые не полностью обездвижены;
- для пожилых людей, которые мало двигаются в силу старческого бессилия;
- для пациентов с травмами и болезнями, не позволяющими активно двигаться;
- для улучшения циркуляции крови в тканях;
- для профилактических средств при нарушениях центральной нервной системы;
- для предотвращения возникновения и прогрессирования пролежней;
- для предупреждения появления дефектов опорно-двигательной системы;
- нормализация сна;
- для противостояния появления и развития язв.

Назначение: предназначен для предотвращения образования пролежней и застоя кровотока в мягких тканях пожилых обездвиженных пациентов, пациентов с ограниченными физическими возможностями или у пациентов с низким уровнем жира в организме. Для полностью обездвиженных пациентов изделие без участия ухаживающего персонала не может самостоятельно гарантировать противолежневый эффект.

5. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- травмирование позвоночного столба, особенно если затронут костный мозг;
- скелетно-шейных вытяжениях;
- вес пациента выше 120 кг (зависимости от варианта исполнения изделия).

6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Берегите матрас от воздействия колющих и режущих предметов.
- Не подвергайте матрас воздействию высоких температур.
- Не используйте матрас вблизи открытого огня.
- Не курите вблизи матраса.
- Поверхность матраса должна быть не скользящей, использование матраса строго в чехле
- Использование изделия строго по показаниям

7. Инструкция по безопасности

- Не использовать при противопоказаниях к применению
- Перед применением ознакомится с инструкцией по эксплуатации
- Матрас использовать строго в чехле
- Подбирайте правильно размер матраса, матрас должен подходить по размеру основания ложа кровати
- Использование матраса с деформаций и складками- **запрещено**
- После каждого пациента необходимо проводить дезинфекцию
- Изделие необходимо использовать строго в температурном режиме эксплуатации
- Запрещено хранить матрас долгое время (больше 3 месяцев) в вертикальном положении
- Запрещено гладить матрас утюгом, сушить феном

Изделие относится к статичным противолежневым матрасам, основное назначение которых - предупреждение развития пролежней, и основное их применение - у пациентов с частично утраченной, но сохраненной способностью к движениям.

Побочные эффекты при использовании изделия: При использовании изделия согласно инструкции по эксплуатации и по показаниям, описанным выше, побочных эффектов не вызывает.

8. Технические данные.

Основные параметры и размеры матрасов указаны в таблице 1. Составляющие изделия и принадлежности указаны в таблице 2.

Таблица 1

Техниче- ские характер- истики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ- 100	МЕТ ММ- 110	МЕТ ММ- 120	МЕТ ММ- 130	МЕТ ММ- 140	МЕТ ММ- 150
Габаритн- ые размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1700 до 2000 ширина: от 600 до 900 толщина: от 80 до 120	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160
Вес, кг	от 5 до 8	от 3 до 6	от 7,5 до 10	от 6 до 9	от 4 до 7	от 4,5 до 7
Максималь- ная нагрузка, кг	95	80	100	110	60	75
Состав матраса	чехол - Комфорт Наполните- ль- ППУ вязкоэласти- чный	чехол - Кожзаменит- ель Наполнит- ель-ПВВ	чехол - Кожзаменит- ель Наполнитель- -ПВВ	чехол - Кожзаменит- ель Наполнитель- -ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель- -ПВВ	чехол - Комфорт Наполнитель- -ППУ
Плотность наполните- ля, кг/м ³	50	60	60	25	60	20

Продолжение таблицы 1

Техниче- ские характер- истики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ- 160	МЕТ ММ- 170	МЕТ ММ- 180	МЕТ ММ- 190	МЕТ ММ- 200	МЕТ ММ- 210
Габаритн- ые размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1750 до 2000 ширина: от 60 до 900 толщина: от 60 до 120	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 800 до 1400 ширина: от 450 до 550 толщина: от 60 до 140	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150
Вес, кг	от 6 до 8,5	от 4 до 9	от 7 до 9,5	от 3,5 до 6,5	от 7 до 10	от 8 до 11

Максимальная нагрузка, кг	90	75	100	60	110	110
Состав матраса	чехол - Oxford Наполнитель -ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель -ППУ	чехол - Oxford Наполнитель -ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель -ПВВ	чехол - Комфорт Наполнитель -ПВВ	чехол - Techmaflex Наполнитель -ПВВ
Плотность наполнителя, кг/м ³	45	20	25	60	60	55

Продолжение таблицы 1

Технические характеристики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ-220	МЕТ ММ-230	МЕТ ММ-240	МЕТ ММ-250	МЕТ ММ-260	МЕТ ММ-270
Габаритные размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1700 до 2100 ширина: от 600 до 1000 толщина: от 80 до 120
Вес, кг	от 5 до 8	от 8 до 10	от 9 до 11	от 7 до 10	от 8 до 11	от 8 до 12
Максимальная нагрузка, кг	65	110	108	100	100	110
Состав матраса	чехол - Techmaflex Наполнитель -ПВВ	чехол - Techmaflex Наполнитель -ППУ	чехол - Techmaflex Наполнитель -ППУ вязкоэластичный	чехол - Комфорт Наполнитель -ПВВ	чехол - Techmaflex Наполнитель -ПВВ	чехол - Комфорт Наполнитель -ППУ вязкоэластичный
Плотность наполнителя, кг/м ³	60	25	50	60	60	50

Продолжение таблицы 1

Техниче- ские характер- истики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ-280	МЕТ ММ- 290	МЕТ ММ- 300	МЕТ ММ- 310	МЕТ ММ- 320	МЕТ ММ-330
Габаритн- ые размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1700 до 2100 ширина: от 600 до 1000 толщина : от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160
Вес, кг	от 6 до 9	от 3 до 7	от 6 до 9	от 4 до 8	от 7 до 10	от 4 до 8
Максималь- ная нагрузка, кг	98	60	95	70	110	65
Состав матраса	чехол - Комфорт Наполни- тель – гель силикон	чехол - Oxford Наполните- ль-ППУ	чехол - Oxford Наполните- ль-ППУ	чехол - Комфорт Наполните- ль-ПВВ	чехол - Комфорт Наполните- ль-ПВВ	чехол - Techmaflex Наполните- ль-ПВВ
Плот- ность наполни- теля, кг/м3	80	20	25	60	60	60

Продолжение таблицы 1

Техниче- ские характер- истики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ-340	МЕТ ММ- 350	МЕТ ММ- 360	МЕТ ММ- 370	МЕТ ММ- 380	МЕТ ММ-390
Габаритн- ые размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина : от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160
Вес, кг	от 7 до 11	от 3 до 7	от 6 до 9	от 4 до 8	от 7 до 10	от 4 до 8
Максималь- ная нагрузка,	100	60	95	70	110	65

кг						
Состав матраса	чехол - Techmafl ex Наполни тель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнител ь-ППУ	чехол - Oxford Наполнител ь-ППУ	чехол - Комфорт Наполнител ь-ПВВ	чехол - Комфорт Наполнител ь-ПВВ	чехол - TechmaflexНа полнитель - ПВВ
Плот- ность наполни- теля, кг/м3	60	25	25	60	60	60

Продолжение таблицы 1

Техническ ие характери стики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ- 400	МЕТ ММ- 410	МЕТ ММ- 420	МЕТ ММ- 430	МЕТ ММ- 440	МЕТ ММ- 450
Габаритны е размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1400 до 1800 ширина: от 550 до 950 толщина: от 80 до 160
Вес, кг	от 7 до 11	от 3 до 7	от 6 до 9	от 4 до 8	от 7 до 10	от 4 до 8
Максималь ная нагрузка, кг	100	60	95	70	110	65
Состав матраса	чехол - Techmaflex Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполните ль-ППУ	чехол - Oxford Наполнитель -ППУ	чехол - Комфорт Наполните ль-ПВВ	чехол - Комфорт Наполните ль-ПВВ	чехол - Techmaflex Наполните ль - ПВВ
Плот-ность наполни- теля, кг/м3	60	20	25	60	60	60

Продолжение таблицы 1

Техническ ие характери стики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ ММ- 460	МЕТ МТ- 100	МЕТ МТ- 110	МЕТ МТ- 120	МЕТ МТ- 130	МЕТ МТ- 140

Габаритные размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 60 до 100	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 80 до 160	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150
Вес, кг	от 7 до 11	от 6 до 9	от 7 до 10	от 6 до 9	от 7 до 10	от 6 до 9
Максимальная нагрузка, кг	100	90	100	90	100	90
Состав матраса	чехол - Techmaflex Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель - ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель - ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель - ППУ
Плотность наполнителя, кг/м ³	60	25	60	25	60	20

Продолжение таблицы 1

Технические характеристики	Значение по вариантам исполнения					
	МЕТ МТ-150	МЕТ МТ-160	МЕТ МТ-170	МЕТ МТ-180	МЕТ МТ-190	МЕТ МТ-200
Габаритные размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 50 до 100	длина: от 1800 до 2100 ширина: от 750 до 1200 толщина: от 80 до 160	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1300 толщина: от 70 до 150
Вес, кг	от 7 до 10	от 7 до 10	от 6 до 9	от 7 до 10	от 6 до 9	от 7 до 10
Максимальная нагрузка, кг	100	100	90	100	90	100
Состав матраса	чехол - Комфорт Наполнитель - ПВВ	чехол - Techmaflex Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель - ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель - ПВВ	чехол - Oxford Наполнитель - ППУ	чехол - Комфорт Наполнитель - ПВВ

Плот-ность наполни- теля, кг/м3	60	60	25	60	25	60

Продолжение таблицы 1

Техничес- кие характер- истики	Значение по вариантам исполнения						
	MET NP 100	MET 2 DENSITY	MET 7 ZONE	MET NP 200	MET NP 300	MET NP 400	MET 3D VISCO
Габаритн- ые размеры матраса, мм шаг 10 мм	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 150 до 220	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 100 до 160	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 120 до 180	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 110 до 180	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 90 до 140	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 160 до 240	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 140 до 240
Вес, кг	от 8 до 12	от 6 до 10	от 7 до 11	от 8 до 12	от 7 до 11	от 8 до 12	от 10 до 14
Максималь- ная нагрузка, кг	110	110	110	110	110	110	110
Состав матраса	чехол - Techmaflex Наполните- ль- ППУ+ППУ (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль- ПВВ +ППУ (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль- ПВВ+ППУ (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль-ППУ + ППУ вязкоэлас- тичный (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль-ППУ + ПВВ (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль-ППУ +ППУ вязкоэлас- тичный (2 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните- ль-ППУ вязкоэлас- тичный+П ВВ+ППУ (3 слоя)
Плот- ность наполни- теля, кг/м3	60	85	85	50	85	65	95

Продолжение таблицы 1

Техни- ческие характ	Значение по вариантам исполнения							
	MET 3D VISCO	MET 3D GEL	MET NP 500	MET NP 600	MET NP 700	MET NP 800	MET 4SL	MET NP- 900

еристи ки	NEW							
Габари тные размер ы матраса , мм шаг 10 мм	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина : от 140 до 230	длина: от 1900 до 2200 ширина : от 800 до 1100 толщин а: от 120 до 200	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина : от 120 до 220	длина: от 1900 до 2200 ширина : от 800 до 1100 толщин а: от 130 до 240	длина: от 1900 до 2200 ширина : от 800 до 1100 толщин а: от 130 до 180	длина: от 1900 до 2200 ширина : от 800 до 1100 толщин а: от 160 до 250	длина: от 1900 до 2200 ширина: от 800 до 1100 толщина: от 140 до 180	длина: от 1980 до 2400 ширина: от 900 до 1300 толщина: от 160 до 260
Вес, кг	от 14 до 18	от 16 до 20	от 9 до 13	от 8 до 12	от 8 до 12	от 16 до 20	от 16 до 22	от 20 до 26
Максим альная нагрузк а, кг	110	110	110	110	110	110	110	120
Состав матраса	чехол - Techmafl ex Наполни тель- ППУ вязкоэла стичный +ПВВ +ППУ (3 слоя)	чехол - Techma flex Наполн итель- ППУ вязкоэл астичн ый+ПВ В+ППУ + гель силико н (4 слоя)	чехол - Techmafl ex Наполни тель- ППУ вязкоэла стичный + ПВВ+ ППУ (3 слоя)	чехол - Techma flex Наполн итель- ПВВ + ППУ вязкоэл астичн ый+ ППУ (3 слоя)	чехол - Techma flex Наполн итель- ППУ + ПВВ + ППУ (3 слоя)	чехол - Techma flex Наполн итель- ППУ вязкоэл астичн ый +ППУ + ППУ вязкоэл астичн ый (3 слоя)	чехол - Techmaflex Наполните ль- ППУ + ПВВ+ ППУ + гель силикон (4 слоя)	чехол - Techmaflex Наполнител ь- ППУ
Плот- ность наполн ителя, кг/м3	90	80	85	90	85	85	80	45

Таблица 2

Название составляющих медицинского изделия и принадлежностей	Характеристики
Чехол	Представляет собой наматрасник, полностью скрывающий боковины, верхнюю и нижнюю полости матраса. Чехол имеет бактериостатический эффект и обеспечивает защитой от повреждений секции матраса. Размер чехла соответствует размеру

	матраса. Габаритный размер: (ДхШхВ): до 2300 мм х до 1400 мм х до 18 мм Вес: до 1,2 кг Материал: указан в таблице 3
Ремонтный комплект (клей, заплатки)	Состоит из клея и заплатки. Клей для ПВХ обладает высокой эластичностью, водонепроцаемостью, стойкостью к солнечным лучам, перепадам температур и механическому воздействию. Клей изготовлен на основе синтетического каучука. Заплатка – кусочек матрасной вставки размером 60х60 мм.

Матрасы по конструкции, являются полиуретановыми.

Матрасы должны обеспечивать повторения анатомического строения тела пациента и создавать равномерно распределенную нагрузку.

Противопролежневый эффект должен достигаться за счет особенностей структуры чехла и наполнителя матраса, которые способствуют лучшему распределению веса пациента, равномерному распределению нагрузки и индивидуальной подстройке матраса к телу пациента.

Матрас может иметь поперечные насечки, для возможности использования на функциональных медицинских кроватях, принимая форму лежа медицинской кровати.

Использование матрасов строго в чехле. По степени жесткости матрацы- средней жесткости. Показатель мягкости матрасов II-III по ГОСТ 19917.

Матрасы должны изготавливаться из материалов, у которых ПДК летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации, не превышала значений, указанных в ГОСТ 19917.

Чехлы матрасов должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства ГОСТ 25644. Чехол матраса должен допускать стирку с применением бытовых моющих средств по МУ 3.5.736-99.

Наружные поверхности матрасов и принадлежностей не должны иметь вмятин, трещин, порезов, разрывов и других дефектов.

Матрасы при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ 4.2 при температуре от +10 °С до +35 °С.

Матрасы при транспортировании и хранении должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

Матрасы при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для изделий группы 1.

Матрасы, упакованные в транспортную тару, должны обладать вибропрочностью и ударопрочностью при транспортировании в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Средний срок службы изделия должен быть не менее 5 лет. За критерий предельного состояния изделия принимается состояние, при котором восстановление изделия невозможно, либо целесообразно по технико-экономическим или функциональным показателям.

Металлические части чехлов (застежки-молнии) должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302.

Матрасы по качественным и художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

Раскрой ткани чехла должен производиться по долевой нити. Один край чехла должен быть закрытым (вход) и иметь застежку-молнию. Отстрочка верхнего и нижнего полотнища по периметру с образованием строчечного бортика без согласования с заказчиком не допускается. Виды стежков, рочек и швов — в соответствии с ГОСТ 16964 и технологической документацией. Строчки должны быть ровными, выполненными без пропусков стежков с частотой 3-4 стежка на один сантиметр, без стяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и обрезаны. Чехол должен быть закреплен без морщин и перекосов.

Сырье и материалы.

Матрасы не контактируют с телом человека т.к. используются в чехле. Чехлы, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5 и ГОСТ ISO 10993-10.

Материалы элементов матрасов, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

При изготовлении матрасов не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы.

На поверхности матрасов не должно быть складок, сборок, механических повреждений, разрывов, а также нарушений структуры материалов.

Материалы, используемые для изготовления матрасов должны обеспечивать изменение линейных размеров после стирки и/или дезинфекции в пределах, не препятствующих надеванию чехла на матрас.

Таблица 3

Часть изделия	Материал	Марка, производитель
Матрас (наполнитель)	ППУ вязкоэластичный, модель LR	Hefei Singry Household Products Co., Ltd.
	ППУ, модель ST	Dongguan Kingsponge Industry Co., Ltd.
	ПВВ, модель RBD	Xiguan Foam Co., Ltd.
	Гель силикон TPR gel	Shijiazhuang Chuanghong Technology Co., Ltd., Jinyuan Plaza, NO.152 Huaian east road, China (Mainland) (Китай).
Чехол	синтетическая ткань с полиуретановой мембраной (Комфорт) Dewspo 240T PU	«Shandong Jinhao International Trade Co., Ltd» (Китай)
	синтетическая ткань с полиуретановой мембраной (Oxford) 210D PU	«SUZHOU CMT IMPORT & EXPORT CO. LTD» (Китай)
	синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной (Techmaflex) PU7621	производства фирмы "PLASTIBERT NV" (Бельгия)

	«FLORA BI-ELASTIC» Кожзаменитель XY	Hangzhou Hongmao Plastic Technology Co., Ltd.
Застежка-молния чехла	Лента спиральная тканая марки SBS	Fujian SBS Zipper Science & Technology Co., Ltd.
Ремонтный комплект (клей, заплатки)	Клей тюбик –Алюминий 6063	Wenzhou Kingsum Trading Co., Ltd (Кн-тай)
Заплата	Поливинилхлорид KLB	Jiangsu Kunlin New Materials Tech Co., LTD
Упаковка	Гофрокартон	-

9. Комплект поставки

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» по ТУ 31.03.12-017-11459109-2021 с принадлежностями одного варианта исполнения согласно п.1.

Упаковка – 1 шт.

10. Требования безопасности

В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными и не вызывать местно-раздражающих и аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей.

Все работы по их производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

Требования охраны окружающей среды:

Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека.

При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Охрана окружающей среды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами РФ.

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.


Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные чехлы пред утилизацией необходимо продезинфицировать.

11. Подготовка к работе и порядок работы

Пролежень (лат. *decubitus*) — омертвление (некроз) мягких тканей в результате постоянного давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. Зная причины возникновения пролежней, можно снизить риск появления ран.

МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЛЕЖНЕЙ

На спине

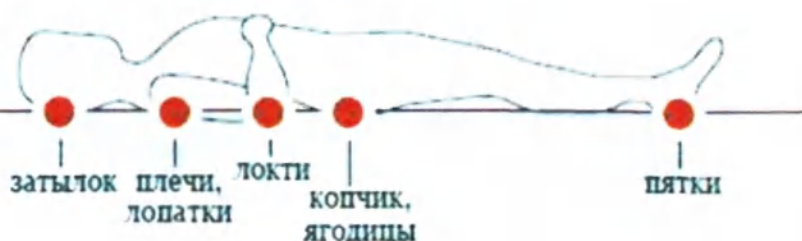

На животе



На боку



Полусидя / полулежа



Для определения пролежня следует ежедневно внимательно осматривать кожу больного. Если вы заметили красное пятно (или несколько пятен) в местах образования пролежней, которое не исчезает в течение 3-5 минут, то это пролежень 1 стадии.

Чтобы снизить образование пролежней необходимо использовать противопролежневые матрасы.

Принцип действия противопролежневого матраса заключается в равномерном распределении веса пациента на площади опоры, что позволяет снизить давление и поддержать нормальное кровообращение.

Порядок использования:

1. Поместите матрас на кровать для ухода или односпальную кровать и убедитесь, что на кровати нет острых или жестких предметов, которые могут повредить матрас. Убедитесь, что матрас в чехле.

2. Для матраса с туалетными отверстиями крышку туалетного отверстия можно снять.
3. Матрас можно использовать непрерывно в течение 24 часов. Для удобства пациента и уменьшения дискомфорта во время использования матрас необходимо застилать любой простыней медицинского назначения.
4. Проводите ежедневный уход за пациентом. Проверяйте наиболее распространенные места локализации пролежней.

12. Срок службы
не менее 5 лет

13. Сведения об упаковке, транспортировке и хранении

Процесс упаковки изделия

Упаковка по ГОСТ Р 50444.

Изделия должны быть упакованы в воздушно-пузырчатую пленку затем в гофрокартон, оклеенный полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477. Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки и вложена в упаковку с изделием.

Размер упаковки и масса зависят от варианта исполнения матраса и соответствуют диапазону: длина от 1450 мм до 2500 мм, ширина от 560 мм до 1400 мм, глубина от 50 мм до 300 мм, масса от 3 кг до 39 кг.

Транспортирование и хранение

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования изделия в упаковке предприятия-изготовителя в части климатических факторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения 2.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

14. Техническое обслуживание

14.1. Условия безопасного применения

14.1.1 Во избежание нежелательных последствий, использование матраса возможно при соблюдении инструкции по безопасности и исключения возможных противопоказаний.

14.1.2 Перед началом работы, проверить наличие физических повреждений матраса.

14.1.3 Условия эксплуатации при температуре от +10 °C до +35 °C.

14.1.4 Процедуру должен проводить персонал, ознакомившийся с инструкцией по эксплуатации.

14.1.5 Использование матрасов строго в чехле.

14.2 Техническое обслуживание

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры технического обслуживания. Для безопасного использования матраса требуется регулярное техническое обслуживание. Описание и периодичность регулярного технического обслуживания представлены в инструкции, поставляемой с изделием. Периодичность проверок указана, исходя из расчета, что матрас используется по 24 часа в день.

План технического обслуживания:

Проверка	Период
----------	--------

Внешний вид матраса	По необходимости
Проверить наличие физических повреждений матраса	Перед каждым использованием

При любых повреждениях, не связанных с действиями пользователя и соблюдения инструкции по эксплуатации матраса необходимо обратиться к производителю.

Чистка и дезинфекция

Чехлы матрасов должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства ГОСТ 25644. Чехол матраса должен допускать стирку с применением бытовых моющих средств по МУ 3.5.736-99.

Уход за чехлом:

Допускается ручная стирка при температуре воды не более 30°C.

Естественная вертикальная сушка без отжима.

Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Не использовать отбеливатели и органические растворители.

Утюжка запрещена.



Стерилизация:

Изделие не стерильно.

15. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении использованных медицинских изделий (утилизация).

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

16. Гарантии изготовителя

16.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

16.2. Гарантийный срок службы – 1 год со дня даты продажи изделия.

16.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

Ответственность

Несоблюдение пунктов инструкции по эксплуатации, а также проведение ремонтных работ лицами без соответствующей квалификации, в особенности технические изменения и доукомплектовка без согласия на то производителя могут привести к отмене гарантии, а также ответственности за продукцию.

17. Стандарты применяемые при разработке МИ

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования».

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»

ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия (Издание с Изменением N 1)

18. Маркировка

18.1. Описание маркировки МИ

Маркировка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51632.

Маркировка должна быть выполнена типографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, с указанием:

- ☐наименование страны-изготовителя;
- ☐наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- ☐обозначение настоящих технических условий;
- ☐наименование изделия;
- ☐дата изготовления (месяц и год) и номер партии или серийный номер;
- ☐слова «годен до...» (месяц и год) / или гарантийный срок службы;
- ☐условия хранения;
- ☐условия утилизации;
- ☐номер регистрационного удостоверения.

Примечание: допускается наносить на маркировку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п. по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Упаковочный ярлык транспортной упаковки должен иметь следующие реквизиты:

- ☐наименование страны-изготовителя;
- ☐наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- ☐обозначение настоящих технических условий;
- ☐наименование изделия и размеры изделия;
- ☐количество изделий;
- ☐дата изготовления (месяц и год) и номер партии;
- ☐слова «годен до...» (месяц и год)/или гарантийный срок службы;
- ☐условия хранения;
- ☐условия утилизации;
- ☐номер регистрационного удостоверения;

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. На упаковке должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги». Упаковочный ярлык должен быть размещен на транспортной упаковке. Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

Пример маркировки:

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» 1 шт.
по ТУ 31.03.12-017-11459109-2021 с принадлежностями
Матрас медицинский противопролежневый многослойный МЕТ 4SL

 ООО "МЕТ", 142784, Россия, Москва, Киевское ш.
22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж
5, блок Г

 08.2021 LOT 082021/001

Утилизация как класс А
Гарантийный срок службы – 1 год
РУ №...

Габаритные размеры, мм
2200x1100x180

 -50 40°C
ХРАНИТИ

 про-во Россия

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» 1 шт.
по ТУ 31.03.12-017-11459109-2021 с принадлежностями
Чехол из синтетического трикотажа с полиуретановой мембраной
(Techmeflex)

 ООО "МЕТ", 142784, Россия, Москва, Киевское ш.
22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж
5, блок Г

 08.2021 LOT 082021

Утилизация как класс А
Гарантийный срок службы – 1 год
РУ №...

 -50 40°C
ХРАНИТИ

 про-во Россия

18.2 Описание символов, нанесенных на маркировку

Символы на матрасе:



Дата изготовления



Изготовитель



Код (номер) партии



Условия хранения



Беречь от воздействия солнечного света



Сушить при низкой температуре



Нельзя гладить



Нельзя отбеливать



Только ручная стирка. Не тереть, без отжима

Транспортная маркировка:



Беречь от влаги



Обратитесь к инструкции по применению

Для рассмотрения рекламаций и для обращения потребителей: (наименование, адрес, телефон)

ООО «МЕТ»

142784, Россия, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г

Тел. 8-495-775-75-95

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

29 (двадцать девять) листов

Должность исполнитель директор

Подпись Филиппов С.В.

« 20 » Апрель 20 22 г. М.П.

