


1. Катетеры на троакаре




2. Торакальные катетеры

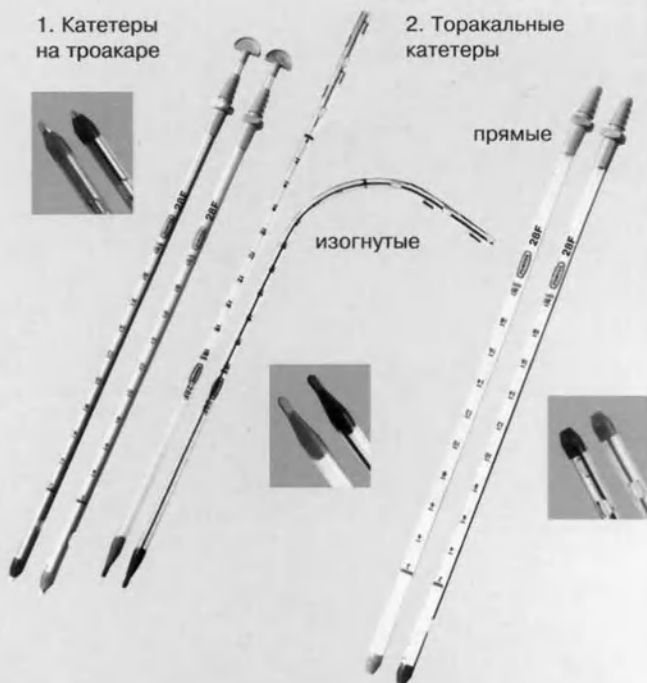

1. Катетеры на троакаре 200/805/... для чрескожного дренирования плевральной полости. Все катетры выполнены из мягкого, устойчивого к перегибам поливинилхлорида (ПВХ) и имеют рентгенконтрастную линию, разметку длины дренажа. На кончике катетера два глазка на протяжении 4,5 см, края глазков атравматичные, гладкие, не позволяющие образованию сгустков, предотвращающие закупорку дренажа. Дренажи имеют универсальный коннектор для соединения с разными диаметрами удлинительных трубок. Размерный ряд 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 Fr. Кончик катетера плотно прилегает к троакару, что позволяет атравматично проходить кожные покровы.

2. Торакальные катетеры 200/810/... для ретроградной постановки во время операции. Данные катетеры могут быть: а) прямые и б) изогнутые (изгиб для более удобного дренирования плевральной полости). Все катетеры выполнены из мягкого, устойчивого к перегибам ПВХ, имеют рентген-контрастную линию, разметку длины дренажа. Края глазков катетера атравматичные, гладкие, не позволяющие образовываться сгусткам, предотвращающие закупорку дренажа. Торакальные катетеры имеют запаянный кончик для захвата щипцами, который срезается после выведения катетера из плевральной полости и устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой. Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5 см. Размерный ряд 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 Fr.

НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПО СЕЛЬДИНГЕРУ. 200/910/120

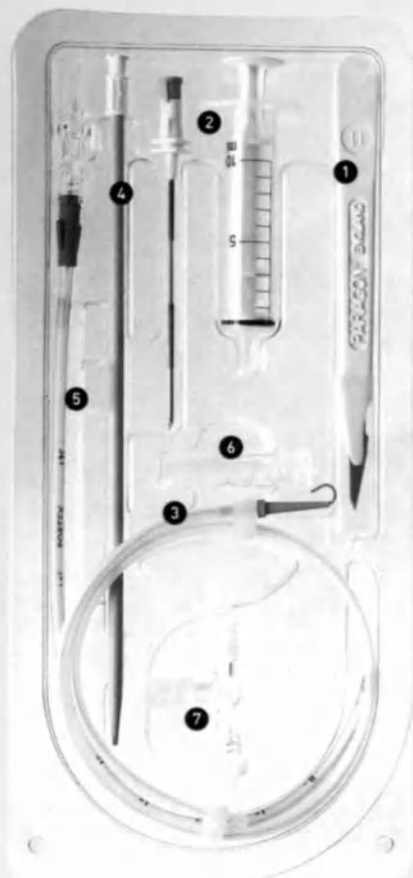

Альтернатива большим дренажам, набор ПОРТЕКС для дренирования грудной клетки по Сельдингеру используется при пневмотораксе, спонтанном или ятрогенном; выпоте, неопасном или злокачественном, за исключением с очень высоким содержанием протеина; эмпиемах низкой вязкости.

1. Скальпель №11 для выполнения кожного разреза.
2. Игла для пункции плевральной полости, шприц для идентификации плевральной полости.
3. Проводник (50 см длина) для поддержания пути в плевральную полость и обеспечения постановки торакального катетера.
4. Дилататор (4.66 мм) для создания тоннеля торакальному катетеру в подкожных тканях.
5. Торакальный катетер 12Fr(3.96мм, 30см длина) .
6. Male - коннектор для осуществления соединения с системой грудного дренажа.
7. 4 - ходовой краник для связи между катетером, дополнительными аксессуарами и продуктами дренирования грудной клетки.





ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ДРЕНАЖА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ПОДВОДНЫМ ЗАМКОМ. 200/870/000

Данная система двухкамерная, используется для активного и пассивного дренирования плевральной полости. Безопасна и эффективна.

- Общий объем системы 2000мл. Малая камера с разметкой по 10мл для более точного контроля жидкости. Большая камера с разметкой по 25 мл.
- А) Пластмассовая прямая трубка с регулируемой длиной, трубка фиксируется в винтовой крышке малой камеры. На этой трубке плотно фиксирована Б) удлинительная трубка. Прямая трубка в сочетании с "двойной" камерой позволяет минимизировать сопротивление дренажной жидкости дыханию.
- В) Имеется порт для подсоединения вакуума на большой камере.
- Система выполнена из легкого и прозрачного материала.
- Набор из винтовой крышки, прямой трубки с удлинительной линией может поставляться отдельно 200/850/000.

Рис.А

НАБОРЫ АМБУЛАТОРНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. 200/900/280

В случаях, когда отсасывание не требуется, мешок амбулаторного дренирования грудной клетки является практичной и безопасной альтернативой системам с подводным замком. "Лепестковый" клапан предотвращает обратное поступление воздуха/жидкости в грудную клетку. Компактный и легкий, амбулаторный мешок является идеальным для мобильных пациентов или для перевозки пациентов.

Рис.Б

- Трояк с катетером 28Fr.
- Мешок с удлинительной линией, V= 1700мл, с 10мл разметкой.
- Шприц 20 мл, скальпель.
- Мешок с удлинительной линией может поставляться отдельно.
- Две ленты, фиксирующие мешок вокруг тела пациента.
- Хирургическая игла, шовный материал.

Рис. А

Односторонний "лепестковый клапан" находится внутри мешка.

Рис. Б

Защитная крышка над клапаном предотвращает случайную окклюзию.

Дренажная система "Робинзон" - это закрытая единая дренажная система (дренаж 1 м и мешок 350мл) для послеоперационного "пассивного" дренирования ран и полостей, является альтернативой вакуумным системам, где отмечен риск тканевой блокировки дренажных глазков, некроза тканей, боли, инфицирования раневого канала.

Дренаж изготовлен из 100% силикона, размеры: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 36 Fr, кончик дренажа открытый, имеются глазки на протяжении 9,5 см, на дренаже рентгеноконтрастная линия. Дренаж соединен с мешком на 350 мл, внутри мешка "лепесток-клапан", на дистальном конце мешка клапан для сброса собираемого отделяемого. Единое исполнение с дренажом, предотвращает инфицирование дренируемой полости.

КОМПАКТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 200/880/000



Данные системы используются для активного и пассивного дренирования плевральной полости. Эти системы предлагают отличную разметку для точной оценки потери жидкости. Имеют ручку для транспортировки и напольную подставку, а также крючки для крепления на кровати пациента, системы предлагают значительные преимущества для пациентов и врачей.

Компактная четырёхбаночная система представлена единым блоком - общий объём 1150мл или 2300мл.

- Данная модель представляет 4-х камерную баночную систему:
- 1-я камера "Камера контроля уровня разряжения" имеет ручной регулятор для точной настройки уровня отсасывания, удерживает вакуумное ограничение максимум до -30смН2О.
- 2-я камера "Камера водного замка", содержит сухой краситель, при добавлении воды происходит её окрашивание для чёткой визуализации уровня "Водного" замка. Над камерой находится порт для регулирования уровня подводного замка.
- 3-я камера "Камера контроля внутриплеврального давления" позволяет наблюдать изменение внутриплеврального давления, имеет клапан "автоматического сброса положительного давления", помогает избежать появления напряженного пневмоторакса.
- 4-я камера "Камера сбора отделяемого из плевральной полости" имеет удобную маркировку: первые 50 мл по 5мл, затем по 10 мл, что позволяет использовать её в детской и взрослой практике. Прозрачность камеры позволяет контролировать уровень жидкости в ней.



Устройства для активного дренирования плевральной полости с 3 камерами, для аутоотрансфузии в кардиохирургии.

ЭМОТРАНС - это дренажное устройство, включающее в себя водный замок, накопительную камеру, камеру контроля всасывания. Система аутоотрансфузии **ЭМОТРАНС** предлагает как пациенту, так и медработнику высокий уровень защиты и одновременно эффективное и удобное решение послеоперационных аутоотрансфузий. Закрытая система **РЕДАКС** помогает избежать контакта крови с пользователем и заражения крови пациента. Накопительная камера имеет внутренний фильтр, вход для соединения с мешком. Данная система комплектуется мешком для реинфузии и гемотрансфузионным фильтром.

Каталожный номер 10160PX



Мешок для сбора и реинфузии крови. Мешок, поскольку он располагается независимо на дренажной системе, может быть соединен как на начальной фазе, так и тогда, когда количество и качество накопленной крови считается адекватным для реинфузии. Эта характеристика позволяет не использовать мешок в том случае, когда количество или качество накопленной крови не подходят для реинфузии.

ООО "С.М.С." -

официальный дистрибьютор Smiths Medical:

121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, д. 33

E-mail: portex-moscow@mtu-net.ru, www.portex.ru

Тел./факс: (095) 443-46-55, тел.: (095) 443-46-54