

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОТТО»
ТУФЛИ ОТКРЫТЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
по ЛТВФ.944721.001 ТУ

Инструкция по эксплуатации. Редакция 002 от 25.09.2019.

Перед применением требуется обязательная консультация со специалистом

1 Назначение

Инструкция по эксплуатации распространяется на туфли открытые ортопедические (далее – туфли), являющиеся обувью ортопедической малосложной, предназначенные для детей, имеющих медицинские показания к их использованию.

Туфли открытые, являющиеся обувью ортопедической малосложной, предназначены для детей, имеющих медицинские показания к их использованию.

Туфли предназначены для предотвращения развития вальгусной деформации стоп у детей с нефиксированными деформациями стоп I степени, приводящими к незначительным функциональным нарушениям, и по функциональному (медицинскому) назначению должны применяться при вальгусной стопе.

2 Показание к применению

Туфли должны обеспечивать предупреждение прогрессирования вальгусной деформации стоп.

3 Противопоказания

Ношение ортопедической обуви не рекомендовано детям, не имеющим показания к ношению обуви данного типа, а также при диагностике:

- некроза костей стопы;
- острых и хронических суставных воспалений;
- незаживающих ран, язв, болезненных рубцов;
- рецидивирующих воспалительных процессов на коже;
- застойных трофических явлений и хронических отеков;
- эндартериита сосудов нижних конечностей, тромбофлебита;
- некоторых индивидуальных особенностей стопы (большая полнота или длина стопы,

широкая пучковая часть, увеличенный объем голени).

4 Указания по эксплуатации и меры предосторожности

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- при эксплуатации обуви учитывайте сезонность. Помните, кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, так как она не является непромокаемой (как, например, резиновая);

- изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом;

- при одевании обуви обязательно расстегните застежку, при затруднении одевании обуви пользуйтесь рожек для обуви (во избежание залома задника);

- перед снятием обуви ослабьте ремешок или «липучку», а потом снимайте, придерживая рукой. Никогда не снимайте обувь, наступая на задник;

- новую обувь из натуральной кожи следует начистить сразу после покупки. Используйте только подходящие и качественные средства для ухода за кожаной обувью. Во избежание изменения цвета обуви будьте внимательны при выборе кремов соответствующих оттенков;

- чистите обувь, по крайней мере, раз в неделю. Для чистки обуви из натуральной кожи используйте обувной крем или восковую эмульсию. Пользуйтесь специальной мягкой щеткой. Крем должен хорошо впитываться;

- грязную обувь сначала нужно очистить специальной щеткой, влажной тряпкой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь потом можно ухаживать за кожей;

- никогда не сушите мокрую обувь на отопительных приборах или вблизи открытого огня. Кожа после этого становится жесткой, хрупкой и ломкой;

- сушите обувь при комнатной температуре, предварительно вложив внутрь скомканную бумагу. Снимая обувь на ночь, вынимайте супинаторы для просушки. Супинаторы, изготовленные из натуральных материалов (кожа, пробка) мыть нельзя, при загрязнении можно их протереть влажной салфеткой, смоченной в мыльном растворе;

- храните обувь в хорошо проветриваемом или вентилируемом месте;

- не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, так как это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви;

- избегайте воздействия на материал верха обуви щелочей, кислот и других активных растворяющих веществ;

- не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям, на которых имеется техническая соль;

- не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, которые, как правило, приводят к отрыву подошвы, фурнитуры;

- не надевайте обувь на голую ногу, так как это негигиенично и может быть причиной появления мозолей, дефектов кожи и мелких ран;

- следует учитывать, что при повышенной потливости ног или при намокании, обувь может окраситься изнутри.

5 Состав обуви

Наименование деталей обуви	Наименование материалов и обозначение нормативных и технических документов
<u>Фурнитура</u> Закрепление обуви на стопе	Застежка текстильная по ГОСТ 30019.1-93 («Велькро», «Контакт»).
Скрепление деталей верха и специальных мягких деталей	Нитки из синтетических волокон по ГОСТ 6309-93, (нитки из комплексных полиэфирных нитей). ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова», РФ
Скрепление деталей низа с заготовкой верха	Полиуретановый клей SAR 306. Производитель KENDRA FARBEN, Италия
<u>Наружные детали верха</u> Союзка-язычок, боковинка наружная, боковинка внутренняя, деталь берца наружного, деталь берца внутреннего, задника, петля, деталь мягкого канта, шлёвка, ремешок верхний, ремешок нижний, подрамник 3 верхний, подрамник 3 нижний, деталь союзки.	Кожа для верха обуви, целая свиная по ГОСТ 939-88, ООО «КАРАВАН-СК», РФ.
<u>Внутренние детали верха</u> Союзка-язычок, берец наружный, берец внутренний, карман, подкладка №5 (под ремешок - заст.), подкладка №3 (под ремешок - заст.), стелька вкладная.	Спилок подкладочный по ГОСТ 940-81, АО «ХРОМ», РФ
<u>Промежуточные детали верха</u> Мягкий кант, боковинка наружная, боковинка внутренняя, задника.	Поролон по ТУ 2254-001-24482080-2007. Термобязь ТК165-Х-070 Фирма ООО «КОРН», Беларусь.
<u>Промежуточные детали заготовки</u> Подносок, задник.	Термопласт 686/СС Фирма "686-Forestali", Италия.
<u>Наружные детали низа</u> Подошва	Термоэластопласт (ТЭП) по ТУ 2243-044-11378612-2003.
<u>Промежуточные детали низа</u> Простилка	Полотно нетканое непропитанное, без покрытия по ТУ-8397-030-00300297-2007
<u>Внутренние детали низа</u> Стелька затяжная, полустелька	Картон обувной по ГОСТ 9542-89

Специальная деталь ортопедической обуви:	Вспененный латекс "7 Point Latex Mostra (Shoe Inside Base)". Производитель: A. D. SPOR TICARET VE SAN. LTD. STI, Istanbul , Турция
Супинатор	

6. Основные параметры и технические характеристики

Туфли соответствуют следующим нормативным документам:

- ЛТВФ.944721.001 ТУ – Туфли открытые ортопедические. Технические условия;
- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 54407-2011 Обувь ортопедическая. Общие технические условия.

Основные параметры и технические характеристики, такие как артикул, размер, половозрастная группа, полнота и дата изготовления обуви приведены на маркировке потребительской тары (коробка).

Туфли имеют одну или несколько специальных ортопедических деталей: жесткий высокий задник, каблук Томаса, приподнятость внутреннего края (поддержка продольного свода стопы).

Туфли изготавливаться с высотой каблука (приподнятостью пяточной части стопы):

- 5 мм – для ясельного возраста;
- не более 10 мм – для младшей и дошкольной;
- не более 20 мм – для школьников-мальчиков, школьников-девочек и мальчиковой.

Установленный срок службы туфель – 6 месяцев.

В зависимости от клинического состояния пациента может быть назначен более ранний срок замены туфель.

Туфли являются ремонтпригодными в течение срока службы. Специальные детали ремонту не подлежат.

7. Принцип действия туфель

- полужесткая поддержка продольного и поперечного сводов стопы
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник

- предупреждение прогрессирования деформации стопы;
- перераспределение нагрузки по стопе с целью уменьшения боли и усталости
- создание комфортных условий при ходьбе, в том числе в обуви на каблуке до 5 см
- физиологически правильное положение стопы во время ходьбы

Терапевтический эффект достигается за счет:

1. Специальных элементов ортопедической обуви:

- стельки-супинатора из специально подобранного мягкого материала, который позволяет амортизировать нагрузки, и в то же время хорошо держит форму. Супинатор из вспененного латекса поддерживает выкладку сводов на стельке, что позволяет равномерно распределять нагрузки на стопе. Специальный рельеф на нижней поверхности стелек разгружает наиболее проблемные зоны в переднем отделе стопы.

2. Жесткого задника и жестких боковых частей (берцов) как с внешней, так и с внутренней стороны. Эти берцы выполнены из специального материала, благодаря этому обувь не стаптывается и не теряет свою форму.

3. Каблука Томаса (скошенный каблук) – против вальгусной деформации. Он удлинен с внутренней стороны. 80% детей имеют вальгусную деформацию стоп (икс-образную), то есть ноги заваливаются вовнутрь. Каблук такой специальной формы как бы разворачивает ноги и не дает им заваливаться. Туфли имеют высокие берцы и прочную подошву с ротационным каблуком Томаса, предотвращающим деформацию стопы, выражающуюся в заваливании её вовнутрь. Также продуман дизайн протектора подошвы: она не скользит и хорошо «цепляется» за поверхность.

4. Регулирующих текстильных застежек «Велькро», «Контакт». Как правило, на трех липучках, на некоторых моделях обуви. Эти конструкционные элементы позволяют регулировать высоту свода, а также объем обуви для обеспечения хорошей фиксации сустава, а также, для того, чтобы зафиксировать установку ноги в правильном положении.

8 Рекомендации по ношению ортопедической обуви

Особые предупреждения при ношении ортопедической обуви:

В первые дни ношения ортопедической обуви возможны непривычные ощущения. Пусть это вас не тревожит: ваши мышцы и суставы «привыкли» к патологической позиции, и требуется время, чтобы правильная постановка стоп вновь стала нормой жизни.

В первые недели ношения ортопедической обуви возможны покраснения в местах давления и небольшие мозоли.

Рекомендуемое время ношения ортопедической обуви:

Первые 3 дня — с 1,5 до 3-х часов в день.

Следующие 7-10 дней — до 5 часов в день.

Привыкание к ортопедической обуви — индивидуально и в среднем составляет от 2-х до 6 недель.

9 Комплектность

В комплект поставки туфель входит:

- туфли – 1 пара;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- полиэтиленовый пакет для покупателя – 1 шт.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование туфель должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При иногородних отправлениях, в радиусе более 100 км, транспортирование производят в транспортной таре в контейнерах, без контейнеров и транспортными пакетами по ГОСТ 26663-85.

Транспортирование железнодорожным транспортом производят в универсальных контейнерах или транспортными пакетами.

При внутригородских перевозках допускается транспортирование туфель в автомашинах-фургонах, упакованных в термоусадочную пленку и в потребительской таре (картонных коробках), связанной крестообразно шпагатом по ГОСТ 17308-88 и другими увязочными материалами из химических волокон и нитей (с прокладкой из картона типа уголка под увязочные материалы) по пять пар одного цвета, сорта, размера, фасона колодки и модели.

Транспортирование туфель пакетами должно соответствовать требованиям ГОСТ 24597-81 и ГОСТ 26663-85.

Транспортирование туфель в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и ГОСТ 15846-2002.

Транспортирование туфель, поставляемых отдельными парами под конкретный заказ (до 5 пар), допускается производить почтовым отправлением (посылкой) ФГУП "Почта России" – в соответствии со стандартами почтовых услуг этого оператора российской государственной почтовой сети.

Туфли должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 до 80 %.

Хранение туфель в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящихся туфель от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м.

Туфли должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

Складское помещение должно иметь достаточное естественное или искусственное освещение в соответствии с действующими нормами строительного проектирования.

11 Утилизация

Утилизация туфель и элементов их упаковки — совместно с твердыми бытовыми отходами.

12 Гарантии изготовителя

ООО "ТОТТО" гарантирует соответствие туфель техническим условиям ЛТВФ.944721.001 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок носки туфель устанавливается со дня отпуска (продажи) туфель потребителю или с начала сезона и составляет 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока ООО "ТОТТО" принимает претензии по качеству туфель и производит безвозмездно ремонт или замену туфель, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя.

Ремонт туфель производится в мастерских по ремонту обуви, осуществляющих бытовое обслуживание населения.

Гарантийный ремонт/замену туфель производит ООО "ТОТТО" по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6. м. 1-Н(80).

ТУФЛИ ОТКРЫТЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

по ЛТВФ.944721.001 ТУ

Вид обуви

Артикул

Материал верха

Материал подкладки

Подошва

Номер ИПР/направления/заказа

Дата покупки/выдачи « ____ » _____

20 ____ г.

М.П.

Претензий по внешнему виду и комплектности
не имею.

С условиями представления гарантии,
эксплуатации, ухода и хранения ознакомлен.

ФИО _____

Подпись _____

Ваше здоровье в надежных руках!

Гарантийный талон

Данный талон дает право на
бесплатный ремонт обуви на протяжении
указанного ниже гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует качество
обуви при соблюдении условий
эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви
устанавливается со дня выдачи обуви
потребителю или с начала сезона:

на детскую обувь - 45 дней

Гарантия на обувь не
распространяется в следующих случаях:

- Дефект появился вследствие
применения товара с целью, не
соответствующей общепринятой сфере
применения данного товара.
- Дефект вызван попаданием внутрь
изделия или на его поверхность химических
реагентов.

- Дефект появился вследствие грубого
механического воздействия или
ускоренного естественного износа.

- Дефект возник вследствие несчастного
случая или форс-мажорных обстоятельств.

- Изменение цвета верха обуви при
попадании воды не является дефектом.

- Гарантия не распространяется на
набойки, шнурки и прочую фурнитуру.

Данные условия не ущемляют
законных прав Потребителя,
предоставленных ему действующим
законодательством Российской Федерации.

Все замечания, вопросы и
предложения по качеству обслуживания Вы
можете отправить на электронный адрес:
sale@totto-spb.ru или позвонить по
телефону +7 (800) 550-38-39.

тронумеровано,
затую

листов
2019г.

ный директор
Степанян К.Г.

