


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО МедИнформ-Инновации

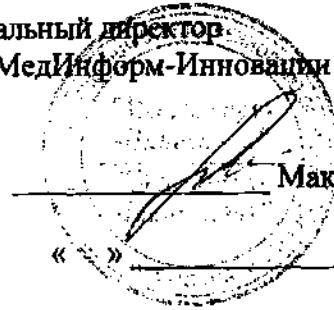


Макарова О. Е.

« » 20 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство цифровое для определения срока беременности «Клиаблу» (Clearblue).

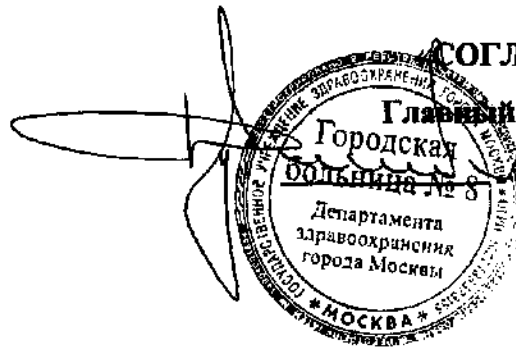

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач ГБ № 8

А.Б. Дуленков

Проведение теста

Когда Вы будете готовы к проведению теста, извлеките **устройство** из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же проведите тестирование с помощью устройства.

1 вариант:

Проведите тестирование под струей мочи

- Поместите направленный вниз пробоотборник под струю мочи **всего на 5 секунд**.
- Следите за тем, чтобы не намочить остальную часть теста.
- Возможно, потребуется надеть колпачок и положить **устройство** на горизонтальную поверхность.

2 вариант:

Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость

- Поместите только пробоотборник, направленный вниз, в мочу, как показано на рисунке, **всего на 20 секунд**.
- Возможно, потребуется надеть колпачок и положить **устройство** на горизонтальную поверхность.

Во время тестирования **никогда** не держите **устройство**, направив пробоотборник вверх.

- Мигающий символ ожидания указывает на проведение теста.
- Когда символ ожидания перестанет мигать, отобразится результат. Если символ ожидания не отображается при проведении теста, *см. вопрос 6* в разделе «Вопросы и ответы».

Проверка результата

Устройство цифровое для определения срока беременности имеет индикатор, который отображает предполагаемую дату зачатия. Эта информация отображается на дисплее рядом с результатом «Есть беременность».

- Через **3 минуты** на дисплее отобразится результат.
- Результат «Есть беременность» может отобразиться на дисплее до результата индикатора срока беременности. **Подождите**, пока символ ожидания не прекратит мигать, и на дисплее отобразится срок беременности. Это может занять до 3 минут.
- В некоторых случаях результаты могут отобразиться всего через 1 минуту.
- Результат будет оставаться на дисплее около 24 часов.
- Если результат — «Есть беременность», Вам следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий. Врач устанавливает срок беременности с первого дня последней менструации, а не от даты зачатия
- Зачатие происходит приблизительно за 2 недели до предполагаемого начала менструации. Индикатор отображает приблизительную информацию о дате зачатия.
- Точность определения даты зачатия индикатором составляет 92%. Дата зачатия определяется по уровню гормона беременности — ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека) — в моче. Уровень гормона ХГЧ может отличаться

у разных женщин, поэтому результаты индикатора срока беременности могут оказаться неточными. Точность результата «Есть беременность» / «Нет беременности» превышает 99% при проведении теста со дня ожидаемого начала менструации.

Интерпретация результатов		
Результаты	Время от момента зачатия	Срок беременности, устанавливаемый врачом (при 28-дневном цикле)*
	Вы не беременны, <i>см. вопрос 12 в разделе «Вопросы и ответы».</i>	-
	Вы беременны, зачатие произошло приблизительно 1–2 недели назад.	3–4 недели
	Вы беременны, зачатие произошло приблизительно 2–3 недели назад.	4–5 недель
	Вы беременны, зачатие произошло более 3 недель назад.	5 недель и более

Раннее тестирование

Рекомендуется проводить тестирование с помощью устройства Clearblue со дня ожидаемого начала менструации. Тем не менее, количество гормона беременности быстро увеличивается на ранней стадии беременности, и устройство можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Во время клинических испытаний с образцами, взятыми у женщин на ранней стадии беременности, устройство цифровое для определения срока беременности «Клиаблу» (Clearblue) показал следующие результаты:

Количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, по которым был получен результат «Есть беременность»
-1	98 %
-2	97 %
-3	86 %
-4	55 %

- Со дня ожидаемого начала менструации, тест на беременность можно проводить в любое время дня.
- Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую утреннюю мочу этого дня.
- Для более точных показаний индикатора беременности следует использовать первую утреннюю мочу этого дня.

- Не пейте слишком много жидкости перед тестированием.

Clearblue рекомендует проводить тестирование начиная с первого дня ожидаемого начала менструации. Тем не менее, количество ХГЧ (гормона беременности) быстро увеличивается в начале беременности, и тест Clearblue можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Во время клинических испытаний с образцами, взятыми у женщин на ранней стадии беременности, устройство Clearblue показало следующие результаты: 55 % женщин получают результат «Есть беременность» за 4 дня до предполагаемого начала менструации, 86 % — за 3 дня, 97 % — за 2 дня и 98% — за 1 день. Если во время раннего тестирования получен результат «Нет беременности», то существует вероятность, что уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Рекомендуется провести тестирование повторно, после дня ожидаемого начала менструации.