



ООО Научно-технический центр «ПИК»

ПАСПОРТ
ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
ТП-1.0 (ПИК.940000.007), ТП-1.1 (ПИК.940000.010)
ТУ 9452-008-10926164-2013

1. Назначение изделия

- 1.1. Тумба прикроватная (далее тумба) предназначена для хранения личных вещей пациентов.
1.2. Тумба может быть использована только в соответствии с данным паспортом.

2. Основные технические данные

2.1. Габаритные размеры и масса

Наименование параметров	Значение параметров	
	ТП – 1.0	ТП – 1.1
1. Габаритные размеры, мм, +/-5мм		
Ширина	400	400
Глубина	466	466
Высота	830	830
2. Масса, кг, не более	15,0	18,5

- 2.2. Тумба изготовлена с использованием листового металла толщиной 0,8 мм.
2.3. Металлические дверцы открываются и закрываются плавно, без заеданий и перекосов, с усилием не более 10 Н (1 кг) на угол не менее 110°.
2.4. Тумба выдерживает предельную рабочую нагрузку на столешницу – 10 кгс.
2.5. Тумба установлена на 4 колеса, вращающихся вокруг своей оси.
2.6. Наружные поверхности тумбы устойчивы к многократной дезинфекции и по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 - процентного раствора моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот.
2.7. Лакокрасочные покрытия тумбы выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2.
2.8. При транспортировании и хранении тумбы устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.
2.9. Тумбы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.
2.10. Средний срок службы до списания не менее 8 лет.

3. Комплект поставки

1. Корпус – 1 шт.
2. Ручка-скоба – 1 шт. (2 шт. для ТП – 1.1).
3. Колеса – 4 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

4. Инструкция по сборке и подготовка к работе

- 4.1. После транспортирования тумб в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
4.2. Распаковать тумбу и пакет с комплектующими. Проверить комплектность и целостность покрытия.
4.3. Установить ручки при помощи винтов.
4.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

5. Правила транспортирования и хранения

- 5.1. Тумбы в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре -50°C до + 50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
6.2. Изделия, вышедшие из строя в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации, подлежат ремонту силами и средствами предприятия-изготовителя при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Адрес изготовителя:


Россия, 610025, г. Киров, ул. Бородулина, 12 А
ООО НТЦ «ПИК»
Тел. (8332) 37-61-38
Факс (8332) 37-61-38
www.pikmed.ru



Тумбы прикроватные _____

Дата выпуска 28.04.14

Подпись ОТК [Signature]

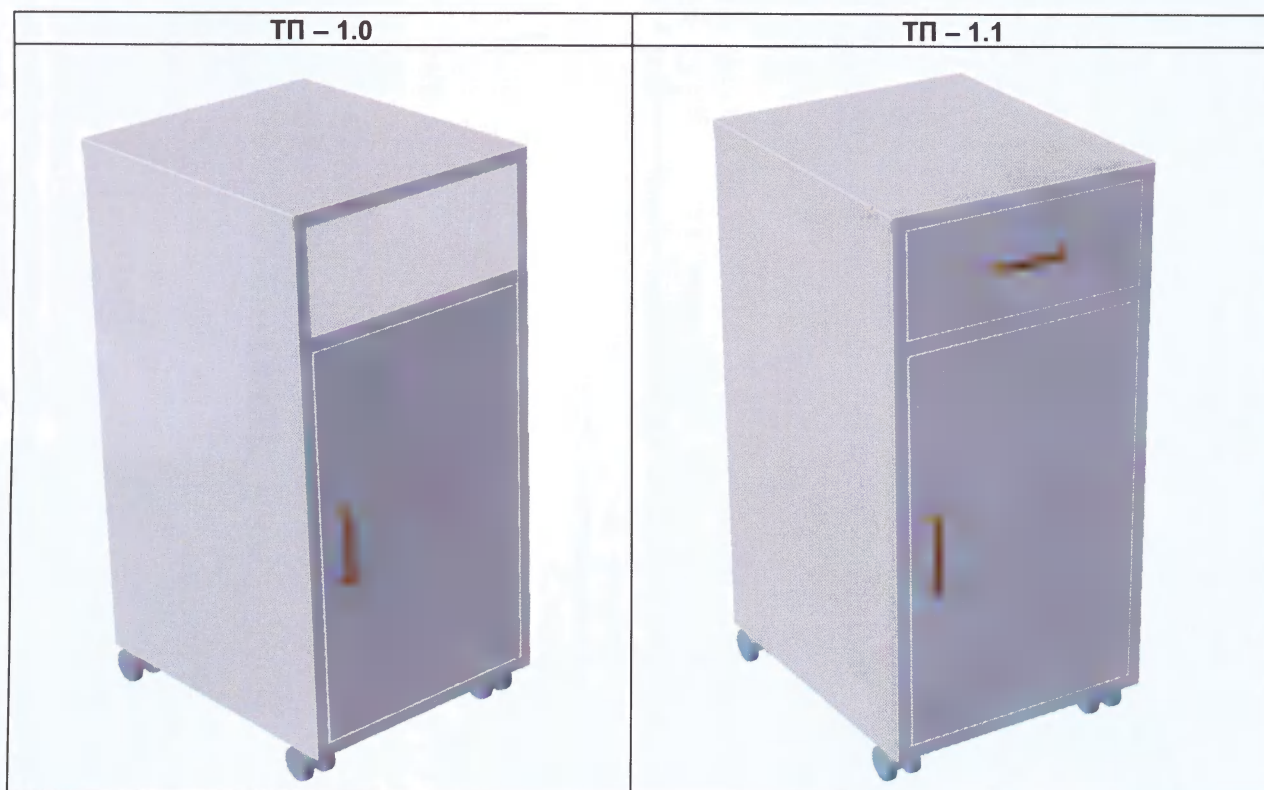

Пронумеровано и
пронумеровано

2 / ДВА

Листов

Генеральный директор
ООО НТЦ «ПИК»

 /А.В.Потапов/

