




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Набор калибраторов для обеспечения правильности определения уровня
фруктозамина в сыворотке или плазме крови человека кинетическим
колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Фруктозамин Калибраторы (Alinity c Fructosamine Calibrator Kit)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

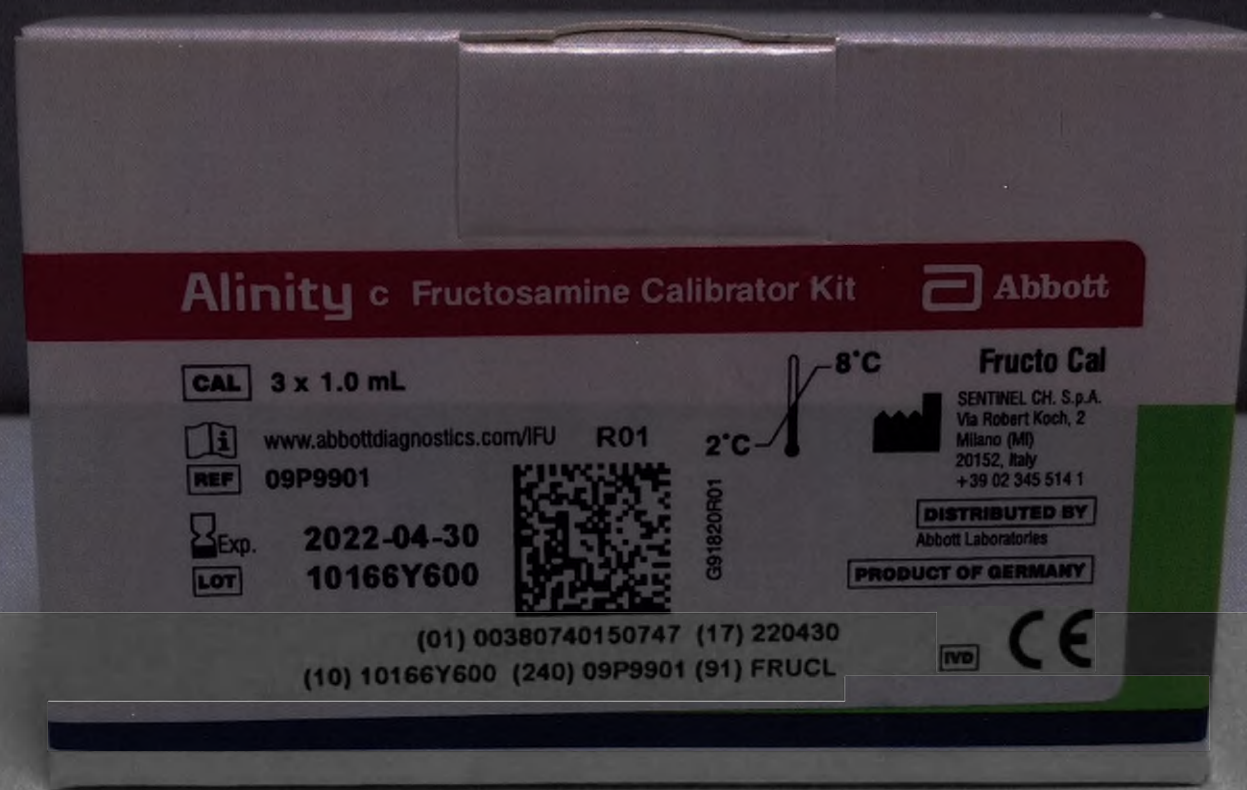

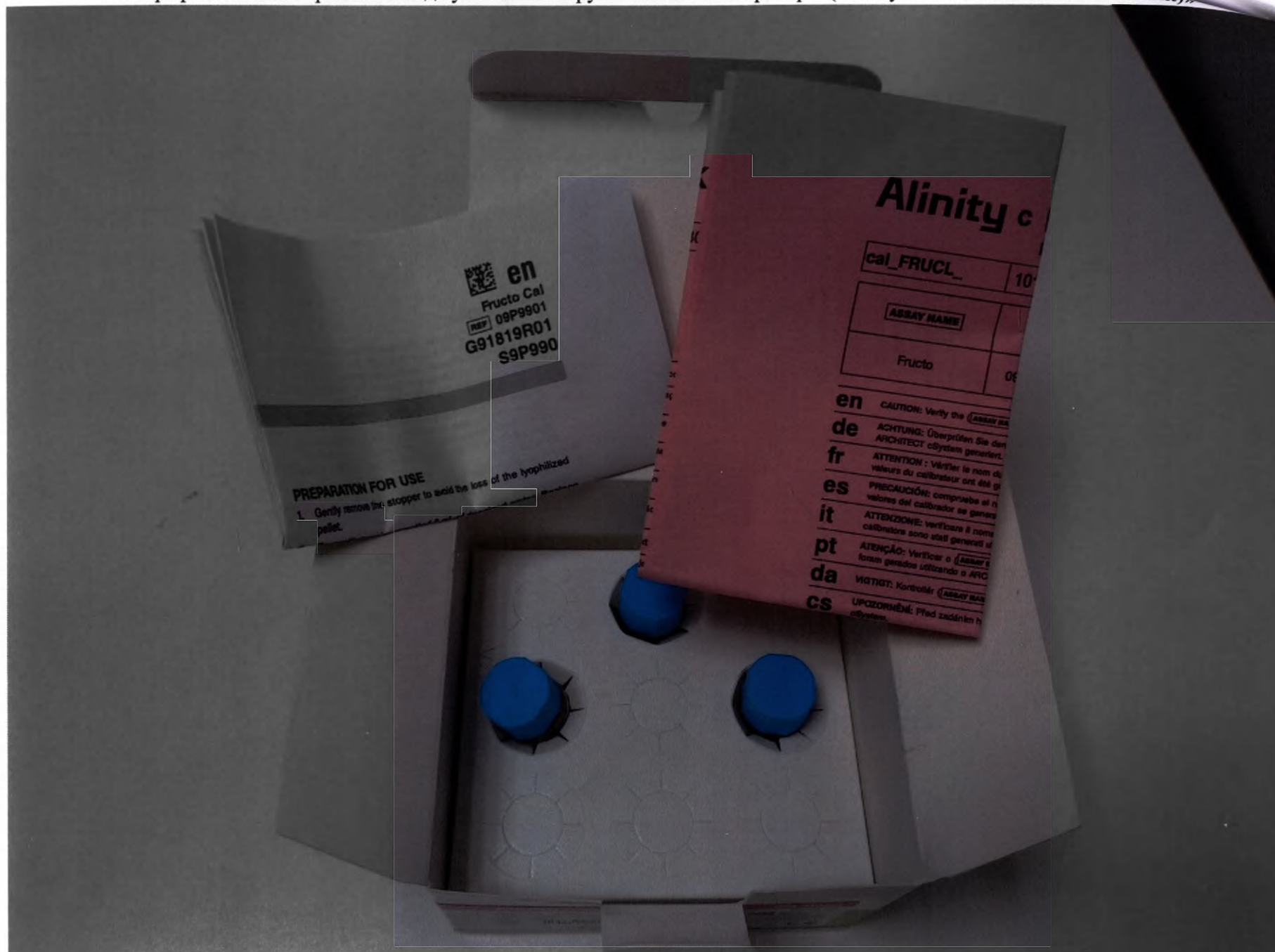

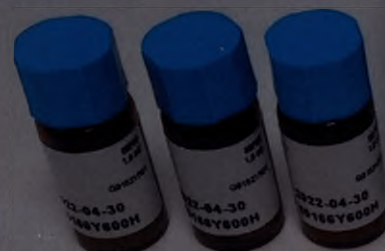

Alinity c Fructosamine Calibrator Kit

Created June 2018.

Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this package insert.

NAME

Alinity c Fructosamine Calibrator Kit (also referred to as Fructo Cal)

PREPARED USE

PREPARATION FOR USE

1. Gently remove the stopper to avoid the loss of the lyophilized pellet.
2. Reconstitute using exactly 1.0 mL of deionized water. Replace the stopper and gently swirl, avoiding the formation of foam.
3. Allow to stand for 30 minutes after reconstitution.
4. Gently invert the bottle.

Alinity c Fructosamine Calibrator Kit

Fruktosamin Kalibrator Kit

cal_FRUCL_		10166Y600		LOT	2022-04-30	Exp.
ASSAY NAME	REF	ASSAY NO.	DEFAULT UNITS			
Fructo	09P9922	1887	407 $\mu\text{mol/L}$			

en

CAUTION: Verify the (ASSAY NAME) before entering calibrator values. Refer to the package insert for information on entering and importing calibrator values electronically. Calibrator values must be

ACHTUNG: Überprüfen Sie den Assaynamen (ASSAY NAME) vor dem Eingeben der Kalibratorwerte. Die Packungsbeilage enthält Informationen zum elektronischen Zugriff und Import von Kalibratorwerten.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор калибраторов для обеспечения правильности определения уровня фруктозамина в сыворотке или плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Фруктозамин Калибраторы (Alinity с Fructosamine Calibrator Kit)»

**REF****09P99-01****IVD**

Набор калибраторов для обеспечения правильности определения уровня фруктозамина в сыворотке или плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Фруктозамин Калибраторы (Alinity с Fructosamine Calibrator Kit)»

В составе:

- Калибратор (Alinity с Fructosamine Cal) – 3 x 1,0 мл;
- Инструкция по применению;
- Таблица значений

Производитель: «СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А.» (SENTINEL CH. S.p.A.), Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy (Италия)

Место производства: SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy

Страна происхождения: Германия / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученный от человека и/или потенциально инфекционные компоненты

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)


Fructo Cal

Alinity с Fructosamine Calibrator Kit

Abbott

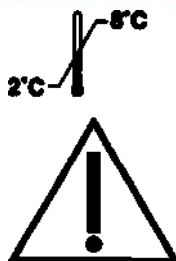**CAL** 3 x 1.0 mL www.abbottdiagnostics.com/IFU**REF** 09P9901


Exp.

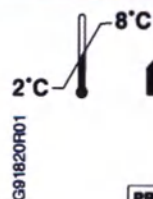LOT

Fructo Cal

SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1**DISTRIBUTED BY**
Abbott Laboratories**PRODUCT OF GERMANY**

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

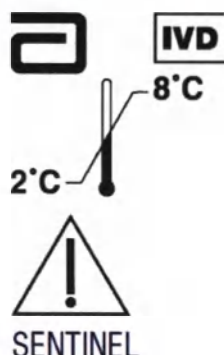**Alinity с**
Fructo**CAL**

Exp.

CN**09P99**
1.0 mL

G91821R01

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

Подпись _____

