

Инструкция по эксплуатации пакетов для медицинских отходов ООО «Мегатехника»

Назначение


Пакеты для медицинских отходов предназначены для сбора, изоляции, хранения и удаления отходов жизнедеятельности человека (рвотные массы, моча, кал).

Способ применения

Разверните пакет, взявшись за жесткие кромки его противоположных сторон. Вставьте пакет с абсорбирующей кассетой в пластиковый модуль или кольцо. Поместите необходимые отходы внутрь гигиенического пакета. После использования снимите пакет и загерметизируйте его, завязав узлом. Содержимое пакета превратилось в гель. Пакет утилизируется как бытовые отходы.

Один пакет может абсорбировать не более 0,7 л. биологической жидкости.

Генеральный директор

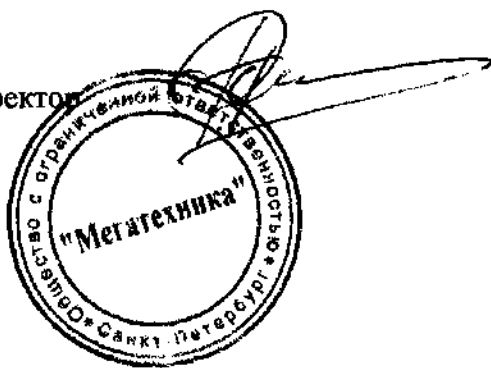

Котченко Р.Г.