

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский
центр фармакотерапии» (ООО «НИЦФ»), г. Санкт-Петербург**

**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
для диагностики in vitro**

**Основа колумбийского агара сухая
по ТУ 20.59.52-030-39484474-2017.**

Индивидуальная упаковка

Для вариантов упаковки (фасовки):

Комплект 1. Основа колумбийского агара сухая, по 100 г в банках полимерных вместимостью 500 мл; до 32 шт в картонной коробке;

Комплект 2. Основа колумбийского агара сухая, по 150 г в банках полимерных вместимостью 500 мл ; до 32 шт в картонной коробке;

Комплект 3. Основа колумбийского агара сухая, по 200 г в банках полимерных вместимостью 500 мл ; до 32 шт в картонной коробке;

Комплект 4. Основа колумбийского агара сухая, по 250 г в банках полимерных вместимостью 500 мл ; до 32 шт в картонной коробке.



«Научно-исследовательский
фармакотерапии» (НИЦФ) ООО

192236, Россия, г. Санкт-Петербург
пом. 18Н офис 300 тел: (812) 320 71 11

НИЦФ

ОСНОВА КОЛУМБИЙСКОГО АГАРА СУХОГО
по ТУ 20.59.52-030-39484474-2017


ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

на 1 л среды		РУ. № _____	
антисептический сухой		Дата регистрации _____	
в жидких сред	4,7 г	МАССА НЕТТО _____ г	
в жидких сред	4,0 г	в банке вместимостью _____ мл	
в жидких сред	4,0 г		
в жидких сред	3,0 г	Серия _____	
в жидких сред	3,0 г	Годен до _____	
в жидких сред	1,5 г		
в жидких сред	1,0 г		
в жидких сред	4,0 г		
в жидких сред	0,8 г		
в жидких сред	11,0 г		

Для профессионального применения

Хранить в сухом месте при температуре от 2 до 25 °С.


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
37,0 г сухой основы разложить в 1 л воды. Фильтровать через микрофильтр в бутылки или колбы. Бутылки и колбы стерилизовать паром (0,11 ± 0,02) MPa (температура 121 °С) в течение 15 мин, охладить до 45-50 °С. После стерилизации к охлажденной среде асептично добавить 5 % проб (колуэмбийский агар) разлить в колбы или 100 мл слесом 3-4 мм. Пробочки чашки подсушить, собирать в чашки (37±1) °С в течение 7-8 мин. Поверхности среды и пробочек стерилизовать. Готовый колуэмбийский агар прозрачный, красноватый. Дополнительная информация по применению.

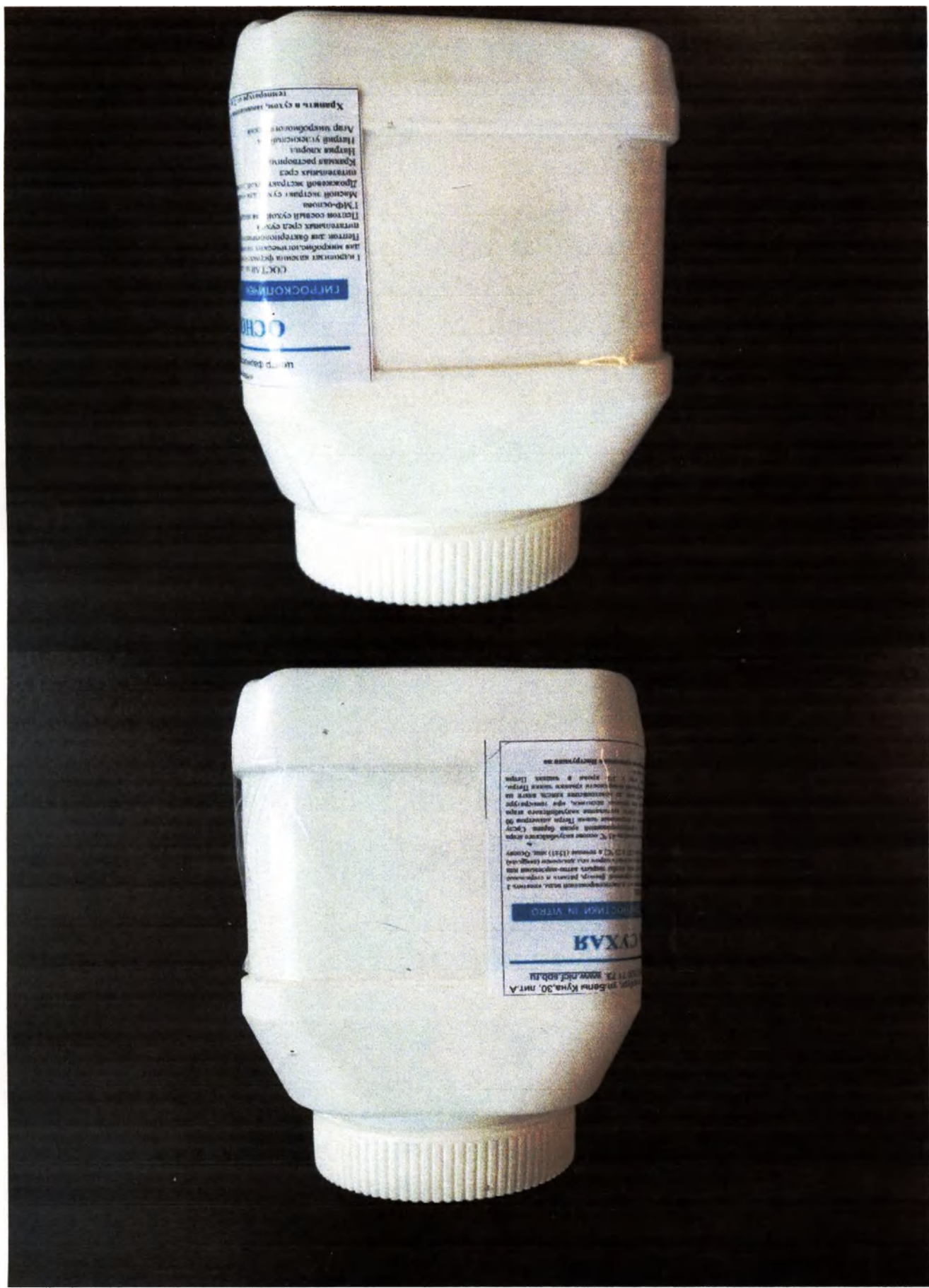

Для вариантов упаковки (фасовки):

Комплект 5. Основа колумбийского агара сухая, по 500 г в банках полимерных вместимостью 1000 мл; до 20 шт в картонной коробке;

Комплект 6. Основа колумбийского агара сухая, по 1000 г в банках полимерных вместимостью 1000 мл; до 15 шт в картонной коробке.

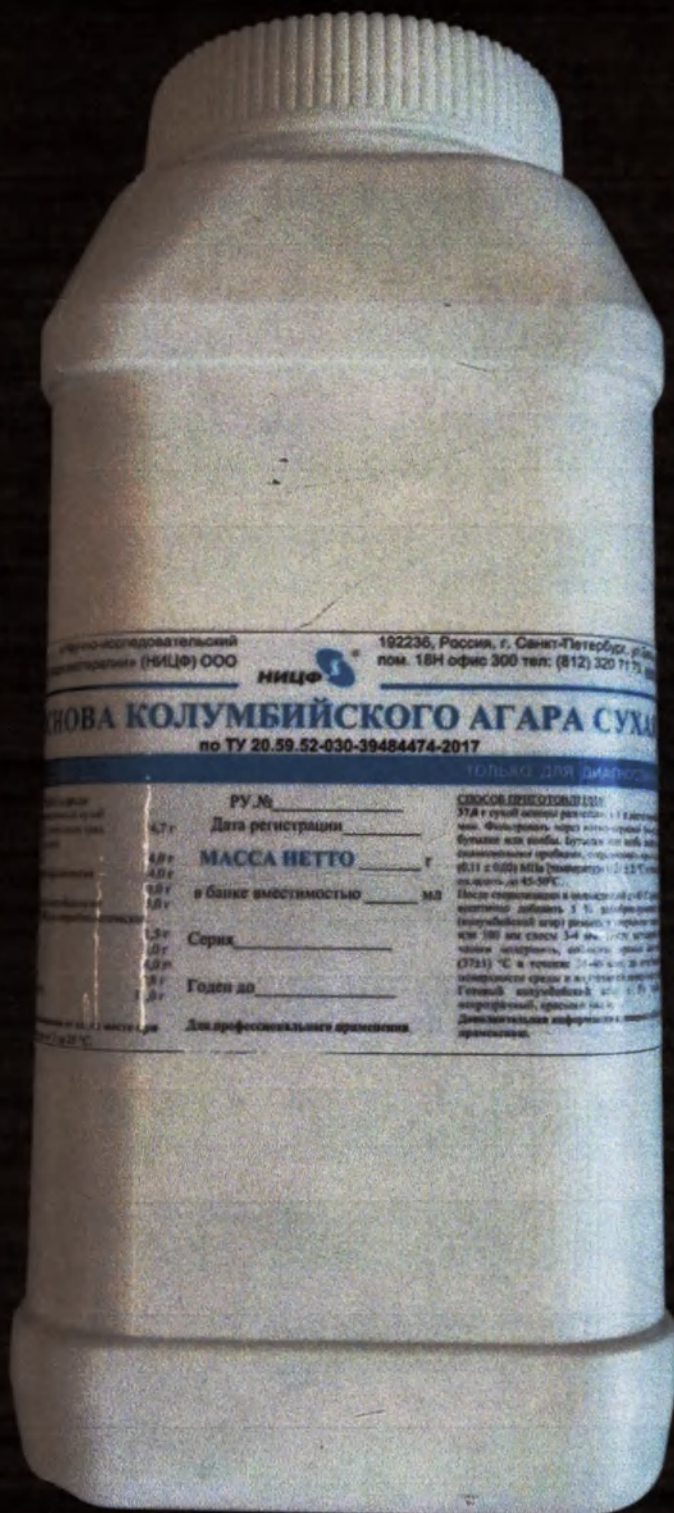

научно-исследовательский
институт (НИИ) ООО



192236, Россия, г. Санкт-Петербург, район
пос. 18Н офис 300 тел: (812) 320 7175


ОСНОВА КОЛУМБИЙСКОГО АГАРА СУХАЯ


по ТУ 20.59.52-030-39484474-2017

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

РУ №	_____
Дата регистрации	_____
МАССА НЕТТО	г
в банке вместимостью	мл
Серия	_____
Годен до	_____
Для профессионального применения	_____

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
37,8 г сухой основы развести в 1 л дистиллированной воды. Флаконировать через стерильный фильтр в бутылки или флаконы, закрыть крышками. Срок годности 12 месяцев при температуре от 4-5-30°C.
После стерилизации в автоклаве при 121°C в течение 15 мин. добавить 1 л дистиллированной воды. Разлить по бутылкам или флаконам по 100 мл. Срок годности 12 месяцев при температуре от 4-5-30°C.
Готовый колумбийский агар использовать для посева и культивирования микроорганизмов. Для приготовления дифференциальной среды использовать 1 л дистиллированной воды.

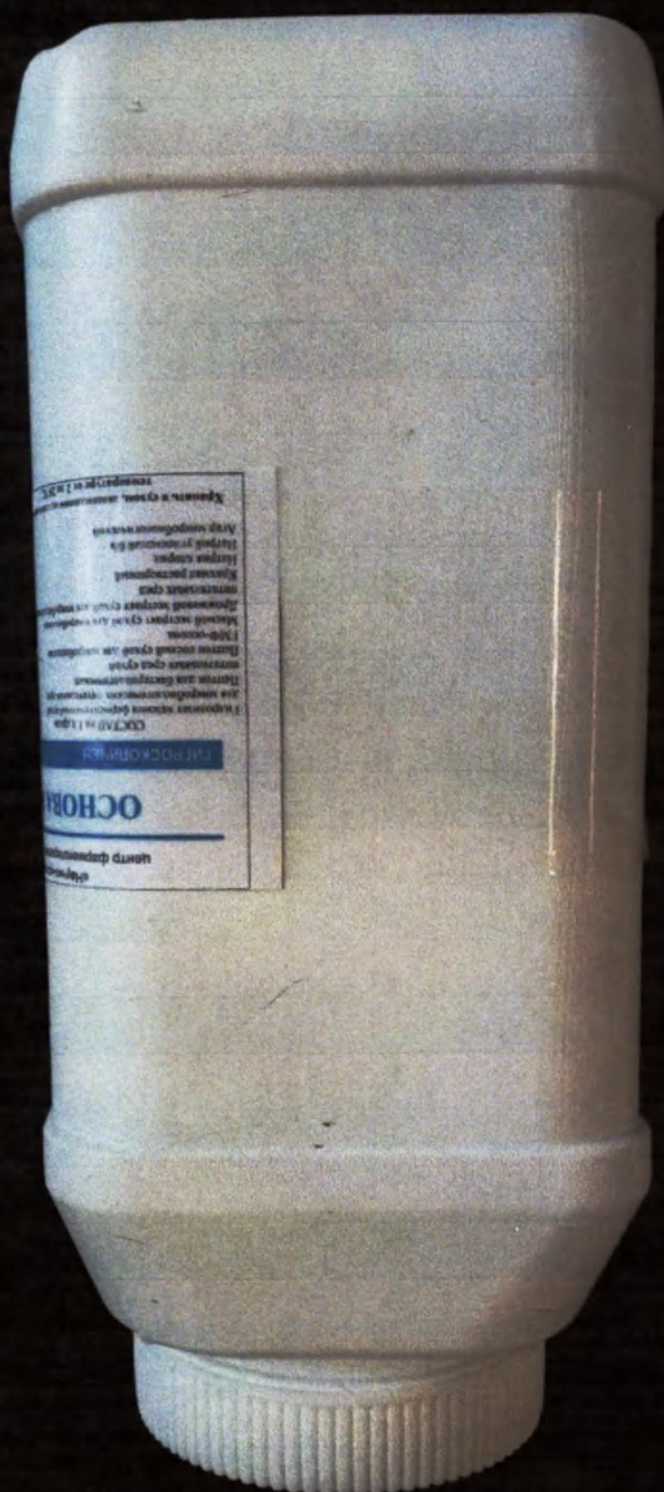

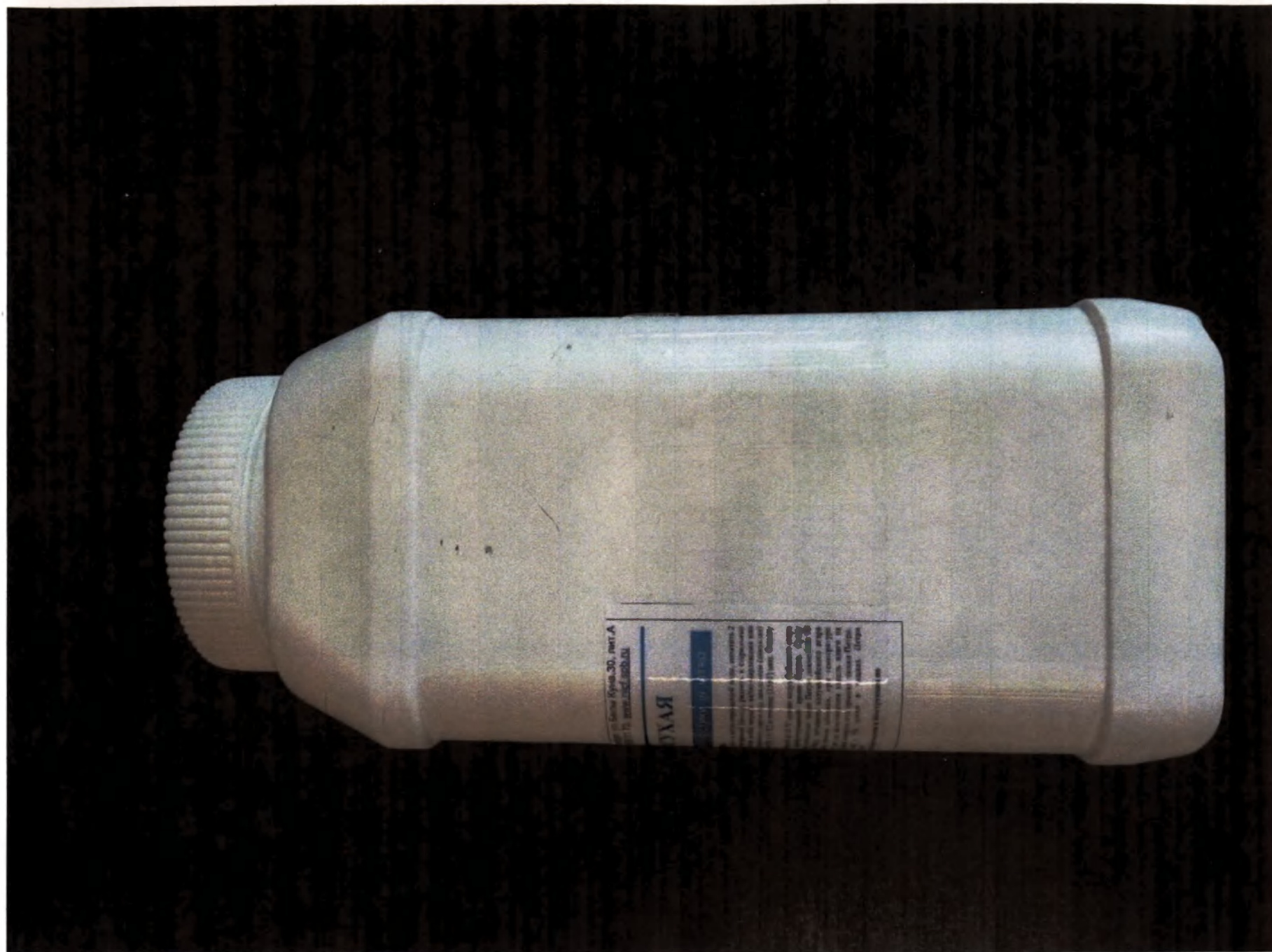


Первичная упаковка (контроль вскрытия)



Транспортная упаковка



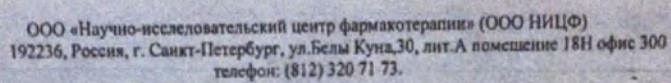


Вариант упаковки:

по _____ г в банках вместимостью _____ мл


Количество банок в ящике, шт	-
Масса нетто, кг	
Масса брутто, кг	
Серия №	
Дата изготовления	
Годен до	

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

ГИГРОСКОПИЧЕН!
Для профессионального применения
Только для диагностики *in vitro*

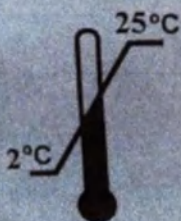

Комплектность

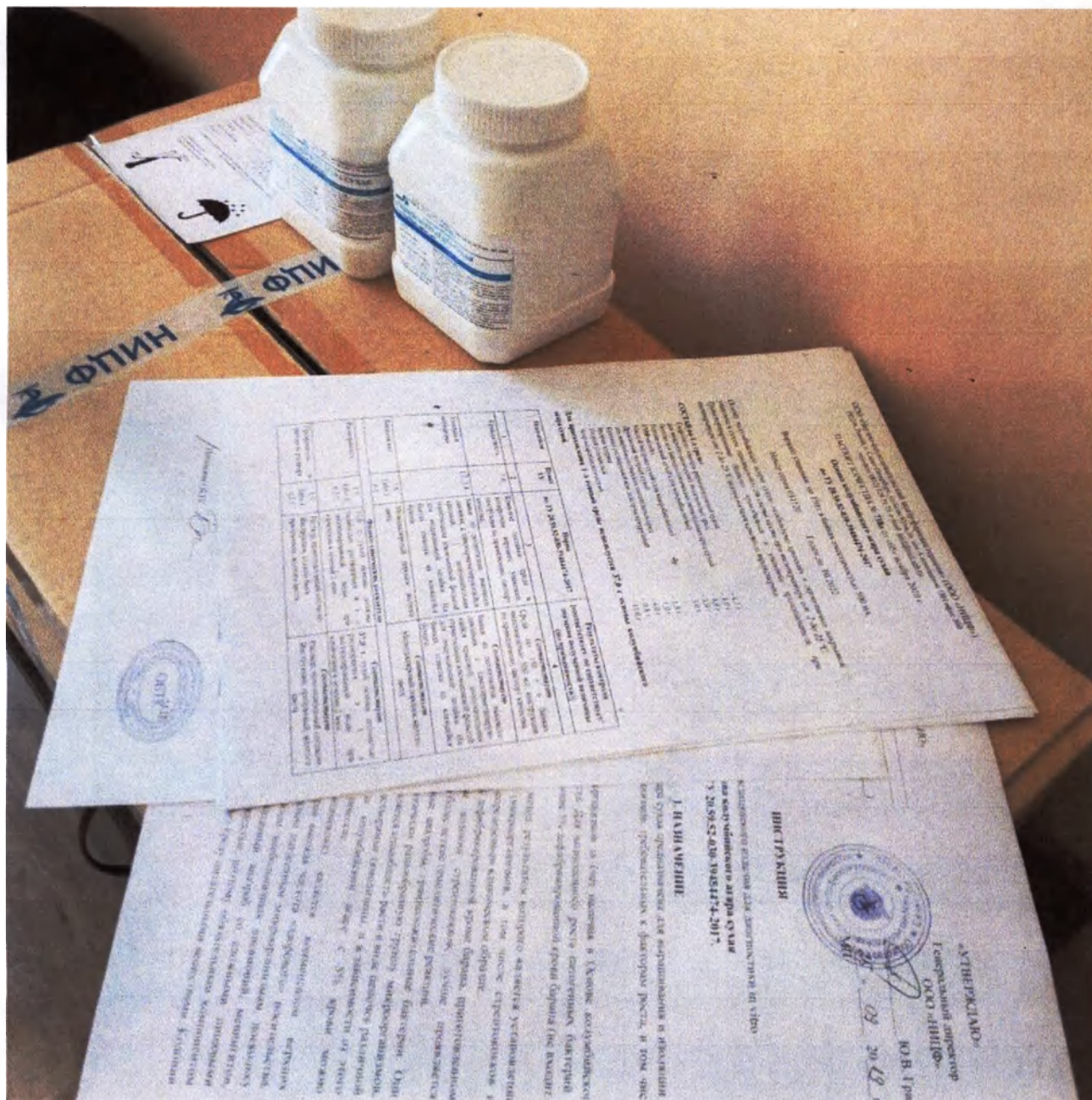



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

(*двенадцать*) лист *08*

Генеральный директор ООО «НИЦФ»

Ю.В. Гришко

М.П. « *22* » *декабря* 20*21*