



**АСЕПТИКА**

ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9,  
строение 3, помещение 2

Тел.: +7(495) 660-18-00 , [www.aseptica.ru](http://www.aseptica.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая

«20» февраля 2019 г.

**Инструкция по применению медицинского изделия**  
**Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного**  
**материала стерильные "М.К.Асептика" с йодовидоном по ТУ**  
**9393-001-51276525-00, размер 135×185 мм.**

**Общие сведения:** Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную раствором йодовидона и упакованную в комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде.

**Состав:** нетканый текстилеподобный материал, пропитанный раствором йодовидона.

**Назначение:** предназначены для санации кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.

**Показания к применению:** Салфетки для местного применения в качестве антимикробного, противовоспалительного, ранозаживляющего средства для антисептической обработки кожи и слизистых, санации травм кожи (царапин, порезов и т.д.), поверхностных ожогов, дезинфекционной обработки ран перед перевязкой.

**Возможные побочные действия:** Раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью пациента.

**Область применения:** Салфетки могут быть использованы в больничных, поликлинических, полевых условиях и быту.

**Противопоказания к применению:** не применять при индивидуальной непереносимости пропитки.

**Меры предосторожности:** Не обрабатывать салфетками слизистые оболочки. Использовать только для наружного применения. Не применять в случае нарушения целостности первичной упаковки.

**Способ применения:**

Вскрыть упаковку по линии надсечки, развернуть салфетку, обработать поверхность.

При необходимости повторить манипуляцию новой салфеткой.

Салфетка является одноразовой и не подлежит повторному использованию.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

**Способ утилизации:** как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10

**Срок годности:** 2 года с даты, указанной на упаковке.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:** ООО «М.К. Асептика», Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9, стр.3, пом.2.

**Адрес производства:** Россия, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

**Сайт:** [www.aseptica.ru](http://www.aseptica.ru); **Электронная почта:** [mk@aseptica.ru](mailto:mk@aseptica.ru)

**Условия отпуска из аптек:** отпускается без рецепта врача.

**Произведено по ТУ 9393-001-51276525-00**

**Регистрационное удостоверение:** ФСР 2009/05439 от 27.07.2016