



ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9,
строение 3, помещение 2

Тел.: +7(495) 660-18-00 , www.aseptica.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая
«20» февраля 2019 г.



Инструкция по применению медицинского изделия

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00

Общие сведения: Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% этиловым спиртом и упакованную в комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде.

Состав: нетканый текстилеподобный материал, пропитанный 70% этиловым спиртом.

Назначение: предназначены для санации кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.

Показания к применению:

Салфетки спиртовые предназначены для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки неповрежденной кожи (дезинфекции рук, подготовки операционного поля, мест проколов до и после постановки инъекций, заборов крови и др.), обработки инструментов и других поверхностей.

Возможные побочные действия: раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью пациента.

Область применения: Салфетки могут быть использованы в больничных, поликлинических, полевых условиях и быту.

Противопоказания к применению: не применять при индивидуальной непереносимости этилового спирта.

Меры предосторожности: Не обрабатывать салфетками слизистые оболочки. Использовать только для наружного применения. Не применять в случае нарушения целостности первичной упаковки.

Способ применения:

Вскрыть упаковку, развернуть салфетку, обработать поверхность.

При необходимости повторить манипуляцию новой салфеткой.

Салфетка является одноразовой и не подлежит повторному использованию.

Условия хранения:

Хранить при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

Способ утилизации: как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10

Срок годности: 5 лет с даты, указанной на упаковке.

Производитель/Организация, принимающая претензии: ООО «М.К. Асептика», Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 3, пом. 2.

Адрес производства: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

Сайт: www.aseptica.ru; **Электронная почта:** mk@aseptica.ru

Условия отпуска из аптек: отпускается без рецепта врача.

Произведено по ТУ 9393-001-51276525-00

Регистрационное удостоверение: ФСР 2009/05438 от 26.07.2016г.

Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная
«М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 220 x 400мм.
Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная
«М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 230 x 300мм.
60. Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная
«М.К.Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт), размер 240 x 240мм.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 лист
(ов)

Генеральный директор

ООО "М.К. Асептика"

О.А. Пелехатая

" 20 " февраля 20 19 г.