

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Джи-ЭЛ»



(Козлов А.О.)

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МАКЕТ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

Перчатки медицинские диагностические (смотровые)
одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса

2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Фотографическое изображение медицинского изделия.....	3
2 Макет потребительской упаковки медицинского изделия	7
Приложение	9

1 Фотографическое изображение медицинского изделия

1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса гладкие опудренные (манжета с валиком), цвет: натуральный, размер: XS, S, M, L, XL.



2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «А.Д.М.» из натурального латекса текстурированные неопудренные хлорированные (манжета с валиком), цвет: натуральный, размер: XS, S, M, L, XL.



3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса текстурированные неопудренные двойного хлорирования (манжета с валиком), цвет: натуральный, размер: XS, S, M, L, XL.



4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса текстурированные неопудренные хлорированные повышенной прочности (High Risk) (удлиненная манжета с валиком), цвет: синий, размер: XS, S, M, L, XL.



2 Макет потребительской упаковки медицинского изделия

Макет потребительской упаковки разработан для каждого варианта исполнения медицинского изделия «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса», производства Топ Глов Сдн. Бхд., Малайзия (см. Приложение).

На упаковке медицинского изделия указана следующая информация на русском языке:

Наименование медицинского изделия.

Назначение медицинского изделия. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента.

Условия транспортировки медицинского изделия. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (морской, автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт) в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Условия хранения медицинского изделия. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Утилизация медицинского изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации.

Неиспользованные медицинские перчатки или перчатки с истекшим сроком годности необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации.

Материал: натуральный каучуковый латекс.

Внимание!

- Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.
- Опудривающее вещество может вызвать аллергическую реакцию (применимо только к опудренным перчаткам).

- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, вызванных воздействием химических веществ.
- При возникновении на коже аллергических реакций при использовании изделия рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником.

Инструкция по применению медицинского изделия. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки.

Чтобы надеть перчатки, необходимо вскрыть упаковку и взять обе перчатки кончиками пальцев левой руки изнутри левой перчатки таким образом, чтобы кончик большого пальца находился внутри правой перчатки, и держать их вместе в вертикальном положении. Убедиться, что пальцы касаются только внутренней поверхности перчаток. Продеть правую руку в манжету перчатки, удерживая перчатки левой рукой. Натягивать сложенную перчатку до тех пор, пока правая рука не окажется в перчатке. Опустить пальцы правой руки в перчатку в манжету левой перчатки и натянуть ее на руку. Четырьмя пальцами натянуть манжету левой перчатки поверх манжеты медицинского халата. Завести пальцы левой руки в перчатку под сложенную манжету перчатки и натянуть ее на манжету медицинского халата. Натянуть манжету четырьмя пальцами и окончательно поправить перчатки, обеспечив их комфортное использование.

Чтобы снять перчатку, возьмитесь за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

Производитель медицинского изделия: «Топ Глов Сдн. Бхд.», Малайзия, Лот 4969, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия. (Top Glove Sdn. Bhd., Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, дом 9, литера В, пом. 10-Н, комн. 7, тел.: +7 (812) 309-92-66, e-mail: GL3099266@gmail.com

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Срок годности медицинского изделия.

Гарантии производителя.

Также на упаковке медицинского изделия оставлены места для следующей информации:

- Размер XX
- Количество XX штук
- Импортер XXXX
- Дата изготовления XX-XXXX
- LOT XXXX
- Артикул XXXX

Приложение

1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса гладкие опудренные (манжета с валиком), цвет: натуральный, размер: XS, S, M, L, XL.



**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ «A.D.M.»
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА ГЛАДКИЕ ОПУДРЕННЫЕ (МАНЖЕТА С ВАЛИКОМ), ЦВЕТ: НАТУРАЛЬНЫЙ, РАЗМЕР: XX.**

Назначение медицинского изделия. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента.

Условия транспортировки медицинского изделия. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (морской, автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт) в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Условия хранения медицинского изделия. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Условия утилизации медицинского изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкции организации.

Неиспользованные медицинские перчатки или перчатки с истекшим сроком годности необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкции организации.

Инструкция по применению медицинского изделия. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки.

Чтобы надеть перчатки, необходимо вскрыть упаковку и взять обе перчатки кончиками пальцев левой руки изнутри левой перчатки таким образом, чтобы кончик большого пальца находился внутри правой перчатки, и держать их вместе в вертикальном положении. Убедиться, что пальцы касаются только внутренней поверхности перчаток. Продеть правую руку в манжету перчатки, удерживая перчатки левой рукой. Натягивать сложенную перчатку до тех пор, пока правая рука не окажется в перчатке. Опустить пальцы правой руки в перчатку в манжету левой перчатки и натянуть ее на руку. Четверыми пальцами натянуть манжету левой перчатки поверх манжеты медицинского халата. Завести пальцы левой руки в перчатку под сложенную манжету перчатки и натянуть ее на манжету медицинского халата. Натянуть манжету четверыми пальцами и окончательно поправить перчатки, обеспечив их комфортное использование.

Чтобы снять перчатку, возьмитесь за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сняв перчатку и удерживая ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снимите ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Материал: натуральный каучуковый латекс

Внимание!

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

- Опушечивающее вещество может вызвать аллергическую реакцию.
- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, вызванных воздействием химических веществ.

При возникновении на коже аллергических реакций при использовании изделия рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Топ Глов Сди Бхд, Малайзия, Лот 4969, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия.
(Top Glove Sdn. Bhd., Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia)

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «Джи-Эл», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, дом 9, литера В, пом. 10-Н, комн. 7, тел. +7 (812) 309-92-66, e-mail: GL3099266@gmail.com

Импортёр: XXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности смотровых одноразовых нестерильных опудренных перчаток из натурального латекса составляет 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (5 лет) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.




XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXX

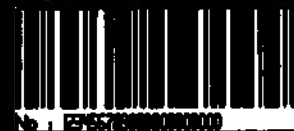

[illegible]

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ «A.D.M.»
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ХЛОРИРОВАННЫЕ (МАНЖЕТА С ВАЛИКОМ), ЦВЕТ: НАТУРАЛЬНЫЙ, РАЗМЕР: XX.**

Назначение медицинского изделия. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента.

Условия транспортировки медицинского изделия. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (морской, автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт) в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Условия хранения медицинского изделия. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

Условия утилизации медицинского изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации.

Неиспользованные медицинские перчатки или перчатки с истекающим сроком годности необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации.

Инструкция по применению медицинского изделия. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки.

Чтобы надеть перчатки, необходимо вскрыть упаковку и взять обе перчатки кончиками пальцев левой руки изнутри левой перчатки таким образом, чтобы кончик большого пальца находился внутри правой перчатки и держать их вместе в вертикальном положении. Убедиться, что пальцы касаются только внутренней поверхности перчаток. Продеть правую руку в манжету перчатки, удерживая перчатки левой рукой. Натягивать сложенную перчатку до тех пор, пока правая рука не окажется в перчатке. Олустить пальцы правой руки в перчатке в манжету левой перчатки и натянуть ее на руку. Четырьмя пальцами натянуть манжету левой перчатки поверх манжеты медицинского халата. Завести пальцы левой руки в перчатку под сложенную манжету перчатки и натянуть ее на манжету медицинского халата. Натянуть манжету четырьмя пальцами и окончательно поправить перчатки, обеспечить их комфортное использование.

Чтобы снять перчатку, возьмитесь за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Материал: натуральный каучуковый латекс.

Внимание!

- Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.
- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, вызванных воздействием химических веществ.
- При возникновении на коже аллергических реакции при использовании изделия рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

"Топ Глов Сдн Бхд", Малайзия, Lot 4969, Джалан Тератай, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия.
(Top Glove Sdn. Bhd., Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia)

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «ДжиЭл», Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, дом 9, литера В, пом. 10-Н, комн. 7, тел. +7 (812) 309-92-66, e-mail: GL3099266@gmail.com

Импортёр: XXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности смотровых одноразовых нестерильных неопудренных перчаток из натурального латекса составляет 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (5 лет) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXX



3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «A.D.M.» из натурального латекса текстурированные неопудренные двойного хлорирования (манжета с валиком), цвет: натуральный, размер: XS, S, M, L, XL.



**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ «A.D.M.»
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ (МАНЖЕТА С ВАЛИКОМ), ЦВЕТ: НАТУРАЛЬНЫЙ, РАЗМЕР: XX.**

Назначение медицинского изделия. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента.

Условия транспортировки медицинского изделия. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (морской, автомобильный, железнодорожный или воздушный транспорт) в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Условия хранения медицинского изделия. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%.

Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15 °C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30 °C по всему объему изделия.

Условия утилизации медицинского изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации. Неиспользованные медицинские перчатки или перчатки с истекшим сроком годности необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и утвержденной инструкцией организации.

Инструкция по применению медицинского изделия. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки.

Чтобы надеть перчатки, необходимо вскрыть упаковку и взять обе перчатки кончиками пальцев левой руки изнутри левой перчатки таким образом, чтобы кончик большого пальца находился внутри правой перчатки, и держать их вместе в вертикальном положении. Убедиться, что пальцы касаются только внутренней поверхности перчаток. Продеть правую руку в манжету перчатки, удерживая перчатки левой рукой. Натягивать сложенную перчатку до тех пор, пока правая рука не окажется в перчатке. Опустить пальцы правой руки в перчатку в манжету левой перчатки и натянуть ее на руку. Четырьмя пальцами натянуть манжету левой перчатки поверх манжеты медицинского халата. Завести пальцы левой руки в перчатку под сложенную манжету перчатки и натянуть ее на манжету медицинского халата. Натянуть манжету четырьмя пальцами и окончательно поправить перчатки, обеспечив их комфортное использование.

Чтобы снять перчатку, возьмитесь за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. Поместите перчатки в предназначенную для них емкость. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Материал: натуральный каучуковый латекс.

Внимание!

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, вызванных воздействием химических веществ.
- При возникновении на коже аллергических реакции при использовании изделия рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

Топ Глов Сдн Бхд, Малайзия, Лот 4969, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия.
(Top Glove Sdn Bhd, Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia)

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «Джи-ЭЛ», Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, дом 9, литера В, пом. 10-Н, комн. 7, тел. +7 (812) 309-92-66, e-mail: GL3099266@gmail.com.

Импортер: XXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности смотровых одноразовых нестерильных неопудренных перчаток из натурального латекса составляет 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (5 лет) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXX



[illegible]



Aug 4-yr XXXX



No : R23456789000000000000

Всего проведено и скреплено
печатью 7 «ДЖА-ЭП»
Ген. дир. КОЗЛОВ А.О.

