



ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

140032, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
улица Шоссейная, дом 40, литер 2Ж, помещение 1
+7 495 660-18-00 | www.aseptica.ru

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «М.К. АСЕПТИКА»
ПЕЛЕХАТАЯ О.А.



Генеральный директор ООО «М.К. Асептика»



УТВЕРЖДАЮ

О.А. Пелехатая

«07» декабря 2021 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные
"М.К. Асептика" с сангвиритрином по ТУ 9393-001-51276525-00**

Общие сведения: Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную раствором сангвиритрина и упакованную в комбинированный материал. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде.

Состав: нетканый текстилеподобный материал, пропитанный раствором йодовидона.

Назначение: предназначены для санации кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.

Показания к применению:

Салфетки с сангвиритрином для местного применения в качестве антимикробного, противовоспалительного, ранозаживляющего средства для антисептической обработки кожи, санации травм кожи (царапин, порезов и т.д.), поверхностных ожогов, дезинфекционной обработки ран перед перевязкой.

Возможные побочные действия: раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью пациента.

Область применения: Салфетки могут быть использованы в больничных, поликлинических, полевых условиях и быту.

Противопоказания к применению: не применять при индивидуальной непереносимости пропитки.

Меры предосторожности: не обрабатывать салфетками слизистые оболочки. Использовать только для наружного применения. Не применять в случае нарушения целостности первичной упаковки.

Способ применения:

Вскрыть упаковку, развернуть салфетку, обработать поверхность.

При необходимости повторить манипуляцию новой салфеткой.

Салфетка является одноразовой и не подлежит повторному использованию.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

Способ утилизации: как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.2790-10. Следует применять только действующие нормы законодательства РФ.

Срок годности: 3 года с даты, указанной на упаковке.

Производитель/Организация, принимающая претензии: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 40, литер 2Ж, помещение 1.

Адрес производства: 140032, Россия, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 40.

Сайт: www.aseptica.ru; **Электронная почта:** mk@aseptica.ru

Условия отпуска из аптек: отпускается без рецепта врача.


Произведено по ТУ 9393-001-51276525-00

Регистрационное удостоверение: ФСР 2009/05437 от _____ г.

Символы на упаковке:

	Обратитесь к инструкции по применению
	Радиационная стерилизация
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия прямых солнечных лучей
	Не использовать при повреждении упаковки
	Вторичная переработка
	Знак декларации о соответствии
	Разработано под контролем лаборатории «Асептика»

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(-ов)
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая

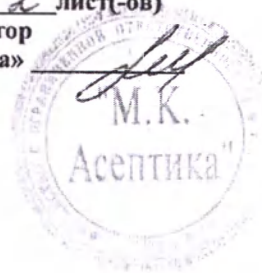

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист (-ов)

Генеральный директор

ООО «М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая

