

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ


Ортез для верхней конечности



Ортез для верхней конечности лучезапястный
50P11, 50P12, 50P13



Ортез для верхней конечности локтевой
50A7

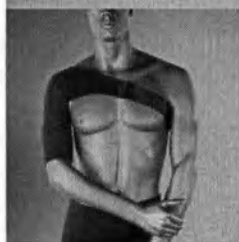

Ортез для верхней конечности плечевой
50A8, 50A9, 50A10, 50A11

1 Назначение

Ортез для верхней конечности является ортопедическим изделием, выполняющим вспомогательные функции по отношению к опорно-двигательному аппарату верхней конечности и обеспечивающим стабилизацию и/или иммобилизацию, защиту и разгрузку, коррекцию положения и функций верхней конечности при наличии соответствующих показаний.

Ортез для верхней конечности предназначен исключительно для ортезирования верхней конечности. Допускается контакт только с интактным кожным покровом.

2 Показания и терапевтический эффект

Ортез для верхней конечности предназначен для реабилитации после травм или заболеваний верхней конечности, а также у пациентов с ограничениями жизнедеятельности вследствие хронических патологических процессов в суставно-связочном или нервно-мышечном аппарате верхней конечности.

За счет применения ортеза для верхней конечности достигаются следующие положительные эффекты:

- улучшение функции опорно-двигательного аппарата верхней конечности,
- профилактика формирования деформаций и патологических установок в опорно-двигательном аппарате верхней конечности,
- коррекция нефиксированных деформаций.