

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Ортез для позвоночника



Ортез для позвоночника поясничный
50R10, 50R11, 50R30



Ортез для позвоночника гиперэкстензионный
28R140

1 Назначение

Ортез для позвоночника является ортопедическим изделием, выполняющим вспомогательные функции по отношению к грудному, поясничному и пояснично-крестцовому отделам позвоночника и мышечному аппарату спины, и обеспечивающий стабилизацию и/или иммобилизацию позвоночника, защиту и разгрузку позвонков, межпозвоночных дисков и дугоотростчатых суставов позвоночника. Ортез для нижней конечности предназначен исключительно для ортезирования нижней конечности. Допускается контакт только с интактным кожным покровом.

2 Показания и терапевтический эффект

Ортез для позвоночника предназначен для реабилитации после травм или заболеваний позвоночника, а также у пациентов с ограничениями жизнедеятельности вследствие хронических патологических процессов в позвонках, межпозвоночных дисках, дугоотростчатых суставах позвоночника.

За счет применения ортеза для позвоночника достигаются следующие положительные эффекты:

- улучшение функции позвоночника и мышечного аппарата спины,
- предупреждение или замедление развития дегенеративных изменений в телах позвонков, межпозвоночных дисках и дугоотростчатых суставах позвоночника,
- компенсация функциональной недостаточности и длительное поддержание функциональной способности.

3 Выбор размера ортеза

Размер ортеза для позвоночника определяется в соответствии с размерной сеткой, размещенной на упаковке.

4 Материал и конструкция ортеза

Ортез для позвоночника представляет собой внешнее ортопедическое приспособление, реализующее единый конструктивный принцип при ортезировании позвоночного столба, в следующем исполнении:

Ортез для позвоночника поясничный 50R10, 50R11, 50R30

Ортез для позвоночника гиперэкстензионный 28R140