

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Ортез для нижней конечности



Ортез для нижней конечности голеностопный 50S8, 50S5, 50S10-1, 50S11-1, 50S12-1, 50S14-1, 50S15-1

Ортез для нижней конечности коленный 50K13, 50K15, 8066=1

1 Назначение

Ортез для нижней конечности является ортопедическим изделием, выполняющим вспомогательные функции по отношению к опорно-двигательному аппарату нижней конечности и обеспечивающим стабилизацию и/или иммобилизацию, защиту и разгрузку, коррекцию положения и функций нижней конечности при наличии соответствующих показаний.

Ортез для нижней конечности предназначен исключительно для ортезирования нижней конечности. Допускается контакт только с интактным кожным покровом.

2 Показания и терапевтический эффект

Ортез для нижней конечности предназначен для реабилитации после травм или заболеваний нижней конечности, а также у пациентов с ограничениями жизнедеятельности вследствие хронических патологических процессов в суставно-связочном или нервно-мышечном аппарате нижней конечности.

За счет применения ортеза для нижней конечности достигаются следующие положительные эффекты:

- улучшение функции опорно-двигательного аппарата нижней конечности,
- профилактика формирования деформаций и патологических установок в опорно-двигательном аппарате нижней конечности,
- коррекция нефиксированных деформаций.

3 Выбор размера ортеза

Размер ортеза для нижней конечности определяется в соответствии с размерной сеткой, размещенной на упаковке.

4 Материал и конструкция ортеза

Ортез для нижней конечности представляет собой внешнее ортопедическое приспособление, реализующее единый конструктивный принцип при ортезировании сегментов нижней конечности, в следующем исполнении:

Ортез для нижней конечности голеностопный 50S6, 50S5, 50S10-1, 50S11-1, 50S12-1, 50S14-1, 50S15-1

Ортез для нижней конечности коленный 50K13, 50K15, 8066