

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Ортез для нижней конечности



Ортез для нижней конечности голеностопный 50S8, 50S5, 50S10-1, 50S11-1, 50S12-1, 50S14-1, 50S15-1

Ортез для нижней конечности коленный 50K13, 50K15, 8066=1

1 Назначение

Ортез для нижней конечности является ортопедическим изделием, выполняющим вспомогательные функции по отношению к опорно-двигательному аппарату нижней конечности и обеспечивающим стабилизацию и/или иммобилизацию, защиту и разгрузку, коррекцию положения и функций нижней конечности при наличии соответствующих показаний.

Ортез для нижней конечности предназначен исключительно для ортезирования нижней конечности. Допускается контакт только с интактным кожным покровом.

2 Показания и терапевтический эффект

Ортез для нижней конечности предназначен для реабилитации после травм или заболеваний нижней конечности, а также у пациентов с ограничениями жизнедеятельности вследствие хронических патологических процессов в суставно-связочном или нервно-мышечном аппарате нижней конечности.

За счет применения ортеза для нижней конечности достигаются следующие положительные эффекты:

- улучшение функции опорно-двигательного аппарата нижней конечности,
- профилактика формирования деформаций и патологических установок в опорно-двигательном аппарате нижней конечности,
- коррекция нефиксированных деформаций.

3 Выбор размера ортеза

Размер ортеза для нижней конечности определяется в соответствии с размерной сеткой, размещенной на упаковке.

4 Материал и конструкция ортеза

Ортез для нижней конечности представляет собой внешнее ортопедическое приспособление, реализующее единый конструктивный принцип при ортезировании сегментов нижней конечности, в следующем исполнении:

Ортез для нижней конечности голеностопный 50S6, 50S5, 50S10-1, 50S11-1, 50S12-1, 50S14-1, 50S15-1

Ортез для нижней конечности коленный 50K13, 50K15, 8066

Конструкция ортеза для верхней конечности включает в себя жесткие элементы (пластмасса, сталь) и прилегающие к телу эластично-упругие тканевые элементы (материал Spacetex®). Жесткие элементы образуют каркас, обеспечивающий фиксацию суставов верхней конечности в заданном положении, а также необходимый диапазон движений в нем. Эластично-упругие тканевые элементы создают поддерживающий эффект, уменьшают нагрузку на кожный покров, позволяя избежать образования наминов и потертостей.

5 Надевание ортеза

Подбор и первичная примерка ортеза для нижней конечности должны выполняться специалистом, имеющим соответствующую подготовку.

Ортез для нижней конечности голеностопный 50S6, 50S5, 50S10-1, 50S11-1, 50S12-1, 50S14-1, 50S15-1 расположите на уровне голеностопного сустава. Зафиксируйте ортез с помощью шнуровки и застежек «велькро».

Ортез для нижней конечности коленный 50K13, 50K15, 8066 расположите так, чтобы он плотно охватывал коленный сустав. Зафиксируйте ортез с помощью застежек «велькро».

Удостоверьтесь в правильности выбора размера и правильном расположении ортеза (ориентир – логотип «Отто Бокк» не должен быть перевернут).

6 Побочные явления

Внимание!

Любое ортопедическое изделие, слишком плотно прилегающее к телу, может привести к сдавлению мягких тканей, а в редких случаях – к нарушению функции проходящих вблизи кровеносных сосудов или нервов.

7 Противопоказания

Внимание!

При наличии какого-либо из перечисленных ниже клинических состояний применение ортопедического изделия допускается только после консультации врача:

1. Заболевания кожи / повреждения кожного покрова на участках тела, соприкасающихся с ортопедическим изделием, в особенности, при наличии симптомов воспаления. То же относится к рубцам, сопровождающимся локальной отечностью, гиперемией и гипертермией.
2. Нарушения лимфооттока, в том числе, отечность мягких тканей неясного генеза на участках тела, непосредственно не контактирующих с ортопедическим изделием.
3. Расстройства чувствительности нижней конечности.

8 Рекомендации по применению и уходу

Ортез должен использоваться в строгом соответствии с показаниями. Важную роль играет положительное отношение пациента к терапии и его готовность к сотрудничеству с врачом. Подробно разъясните пациенту правила применения ортеза!

Вниманию пациента: рекомендации врача должны строго соблюдаться. Длительность использования в течение дня, а также общая продолжительность применения ортопедического изделия определяются лечащим врачом. Пациент должен быть проинформирован, что при появлении у него каких-либо необычных симптомов (например, усиление болевых ощущений), ему следует немедленно обратиться к врачу.

Внимание!

Изделие не является огнеупорным. Не используйте изделие вблизи открытого огня и других источников интенсивного теплового излучения.

Перед применением изделия проверьте его функциональную пригодность, убедитесь в отсутствии повреждений и признаков износа. При износе застежек «велькро» или других деталей ортеза его использование следует прекратить.

Не допускайте контакта изделия с мазями, лосьонами, а также другими средствами, имеющими в своем составе жиры и кислоты.

Внесение в конструкцию изделия непредусмотренных изменений не допускается.

Изделие можно стирать вручную в теплой воде (30 °C) с использованием мягкого моющего средства. Чтобы уменьшить износ застежек «велькро», их рекомендуется стирать в застегнутом состоянии. Чтобы избежать раздражения кожи, тщательно смывайте все остатки мыла с ортеза.

Сушите изделие на воздухе. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не используйте для сушки печи и отопительные приборы.



9 Ограничения по использованию

Ортез для нижней конечности предназначен для индивидуального применения. Длительность использования в течение дня, а также общая продолжительность применения изделия определяются медицинскими показаниями. Не допускайте контакта ортеза с поврежденным кожным покровом.

Внимание!

При использовании одного и того же ортеза несколькими пациентами детали, непосредственно контактирующие с кожей, могут оказаться функционально не пригодными, а также могут представлять риск с точки зрения гигиены.

10 Ответственность изготовителя

Изготовитель несет ответственность только в случаях применения изделия при оговоренных условиях и по его прямому назначению. При использовании изделия и уходе за ним рекомендуется придерживаться данной инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации ортеза для нижней конечности составляет 6 месяцев со дня выдачи пациенту изделия в эксплуатацию. В течение этого срока, в случае выхода из строя ортеза для нижней конечности, при соблюдении условий эксплуатации, предприятие-изготовитель производит замену или необходимый ремонт бесплатно.

11 Соответствие стандартам ЕС

Ортез для нижней конечности отвечает требованиям Директивы 93/42/ЕЭС по изделиям медицинского назначения. Согласно критериям классификации, приведенной в Приложении IX указанной Директивы, данные изделия отнесены к классу I. С учетом этого, согласно Приложению VII Директивы, Декларация о соответствии была оформлена фирменной группой «Отто Бокк» под свою исключительную ответственность.

Принято, проку-
меровано и

скреплено -
подато

Всего: 3 л.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

О. ЯКОБИ

