



ООО «М.К. Асептика»
ОГРН 1027700317941
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9,
строение 3, помещение 2
Тел.: +7(495) 660-18-00, www.aseptica.ru

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «М.К. АСЕПТИКА»
ПЕЛЕХАТАЯ О.А.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «М.К.Асептика»



О.А. Пелехатая
« 01 » марта 2021 г.

Инструкция по применению

Салфетка сорбционная стерильная по ТУ 32.50.50-007-51276525-2019

Общие сведения: салфетка сорбционная стерильная представляет собой салфетку из нетканого материала белого цвета (допустимо наличие незначительного желтоватого или серого оттенка), обладающего поглотительной (впитывающей) способностью не менее 10,0 г/г.

Салфетка представлена в нескольких вариантах исполнения (типоразмерность):

30 x 30мм, 30 x 60мм, 30 x 65мм, 35 x 65мм, 30 x 80мм, 40 x 40мм, 40 x 60мм, 45 x 45мм, 45 x 65мм, 50 x 75мм, 50 x 100мм, 56 x 65мм, 60 x 60мм, 60 x 90мм, 60 x 100мм, 65 x 65мм, 65 x 70мм, 65 x 100мм, 75 x 80мм, 80 x 80мм, 80 x 125мм, 85 x 110мм, 100 x 100мм, 100 x 110мм, 100 x 120мм, 100 x 125мм, 100 x 135мм, 100 x 140мм, 100 x 150мм, 110 x 110мм, 110 x 125мм, 115 x 130мм, 115 x 250мм, 120 x 150мм, 125 x 125мм, 125 x 150мм, 130 x 150мм, 130 x 180мм, 130 x 200мм, 135 x 145мм, 135 x 185мм, 135 x 200мм, 140 x 190мм, 140 x 200мм, 150 x 150мм, 150 x 200мм, 185 x 185мм, 185 x 200мм, 200 x 200мм, 200 x 220мм, 200 x 240мм, 200 x 250мм, 200 x 300мм, 200 x 350мм, 220 x 220мм, 220 x 250мм, 220 x 300мм, 220 x 400мм, 230 x 300мм, 240 x 240мм.

Область применения: салфетка сорбционная может применяться в клинических и поликлинических условиях, в автомобилях скорой медицинской помощи, а также быту.

Состав: полотно нетканое гидросплетенное.

Назначение: салфетка сорбционная предназначена для очищения ран или царапин и впитывания экссудата, абсорбирования выпотов поверхности тела, вытирания излишков применения антисептических или дезинфекционных средств, а также для нанесения медикаментов местного действия. Салфетка может быть использована в качестве перевязочного материала (для покрытия раны) с использованием дополнительных фиксирующих материалов.

Показания к применению: очищение ран или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирование выпотов поверхности тела, вытирание излишков применения антисептических или дезинфекционных средств, а также нанесение медикаментов местного действия.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость (аллергическая реакция).

Способ применения: вскрыть упаковку, развернуть салфетку, обработать поверхность. При необходимости повторить манипуляцию новой салфеткой.

Меры предосторожности: использовать только для наружного применения. Не обрабатывать слизистые оболочки. Не применять в случае нарушения целостности первичной упаковки.

Возможные побочные воздействия: раздражающее действие или аллергическая реакция в связи с индивидуальной непереносимостью пациента.

Условия хранения: при температуре от -40 °С до +40 °С в недоступном для детей месте. Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: при температуре от -40 °С до +40 °С.

Стерилизация: радиационный метод

Дата стерилизации: см. на упаковке

Ремонт и обслуживание: салфетка сорбционная – это медицинское изделие однократного применения. Ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «М.К. Асептика»

Юридический адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, д.9, строение 3, помещение 2

Адрес производства: ООО «М.К. Асептика», 140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Шоссейная, дом 40

Организация, принимающая претензии: ООО «М.К. Асептика», 111524, Москва, ул. Электродная, д.9, строение 3, помещение 2

Тел.: + 7(495) 660-18-00. **Сайт:** www.aseptica.ru

Электронная почта: mk@aseptica.ru

Условия отпуска из аптек: отпускается без рецепта врача.

Выпуск по ТУ 32.50.50-007-51276525-2019.

Регистрационное удостоверение: РУ № от

Способ утилизации: салфетки с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованные после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Салфетки использованные или извлеченные подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Следует применять только действующие нормы законодательства РФ.

Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения: при изготовлении салфетки сорбционной не используются материалы животного или человеческого происхождения.

Методология применения

Салфетка сорбционная стерильная по ТУ 21.20.24-007-51276525-2019

Вариант 1 (очищение ран и царапин)

1. Вскрыть индивидуальную упаковку, развернуть салфетку
2. Обработать поверхность (в зависимости от необходимости: впитывание экссудата, абсорбирование выпотов поверхности тела, удаление излишков применения антисептических или дезинфекционных средств).

Вариант 2 (покрытие раны)

1. Вскрыть индивидуальную упаковку, развернуть салфетку. Размер салфетки должен быть выбран в соответствии с размером раны.
2. Наложить салфетку прямо на рану, крепко прижимая ее по направлению от центра к краям.
3. Сверху зафиксировать салфетку. Частота смены салфетки зависит от индивидуального состояния раны.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 лист (-ов)

Генеральный директор

ООО «М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 лист (-ов)

Генеральный директор

ООО «М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая

