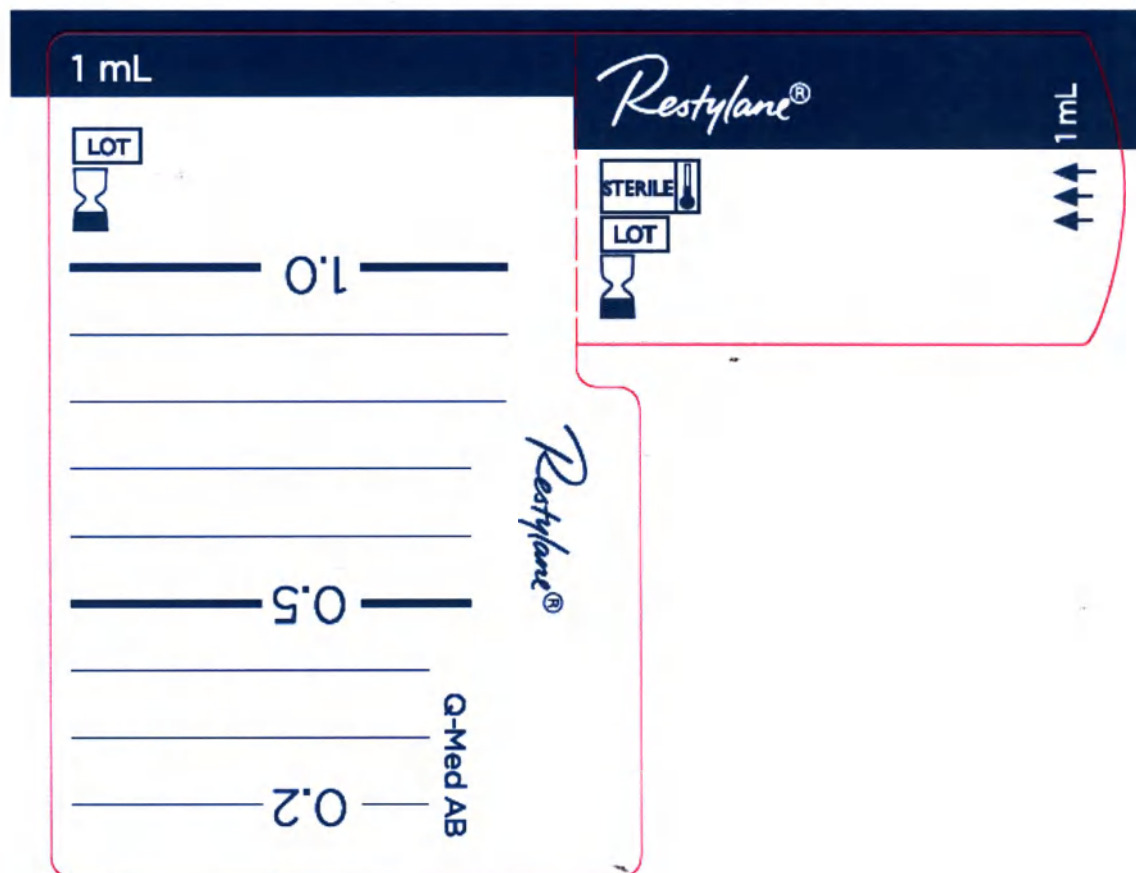


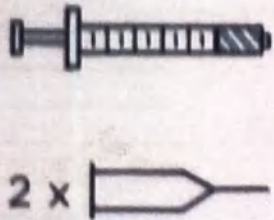
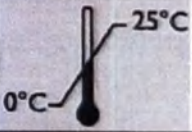
**Макеты маркировки на картонной
коробке и этикетке шприца в
зависимости от варианта исполнения**

Рестилайн (Restylane)



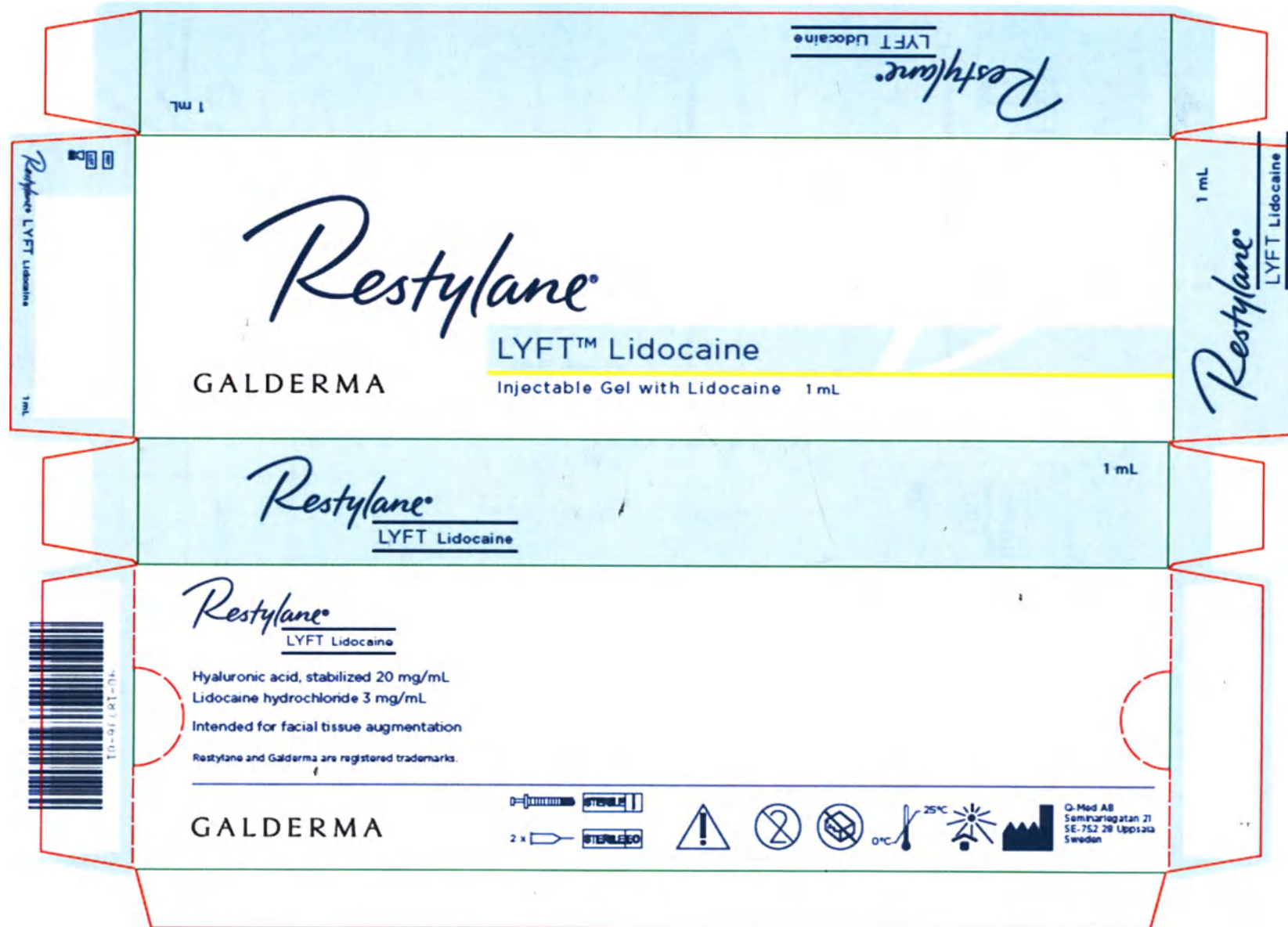


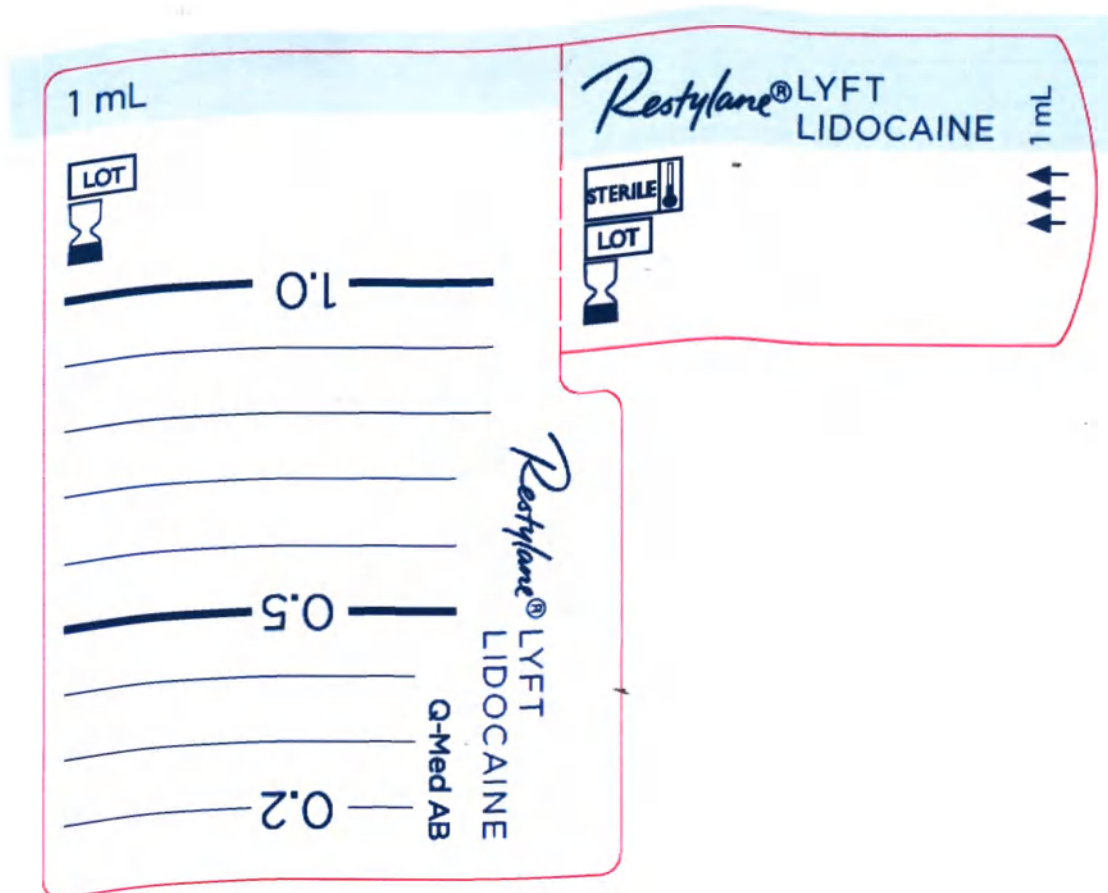
Символ / Текст	Значение / Перевод
GALDERMA	Логотип компании GALDERMA
<i>Restylane</i> <i>Restylane</i>	Торговое наименование Рестилайн (Restylane)
Injectable Gel	Инъекционный Гель
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Использовать до
1 mL	Объем продукта

	В комплектацию медицинского изделия входят один шприц и две иглы
	Стерилизация паром
	Стерилизация с применением оксида этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хранить при температуре от 0°C до 25°C
	Не допускать воздействия солнечного света
	Изготовитель
Q-Med AB	Наименование производителя
Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Адрес производителя
Hyaluronic acid, stabilized 20 mg/ml	Гиалуроновая кислота, стабилизированная 20 мг/мл
Intended for facial tissue augmentation	Предназначен для увеличения объема тканей лица
Restylane and Galderma are registered trademarks	Restylane и Galderma являются зарегистрированными торговыми марками
	Указание направления
Q-Med AB	Наименование производителя

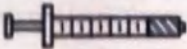
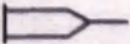
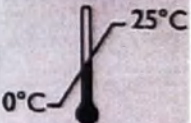
1.0 0.5 0.2	Градуировочная шкала шприца
---	-----------------------------

Рестилайн Лифт Лидокаин (Restylane Lyft Lidocaine)



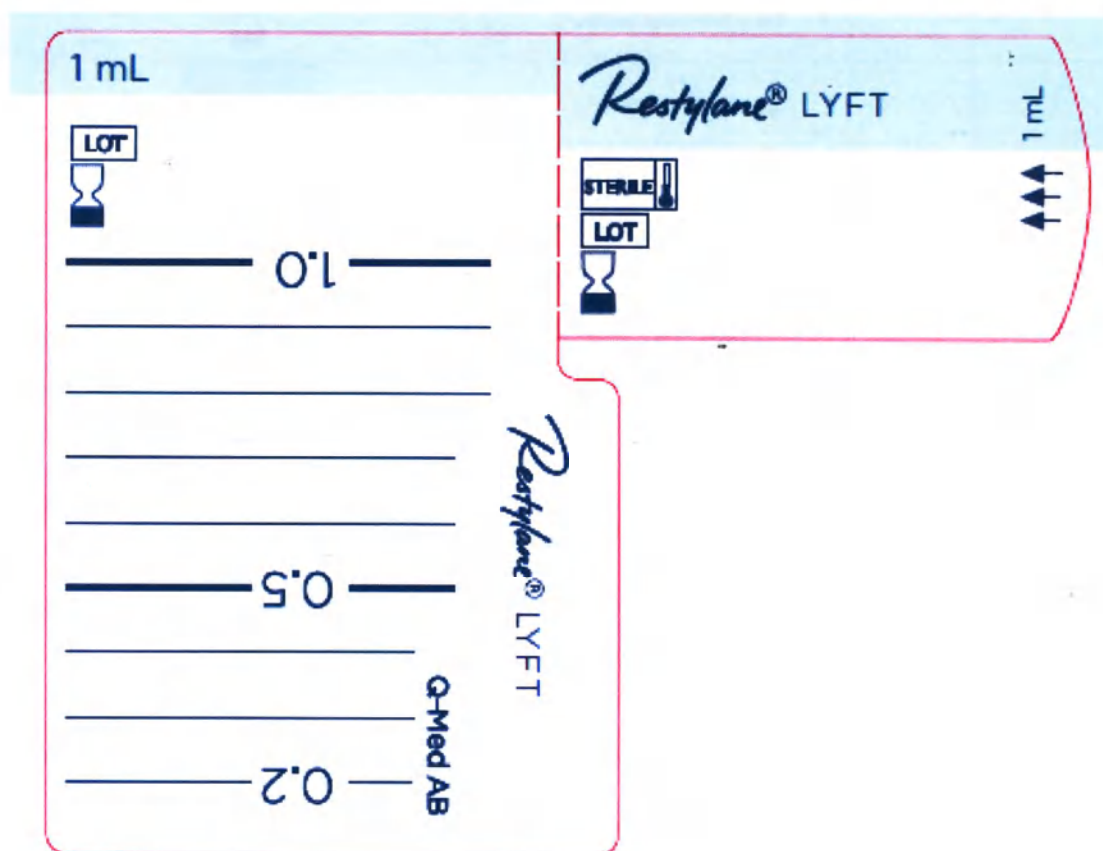


Символ / Текст	Значение / Перевод
GALDERMA	Логотип компании GALDERMA
<i>Restylane</i> LYFT™ Lidocaine	Торговое наименование Рестилайн Лифт Лидокаин (Restylane Lift Lidocaine)
<i>Restylane</i> LYFT Lidocaine	
Injectable Gel with Lidocaine	Инъекционный Гель с Лидокаином
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу

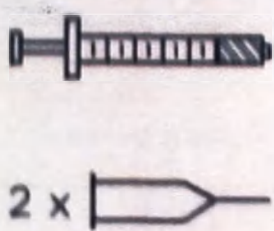
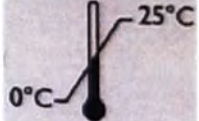
	Использовать до
1 mL	Объем продукта
 2 x 	В комплектацию медицинского изделия входят один шприц и две иглы
STERILE 	Стерилизация паром
STERILE EO	Стерилизация с применением оксида этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хранить при температуре от 0°C до 25°C
	Не допускать воздействия солнечного света
	Изготовитель
Q-Med AB	Наименование производителя
Seminarlegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Адрес производителя
Hyaluronic acid, stabilized 20 mg/mL Lidocaine hydrochloride 3 mg/mL	Гиалуроновая кислота, стабилизированная 20 мг/мл Гидрохлорид лидокаина 3 мг/мл
Intended for facial tissue augmentation	Предназначен для увеличения объема тканей лица
Restylane and Galderma are registered trademarks	Restylane и Galderma являются зарегистрированными торговыми марками
	Указание направления

	Q-Med AB	Наименование производителя
		Градировочная шкала шприца

Рестилайн Лифт (Restylane Lyft)

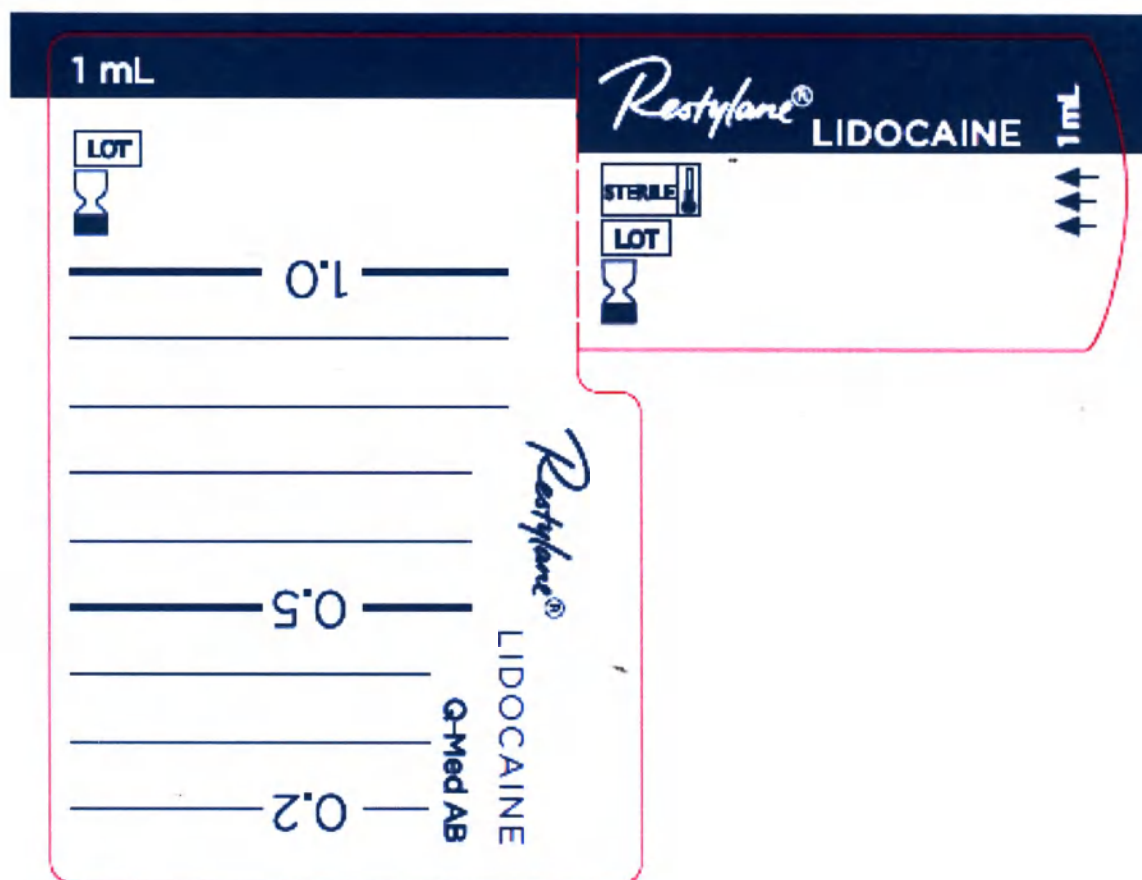


Символ / Текст	Значение / Перевод
GALDERMA	Логотип компании GALDERMA
	Торговое наименование Рестилайн Лифт (Restylane Lift)
Injectable Gel	Инъекционный Гель
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу

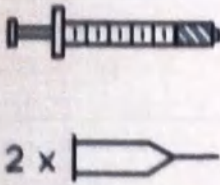
	Использовать до
1 mL	Объем продукта
	В комплектацию медицинского изделия входят один шприц и две иглы
	Стерилизация паром
	Стерилизация с применением оксида этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хранить при температуре от 0°C до 25°C
	Не допускать воздействия солнечного света
	Изготовитель
Q-Med AB	Наименование производителя
Seminarlegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Адрес производителя
Hyaluronic acid, stabilized 20 mg/mL	Гиалуроновая кислота, стабилизированная 20 мг/мл
Intended for facial tissue augmentation	Предназначен для увеличения объема тканей лица
Restylane and Galderma are registered trademarks	Restylane и Galderma являются зарегистрированными торговыми марками
	Указание направления
Q-Med AB	Наименование производителя

— 0.1 — — — — — — — — — — — 0.5 — — — — — — — — 0.2 —	Градуировочная шкала шприца
--	---

Рестилайн Лидокаин (Restylane Lidocaine)

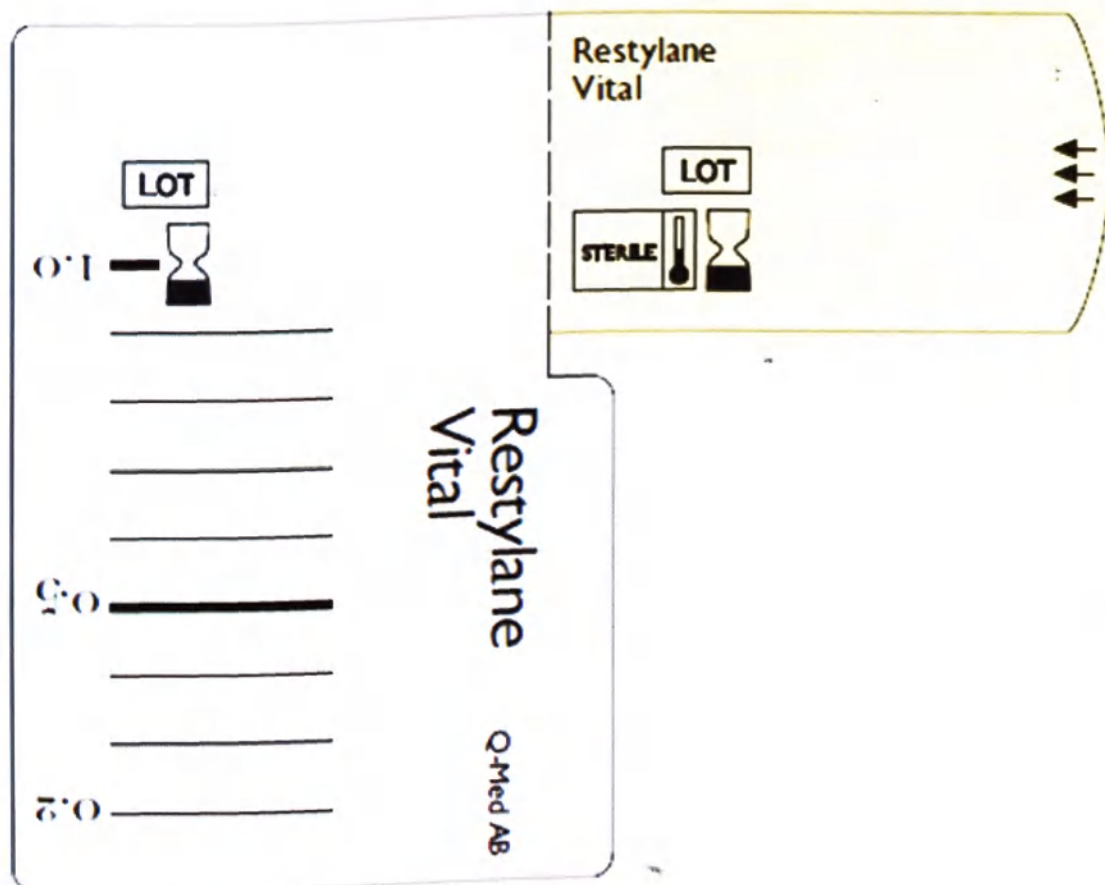


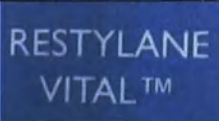
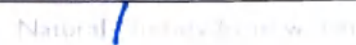
Символ / Текст	Значение / Перевод
GALDERMA	Логотип компании GALDERMA
	Торговое наименование Рестилайн Лидокаин (Restylane Lidocaine)
Injectable Gel with Lidocaine	Инъекционный Гель с Лидокаином

LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Использовать до
1 mL	Объем продукта
	В комплектацию медицинского изделия входят один шприц и две иглы
STERILE 	Стерилизация паром
STERILE EO	Стерилизация с применением оксида этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хранить при температуре от 0°C до 25°C
	Не допускать воздействия солнечного света
	Изготовитель
Hyaluronic acid, stabilized 20 mg/mL Lidocaine hydrochloride 3 mg/mL	Гиалуроновая кислота, стабилизированная 20 мг/мл Гидрохлорид лидокаина 3 мг/мл
Intended for facial tissue augmentation	Предназначен для увеличения объема тканей лица
Restylane and Galderma are registered trademarks	Restylane и Galderma являются зарегистрированными торговыми марками
	Указание направления
Q-Med AB	Наименование производителя

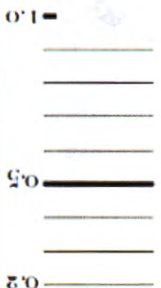
Seminarlegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Адрес производителя
	Градуировочная шкала шприца

Рестилайн Витал (Restylane Vital)



Символ / Текст	Значение / Перевод
 	Рестилайн (Restylane)
  	Торговое наименование Рестилайн Витал (Restylane Vital)
	Естественная красота изнутри
Hyaluronic acid, stabilized 20 mg/ml	Гиалуроновая кислота, стабилизированная 20 мг/мл
Intended to restore skin hydrobalance, improve structure and elasticity of the skin.	Предназначен для восстановления гидробаланса кожи, улучшения структуры и эластичности кожи.

Restylane and NASHA are registered trademarks.	Restylane и NASHA являются зарегистрированными торговыми марками
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Использовать до
MADE IN SWEDEN	Сделано в Швеции
1 x 1 ml • 3 Needles	Указание объема и комплектации изделия
1 ml	Объем изделия
	Торговая марка технологии NASHA
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хранить при температуре от 0°C до 25°C
	Не допускать воздействия солнечного света
	Изготовитель
Q-Med AB	Наименование производителя
Seminarlegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sweden	Адрес производителя
STERILE 	Стерилизация паром

	Указание направления
	Градировочная шкала шприца

ПРОШИ
ПРОНУМЕРАЦИЯ
26 ЛИСТОВ



Макеты русскоязычного стикера в зависимости от вариантов исполнения

Имплантат внутривидермальный Рестилайн (Restylane), вариант исполнения:
Рестилайн Витал (Restylane Vital)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05428 от
Кислота гиалуроновая стабилизированная 20 мг/мл

Назначение

Данный продукт предназначен для восстановления баланса жидкости в коже, улучшения ее структуры и повышения эластичности. Его следует вводить в дермальный слой кожи, преимущественно в более глубокий слой дермы.

Условия и срок хранения

Дата окончания срока годности указана на упаковке. Срок хранения 36 месяцев с даты стерилизации. Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать. Беречь от солнечного света. Радиационный метод стерилизации для игл 30 G.

Производитель:

Кью-Мед АБ, Швеция
Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28, Uppsala, Sweden
Телефон +46(0)18 474 90 00,
Факс +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com,
электронная почта: info.q-med@galderma.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ГАЛДЕРМА»
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15, этаж 34, офис 34.01
Тел./факс: +7 (495) 540-50-17
info.russia@galderma.com



Имплантат внутридермальный Рестилайн (Restylane), вариант исполнения:
Рестилайн (Restylane)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05428 от
Кислота гиалуроновая стабилизированная 20 мг/мл

Назначение

Данный продукт предназначен для увеличения объема тканей лица. Его применение рекомендуется для коррекции морщин и увеличения объема губ. Его следует вводить путем инъекции в среднюю часть дермы или в подслизистый слой губ. В зонах лица с ограниченным количеством поддерживающих и покрывающих мягких тканей, например, в периорбитальной зоне, рекомендуется инъекция в подкожную жировую ткань или супрапериостальное введение.

Условия и срок хранения

Дата окончания срока годности указана на упаковке. Срок хранения 36 месяцев с даты стерилизации. Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать. Беречь от солнечного света.

Производитель:

Кью-Мед АБ, Швеция
Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28, Uppsala, Sweden
Телефон +46(0)18 474 90 00,
Факс +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com,
электронная почта: info.q-med@galderma.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ГАЛДЕРМА»
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15, этаж 34, офис 34.01
Тел./факс: +7 (495) 540-50-17
info.russia@galderma.com



Имплантат внутривидермальный Рестилайн (Restylane), вариант исполнения:

Рестилайн Лидокаин (Restylane Lidocaine)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05428 от

Кислота гиалуроновая стабилизированная 20 мг/мл

Лидокаина гидрохлорид 3 мг/мл

Назначение

Данный продукт предназначен для коррекции объема тканей лица. Его рекомендуется применять для исправления морщин и коррекции формы губ. Следует вводить путем инъекции в среднюю часть дермы или в подслизистый слой губ.

В зонах лица с ограниченным количеством поддерживающих и покрывающих мягких тканей, например, в периорбитальной зоне, рекомендуется инъекция в подкожную жировую ткань или околонадкостничные ткани. Лидокаин в составе продукта ослабляет боль при введении.

Условия и срок хранения

Дата окончания срока годности указана на упаковке. Срок хранения 36 месяцев с даты стерилизации. Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать. Беречь от солнечного света.

Производитель:

Кью-Мед АБ, Швеция

Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28, Uppsala, Sweden

Телефон +46(0)18 474 90 00,

Факс +46(0)18 474 90 01

www.q-med.com,

электронная почта: info.q-med@galderma.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ГАЛДЕРМА»

123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15, этаж 34, офис 34.01

Тел./факс: +7 (495) 540-50-17

info.russia@galderma.com



Имплантат внутривидермальный Рестилайн (Restylane), вариант исполнения:
Рестилайн Лифт (Restylane Lift)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05428 от
Кислота гиалуроновая стабилизированная 20 мг/мл

Назначение

Данный продукт предназначен для увеличения объема тканей лица. Его применение рекомендуется для исправления контуров лица, коррекции морщин и увеличения объема губ. Его следует вводить в глубокий слой дермы и (или) поверхностный подкожный слой или в подслизистый слой губ. В зонах лица с ограниченным количеством поддерживающих и покрывающих мягких тканей, например, в периорбитальной зоне, рекомендуется инъекция в подкожную жировую ткань или супралариостальное введение.

Условия и срок хранения

Дата окончания срока годности указана на упаковке. Срок хранения 36 месяцев с даты стерилизации. Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать. Беречь от солнечного света.

Производитель:

Кью-Мед АБ, Швеция
Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28, Uppsala, Sweden
Телефон +46(0)18 474 90 00,
Факс +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com,
электронная почта: info.q-med@galderma.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ГАЛДЕРМА»
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15, этаж 34, офис 34.01
Тел./факс: +7 (495) 540-50-17
info.russia@galderma.com



Имплантат внутривидермальный Рестилайн (Restylane), вариант исполнения:
Рестилайн ЛифтЛидокаин (Restylane Lift Lidocaine)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05428 от
Кислота гиалуроновая стабилизированная 20 мг/мл
Лидокаина гидрохлорид 3 мг/мл

Назначение

Данный продукт предназначен для увеличения объема тканей лица. Его применение рекомендуется для исправления контуров лица, коррекции морщин и увеличения объема губ. Его следует вводить в глубокий слой дермы и (или) поверхностный подкожный слой или в подслизистый слой губ. В зонах лица с ограниченным количеством поддерживающих и покрывающих мягких тканей, например, в периорбитальной зоне, рекомендуется инъекция в подкожную жировую ткань или супрапериостальное введение. Добавление лидокаина обеспечивает обезболивающий эффект во время процедуры.

Условия и срок хранения

Дата окончания срока годности указана на упаковке. Срок хранения 36 месяцев с даты стерилизации. Хранить при температуре до 25 °С. Не замораживать. Беречь от солнечного света.

Производитель:

Кью-Мед АБ, Швеция
Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28, Uppsala, Sweden
Телефон +46(0)18 474 90 00,
Факс +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com,
электронная почта: info.q-med@galderma.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ГАЛДЕРМА»
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд д. 15, этаж 34, офис 34.01
Тел./факс: +7 (495) 540-50-17
info.russia@galderma.com



ПРОШУ
ПРОНУМЕРОВАТИ
6 ЛИСТОВ

