

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

От _____ 200__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ОБЕРОН»

Шушура И.В.

200__ г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетки антисептические стерильные «Эплан»® от «100 ран» ®

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Назначение

Салфетки антисептические стерильные «Эплан»® от «100 ран»® (далее – салфетки) предназначены для санации небольших ран, легких поверхностных ушибов, порезов, ссадин, потертостей и других поражений кожи, ожогов (I, II, IIIa) степеней.

Салфетки обладают антимикробным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Не прилипают к ранам.

Основные технические характеристики

Салфетки представляют собой основу из марлевой медицинской двухслойной салфетки по ГОСТ 16427, пропитанную раствором косметического средства «Эплан» по ТУ 91058-001-28916195-06, индивидуально упакованную в пакеты из 3-х слойного комбинированного материала. Салфетки выпускаются в стерильном виде, одного типоразмера: 16x14 см. Масса пропиточного состава в салфетке составляет не менее 3,5 г. Антимикробное действие салфетки (зона задержки роста по St.epid. не менее 5 мм).

Срок годности – 5 лет с момента их стерилизации.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия (препарата).

Подготовка к работе изделия

- вскрыть упаковку (пакет) по насечке и достать салфетку;
- при необходимости салфетку развернуть.

Порядок работы изделия

- Наружно. Раны, ожоги, легкие поверхностные ушибы, порезы, ссадины, потертости и другие поражения кожи: смазывают пораженный участок салфеткой, обработку периодически повторяют до полного заживления.
- При значительных повреждениях: на поврежденную поверхность накладывают развернутую салфетку и фиксируют марлевым бинтом. Смену повязок производят ежедневно или через день в зависимости от состояния раны.

Правила хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Салфетки
антисептические стерильные
"Эплан" от "100 ран" (16x14 см)
Стерильно

ТУ 9393-002-28916195-2008
РУ МЗ и СР №



ЗАО "ОБЕРОН"



Дата стерилизации: 12.12.2007
Срок годности: 6 лет

Салфетки
антисептические стерильные
“Эплан”[®] от “100 ран”[®] (16x14 см)
Стерильно

ТУ 9393-002-28916195-2008
РУ МЗ и СР №




ЗАО “ОБЕРОН”



Дата стерилизации: 12.12.2007
Срок годности: 5 лет

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМЕНИ
А.В.ВИШНЕВСКОГО РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ

“УТВЕРЖДАЮ”
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФГУ «ИНСТИТУТ
ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.В.ВИШНЕВСКОГО
РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ»
ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Грассон
24.12.07

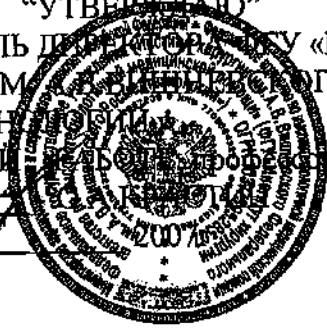

АКТ НГЦ - 349 / 2007

Проведение приемочных технических испытаний
Салфеток антисептических ранозаживляющих, стерильных,
"Эплан"® от "100 ран"™, разработанных и представленных
ЗАО «ОБЕРОН», на соответствие проекта
ТУ 9393-002-28916195-2008 «Салфетки антисептические
ранозаживляющие, стерильные "Эплан"® от "100 ран"™.

Рез

МВ