

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»



О.Е. Макарова

2012 __ г.

М.п.

Инструкция по применению
«Инструменты механизированные для
остеосинтеза, эндопротезирования и
реконструктивной хирургии,
с принадлежностями »

производства

Synthes GmbH, Швейцария

Инструментарий, изготавливаются и поставляются потребителю в соответствии с международными стандартами качества: медицинской директивой 93/42/ЕЕС, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003,

и соответствуют требованиям Министерства здравоохранения относительно изделий медицинского назначения.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЫ И ПРОСТЕРИЛИЗОВАНЫ.

После использования инструменты следует сразу же вымыть с целью удаления всех органических загрязнений (кровь, ткани).

Инструменты промывают теплой водой при помощи щетки из искусственного материала с использованием специальных препаратов (содержащих антикоррозийные вещества), допущенных к применению в медицине.

Рекомендуется мытье машинным методом (в ультразвуковой камере).

Тщательно вымыв и просушив, инструменты выложить в ящик-штатив и закрыть крышкой. Инструментарий следует хранить в сухом состоянии в помещении при температуре 5-30°C и относительной влажности не более 70%.

Инструменты следует подвергать процессу стерилизации (паровая или сухая стерилизация при температуре до 200°C), действуя в соответствии с существующими медицинскими требованиями. Рекомендуется применение паровой стерилизации (в автоклаве).

Инструменты, входящие в состав инструментария, изготовлены из нержавеющей стали, сплавов, пластмассы, поэтому они подвержены механическим повреждениям и коррозионным процессам.

ИЗДЕЛИЕ НЕ СТЕРИЛЬНО!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТЕРИЛИЗОВАТЬ !

Промышленно
Промышленно
9-11-19

