

Директор
ООО «Камелот Медикал»



Ю.М. Трофимова
« 06 » июня 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Белье медицинское одноразовое, нестерильное,
в отдельных упаковках по ТУ 32.50.50-002-23336004-2021.

2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Белье медицинское одноразовое нестерильное, в отдельных упаковках по ТУ 32.50.50-002-23336004-2021, в следующих исполнениях:

1. Варианты исполнения.

1.1. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная.

1.1.1. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м².

1.1.2. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. Сантейс, плотность 54 или 74 г/м².

1.1.3. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м².

1.1.4. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м².

1.1.5. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м².

1.1.6. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.1.7. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.1.8. Салфетка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 10,0 см до 60,0 см с интервалом 1,0 см, ширина от 10,0 см до 50,0 см с интервалом 1,0 см. СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м².

1.2. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная.

1.2.1. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м².

1.2.2. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. Сантейс, плотность 54 или 74 г/м².

1.2.3. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м².

1.2.4. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м².

1.2.5. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м².

1.2.6. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.2.7. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.2.8. Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 180,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 160,0 см с интервалом 5,0 см. СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м².

1.3. Простыня медицинская большая одноразовая нестерильная.

1.5. Чехол на кушетку медицинский одноразовый нестерильный.

1.6.8. Наволочка медицинская одноразовая нестерильная, размер: длина от 60,0 см до 100,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 50,0 см до 100,0 см с интервалом 5,0 см. СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м².

1.8.5. Пододеяльник медицинский одноразовый нестерильный, длина от 100,0 см до 210,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 60,0 см до 160,0 см с интервалом 1,0 см. СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м².

1.8.6. Пододеяльник медицинский одноразовый нестерильный, длина от 100,0 см до 210,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 60,0 см до 160,0 см с интервалом 1,0 см. Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.8.7. Пододеяльник медицинский одноразовый нестерильный, длина от 100,0 см до 210,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 60,0 см до 160,0 см с интервалом 1,0 см. Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м².

1.8.8. Пододеяльник медицинский одноразовый нестерильный, длина от 100,0 см до 210,0 см с интервалом 5,0 см, ширина от 60,0 см до 160,0 см с интервалом 1,0 см. СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м².

2. Комплект поставки:

2.1. Белье одного варианта исполнения и типоразмера, в количестве от 1 до 100 штук в потребительской упаковке с маркировкой – 1 уп.;

2.2. Инструкция по применению – 1 (одна) штука на 1 (одну) транспортную упаковку.

(далее по тексту - «изделие» или «белье»).

НАЗНАЧЕНИЕ

Белье предназначено для применения во время осмотра/проведения медицинских процедур для поддержания гигиены, предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Белье может быть использовано в стационарных, амбулаторных лечебно- профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, в социальных учреждениях, как высококвалифицированным медицинским персоналом, так и младшим медицинским персоналом.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначено для применения во время осмотра/проведения медицинских процедур для поддержания гигиены, предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия. Побочные действия медицинского изделия отсутствуют.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Изделие с истекшим сроком годности использовать нельзя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Отсутствуют.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Используется совместно с любыми медицинскими изделиями разрешенными к применению в медицинской практике.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 1). Ознакомиться с инструкцией по применению изделия.
- 2). Открыть упаковку.
- 3). Использовать изделие по назначению.

СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Срок годности изделия– 5 лет, с даты изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие белья требованиям ТУ 32.50.50-002-23336004-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.
Не использовать после окончания срока годности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения белья в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С
Транспортирование белья в транспортной таре осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, при температуре от -50 °С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при 25 °С

УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В комплект поставки должны входить:
- Белье одного варианта исполнения и типоразмера, в количестве от 1 до 100 штук в потребительской упаковке с маркировкой – 1 уп.;

- Инструкция по применению – 1 (одна) штука на 1 (одну) транспортную упаковку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

Белье включает ассортимент следующих изделий: Салфетка медицинская одноразовая нестерильная; Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная; Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная; Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный; Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный; Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная; Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная; Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный.

Основные линейные размеры изделий должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 1 – 7.

Таблица 1.Салфетка медицинская одноразовая нестерильная

Длина изделия (1), см	от 10,0 до 60,0 с интервалом 1,0 см
Ширина изделия (2), см	от 10,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 2 . Простыня медицинская малая одноразовая нестерильная

Длина (1), см	Ширина (2), см
от 60,0 до 180,0 с интервалом 5,0 см.	от 50,0 до 160,0 с интервалом 5,0 см.

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 3. Простыня медицинская большая одноразовая нестерильная

Длина (1), см	Ширина (2), см
от 180,0 до 360,0 с интервалом 5,0 см.	от 160,0 до 280,0 с интервалом 5,0 см.

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 4. Наматрачник медицинский одноразовый нестерильный

Длина наматрачника (А), см	от 110,0 до 250,0 с интервалом 5 см
Ширина наматрачника (В), см	от 60,0 до 240,0 с интервалом 5 см.
Ширина бортика (при наличии), наматрачника (С), см	от 10,0 до 30,0 с интервалом 5 см.
Длина резинки (при наличии) если резинка по двум коротким сторонам (в растянутом виде), на одну сторону, см,	от 30,0 до 120,0 см с интервалом 1см,
Длина резинки (при наличии) если резинка по всему периметру (в растянутом виде), см	от 180,0 до 550,0 см с интервалом 1см,
Диаметр/ширина резинки (при наличии), см	от 0,2 до 9,0 см
Длина завязок (при наличии), см	от 30,0 до 40,0 см с интервалом 1см,
Ширина завязок (при наличии), см	от 3,0 до 5,0 см с интервалом 1см,

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 5. Чехол на кушетку медицинский одноразовый нестерильный

Длина чехла (А), см	от 70,0 до 220,0 с интервалом 5 см
Ширина чехла (В), см	от 40,0 до 160,0 с интервалом 5 см
Длина резинки (при наличии), резинка по двум коротким сторонам (в растянутом виде), на одну сторону, см,	От 40,0 до 160,0 с интервалом 1см,
Диаметр/ширина резинки, см	от 0,2 до 9,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 6. Наволочка медицинская одноразовая нестерильная. Наволочка с клапаном медицинская одноразовая нестерильная

Длина (А), см	от 60,0 до 100,0 с интервалом 5 см
Ширина (В), см	от 50,0 до 100,0 с интервалом 5 см.
Клапан, при наличии	
Длина, см	От 20,0 до 70,0см с интервалом 5,0см
Ширина, см	от 50,0 до 100,0 с интервалом 5 см.

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 7. Пододеяльник медицинский одноразовый нестерильный

Длина (А), см	от 100,0 до 210,0 с интервалом 5 см
Ширина (В), см	от 60,0 до 160,0 с интервалом 5 см.

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Белье должно изготавливаться из материалов, представленных в таблице 8.

Таблица 8.

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий
1	2	3
Ламинированный Спан-лейс, плотность 65 г/м ² .	Нетканые материалы из химических нитей, производства "Shangvu Wanril Non-Women Textiles Co, Ltd", Китай/ООО ТД "Нетканые технологии", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый,

		нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
Сантейс ((Santeys), голубого цвета, плотность 54, 74 г/м². Краситель: марка E50152 (цвет светло-голубой), производства фирмы "Lianhong", Китай.	Нетканые материалы из химических нитей, производства "Shangyu Wanrui Non-Woven Textiles Co, Ltd", Китай/ООО ТД "Нетканые технологии", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
СС (нетканый двухслойный материал спанбонд-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45, 60 г/м². Краситель: марка 63397-D2-300 (цвет светло-голубой), производства фирмы "Americhem Europe Limited", Великобритания.	Полотна нетканые термоскрепленные СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полимагиз", Россия или Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010-74582615-2009 ООО "Завод Эластик", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
СМС (нетканый трехслойный материал спанбонд-мельтблаун-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 60 г/м². Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полимагиз", Россия или Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010-74582615-2009 ООО "Завод Эластик", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
СММС (нетканый четырехслойный материал спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 60 г/м². Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полимагиз", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная

Спанлейс (нетканый однослойный материал из штапельных вискозных и полиэфирных волокон), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 60 г/м ² .	Материал нетканый «Спанлейс» из штапельных вискозных и полиэфирных волокон по ТУ 13.95.10-006-56176857-2018, производства ООО «Авангард», Россия. или Нетканые материалы из химических нитей, производства фирмы "Shangyu Wanrui Non-Woven Textiles Co, Ltd." Китай/ ООО ТД «Нетканые технологии», Россия	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
Спанбонд ламинированный (нетканый двухслойный материал спанбонд-спанбонд ламинированны, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные в том числе ламинированные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиаматиз", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
СММС (гидрофильный ламинированный, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные в том числе ламинированные по СТО 96891647-002-2009, производства производства АО "Полиаматиз", Россия.	Салфетка медицинская одноразовая нестерильная Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный
Полиэтилен, плотность 60 мкм	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82, производства ЗАО "Производственно-Торговое Предприятие Киль", Россия.	Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная, Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная
Тесьма (Резинка)(Состав: 70% полиэфир, 30% латекс)	Тесьма по ТУ 8151-001-59722763-2 производства ООО «ФИ-ТЕКС» Росси	Элемент чехла и наматрачника.

Материалы для белья должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 9.

Таблица 9.

Наименование материала.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм вод. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Неламинированный нетканый материал (СС,	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	23,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-

СМС, СММС, Спанлейс)	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	30,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	42,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
2. Ламинированный нетканый материал Сантейс (Santeys).	54,0	2,0	1,8	1,0	1,0	500
	74,0	2,5	2,0	1,5	1,2	500
3. Ламинированный нетканый материал (Спанлейс, СММС). Спанбонд,	20,0	4,0	2,5	3,5	2,0	500
	25,0	4,0	2,5	3,5	2,0	500
	30,0	4,5	2,5	3,5	2,0	500
	35,0	4,5	2,5	3,5	2,0	500
	40,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	42,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	45,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	50,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	55,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	60,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	65,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
4. Пленка полиэтиленовая	60,0	3,0	2,0	-	-	500,0

Салфетка медицинская одноразовая нестерильная прямоугольной формы. Края не обработаны. Простыня медицинская малая одноразовая, нестерильная и Простыня медицинская большая одноразовая, нестерильная прямоугольной формы, цельнокроеное, края не обработаны. Наматрачник медицинский одноразовый, нестерильный прямоугольной формы с бортиком или без, фиксироваться при помощи резинки или на восьми завязках. Чехол на кушетку медицинский одноразовый, нестерильный прямоугольной формы, стягиваться на резинку. Наволочка медицинская одноразовая, нестерильная и Наволочка с клапаном медицинская одноразовая, нестерильная представляет собой сшивное изделие прямоугольной или квадратной формы с клапаном или без него. Края могут быть обработаны и не обработаны. Пододеяльник медицинский одноразовый, нестерильный представляет собой сшивное изделие прямоугольной или квадратной формы. Края могут быть обработаны и не обработаны. Соединение деталей изделий должно осуществляться нитками полиэстер по ТУ 8147-045-00319629-2007 - 50/2,40/2, 40/3, 100лш, 170лш, 270лш, производства ОАО "ПНК им. С.м. Кирова" либо ультразвуковой либо термической сваркой (ширина шва 1 - 10 мм). Прочность шва не менее 18 Н. Белье может выпускаться из окрашенных или неокрашенных материалов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Потенциальные потребители: высококвалифицированный медицинский персонал, младший медицинский персонал.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Белье имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Камелот Медикал» (ООО «Камелот Медикал»)

Юридический адрес: 420108, Россия, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 48, пом. 10

Тел: (843) 590-99-40, 590-99-45

E-mail: camelotmedical@bk.ru

Адрес места производства: ООО «Камелот Медикал», 420108, Россия, г. Казань, ул. Ирек д. 1 часть пом. 28, часть пом. 29.

Внимание! О нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) рекомендуется направлять в адрес производителя ООО «Камелот Медикал».

Сшито и заверено печатью 14
(Двадцать) лист 06
уаот

ДИРЕКТОР ООО «КАМЕЛОТ
МЕДИКАЛ»

Трофимова Ю.М.

