

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО ПРОМЕТ»



Е.В. Петров

2022 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

03007-01 РЭ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат

MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

производства ООО «НПО ПРОМЕТ», Россия

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
4 МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	8
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9
6 СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКА	10
7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ	11
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9 УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	13
10 УТИЛИЗАЦИЯ	14
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15
12 СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ	16
13 ПРИЛОЖЕНИЕ А	17
14 ПРИЛОЖЕНИЕ Б	37
15 ПРИЛОЖЕНИЕ В	48
16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ	55
17 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	56

					03007-01 РЭ										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.					Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат МР по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ										
Провер.															
И. Кнущ.															
 INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU															
утвер.															
					<table><tr><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>56</td></tr></table> ООО «НПО ПРОМЕТ»					Лит.	Лист	Листов		2	56
Лит.	Лист	Листов													
	2	56													

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации совмещено с техническим описанием и паспортом (далее – РЭ).

1.1 Наименование медицинского изделия

«Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021» (далее по тексту – мебель).

1.2 Обозначение технических условий

ТУ 32.50.30-014-47272295-2021.

1.3 Номер и дата регистрационного удостоверения

РЗН _____ / _____ от _____

1.4 Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие «Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021» (далее по тексту – мебель), предназначено для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат:

- Шкафы MF – для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения и хранения медикаментов, перевязочных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении медицинских процедур;

- Столы пеленальные MF – для размещения в процедурных/смотровых кабинетах с целью проведения осмотра новорожденных и различных манипуляций, пеленания; для размещения в палатах для ухода за новорожденными и пеленания;

- Тумбы MF – для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения и хранения медикаментов, перевязочных материалов;

- Тумбы с поворотным столиком MF – для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения и хранения медикаментов, перевязочных материалов и инструментов, применяемых при проведении медицинских процедур.

1.5 Перечень показаний к применению, противопоказаний, побочных действий

Показания к применению: для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения, медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Противопоказания: применение не по назначению.

Побочные действия: не выявлено.

1.6 Информация о наличии лекарственных средств, материалов животного или человеческого происхождения

Не содержит лекарственные средства, материалы животного или человеческого происхождения.

1.7 Основные потребители

Обслуживающий медицинский персонал, пациент.

1.8 Условия применения

Мебель медицинская должен устанавливается на горизонтальную поверхность и при необходимости выравниваются с помощью регулируемых опор.

1.9 Область применения

Мебель применяется в больницах и других лечебных заведениях.

1.10 Условия окружающей среды при применении

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (при температурных условиях от 10 °С до 35 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С).

1.11 Сведения об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ» (ООО «НПО ПРОМЕТ»).

Юридический адрес: Российская Федерация, 301602, Тульская обл., Узловский р-он, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Фактический адрес: Российская Федерация, 301602, Тульская обл., Узловский р-он, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Адрес производства:

Российская Федерация, 301602, Тульская обл., Узловский р-он, г.
Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Контактный телефон: (495) 777-48-38

Электронная почта: moscow@safe.ru

1.12 Контакты для обращения по гарантийному обслуживанию

ООО «НПО ПРОМЕТ»

Адрес: 301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул.
Дубовская, д. 2а.

Контактный телефон: (495) 777-48-38

Электронная почта: www.safe.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массогабаритные и присоединительные размеры представлены на Рисунках ПРИЛОЖЕНИЯ А. Допустимые отклонения габаритных размеров $\pm 10 \%$, допустимые отклонения масс $\pm 10 \%$, допустимые отклонения присоединительных размеров $\pm 1,0$ мм.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделия указан в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

4 МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материалы медицинского изделия указаны в ПРИЛОЖЕНИИ В.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Требования безопасности по ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371.

5.2 Мебель должна быть устойчива к различным воздействиям: влаге, огню и механическим повреждениям.

5.3 Механическая безопасность должна обеспечиваться необходимым уровнем устойчивости, статической и ударной прочности, жесткости, деформируемости, величины прогибов, долговечности конструкции шкафа.

5.4 При использовании шкафов со стеклянными дверцами в качестве необходимого уровня защиты от травм (отсутствием возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении) возможно использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного; обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или факета.

5.5 Требования безопасности должны обеспечиваться в течение всего срока службы мебели.

5.6 Покрытия мебели должны быть химически безопасны в течение всего срока службы изделия.

5.7 При установке изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов шкафа не должна превышать +40 °С.

6 СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКА

Каждое изделие имеет маркировку в виде прикрепленной на упаковку таблички или бумажной этикетки, на которой должно быть указано:

- наименование изделия;
- обозначение модели;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование фирмы-изготовителя;
- обозначение настоящих ТУ;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- дата выпуска.

Мебель изготавливают без серийного номера.

Общие требования к маркировке изделия – по ГОСТ 16371.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

7.1. Мебель устанавливается на горизонтальную поверхность и при необходимости выравниваются с помощью регулируемых опор.

7.2. При возникновении неисправности Вы можете обратиться в адрес сервисной службы, уполномоченной заводом-изготовителем.

7.3. После окончания срока эксплуатации потребитель осуществляет утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Габаритные размеры и инструкция по сборке* см. Приложение А.

**Сборку медицинского изделия осуществляет представитель компании производителя.*

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Периодичность проведения профилактических работ устанавливается пользователем в зависимости от условий эксплуатации медицинской мебели, но не реже 1 раза в квартал, за исключением дезинфекции.

8.1. Дезинфекция

Мебель медицинская один раз в неделю должен пройти дезинфекционную обработку одним из следующих способов:

- двукратного протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос», салфетка должна быть отжата;
- двукратного протирания салфеткой, смоченной 1 % раствором хлорамина, салфетка должна быть отжата.

ВНИМАНИЕ! Все дезинфицирующие средства должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации и предназначены для дезинфекции наружных металлических поверхностей.

9 УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упаковка осуществляется предприятием-изготовителем.

Транспортировать мебель медицинскую следует в транспортной упаковке в крытых вагонах, крытых автомашинах, герметизированных отсеках самолетов и грузовых контейнеров.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 – от минус 50 °С до 50 °С.

Мебель медицинская в транспортной упаковке должна храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 не более 12 месяцев – от 5 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С.

В процессе хранения мебель медицинская в транспортной упаковке не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. После окончания срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с СанПиН 2.1.3684, класс А.

10.2. Утилизация частей изделия, имевших контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, класс Б и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели – 1 год с момента даты продажи мебели, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год с даты изготовления мебели. Гарантийные обязательства обеспечиваются квалификацией персонала и использованием новейшего оборудования и материалов.

Средний срок службы мебели – 10 лет, в том числе срок хранения два года в упаковке изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документацией.

Срок службы замка распространяется на весь срок службы мебели.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документацией.

Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления мебели медицинской.

12 СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

Мебель медицинская соответствует следующим национальным стандартам:

ГОСТ 9.014, ГОСТ 166, ГОСТ 177, ГОСТ 427, ГОСТ 1491, ГОСТ 2228, ГОСТ 3749, ГОСТ 6402, ГОСТ 6799, ГОСТ 7502, ГОСТ 8273, ГОСТ 8828, ГОСТ 9142, ГОСТ 9569, ГОСТ 10354, ГОСТ 14192, ГОСТ 15150, ГОСТ 15846, ГОСТ 16371, ГОСТ 17308, ГОСТ 17473, ГОСТ 18251, ГОСТ 18510, ГОСТ 19882, ГОСТ 20477, ГОСТ 24297, ГОСТ 24709, ГОСТ 25347, ГОСТ 25644, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 52582, ГОСТ Р 53228, ГОСТ Р 54170.

13 ПРИЛОЖЕНИЕ А






ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ*

*Сборку медицинского изделия осуществляет представитель компании производителя.

1. Шкаф для палат MF, в вариантах исполнения: LH-1 1940.1


Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF LH-1 1940.1	1926	400	550	41,1

Инструкция по сборке.

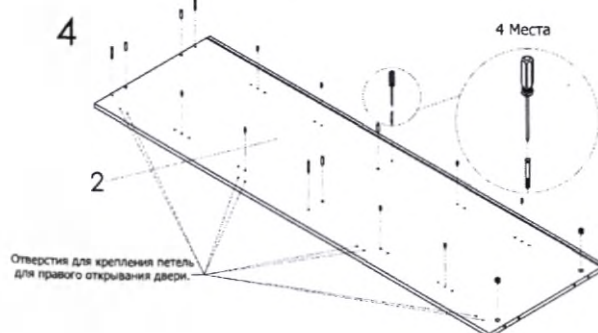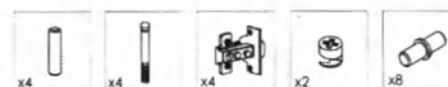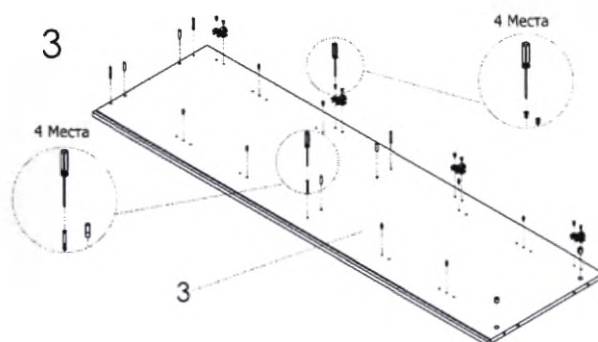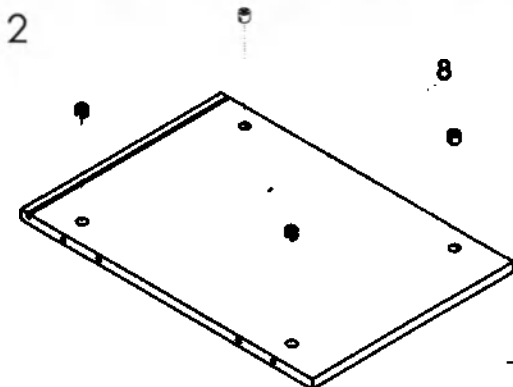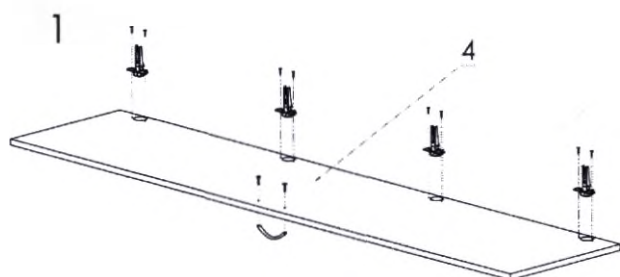


* На схеме показано крепление петель под правое открывание двери.

5

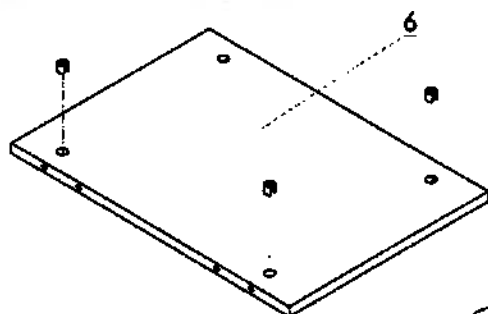


6

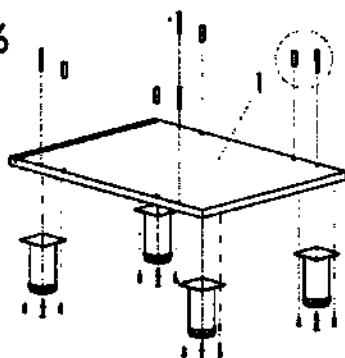


4 места



7

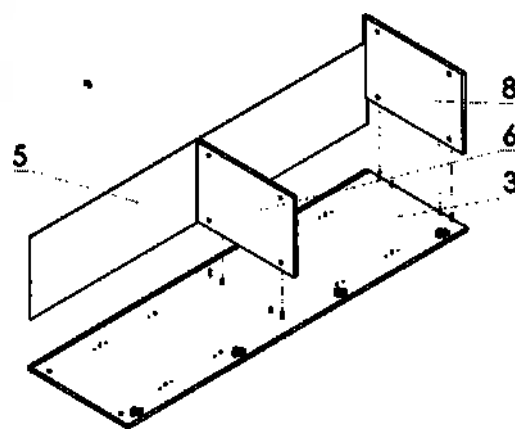


8

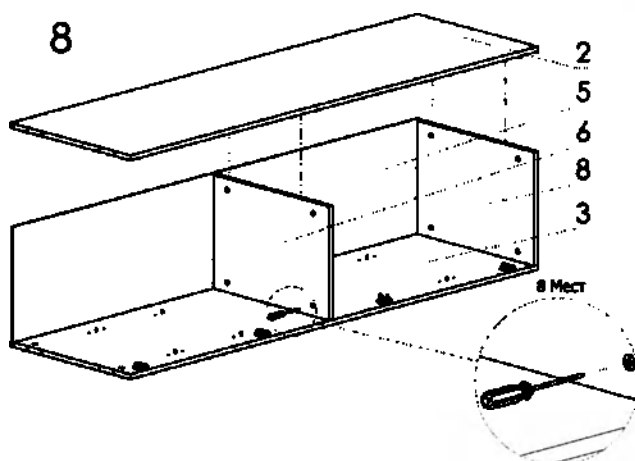

8 Мест

9


2

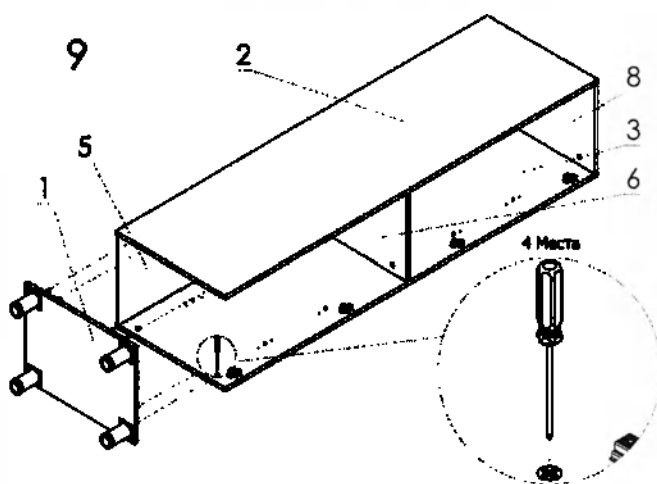

4 Места


10

12 Мест

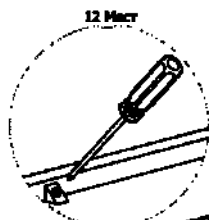

Вариант №1 правое открывание двери

Вариант №2 левое открывание двери

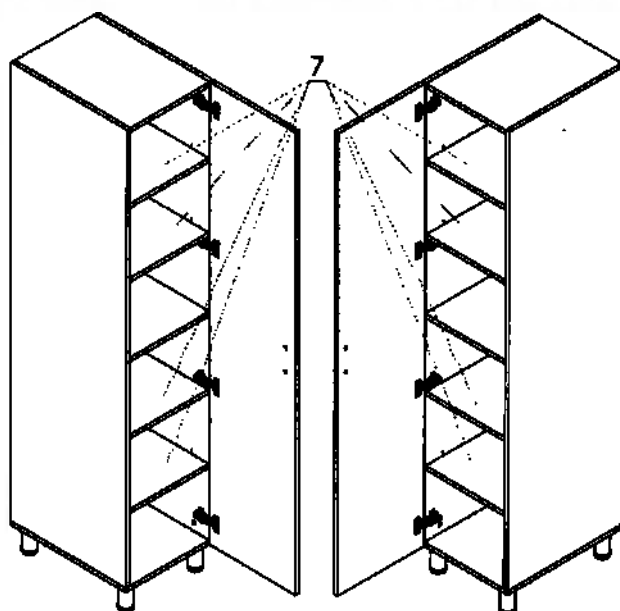





*- после сборки заглушить отверстия заглушками входящие в комплект.





2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2
1980



Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF LH-2 1980	1900	800	550	86

*- допустимое отклонение +/- 10%

Инструкция по сборке.

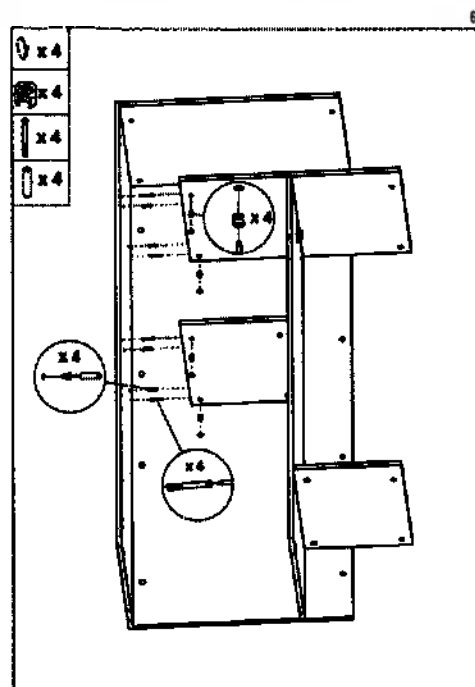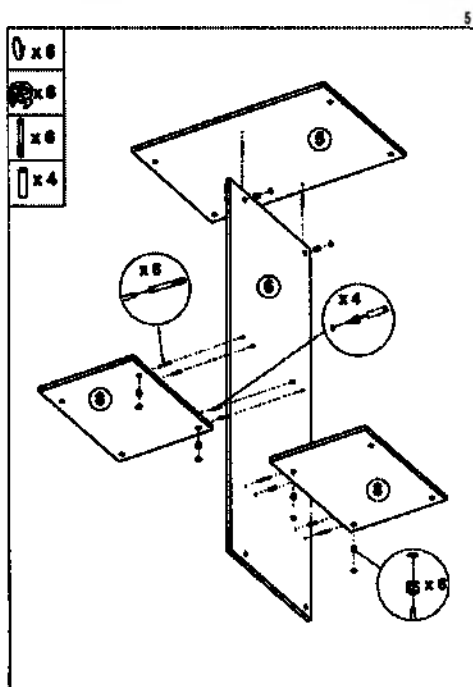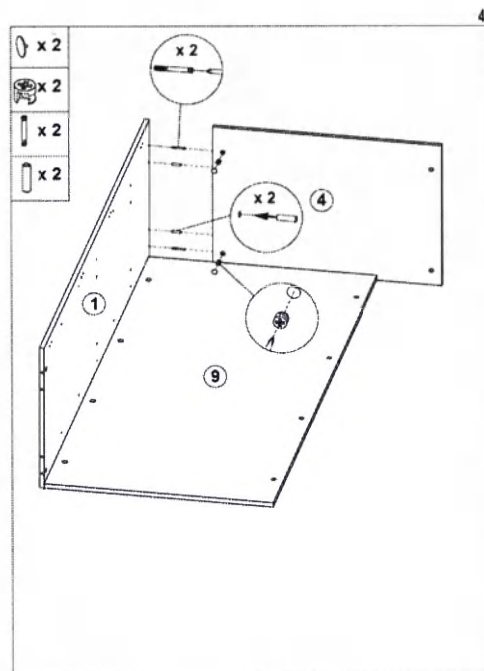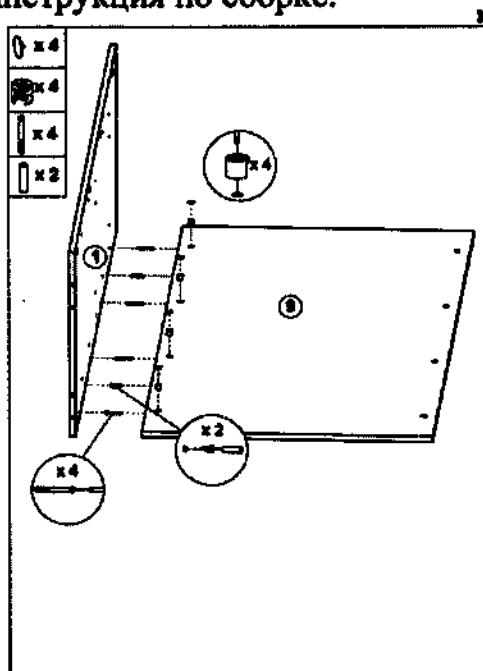

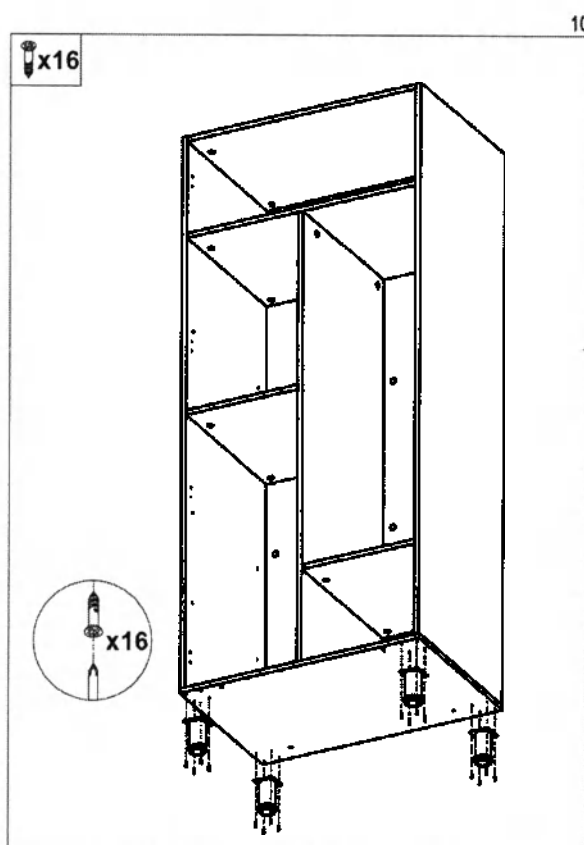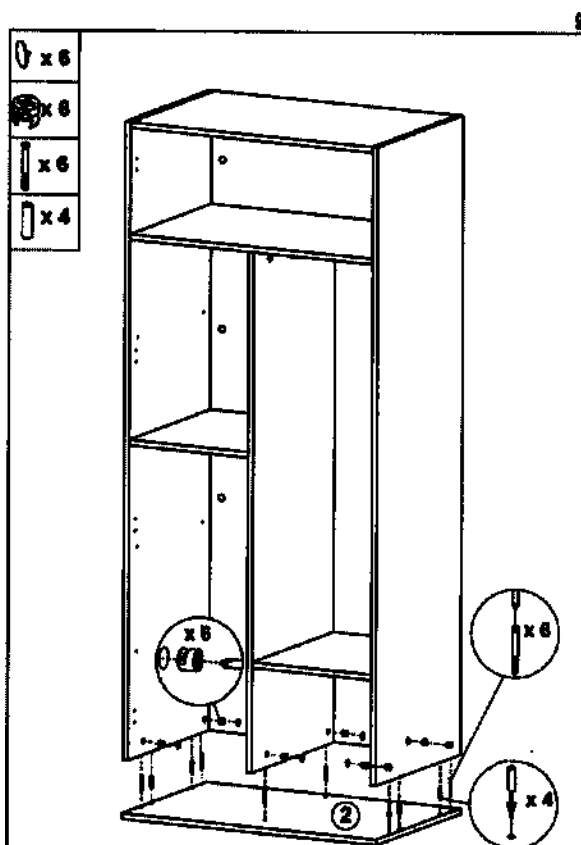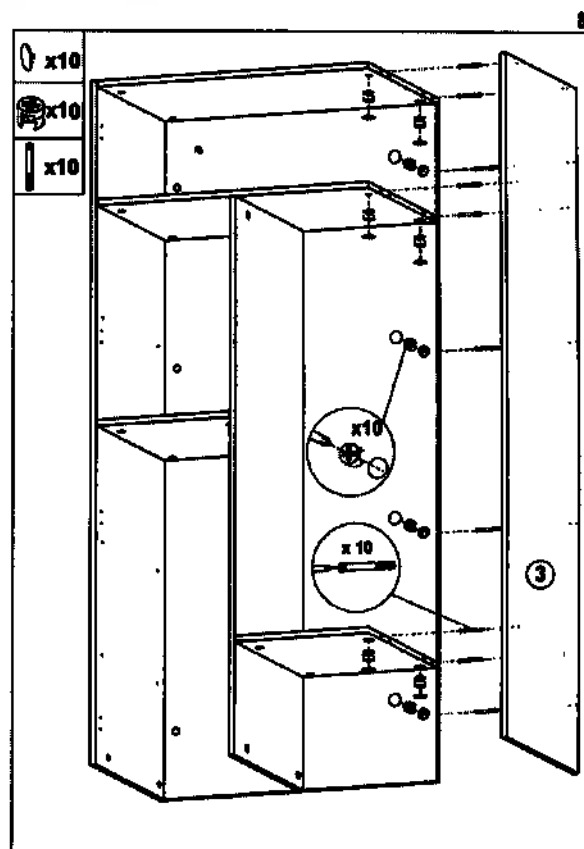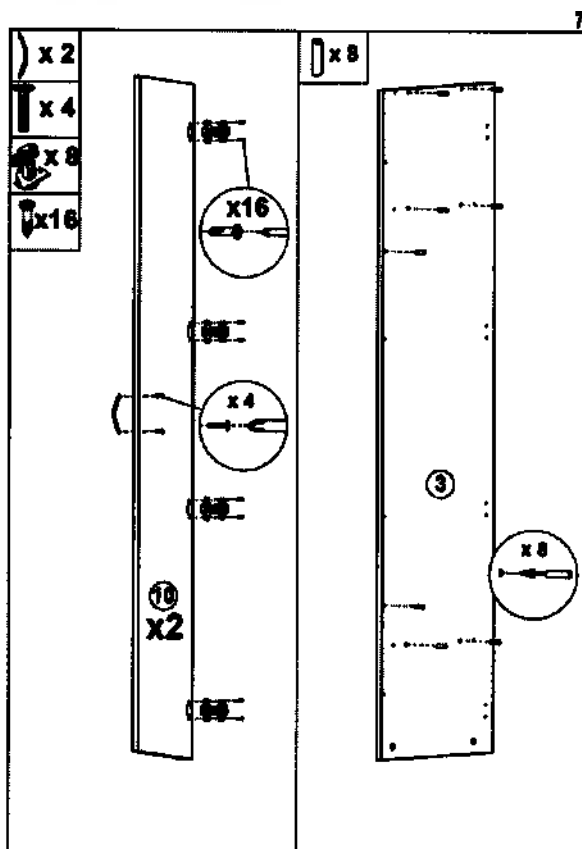

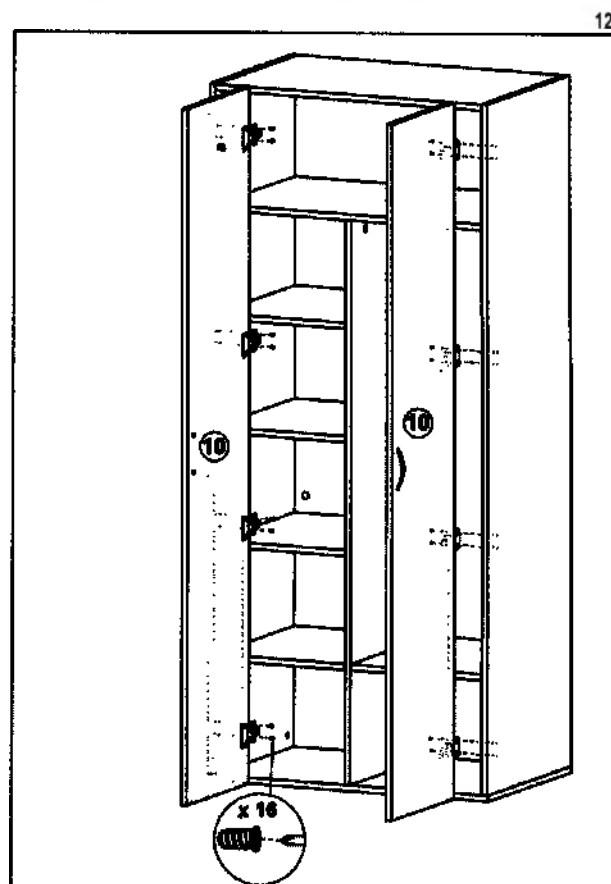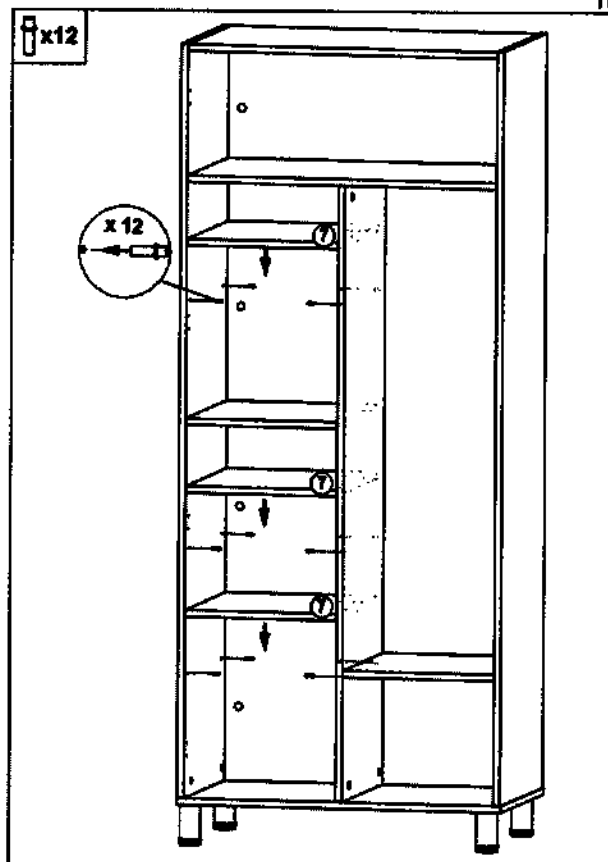









3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S.

MF NH-2S


Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF NH-2S	718	423	515	16.2

*- допустимое отклонение +/- 10%


Инструкция по сборке.

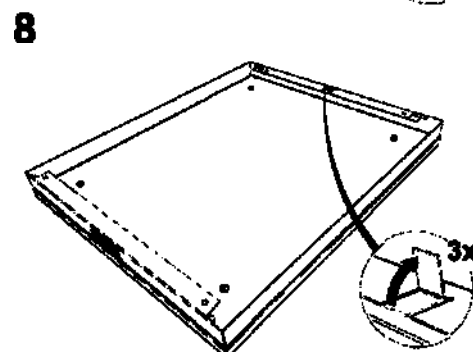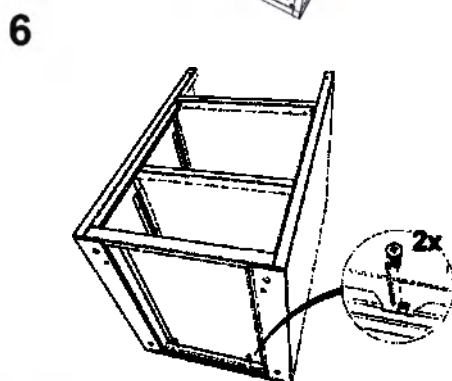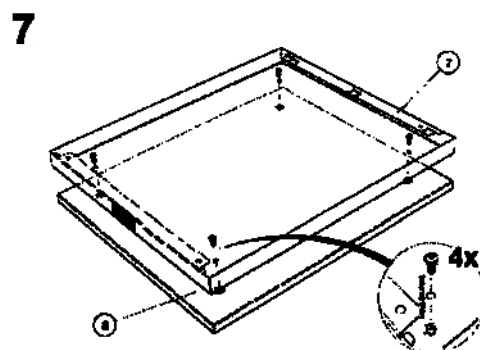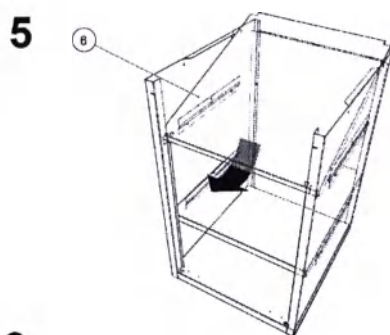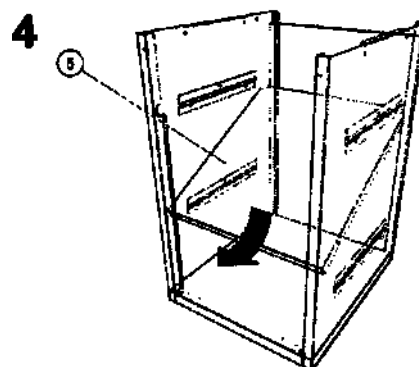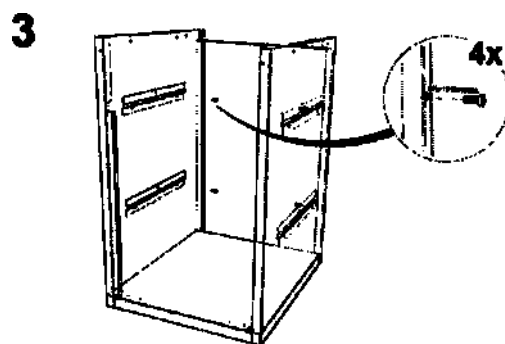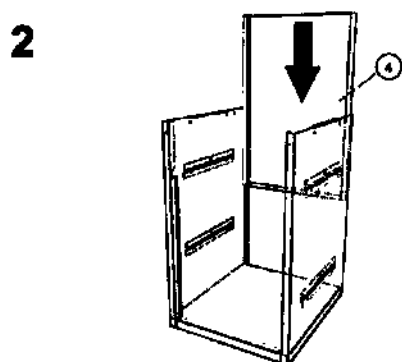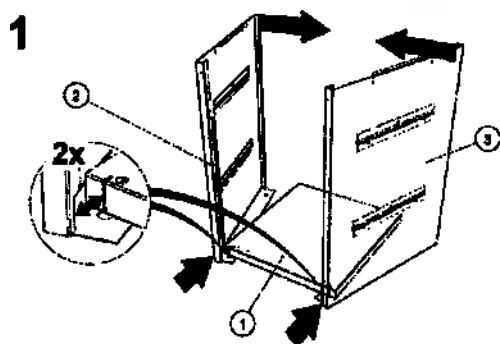


9

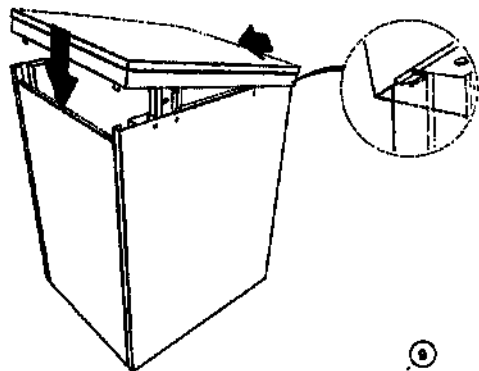


11

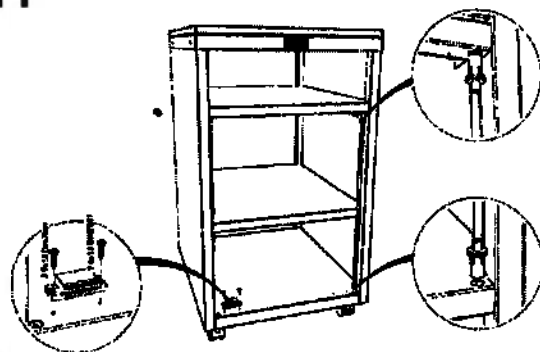


10

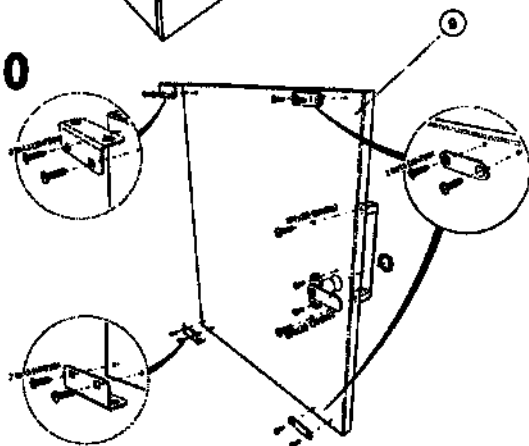

12

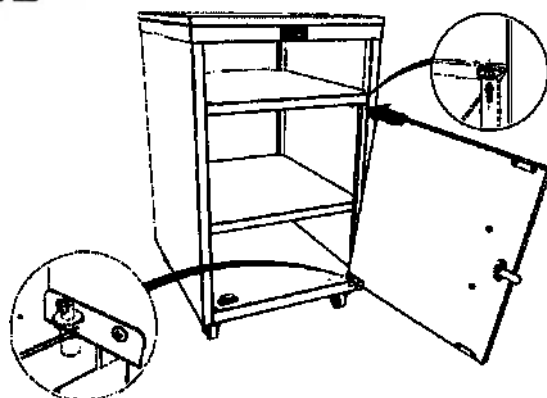

13

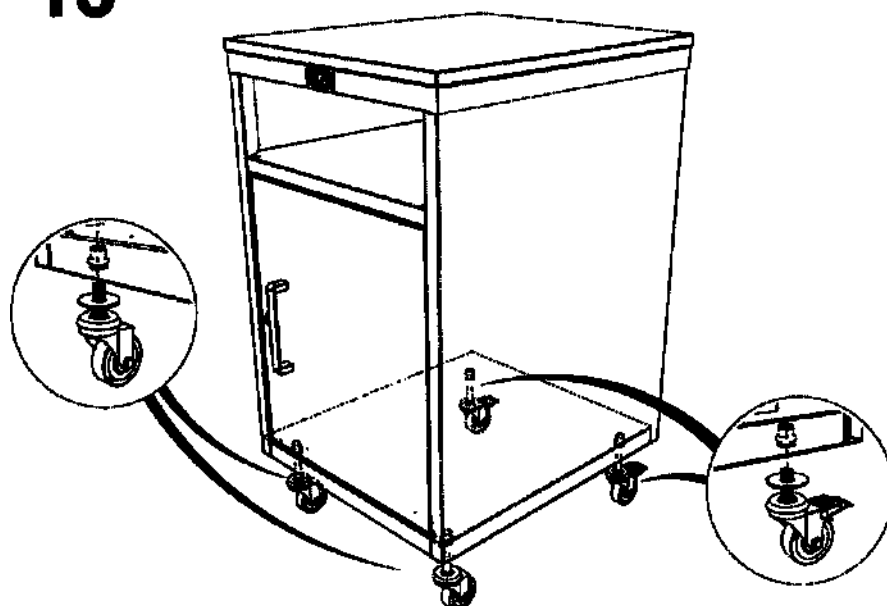


MF NH-3S

Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF NH-3S	720	420	490	20


*- допустимое отклонение +/- 10%

Инструкция по сборке


1

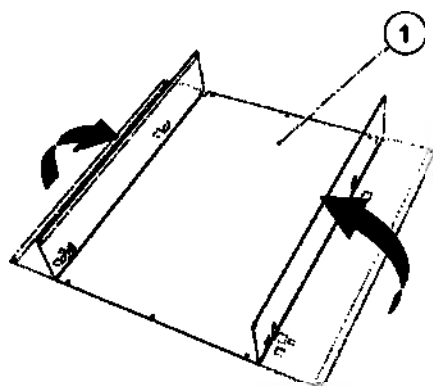


2







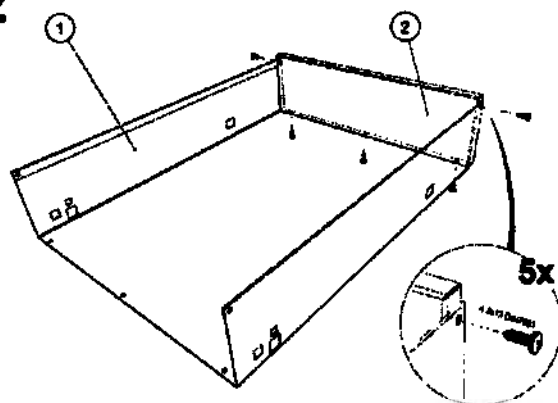


3

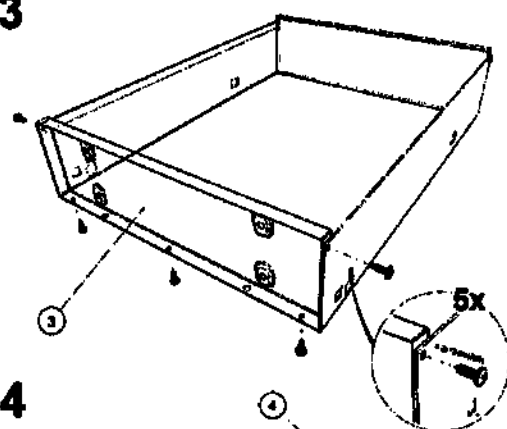


4

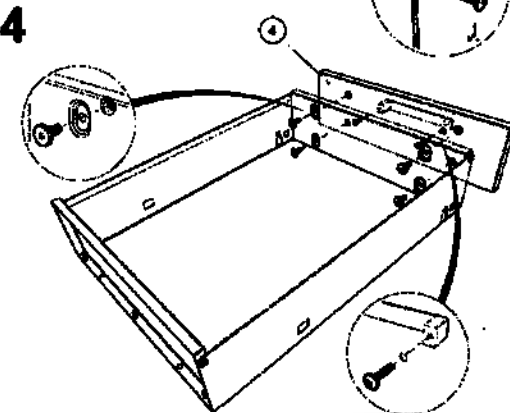


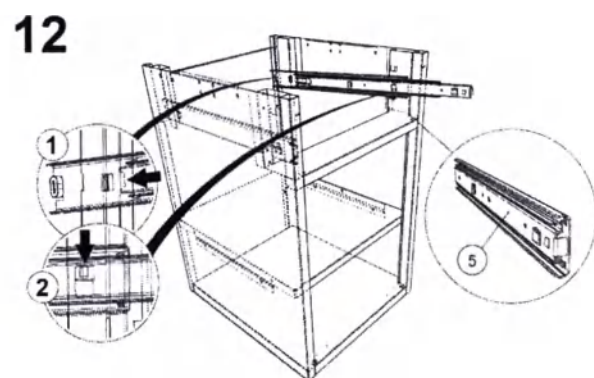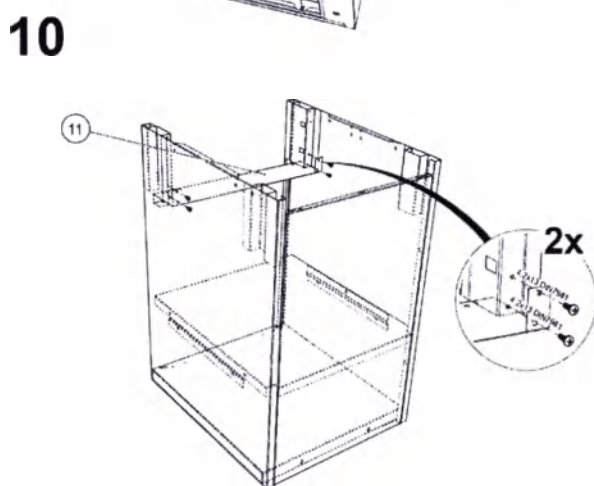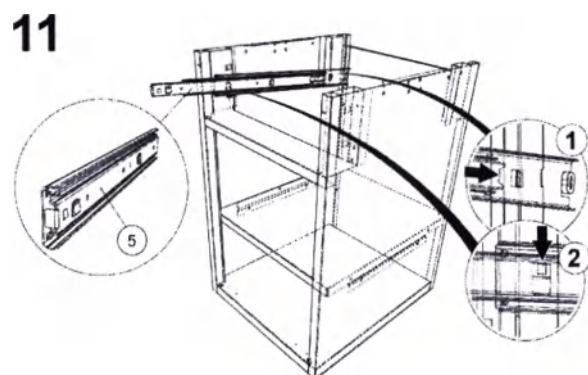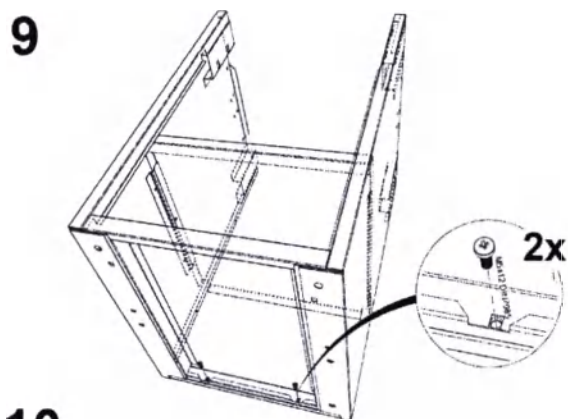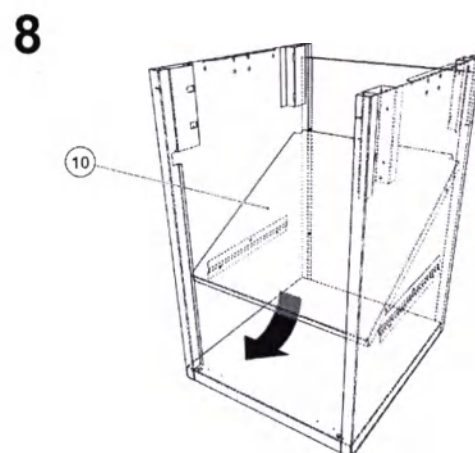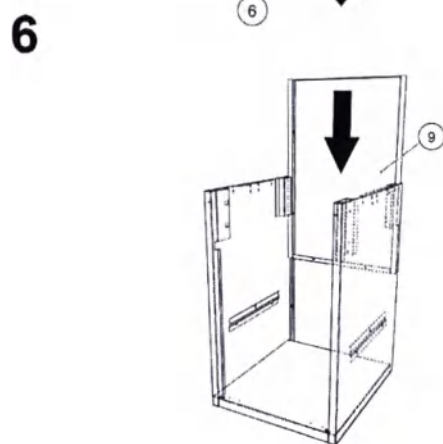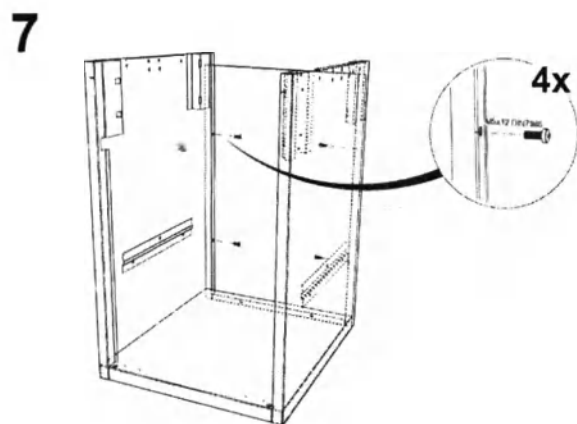


13

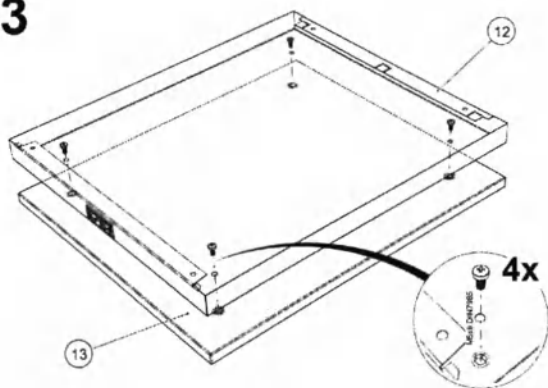


15

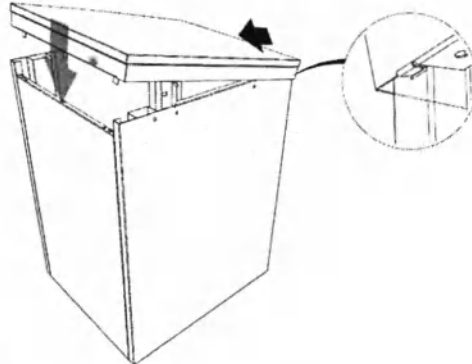


14

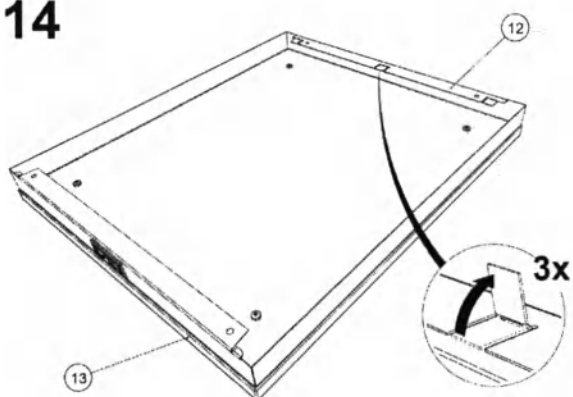


16

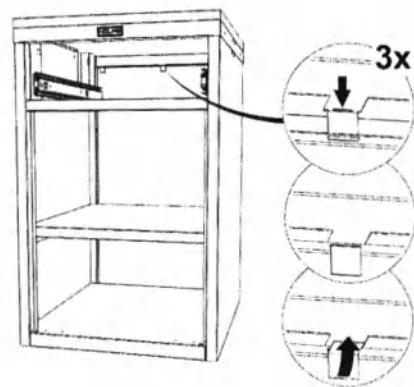


17

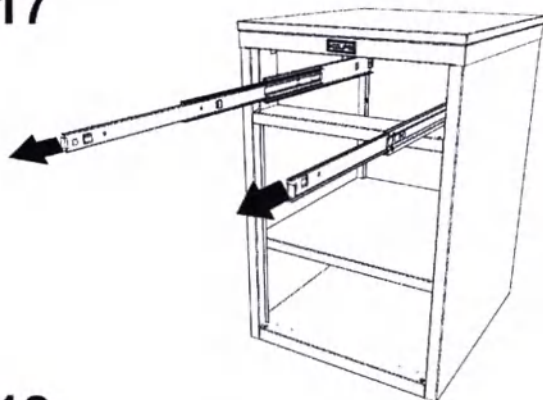


19

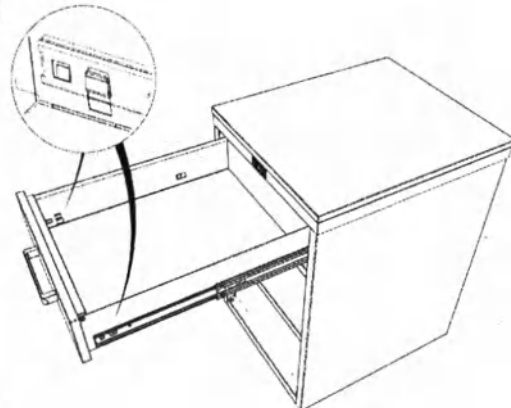


18

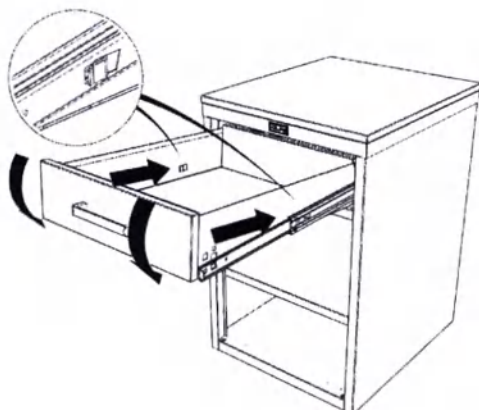


20

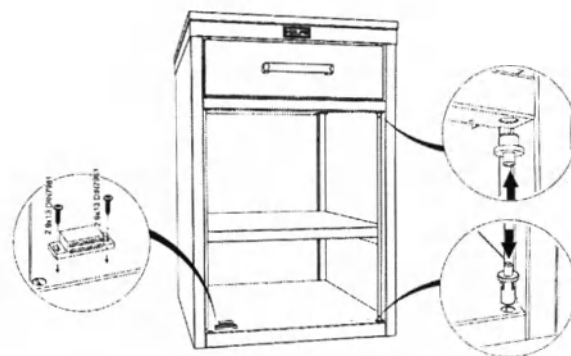


21

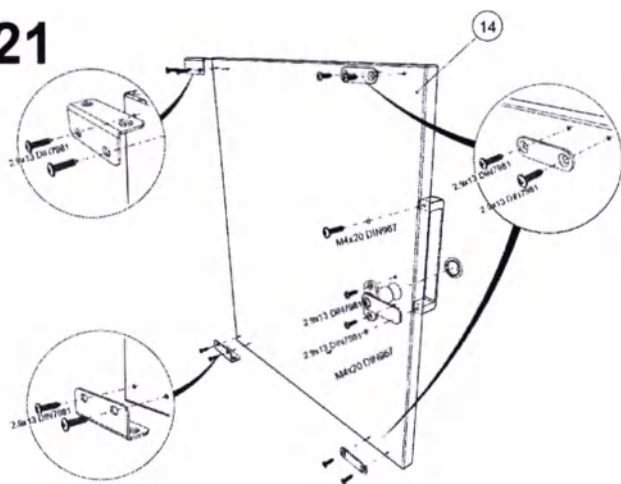

22

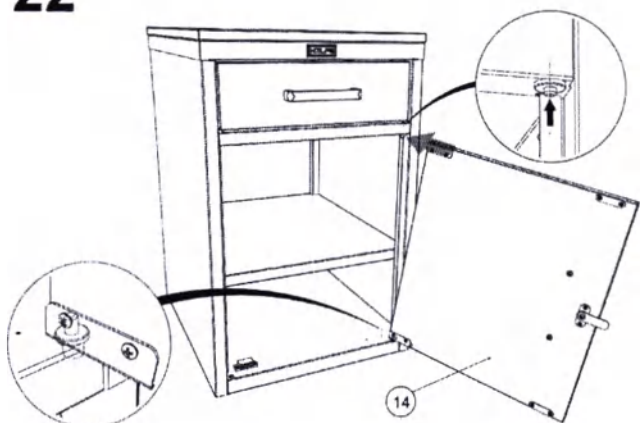

23

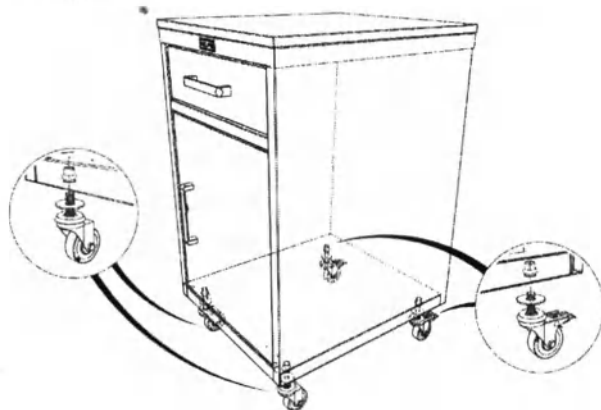

03007-01 РЭ

Лист

27


MF NH-5S

Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF NH-5S	718	423	515	25,9


*- допустимое отклонение +/- 10%

Инструкция по сборке


1

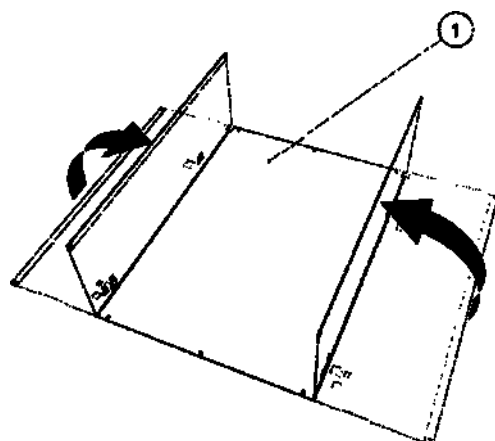


3

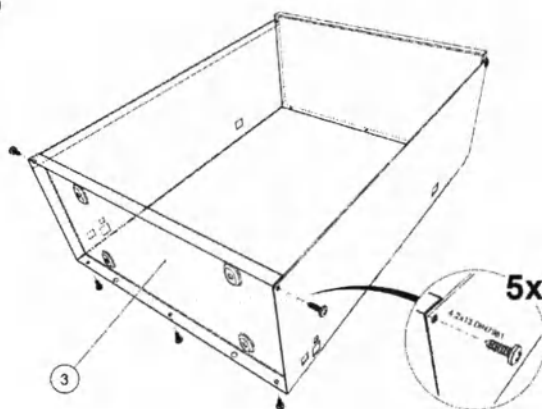


2

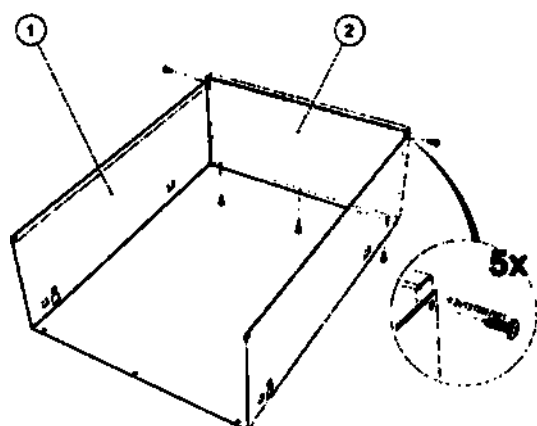


4

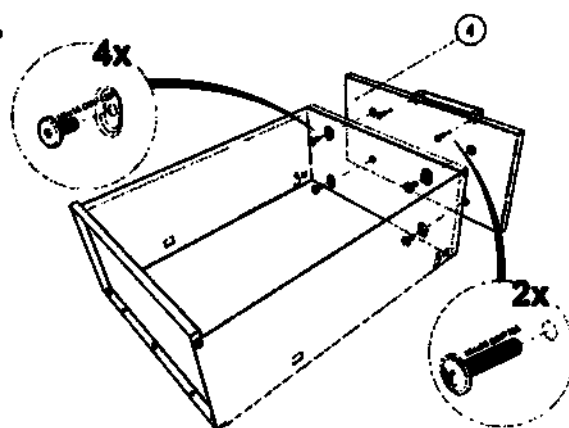


5

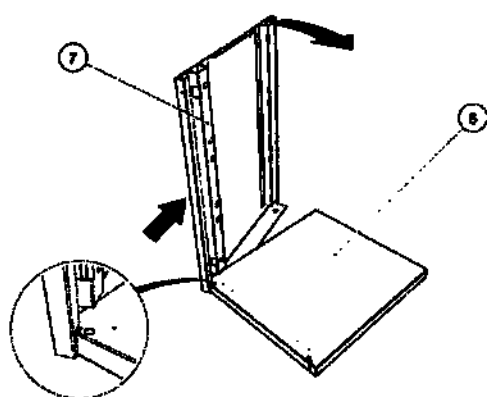


6

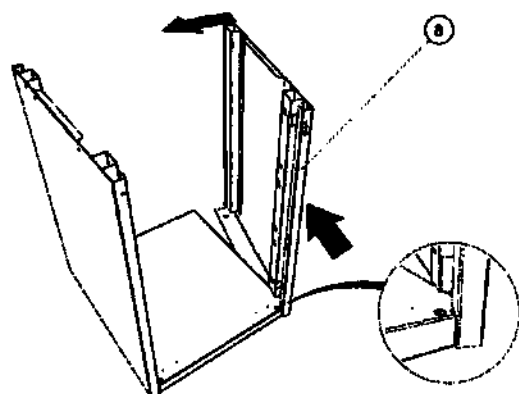


7

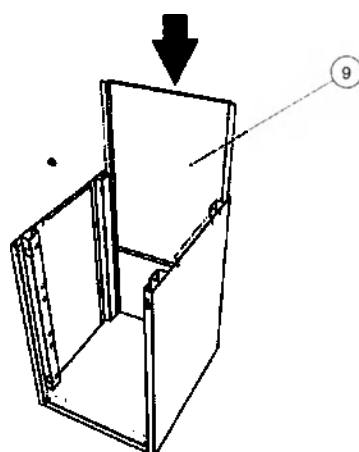


8

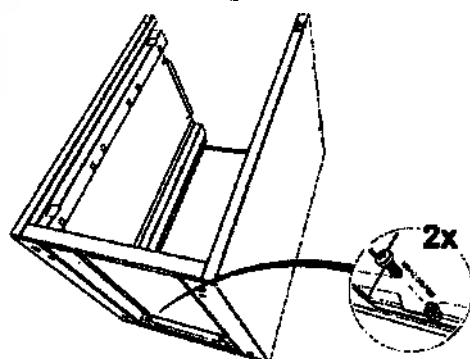


9

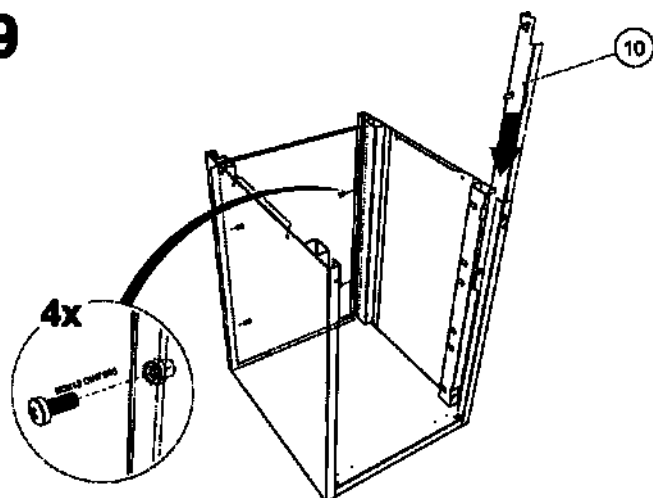


11

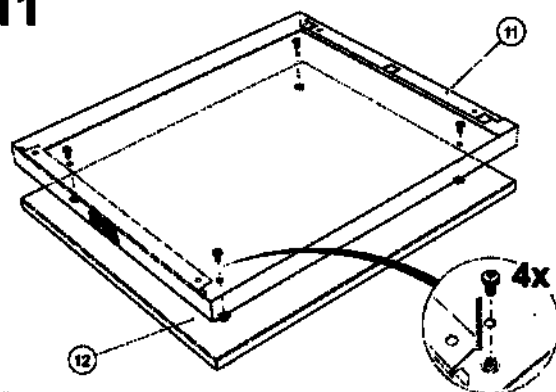


10

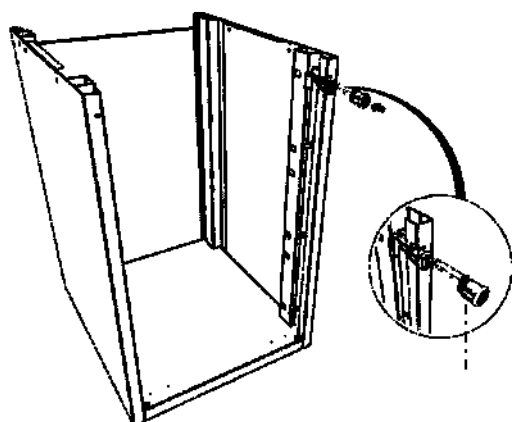


12

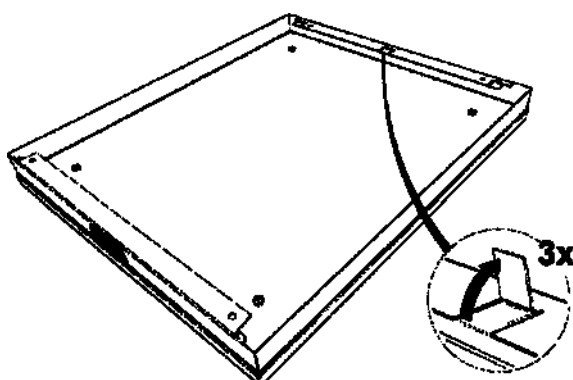


13

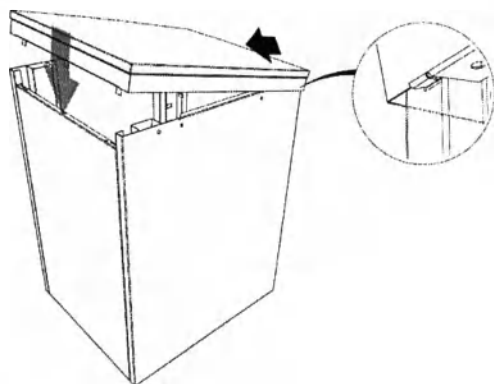


15

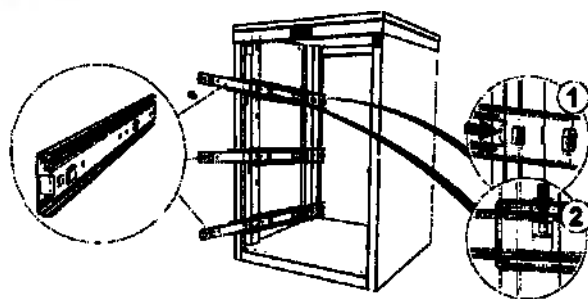


14

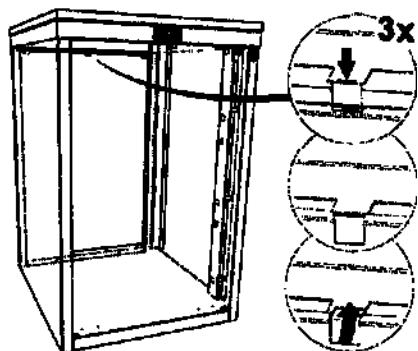


16

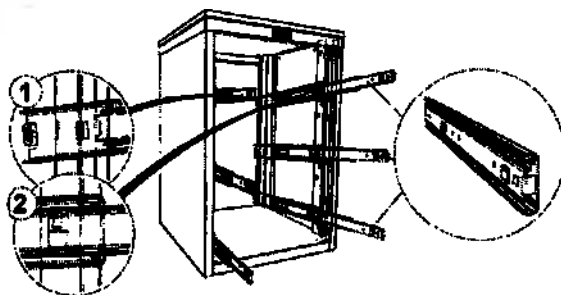


17

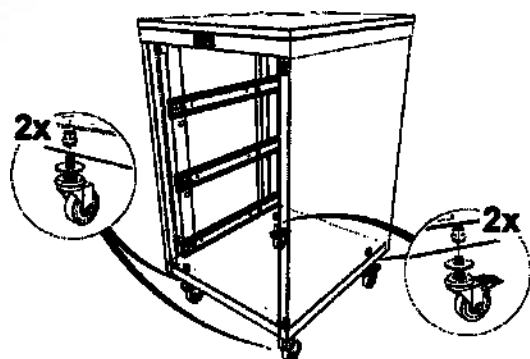


19

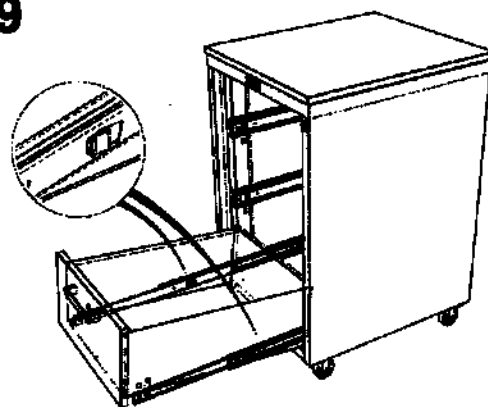


18

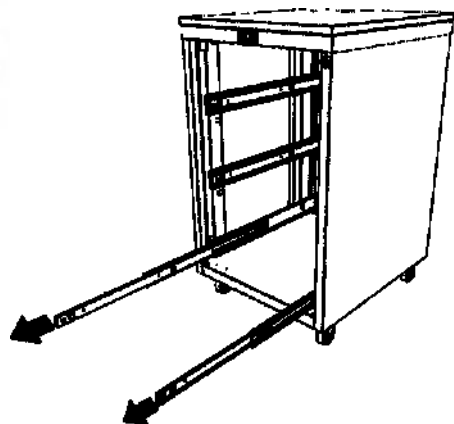

20

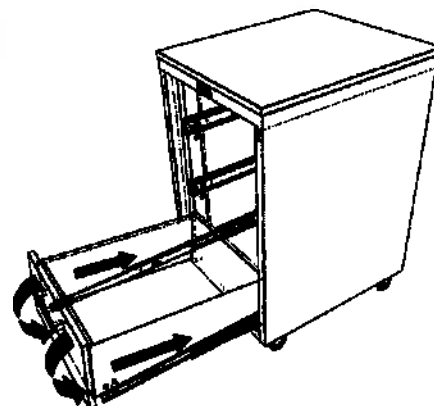

21

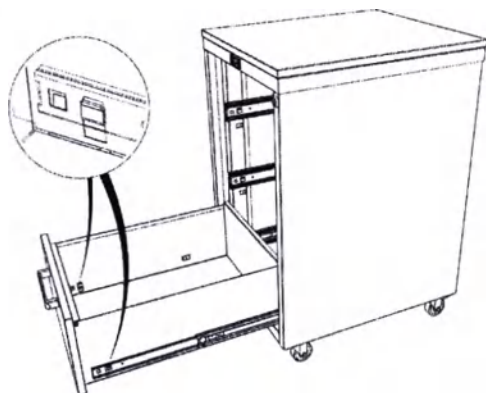

22



03007-01 РЭ

Лист

31


5. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2,
TD 85S

MF TD-100.1




Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF TD-100.1	1000	1000	700	36.78

*- допустимое отклонение +/- 10%

Инструкция по сборке.

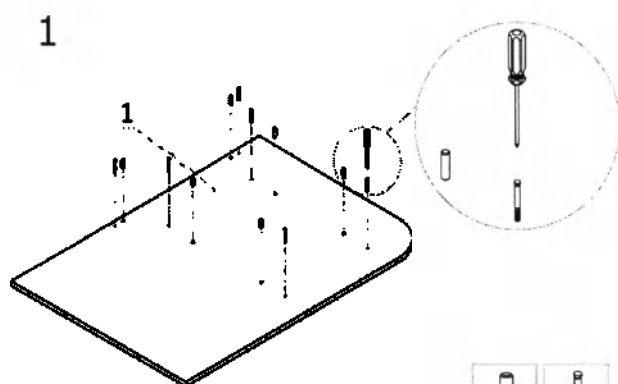

*- Опора левая собирается аналогично данной схеме.

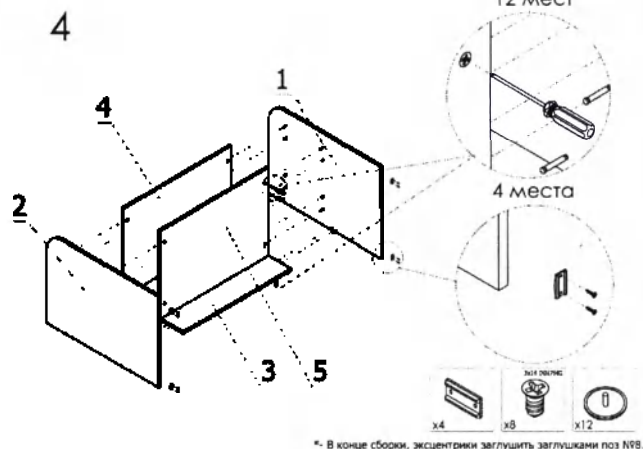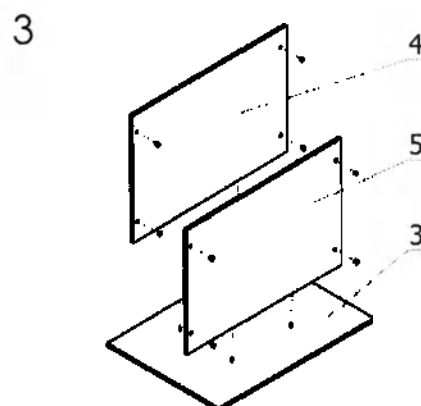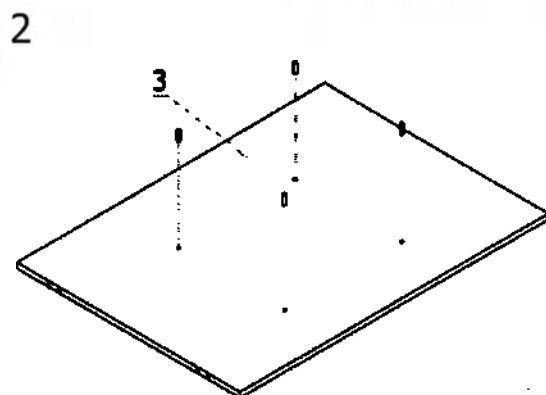

*- В конце сборки, эксцентрики заглушить заглушками поз №8.

6. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6.


MF NH-4S

Модель	 mm	 mm	 mm	 Kg*
MF NH-4S	860...1150	650	490	23.1
MF NH-4	860...1150	455	452	28
MF NH-6	860...1150	455	452	25


*- допустимое отклонение +/- 10%

Инструкция по сборке.


1

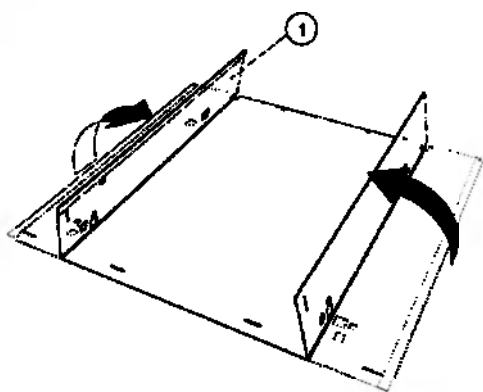


3

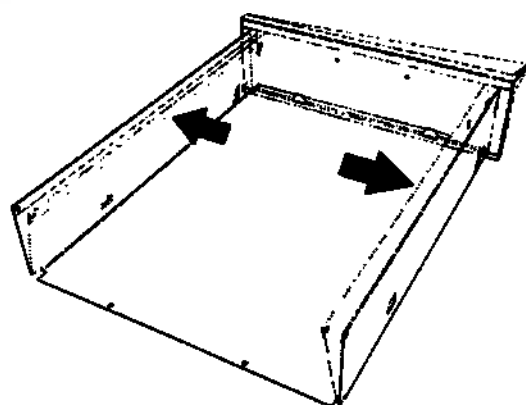


2

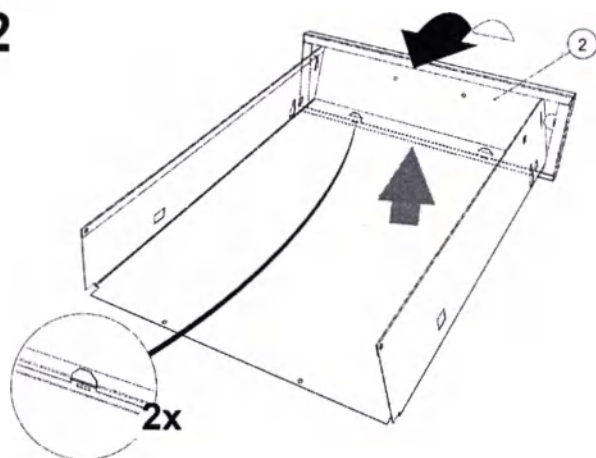


4

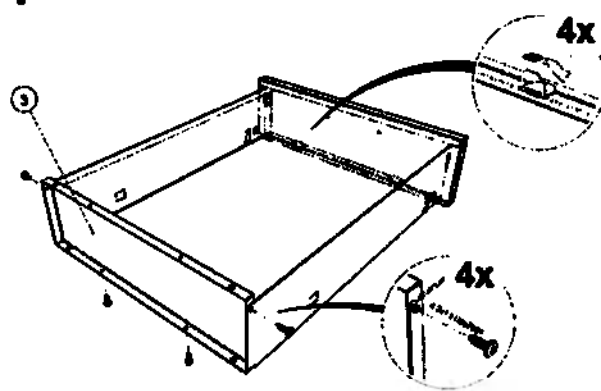


5

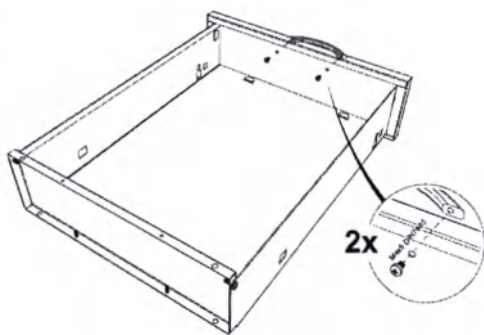


7

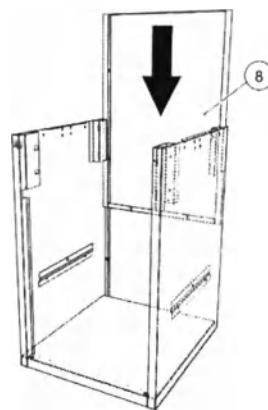


6

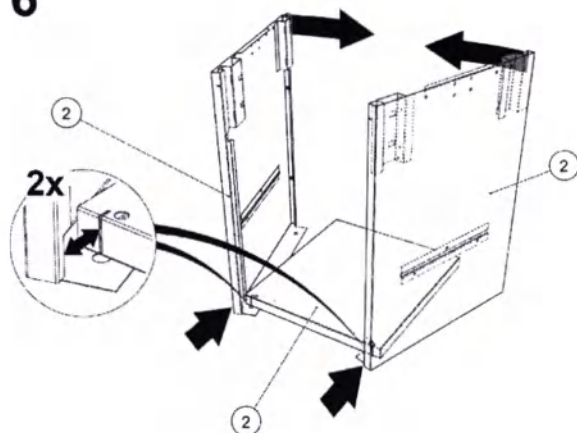


8

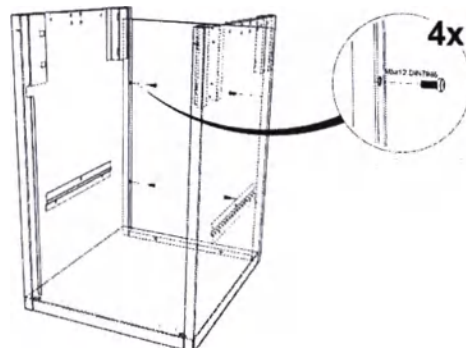


9

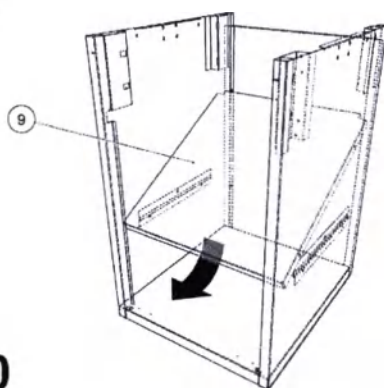


11

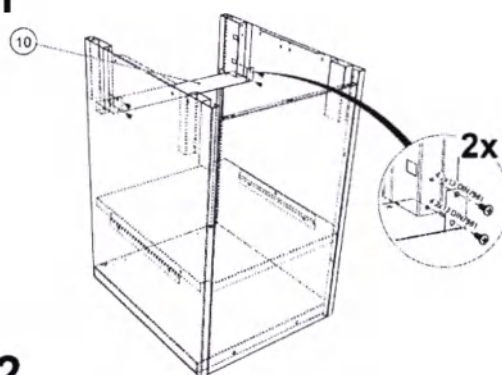


10

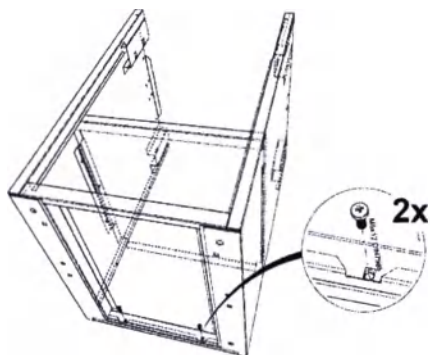


12

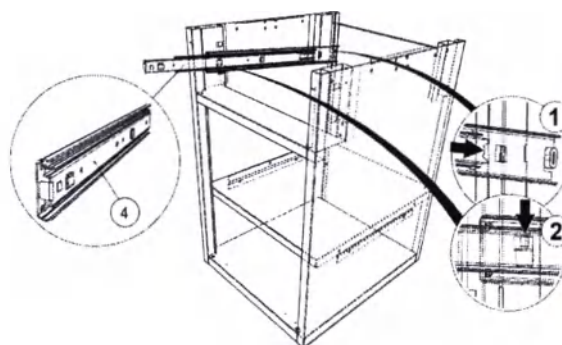


13

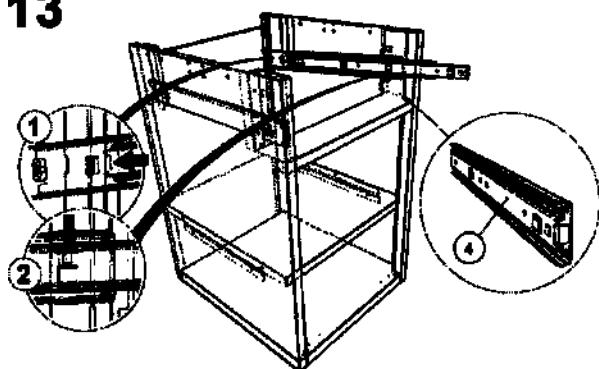


15

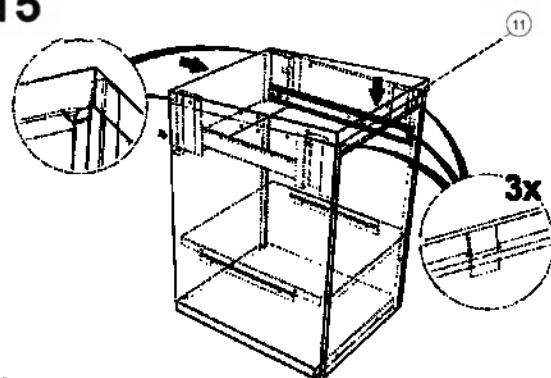


14

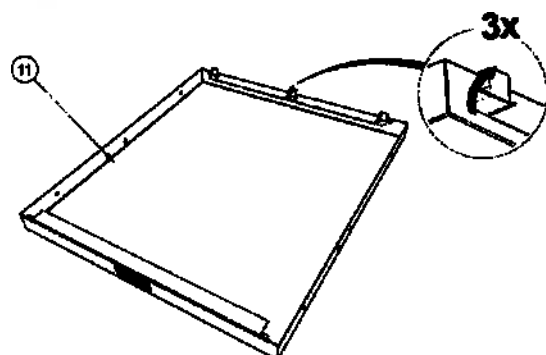


16

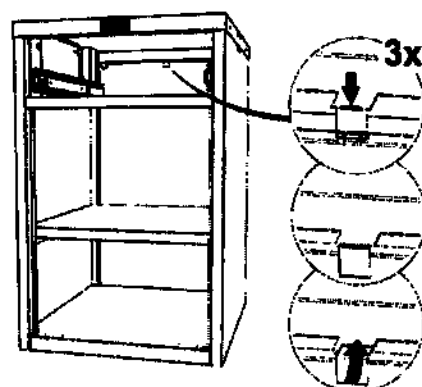


17

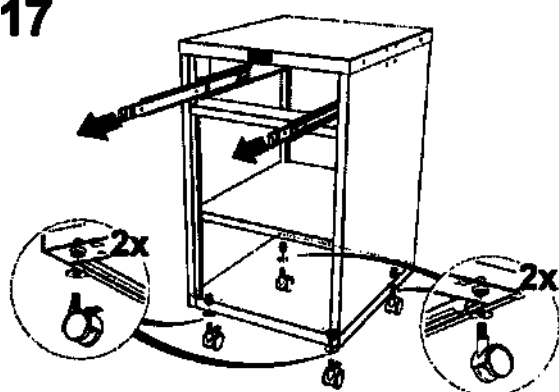


19

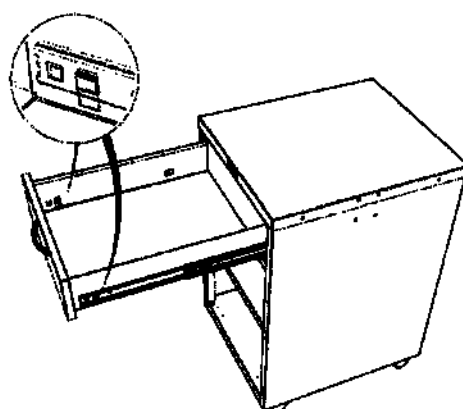


18

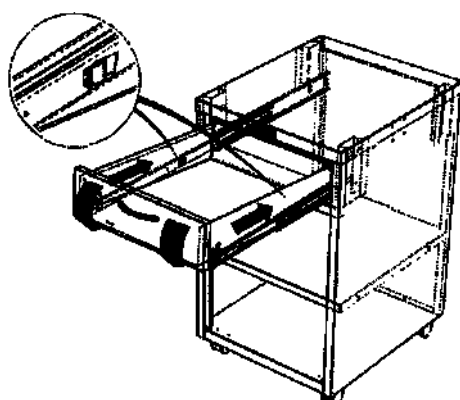


20

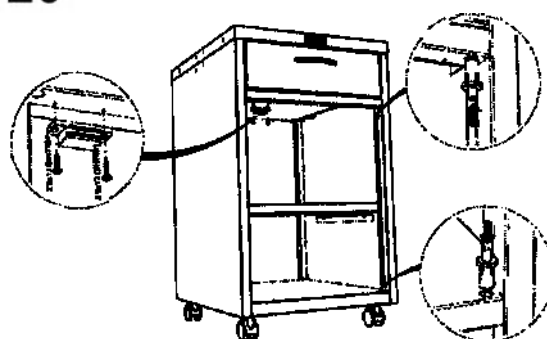


21

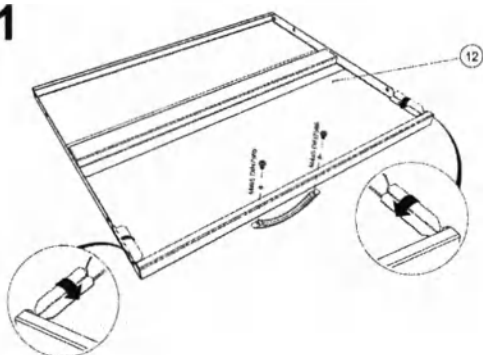


23

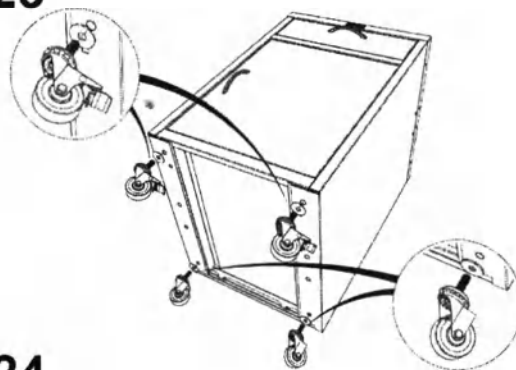


22

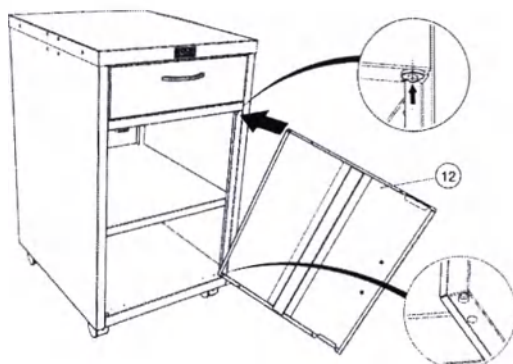


24

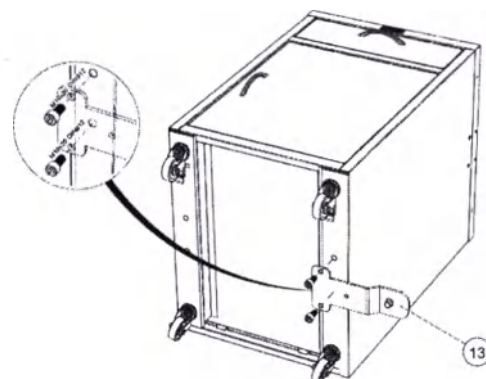


25

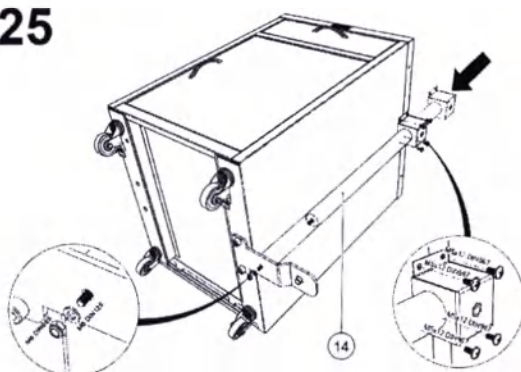


27

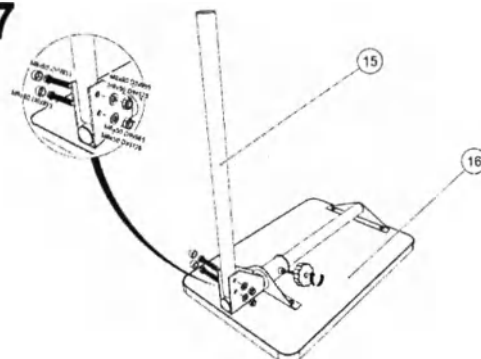

26

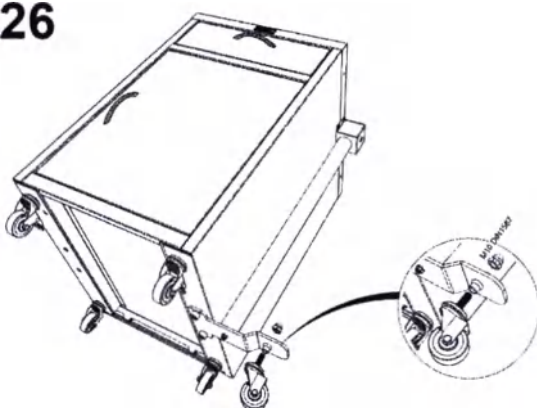

28

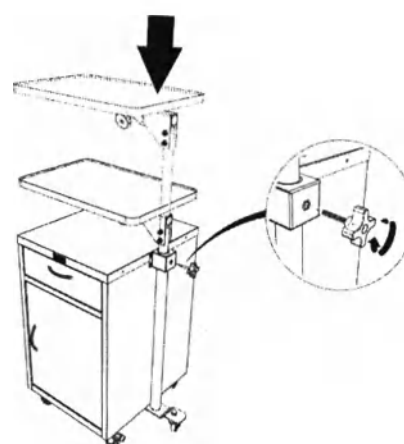



14 ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шкаф для палат МР, в вариантах исполнения: ЛН-1 1940.1

ЛН-1 1940.1

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно	1	6	Несущая полка	1
2	Стенка левая	1	7	Полка	4
3	Стенка правая	1	8	Крышка	1
4	Дверь	1	9	Комплект фурнитуры	1
5	Стенка задняя	1			

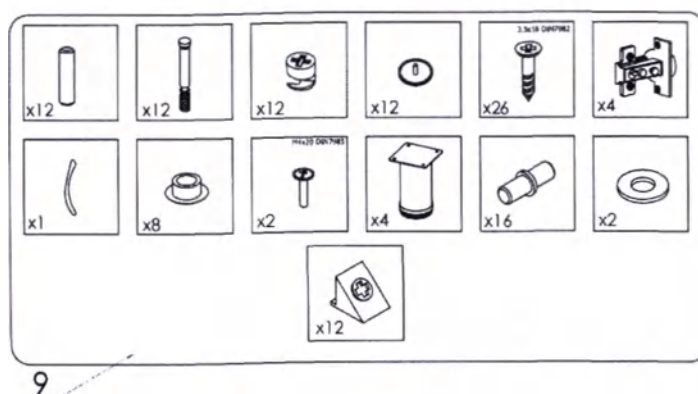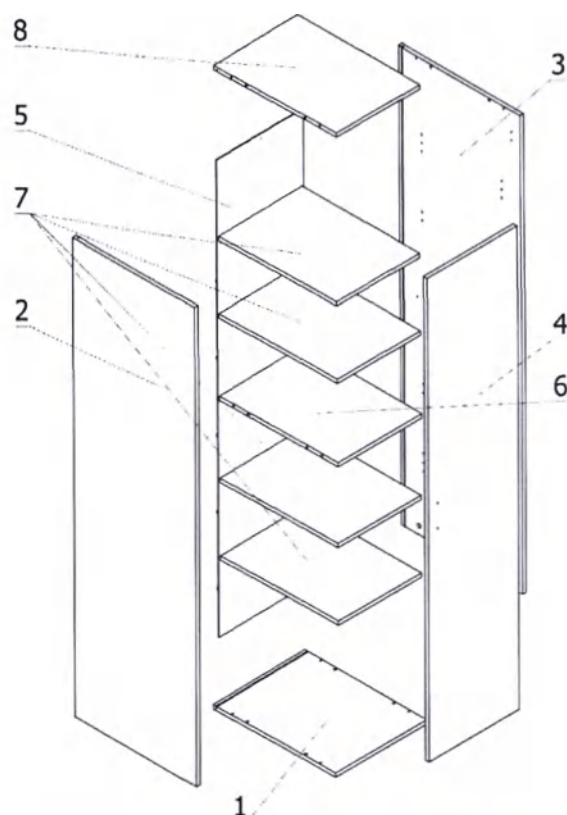

9

03007-01 РЭ

Лист



37

2. Шкаф для палат МР двухстворчатый, в вариантах исполнения: ЛН-2

1980

ЛН-2 1980

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно	1	7	Несущая полка малая	2
2	Стенка левая	1	8	Полка	3
3	Стенка правая	1	9	Крышка	1
4	Дверь	2	10	Стенка средняя	1
5	Стенка задняя	2	11	Комплект фурнитуры	1
6	Несущая полка	1			

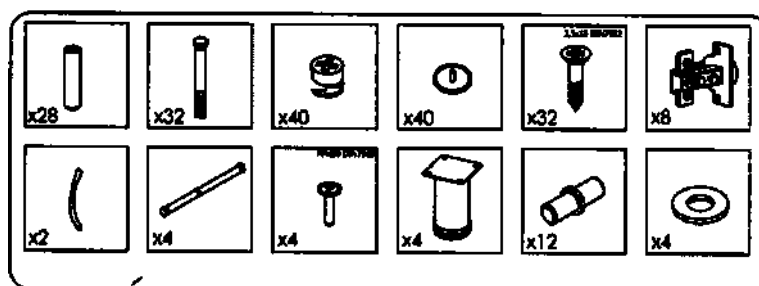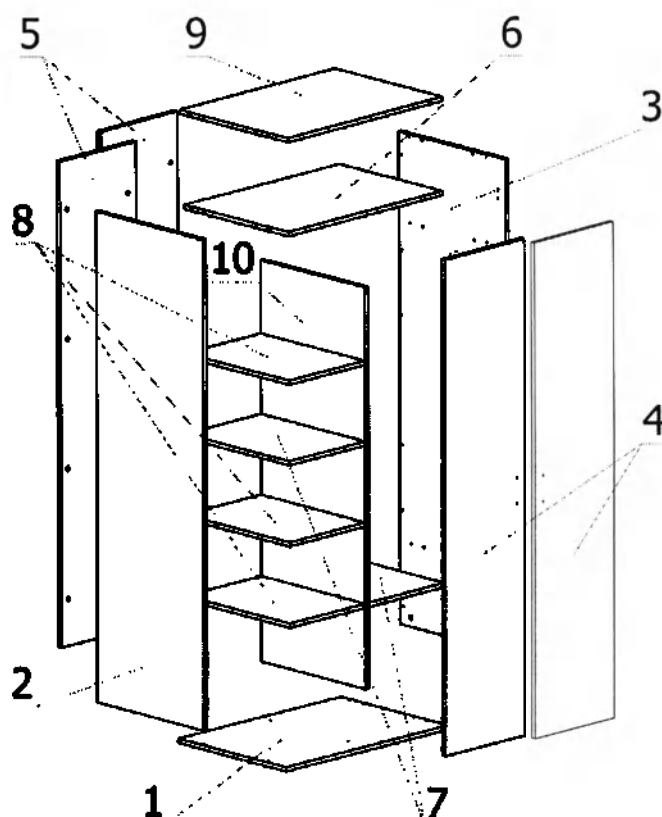


11

4. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S.

MF NH-2S

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Основание	1	6	Разделитель	1
2	Стенка боковая левая	1	7	Крыша	1
3	Стенка боковая правая	1	8	Топ (ЛДСП)	1
4	Стенка задняя	1	9	Дверца (ЛДСП)	1
5	Полка	1	10	Комплект фурнитуры	1

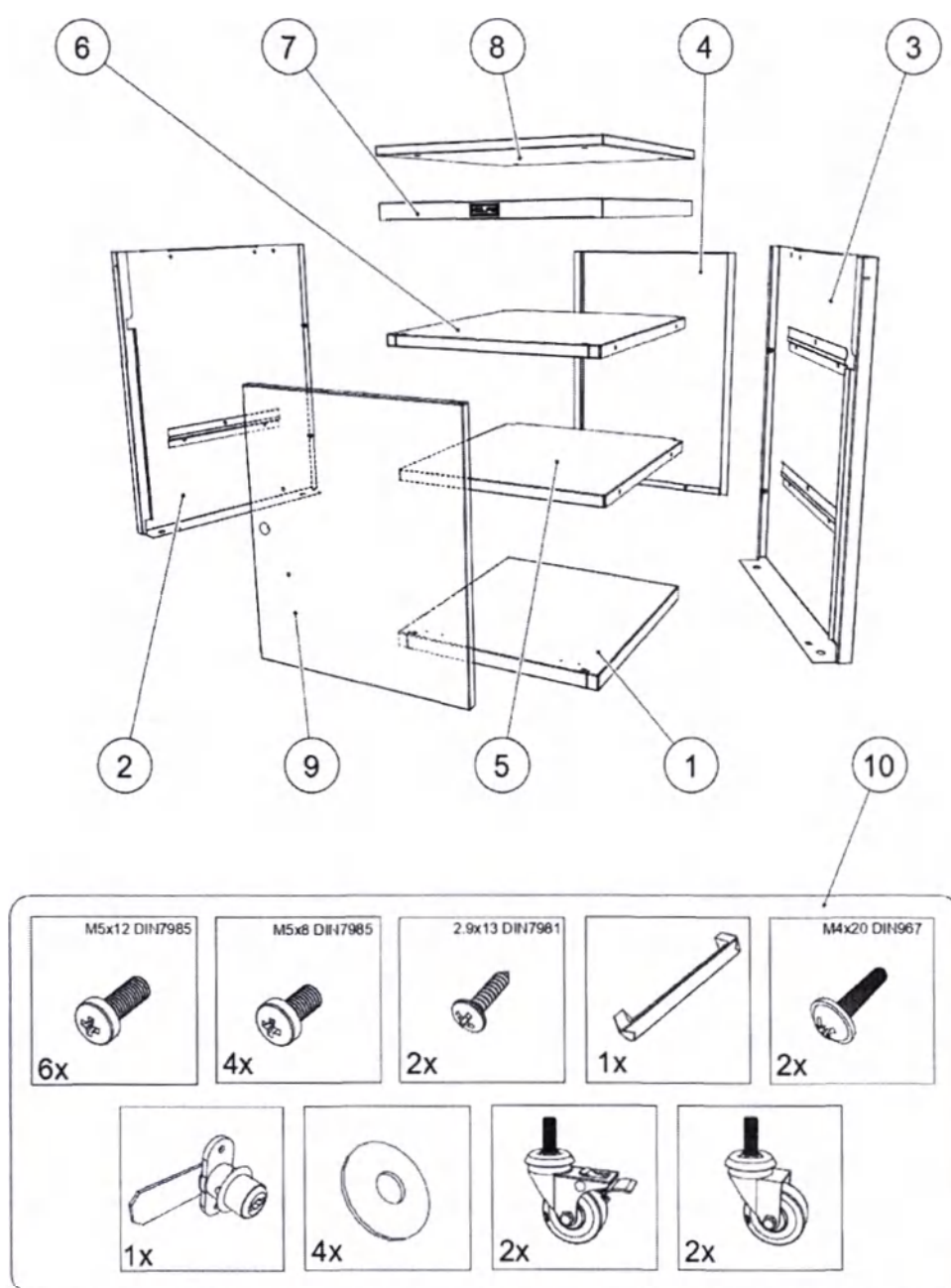


03007-01 РЭ

Лист


39

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно ящика	1	9	Стенка задняя	1
2	Задняя стенка ящика	1	10	Полка	1
3	Передняя стенка ящика	1	11	Перемычка	1
4	Фасад ящика (ЛДСП)	1	12	Крыша	1
5	Комплект направляющих	1	13	Топ (ЛДСП)	1
6	Основание	1	14	Дверца (ЛДСП)	1
7	Стенка боковая левая	1	15	Комплект фурнитуры	1
8	Стенка боковая правая	1			

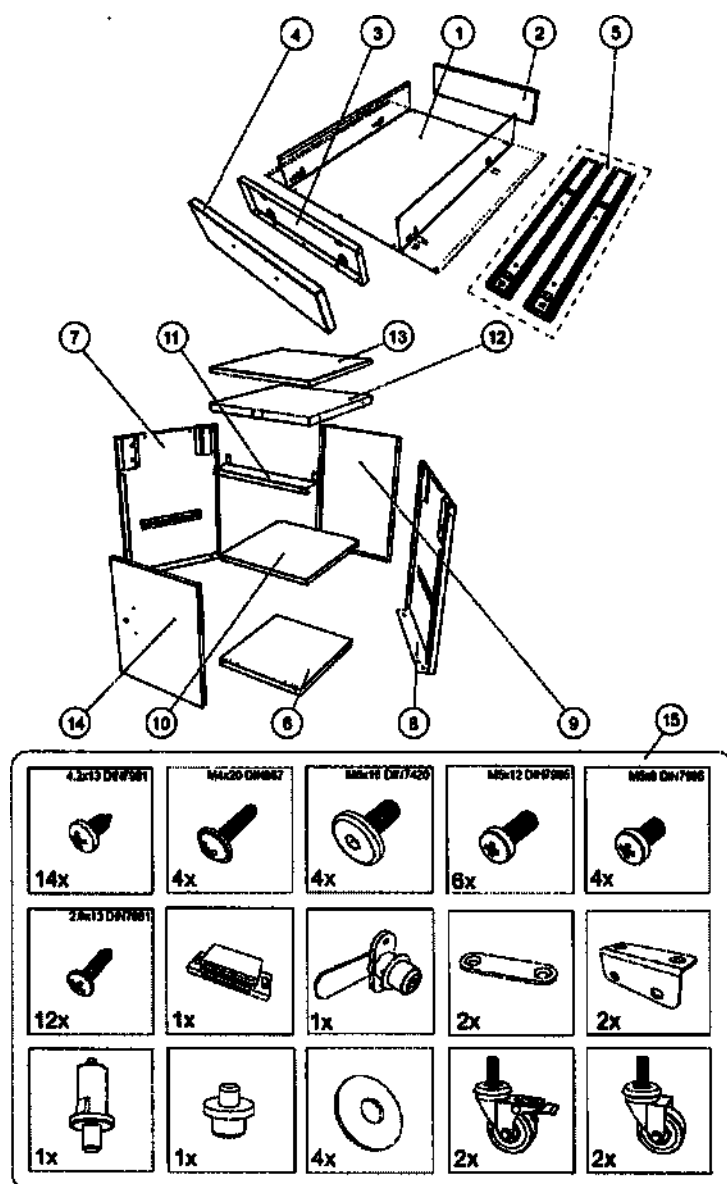

MF NH-5S

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно ящика	3	8	Стенка боковая правая	1
2	Передняя стенка ящика	3	9	Стенка задняя	1
3	Задняя стенка ящика	3	10	Штанга	1
4	Фасад ящика (ЛДСП)	3	11	Крыша	1
5	Комплект направляющих	3	12	Топ (ЛДСП)	1
6	Основание	1	13	Комплект фурнитуры	1
7	Стенка боковая левая	1			


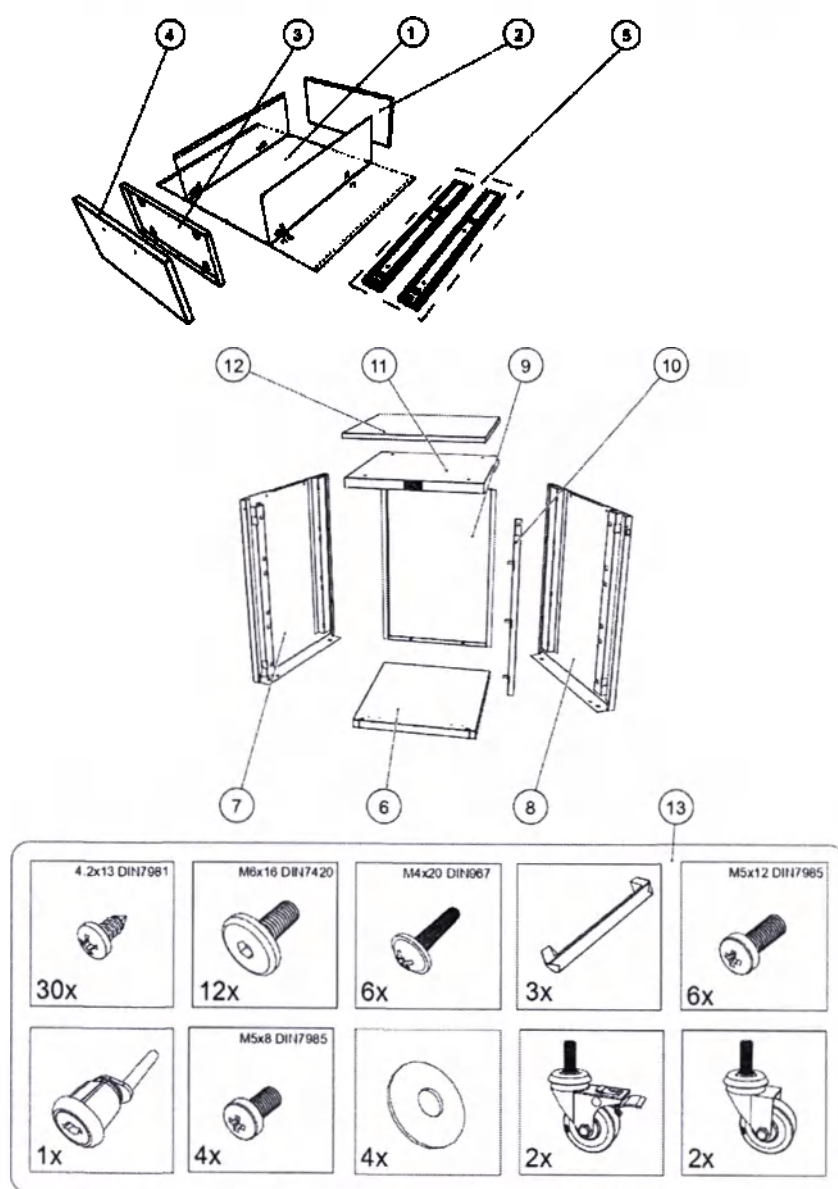


5. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S.

TD 100.1



№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка правая	1	5	Полка	1
2	Стенка левая	1	6	Комплект фурнитуры	1
3	Стенка задняя	1	7	Матрац	1
4	Столешница	1			

Позиция №7 на схеме не изображена.

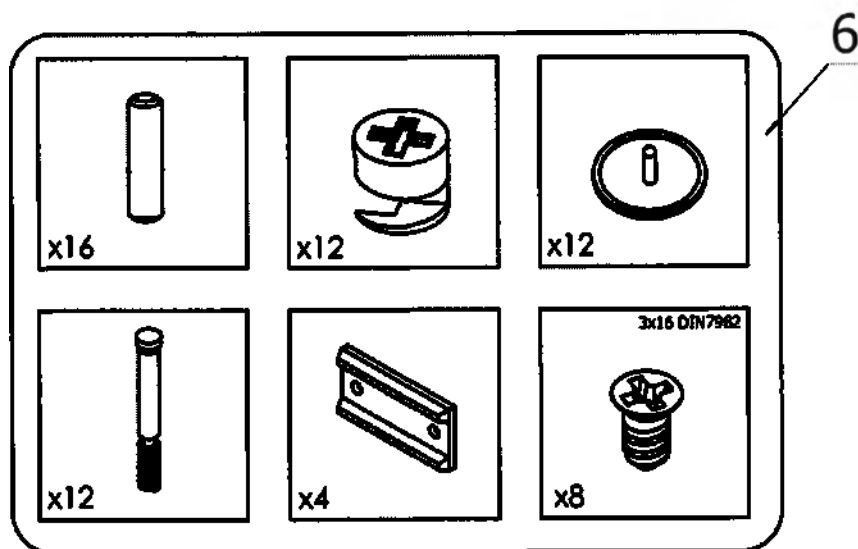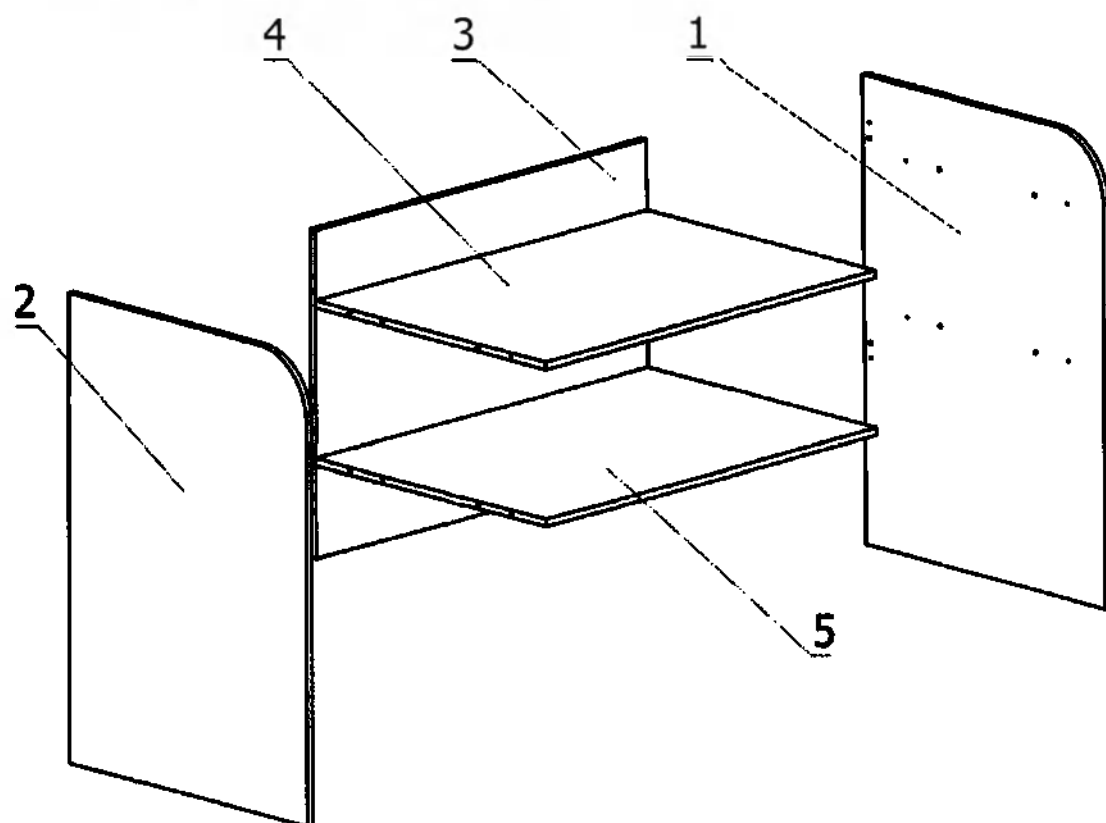



№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка правая	1	5	Полка	1
2	Стенка левая	1	6	Комплект фурнитуры	1
3	Стенка задняя	1	7	Матрац	1
4	Столешница	1	8	Дверь	2

Позиция №7 и №8 на схеме не изображена.

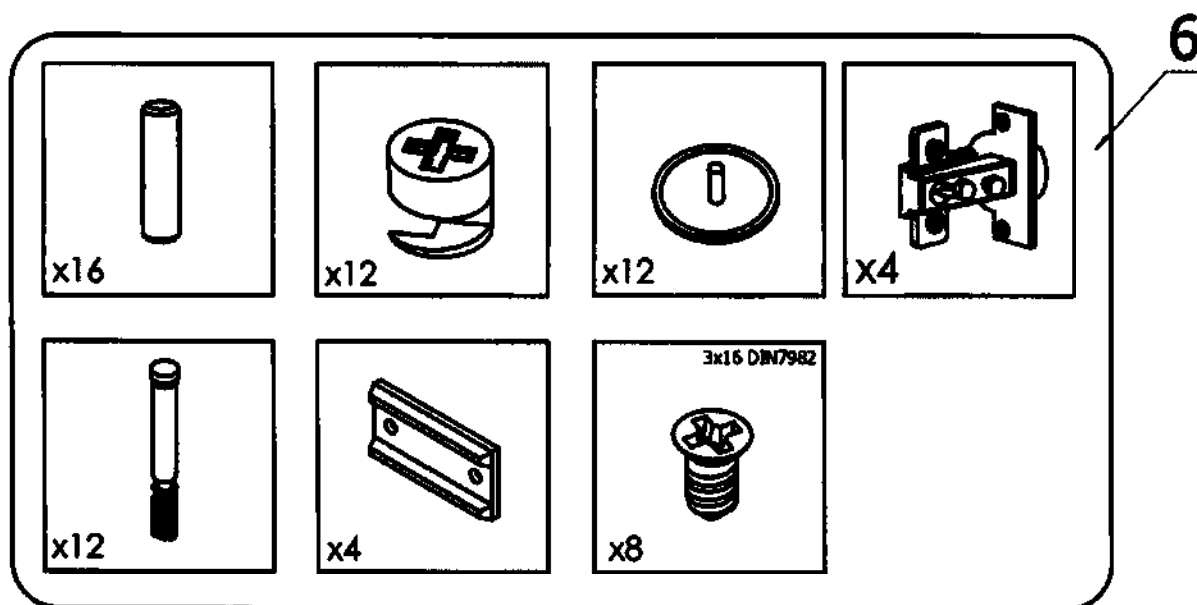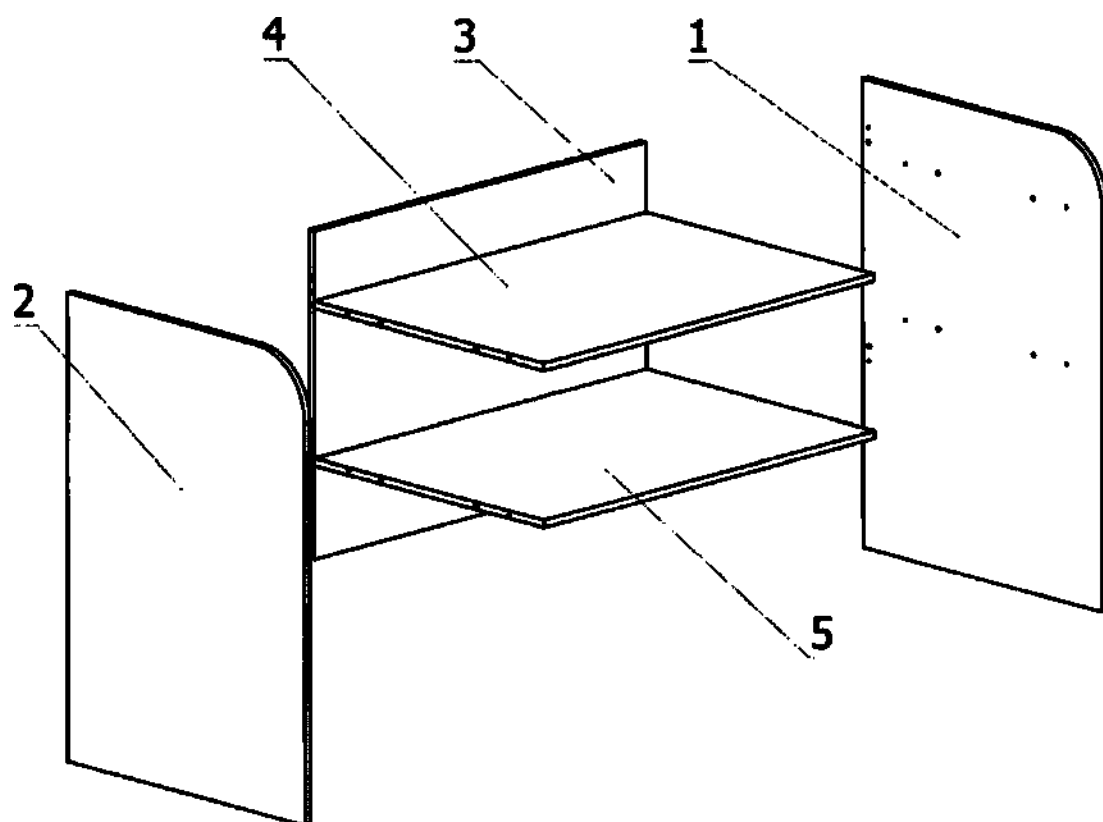

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Каркас	1	4	Столешница	1
2	Боковины	2	5	Полка	1
3	Стенка задняя	1	6	Комплект фурнитуры	1


Позиция №6 на схеме не изображена

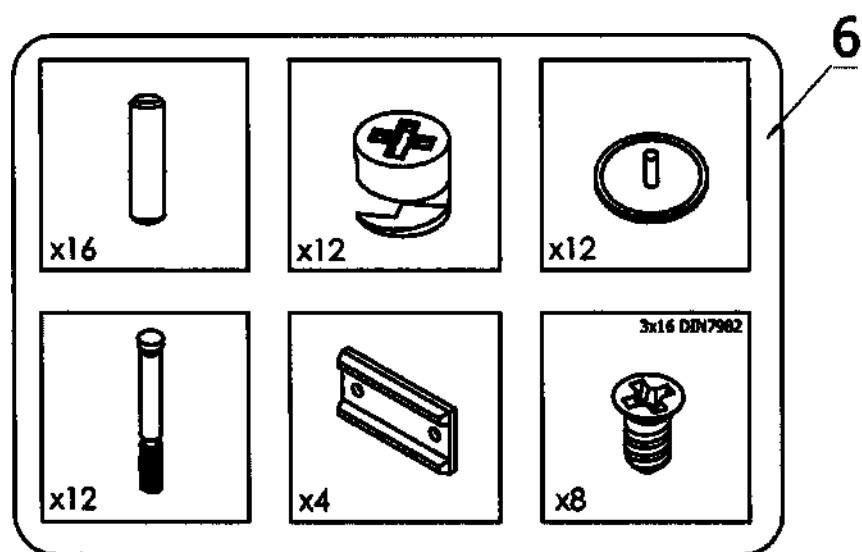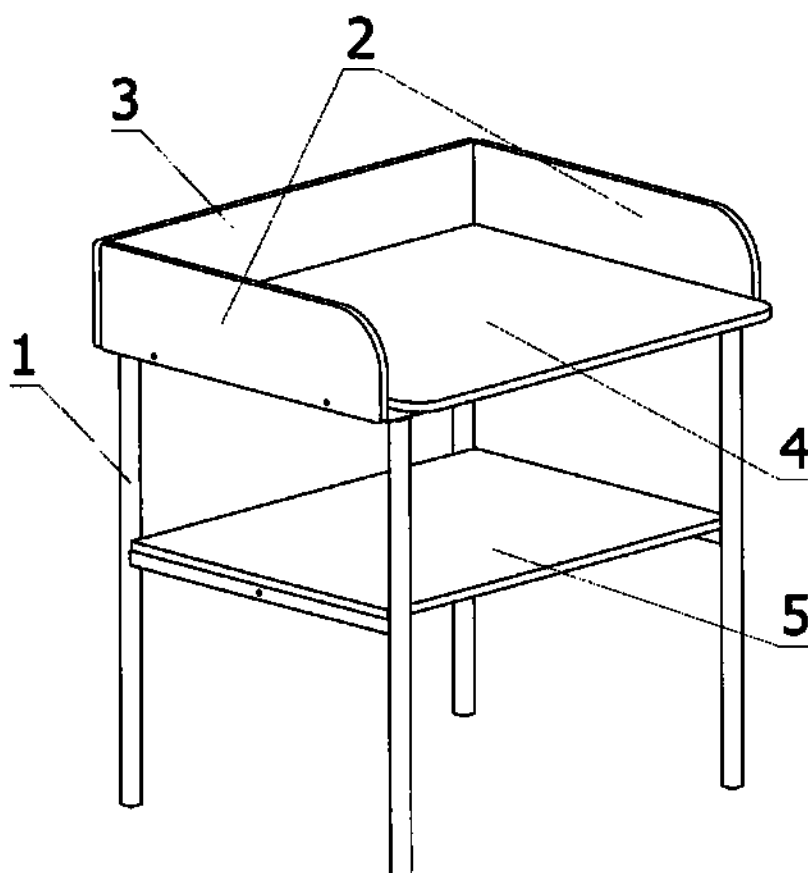

6. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6.

NH-4S



№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно ящика	1	10	Перемычка	1
2	Передняя стенка ящика	1	11	Крыша	1
3	Задняя стенка ящика	1	12	Дверца	1
4	Комплект направляющих	1	13	Кронштейн	1
5	Дно	1	14	Стойка	1
6	Стенка боковая левая	1	15	Шток столика	1
7	Стенка боковая правая	1	16	Столик	1
8	Стенка задняя	1	17	Комплект фурнитуры	1
9	Полка внутренняя	1			

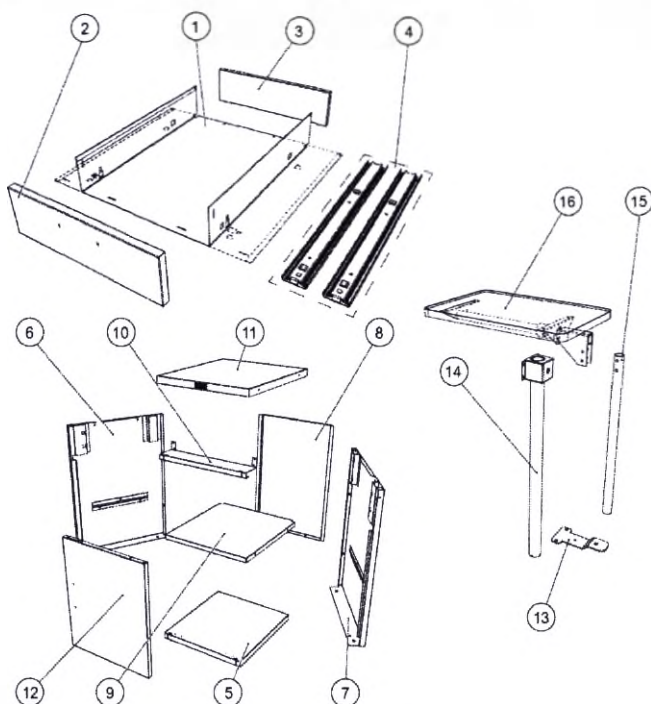

4 2x13 DIN7981 8x	M4x5 DIN7985 4x	2x	M5x12 DIN7985 6x	2x	4x	1x
2 9x13 DIN7981 2x	2x	3x	M10x20 DIN912 2x	M6 DIN985 1x	M6 DIN125 1x	M5x12 DIN967 4x
M10 DIN1687 1x	M8 DIN985 2x	M6x50 DIN933 2x	M8 DIN125 2x	2x	1x	1x



№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно ящика	1	8	Стенка задняя	1
2	Передняя стенка ящика	1	9	Полка внутренняя	1
3	Задняя стенка ящика	1	10	Крыша	1
3.1	Стенка левая ящика	1	11	Дверца	1
3.2	Стенка правая ящика	1	12	Кронштейн	1
4	Комплект направляющих	1	13	Стойка	1
5	Дно	1	14	Шток столика	1
6	Стенка боковая левая	1	15	Столик	1
7	Стенка боковая правая	1	16	Комплект фурнитуры	1

Позиция №4 в комплекте фурнитуры.

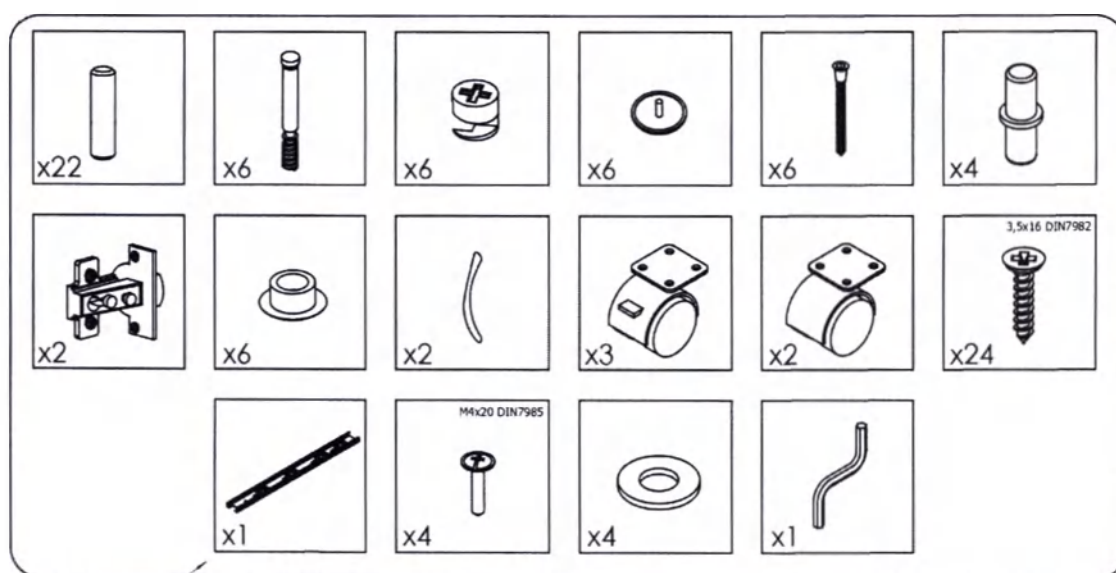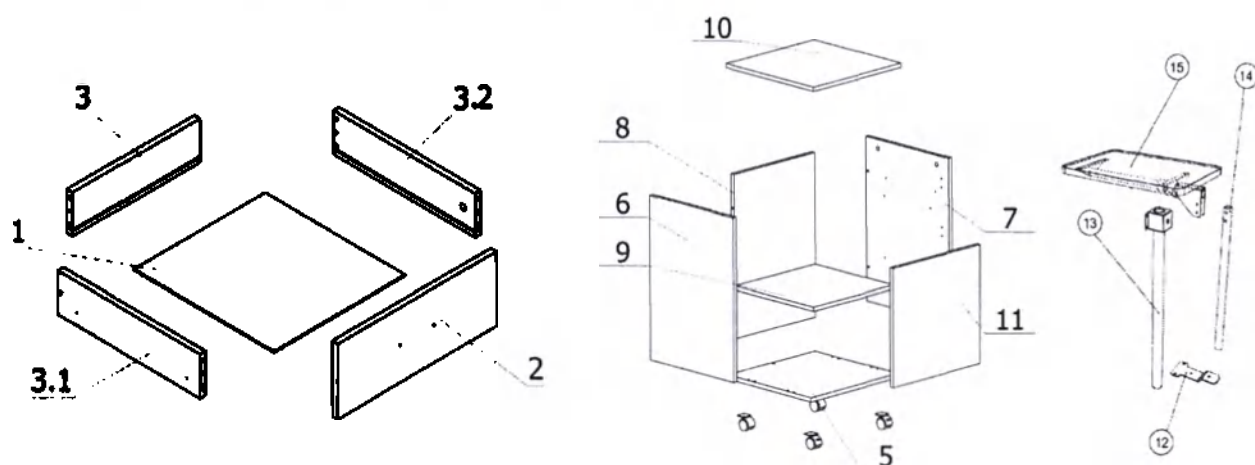

16

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно	1	7	Дверца	1
2	Стенка боковая левая	1	8	Кронштейн	1
3	Стенка боковая правая	1	9	Стойка	1
4	Стенка задняя	1	10	Шток столика	1
5	Полка внутренняя	1	11	Столик	1
6	Крыша	1	12	Комплект фурнитуры	1

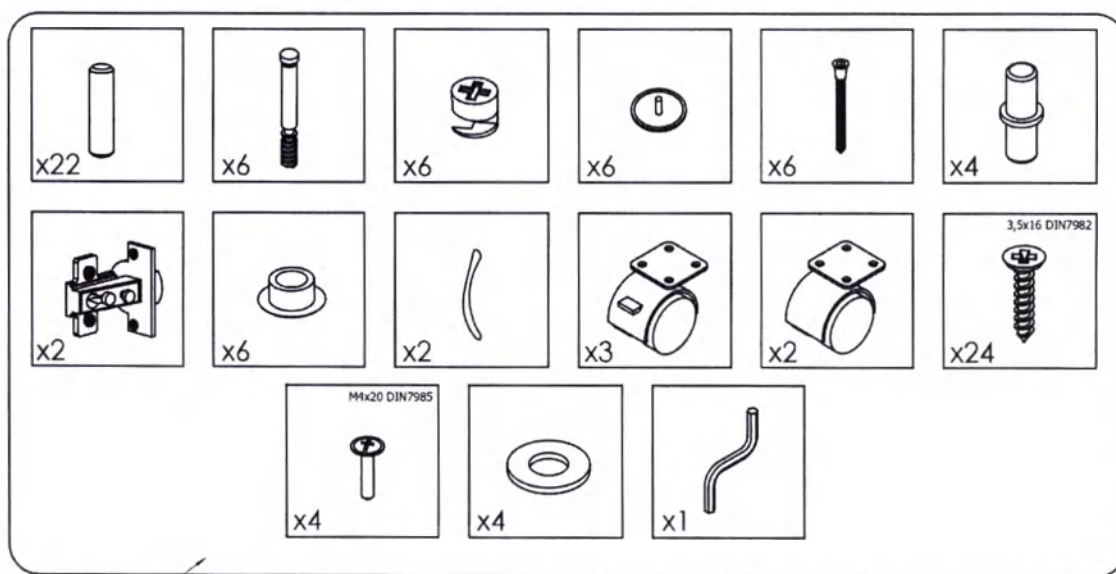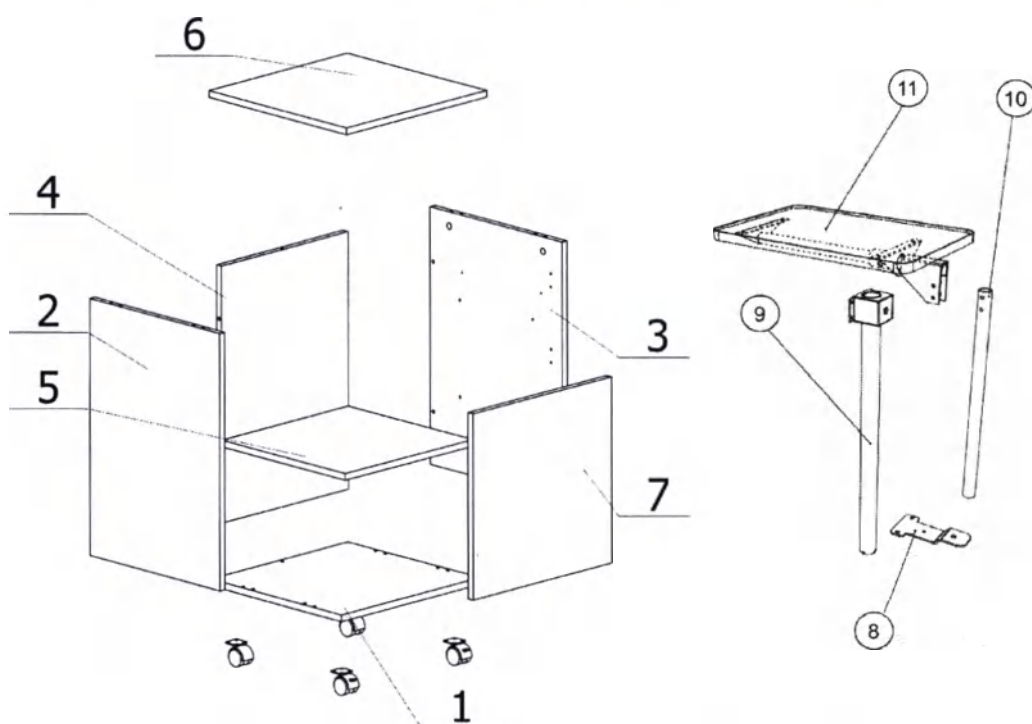

12

15 ПРИЛОЖЕНИЕ В

МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Таблица 2

Наименование узла	Материалы	Производитель
1. Шкафы для палат ЛДСП + металл*		
- Двери - Полки - Стенки боковые - Стенка средние - Крышка - Дно - Цоколь	Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия
Стенка задняя	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, марки ХДФ, класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32274-2013 Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия
Цоколь	Рулон 1,5 мм оцинкованный Сталь 20пс (C-0.17-0.24%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.04%, Cr-<0,25%, Cu – <0.25%, As – <0.08%)	ООО «ТехИнвестСтрой» Россия

	Краска RAL 9003 PP-MAT (Titanium dioxide 12%butylmalonate 1.5%)	Jotun Boya San Турция Или Pulver Kimya San Турция
2. Тумбы для палат из ЛДСП **		
• Дверь • Полки • Стенки боковые • Крышка • Дно • Стенки боковые ящика • Фасад ящика • Столик	Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия
• Стенка задняя • Дно ящика	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, марки ХДФ, класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32274-2013 Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия
• Стойка	Труба 30x1,5 мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Труба 38x3 мм Сталь 2пс (C-0.9-0,15%, Si – 0.05-0.15%, Mn-0.25-0.5%, S-	ООО «ТД «РТПЗ» Россия ООО «ПО «НВТЗ» Россия

	<0.05%, P-<0.04%, Cr-<0,03%, Ni-<0,03%, N-<0.008%, Cu - <0.3%, As - <0.08%) Труба 42х3 мм Сталь 2пс (C-0.9-0,15%, Si - 0.05-0.15%, Mn-0.25-0.5%, S- <0.05%, P-<0.04%, Cr-<0,03%, Ni-<0,03%, N-<0.008%, Cu - <0.3%, As - <0.08%) Лист 2мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si - 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni - < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu - <0.25%, As - <0.08%) Лист 3 мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si - 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni - < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu - <0.25%, As - <0.08%) Лист 5 мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si - 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni - < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu - <0.25%, As - <0.08%) Краска RAL 9003 PP-MAT (Titanium dioxide 12%butylmalonate 1.5%)	ПАО «НЛМК», Россия ПАО «Северсталь», Россия Jotun Boya San Турция Или Pulver Kimya San Турция
--	---	---

Продолжение таблицы 2.

Наименование узла	Материалы	Производитель
3. Тумбы для палат на металлокаркасе + ЛДСП***		
- Полки - Стенки боковые - Крышка - Основание тумбы - Стенки боковые - Дно ящика - Стенка задняя ящика - Стенка передняя - Стенка задняя - Стойка	Рулон 0.8 мм Сталь 20пс (C-0.17-0.24%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.04%, Cr-<0,25%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Рулон 0.7 мм Сталь 20пс (C-0.17-0.24%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.04%, Cr-<0,25%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Рулон 0.6 мм Сталь 20пс (C-0.17-0.24%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.04%, Cr-<0,25%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Краска RAL 9003 PP-MAT (Titanium dioxide 12%butylmalonate 1.5%)	ПАО «НЛМК», Россия ПАО «Северсталь», Россия Jotun Boya San Турция Или Pulver Kimya San Турция
- Фасад ящика - Дверь - Столешница	Плиты двесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия

Продолжение таблицы 2.

Наименование узла	Материалы	Производитель
6. Столы пеленальные ЛДСП****		
• Столешница • Полка • Опоры боковые • Царга • Двери	Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия
7. Столы пеленальные на металлокаркасе+ЛДСП*****		
• Каркас	Труба 25x25x1.2 мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Лист 3 мм Сталь 08пс (C-0.05-0.11%, Si – 0.05-0.17%, Mn-0.35-0.65%, Ni – < 0.25%, S-<0.04%, P-<0.035%, Cr-<0,1%, Cu – <0.25%, As – <0.08%) Краска RAL 9003 PP-MAT (Titanium dioxide 12%butylmalonate 1.5%)	Волжский (ООО «ПО «НВТЗ»), Россия ООО «Дмитровский металлоцентр», Россия ПАО «НЛМК», Россия ПАО «Северсталь», Россия Jotun Boya San Турция Или Pulver Kimya San Турция
• Столешница • Боковины • Задняя стенка	Плита древесно-стружечная тип P2, класс эмиссии формальдегида E2 по ГОСТ 10632-2014 Пенополиуретан эластичный марки EL 2040 по ТУ 2254-001-70465083-2016	ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» Россия ООО «ЕВРОПЛАСТ» Россия

	Искусственная кожа мебельная марки ВИК-ТР ГОСТ Р 57019- 2016	АО «ЗАВОД ИСКУСТВЕННЫХ КОЖ» Россия
--	--	--

Продолжение таблицы 2.

Наименование узла	Материалы	Производитель
• Полка	Плиты двевесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013.	ООО «Кроношпан» Россия

*- MF LH-1 1940.1.; MF LH-2 1980.

** - MF NH-4, MF NH-6.

***- MF NH-2S; MF NH-3S; MF NH-4S; MF NH-5S.

****- MF TD-100.1, MF TD-100.2.

*****- MF TD-85S.

Корпуса мебели, двери, ящики изготавливают из ЛДСП 10-48 мм, произведенной согласно ГОСТ 10632-2014, класс эмиссии не менее E1. Заднюю стенку допускается изготавливать из ДВП ГОСТ 32687-2014.

Стекланные двери изготавливаются из листового стекла толщиной 4 мм по ГОСТ Р 54170. Стекланные полки изготавливаются из листового стекла толщиной 5 мм по ГОСТ Р 54170.

Требования к винтам, болтам и шайбам по ГОСТ 1491, ГОСТ 17473 и ГОСТ 6402, эмали по ГОСТ 24709.

**«Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат МФ
по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021»**

TY 32.50.30-014-47272295-2021

«_____ в варианте исполнения _____»

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

17 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, Тульская область, Узловский район,

г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а тел. +7 (495) 777-48-38

E-mail: moscow@safe.ru

Internet: <http://www.safe.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

на ремонт «_____» в варианте исполнения _____»

по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Дата изготовления «___» _____ 20___ г.

Штамп предприятия _____

подпись, штамп ОТК

Владелец и его адрес _____

название организации (полностью)

индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон

Характер неисправности _____

заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание:

ФИО, телефон, e-mail

Дата возникновения неисправности

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей:

дата _____

подпись _____

Штамп предприятия

56 (нагрудный мед.)

