

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтехника-Р»

И. В. Сирин

2022 г

М.П.



**Матрас медицинский в вариантах исполнения
по ТУ 31.03.12-022-98238288-2021,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS
Руководство пользователя**

Редакция 2

2022 г.

Оглавление

1. Информация о производителе медицинского изделия.....	3
2. Наименование медицинского изделия.....	3
3. Назначение медицинского изделия.....	7
4. Область применения.....	7
5. Потенциальный пользователь.....	7
6. Показания. Противопоказания. Возможные побочные действия	7
7. Меры предосторожности.....	7
8. Технические характеристики.....	8
10. Инструкция по использованию	20
11. Методы и средства очистки	21
12. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации	21
13. Предупреждающие символы и их значение.....	22
14. Маркировка	22
15. Критерии непригодности	25
16. Порядок осуществления утилизации и уничтожения	25
17. Требования к охране окружающей среды	26
18. Гарантийные обязательства	26
19. Адрес для направлений претензий и рекламаций:	26
20. Рекламация	26

1. Информация о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»

Сокращенное наименование: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2, этаж 1, пом. Х

Тел.: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-53

E-mail: info@rebotec.net

Официальный сайт: <http://www.med-mos.ru>

Место производства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» (ООО «Медтехника-Р»), 141400, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30

2. Hebei Dingli Medical Apparatus and Instrument Co., Ltd.

No.588, ChangAn E. Road, Jizhou District, Hengshui City (In the Yard of Hebei Jixing Pharmaceutical Packaging Company)

2. Наименование медицинского изделия

Данное руководство пользователя распространяется на медицинское изделие Матрас медицинский в вариантах исполнения по ТУ 31.03.12-022-98238288-2021, зарегистрированный товарный знак MED-MOS:

1. Матрас медицинский односекционный, модель МН-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

1.1 Матрас – 1 шт.

1.2 Чехол съемный – 1 шт.

1.3 Руководство пользователя – 1 экз.

2. Матрас медицинский односекционный, модель МО-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

2.1 Матрас – 1 шт.

2.2 Чехол съемный – 1 шт.

2.3 Руководство пользователя – 1 экз.

3. Матрас медицинский односекционный, модель МО-02, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

3.1 Матрас – 1 шт.

- 3.2 Чехол съемный – 1 шт.
- 3.3 Руководство пользователя – 1 экз.

4. Матрас медицинский односекционный, модель МО-03, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

- 4.1 Матрас – 1 шт.
- 4.2 Чехол съемный – 1 шт.
- 4.3 Руководство пользователя – 1 экз.

5. Матрас медицинский односекционный, модель МО-04, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

- 5.1 Матрас – 1 шт.
- 5.2 Чехол съемный – 1 шт.
- 5.3 Руководство пользователя – 1 экз.

6. Матрас медицинский односекционный, модель МО-05, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

- 6.1 Матрас – 1 шт.
- 6.2 Чехол съемный – 1 шт.
- 6.3 Руководство пользователя – 1 экз.

7. Матрас медицинский односекционный с функцией удлинения ложа, модель МОУ-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

- 7.1 Матрас – 1 шт.
- 7.2 Чехол съемный – 1 шт.
- 7.3 Руководство пользователя – 1 экз.

8. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант

исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

8.1 Матрас – 1 шт.

8.2 Чехол съемный – 1 шт.

8.3 Руководство пользователя – 1 экз.

9. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-02, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

9.1 Матрас – 1 шт.

9.2 Чехол съемный – 1 шт.

9.3 Руководство пользователя – 1 экз.

10. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-03, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

10.1 Матрас – 1 шт.

10.2 Чехол съемный – 1 шт.

10.3 Руководство пользователя – 1 экз.

11. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-05, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

11.1 Матрас – 1 шт.

11.2 Чехол съемный – 1 шт.

11.3 Руководство пользователя – 1 экз.

12. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-06, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

12.1 Матрас – 1 шт.

12.2 Чехол съемный – 1 шт.

12.3 Руководство пользователя – 1 экз.

13. Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-07, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения

4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

13.1 Матрас – 1 шт.

13.2 Чехол съемный – 1 шт.

13.3 Руководство пользователя – 1 экз.

14. Матрас медицинский многосекционный штрибированный с функцией удлинения ложа, модель ММУ-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

14.1 Матрас – 1 шт.

14.2 Чехол съемный – 1 шт.

14.3 Руководство пользователя – 1 экз.

15. Матрас медицинский многосекционный штрибированный с функцией удлинения ложа, модель ММУ-02, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

15.1 Матрас – 1 шт.

15.2 Чехол съемный – 1 шт.

15.3 Руководство пользователя – 1 экз.

16. Матрас медицинский многосекционный штрибированный с туалетным вырезом, модель ММТ-01, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

16.1 Матрас – 1 шт.

16.2 Чехол съемный – 1 шт.

16.3 Руководство пользователя – 1 экз.

17. Матрас медицинский многосекционный штрибированный с туалетным вырезом, модель ММТ-02, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения: вариант исполнения 1, вариант исполнения 2, вариант исполнения 3, вариант исполнения 4, вариант исполнения 5, вариант исполнения 6, вариант исполнения 7, в составе:

17.1 Матрас – 1 шт.

17.2 Чехол съемный – 1 шт.

17.3 Руководство пользователя – 1 экз.

3. Назначение медицинского изделия

Матрасы предназначены для использования в закрытых отапливаемых помещениях для настила поверх ложа кроватей (в том числе для функциональных медицинских кроватей, предназначенных для ухода за больными, для реабилитации, восстановления организма), имеющих жесткую основу, исключая механические повреждения поверхности матраса.

4. Область применения

Матрасы используются в лечебных, реабилитационных, профилактических медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.

5. Потенциальный пользователь

Потенциальными пользователями медицинского изделия являются пациенты терапевтических, реабилитационных отделений, отделений восстановительного лечения, палат общего назначения, социальных учреждений.

6. Показания. Противопоказания. Возможные побочные действия

Показания:

Матрасы предназначены для облегчения ухода за лежачими, тяжелобольными пациентами, пожилыми ослабленными людьми, а также лицами, перенесшими операцию.

Противопоказания:

При соблюдении условий эксплуатации противопоказания отсутствуют.

Возможные побочные действия:

Аллергические реакции вследствие индивидуальной непереносимости материалов изготовления.

7. Меры предосторожности

- Для чистки матраса запрещается использование пылесосов высокой мощности и агрессивных моющих средств.
- Во избежание деформации матраса запрещается превышать максимальную допустимую нагрузку, а также подвергать изделие иным механическим воздействиям, в том числе скручиванием, складыванием и хождению по матрасу.
- Запрещается использовать утюг или фен для сушки матраса.

- Запрещается подвергать матрас воздействию высоких температур или располагать его вблизи источников тепла.
- Во избежание повреждений целостности матраса, не допускается механическое воздействие острыми предметами.
- Запрещается использование поврежденного матраса.
- Во избежание появления загрязнений непосредственно на матрасе, рекомендуется использование защитного чехла.

8. Технические характеристики

Срок службы матраса составляет 5 лет.

Матрас медицинский односекционный, модель МН-01				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	740×410×65	1,3	745×415×70
	Вариант исполнения 2	740×410×70	1,7	745×415×75
	Вариант исполнения 3	740×410×80	2	745×415×85
	Вариант исполнения 4	740×410×100	2,2	745×415×105
	Вариант исполнения 5	740×410×120	2,4	745×415×125
	Вариант исполнения 6	740×410×140	2,6	745×415×145
	Вариант исполнения 7	740×410×185	2,8	745×415×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 50 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			

Категория мягкости	I			
Матрас медицинский односекционный, модель МО-01				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1760×760×65	6,3	1765×765×70
	Вариант исполнения 2	1760×760×70	6,5	1765×765×75
	Вариант исполнения 3	1760×760×80	6,8	1765×765×85
	Вариант исполнения 4	1760×760×100	7	1765×765×105
	Вариант исполнения 5	1760×760×120	7,2	1765×765×125
	Вариант исполнения 6	1760×760×140	7,4	1765×765×145
	Вариант исполнения 7	1760×760×185	7,6	1765×765×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский односекционный, модель МО-02				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1200×650×65	4,1	1205×655×70
	Вариант исполнения 2	1200×650×70	4,3	1205×655×75

	Вариант исполнения 3	1200×650×80	4,5	1205×655×85
	Вариант исполнения 4	1200×650×100	4,9	1205×655×105
	Вариант исполнения 5	1200×650×120	5,3	1205×655×125
	Вариант исполнения 6	1200×650×140	5,7	1205×655×145
	Вариант исполнения 7	1200×650×185	6,5	1205×655×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский односекционный, модель МО-03				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1950×850×65	6	1955×855×70
	Вариант исполнения 2	1950×850×70	6,4	1955×855×75
	Вариант исполнения 3	1950×850×80	6,8	1955×855×85
	Вариант исполнения 4	1950×850×100	7,6	1955×855×105
	Вариант исполнения 5	1950×850×120	8,4	1955×855×125
	Вариант исполнения 6	1950×850×140	9,2	1955×855×145
	Вариант исполнения 7	1950×850×185	10,8	1955×855×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			

Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг				
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000				
Категория мягкости	I				
Матрас медицинский односекционный, модель МО-04					
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм	
	Вариант исполнения 1	1950×900×65	6,2	1955×905×70	
	Вариант исполнения 2	1950×900×70	6,5	1955×905×75	
	Вариант исполнения 3	1950×900×80	6,8	1955×905×85	
	Вариант исполнения 4	1950×900×100	7,4	1955×905×105	
	Вариант исполнения 5	1950×900×120	8	1955×905×125	
	Вариант исполнения 6	1950×900×140	8,6	1955×905×145	
	Вариант исполнения 7	1950×900×185	9,8	1955×905×190	
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый				
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг				
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000				
Категория мягкости	I				

Матрас медицинский односекционный, модель МО-05				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1760×760×65	12	1765×765×70
	Вариант исполнения 2	1760×760×70	12,3	1765×765×75
	Вариант исполнения 3	1760×760×80	12,6	1765×765×85
	Вариант исполнения 4	1760×760×100	12,8	1765×765×105
	Вариант исполнения 5	1760×760×120	13	1765×765×125
	Вариант исполнения 6	1760×760×140	13,5	1765×765×145
	Вариант исполнения 7	1760×760×185	13,9	1765×765×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский односекционный с функцией удлинения ложа, модель МОУ-01				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	(1960-2160)×950×65	18	(1965-2170)×955×70
	Вариант исполнения 2	(1960-2160)×950×70	18,5	(1965-2170)×955×75
	Вариант исполнения 3	(1960-2160)×950×80	19	(1965-2170)×955×85

	Вариант исполнения 4	(1960-2160)× 950×100	19,5	(1965-2170)× 955×105
	Вариант исполнения 5	(1960-2160)× 950×120	20	(1965-2170)× 955×125
	Вариант исполнения 6	(1960-2160)× 950×140	20,5	(1965-2170)× 955×145
	Вариант исполнения 7	(1960-2160)× 950×185	21,2	(1965-2170)× 955×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-01				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1950×850×65	6	1955×855×70
	Вариант исполнения 2	1950×850×70	6,3	1955×855×75
	Вариант исполнения 3	1950×850×80	6,6	1955×855×85
	Вариант исполнения 4	1950×850×100	7,2	1955×855×105
	Вариант исполнения 5	1950×850×120	7,8	1955×855×125
	Вариант исполнения 6	1950×850×140	8,4	1955×855×145
	Вариант исполнения 7	1950×850×185	9,6	1955×855×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			

Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-02				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	1900×900×65	6	1905×905×70
	Вариант исполнения 2	1900×900×70	6,3	1905×905×75
	Вариант исполнения 3	1900×900×80	6,5	1905×905×85
	Вариант исполнения 4	1900×900×100	7	1905×905×105
	Вариант исполнения 5	1900×900×120	7,5	1905×905×125
	Вариант исполнения 6	1900×900×140	8	1905×905×145
	Вариант исполнения 7	1900×900×185	9	1905×905×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-03				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×900×65	6,2	2005×905×70

	Вариант исполнения 2	2000×900×70	6,5	2005×905×75
	Вариант исполнения 3	2000×900×80	6,8	2005×905×85
	Вариант исполнения 4	2000×900×100	7,4	2005×905×105
	Вариант исполнения 5	2000×900×120	8	2005×905×125
	Вариант исполнения 6	2000×900×140	8,6	2005×905×145
	Вариант исполнения 7	2000×900×185	9,8	2005×905×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-05				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×1200×65	18,5	2005×1205×70
	Вариант исполнения 2	2000×1200×70	19	2005×1205×75
	Вариант исполнения 3	2000×1200×80	20	2005×1205×85
	Вариант исполнения 4	2000×1200×100	20,5	2005×1205×105
	Вариант исполнения 5	2000×1200×120	21	2005×1205×125
	Вариант исполнения 6	2000×1200×140	21,5	2005×1205×145

	Вариант исполнения 7	2000×1200×185	22	2005×1205×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-06				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×1420×65	19	2005×1425×70
	Вариант исполнения 2	2000×1420×70	20	2005×1425×75
	Вариант исполнения 3	2000×1420×80	21	2005×1425×85
	Вариант исполнения 4	2000×1420×100	23	2005×1425×105
	Вариант исполнения 5	2000×1420×120	24	2005×1425×125
	Вариант исполнения 6	2000×1420×140	25	2005×1425×145
	Вариант исполнения 7	2000×1420×185	26	2005×1425×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный, модель ММ-07				

Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×910×65	15,5	2005×915×70
	Вариант исполнения 2	2000×910×70	16	2005×915×75
	Вариант исполнения 3	2000×910×80	16,5	2005×915×85
	Вариант исполнения 4	2000×910×100	17	2005×915×105
	Вариант исполнения 5	2000×910×120	17,5	2005×915×125
	Вариант исполнения 6	2000×910×140	18,5	2005×915×145
	Вариант исполнения 7	2000×910×185	19,2	2005×915×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный с функцией удлинения ложа, модель ММУ-01				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	(1950-2150)×900×65	15	(1955-2160)×905×70
	Вариант исполнения 2	(1950-2150)×900×70	16	(1955-2160)×905×75
	Вариант исполнения 3	(1950-2150)×900×80	16,5	(1955-2160)×905×85

	Вариант исполнения 4	(1950-2150)× 900×100	17	(1955-2160)× 905×105
	Вариант исполнения 5	(1950-2150)× 900×120	17,5	(1955-2160)× 905×125
	Вариант исполнения 6	(1950-2150)× 900×140	18	(1955-2160)× 905×145
	Вариант исполнения 7	(1950-2150)× 900×185	18,5	(1955-2160)× 905×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штрибированный с функцией удлинения ложа, модель ММУ-02				
Габаритные размеры	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	(1960-2160)× 910×65	16	(1965-2165)× 915×70
	Вариант исполнения 2	(1960-2160)× 910×70	16,5	(1965-2165)× 915×75
	Вариант исполнения 3	(1960-2160)× 910×80	17	(1965-2165)× 915×85
	Вариант исполнения 4	(1960-2160)× 910×100	18	(1965-2165)× 915×105
	Вариант исполнения 5	(1960-2160)× 910×120	18,5	(1965-2165)× 915×125
	Вариант исполнения 6	(1960-2160)× 910×140	19	(1965-2165)× 915×145
	Вариант исполнения 7	(1960-2160)× 910×185	19,5	(1965-2165)× 915×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			

Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный с туалетным вырезом, модель ММТ-01				
Размер матраса	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×910×65	16,5	2005×915×70
	Вариант исполнения 2	2000×910×70	16	2005×915×75
	Вариант исполнения 3	2000×910×80	17	2005×915×85
	Вариант исполнения 4	2000×910×100	17,5	2005×915×105
	Вариант исполнения 5	2000×910×120	18	2005×915×125
	Вариант исполнения 6	2000×910×140	18,5	2005×915×145
	Вариант исполнения 7	2000×910×185	19,6	2005×915×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			
Матрас медицинский многосекционный штробированный с туалетным вырезом, модель ММТ-02				

Размер матраса	Вариант исполнения	Длина × ширина × толщина матраса, мм	Масса матраса, кг	Длина × ширина × высота чехла, мм
	Вариант исполнения 1	2000×910×65	14	2005×915×70
	Вариант исполнения 2	2000×910×70	15	2005×915×75
	Вариант исполнения 3	2000×910×80	16	2005×915×85
	Вариант исполнения 4	2000×910×100	17	2005×915×105
	Вариант исполнения 5	2000×910×120	18	2005×915×125
	Вариант исполнения 6	2000×910×140	19	2005×915×145
	Вариант исполнения 7	2000×910×185	19,9	2005×915×190
Тип чехла	Съемный, на молнии, водонепроницаемый			
Максимальная допустимая нагрузка	Не более 250 кг			
Количество циклов нагружения	Не менее 10 000			
Категория мягкости	I			

*допустимое отклонение от указанных размеров и массы матрасов $\pm 15\%$

10. Инструкция по использованию

1. Перед началом эксплуатации необходимо освободить изделие от упаковочных материалов.
2. Наденьте защитный чехол, который поставляется совместно с матрасом.
3. Уложите матрас на подготовленную поверхность медицинской кровати.

4. Протрите поверхность чехла дезинфицирующим средством (средства очистки и дезинфекции указаны в пункте «Методы и средства очистки» данного руководства пользователя)

11. Методы и средства очистки

Поверхность чехла должна быть устойчивой к дезинфекции, проводимой способом протирания салфеткой, смоченной в воде или нейтральном мыльном растворе в соответствии с МУ 287-113.

Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих веществ.

Для дезинфекции поверхности матраса используйте любые медицинские средства, предназначенные для дезинфекции медицинских изделий и медицинской мебели путем орошения или протирания поверхности чехла матраса.



Важно!

Чистка и дезинфекция матраса должна производиться с застегнутым чехлом матраса. Попадание средств чистки и дезинфекции непосредственно на матрас не допускается

12. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Условия транспортировки и хранения

Температура окружающей среды от -20°C до +55°C

Относительная влажность не более 85%

Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке. Допускается транспортировка любым видом наземного и воздушного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение должно осуществляться в закрытых помещениях без воздействия агрессивных веществ и попадания на изделие прямых солнечных лучей, воды и осадков.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от +10°C до +40°C

Относительная влажность не более 90% при температуре 25°C.

Эксплуатация матраса должна осуществляться в закрытых отапливаемых помещениях.



Важно!

После транспортировки или хранения матраса при отрицательных температурах необходимо поместить изделие в условия эксплуатации не менее, чем на 2 часа до начала использования по назначению

13. Предупреждающие символы и их значение

	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Подлежит утилизации в специально отведенном месте
	Глажение запрещено

14. Маркировка

Маркировка изделия должна содержать следующую информацию:

- Наименование медицинского изделия с обозначением модели и варианта исполнения;
- Обозначение технических условий;
- Номер регистрационного удостоверения и дату выдачи;
- Наименование и юридический адрес производителя;

- Место производства;
- Товарный знак производителя;
- Дату производства в формате.месяц/год;
- Серийный номер;
- Максимально допустимую нагрузку;
- Категорию мягкости;
- Срок службы;
- Символы: «Изготовитель», «Серийный номер», «Дата изготовления», «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- Символ «Подлежит утилизации в специально отведенном месте»
- Символ «Глажение запрещено» по ГОСТ ISO 3758.

Допускается нанесение дополнительной информации, необходимой для идентификации товара, в том числе знаков соответствия национальным стандартам, а также знаков соответствия Регламенту (-ам) Евразийского экономического союза после прохождения обязательных процедур оценки соответствия.

Информация может быть указана как на этикетке, так и на самом изделии.

Макет маркировки изделия

Матрас медицинский в вариантах исполнения по ТУ 31.03.12-022-98238288-2021, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, модель ММТ-01, вариант исполнения 1	
Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.	
	Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» 125222, Россия, г. Москва, улица Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещ. X
Место производства: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» (ООО «Медтехника-Р»), 141400, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30	
SN XXXXXX	 XX/XXXX
Максимальная допустимая нагрузка: не более 250 кг Категория мягкости – I Срок службы: 5 лет	
   	

Потребительская и транспортная маркировка должна содержать следующие сведения:

- Наименование медицинского изделия с обозначением модели и варианта исполнения;**
- Обозначение технических условий;**
- Номер регистрационного удостоверения и дату выдачи;**
- Наименование и юридический адрес производителя;**
- Товарный знак производителя;**
- Место производства;**
- Дату производства в формате месяц/год;**
- Серийный номер;**
- Максимально допустимую нагрузку;**
- Категорию мягкости;**
- Срок службы;**
- Условия хранения и транспортирования;**
- Символы: «Изготовитель», «Серийный номер», «Дата изготовления», «Бережь от влаги»; «Не допускать воздействия солнечного света», «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;**
- Символ «Подлежит утилизации в специально отведенном месте»;**
- Габаритные размеры упаковки;**
- Массу НЕТТО.**

Допускается нанесение дополнительной информации, необходимой для идентификации товара, в том числе знаков соответствия национальным стандартам, а также знаков соответствия Регламенту (-ам) Евразийского экономического союза после прохождения обязательных процедур оценки соответствия.

Макет маркировки потребительской и транспортной упаковки

Матрас медицинский в вариантах исполнения по ТУ 31.03.12-022-98238288-2021, зарегистрированный товарный знак «MED-MOS», модель MMT-01, вариант исполнения 1		
Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.		
	Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» 125222, Россия, г. Москва, улица Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещ. X	
Место производства: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК» (ООО «Медтехника-Р»), 141400, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30		
 SN	XXXXXX	 XX/XXXX
Максимальная допустимая нагрузка: не более 250 кг		
Категория мягкости – I		
Срок службы: 5 лет		
Условия транспортирования и хранения: температура окружающей среды от -20°C до +55°C, относительная влажность не более 85%		
		
Габаритные размеры: Масса НЕТТО:		

15. Критерии непригодности

Если качество медицинского изделия вызывает подозрения, свяжитесь с производителем.

16. Порядок осуществления утилизации и уничтожения

По окончании срока службы матрасы подлежат утилизации только в специализированных пунктах утилизации. Запрещается утилизировать изделие вместе с неотсортированными отходами.

Матрасы с истекшим сроком годности должны быть утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 для класса А и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Утилизация матрасов и чехлов, имевших контакт с биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 для класса Б и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

17. Требования к охране окружающей среды

Данное медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

18. Гарантийные обязательства

Если качество приобретенного продукта вызывает сомнения, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным представителем как можно скорее.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящего «Руководства пользователя».

Гарантийный срок хранения - 24 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в ООО «Медтехника-Р» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Средний срок службы до списания: 5 лет.

Изготовлено из перерабатываемых материалов, не загрязняющих окружающую среду.

19. Адрес для направлений претензий и рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»

Сокращенное наименование: ООО «Медтехника-Р»

Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещ. X

Тел.: +7 (495) 504-26-51

+7 (495) 504-26-53

E-mail: info@rebotec.net

Официальный сайт: <http://www.med-mos.ru>

20. Рекламация

Заявление в ОТК (заполняется клиентом):

1. Наименование/ФИО покупателя
2. Контактные данные уполномоченного лица покупателя
3. Номер и дата документа, по которому покупатель получил товар
4. Краткое описание проблемы (с любыми касающимися дела подробностями)

5. Приложения и фотодетализация

- копия гарантийного талона с отметкой продавца, накладной и чеком, если товар куплен не напрямую в ООО "Медтехника-Р"
- фото товара, проблемных деталей и/или участков
- фото маркировки (наклейка/стикер, нанесённый на изделие на производстве)
- фото ненарушенной упаковки (обязательно при выбраковке в процессе приемки товара от транспортной компании)

6. Дата обращения и подпись

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

17 (двадцать семь) листа(ов)

Управляющий ИВ – Сирин И.В.

Подпись _____

