

Общество с ограниченной ответственностью

«Служба комплексного снабжения»

Код ОКПД-2 32.50.50.190

**МАТРАЦ
МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ЧЕХЛОМ В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПО
ТУ 32.50.50-001-19398005-2019**

ПАСПОРТ/ИНСТРУКЦИЯ

2019 г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом в вариантах исполнения по ТУ32.50.50-001-19398005-2019 (далее- матрац)
- 1.2. Матрац изготавливается в соответствии с ТУ 32.50.50-001-19398005-2019
- 1.3. Изделие имеет РУ № от г и Сертификат соответствия № с Г.
- 1.4. В целях повышения надежности и долговечности изделия, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом/Инструкцией.

2. Сведения об изготовителе.

Изготовитель - Общество с ограниченной ответственностью «Служба комплексного снабжения» (ООО «СКС»)

Юр. адрес изготовителя: РФ, 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 27, пом. I, эт.2, ком. 10

Адрес производства: РФ, 301205, Тульская обл., Щёкинский р-н, г. Советск, ул. Молодежная д. 10.

Контактный телефон: 7 (495) 646-80-44; электронная почта: info@sk-s-rf.ru

3. Назначение изделия.

Матрац, предназначенный для его размещения на опорной платформе для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой можно лежать, отдыхать и спать; а также для распределения веса тела по большой площади поверхности с целью обеспечения уменьшения давления для удобства и улучшения кровообращения, для профилактики пролежней.

Матрац представляет собой большой износостойкий водонепроницаемый чехол с наполнением из мягкого объемного материала.

Матрац может применяться в любых отделениях клинических и поликлинических учреждений, а также в домашних условиях. Потенциальными потребителями являются клинические и поликлинические учреждения, у которых есть потребность в оснащении больничных кроватей.

4. Технические характеристики.

Матрац выпускается в следующих вариантах исполнения:

Односекционный ППУ	Односекционный ПВВ
Двухсекционный ППУ	Двухсекционный ПВВ
Трехсекционный ППУ	Трехсекционный ПВВ
Четырехсекционный ППУ	Четырехсекционный ПВВ
Универсальный* ППУ	Универсальный* ПВВ

* – в данном исполнении чехол матраца односекционный, а наполнитель матраца канавочный (штробированный).

Матрац выпускается следующих размеров:

Длина в диапазоне от 1600 мм до 2150 мм, шаг 5 мм. Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Ширина в диапазоне от 650 мм до 1000 мм, шаг 5 мм. Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Высота в диапазоне от 60 мм до 150 мм, шаг 5 мм. Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Количество и размеры канав для универсального матраца:

Количество канав варианта исполнения Универсальный в наполнителе не менее 3.

Минимальное расстояние между канавами в наполнителе 10 мм. Максимальное расстояние между канавами (измеряемое в мм.) кратно 5 и определяется требованием к их минимальному количеству в изделии.

Канавы варианта исполнения Универсальный размещаются на расстоянии не менее 30 мм от края по длине наполнителя.

Ширина канавы варианта исполнения Универсальный в диапазоне от 5 мм до 30 мм, шаг 5 мм. Предельное допустимое отклонение ± 1 мм.

Глубина канавы варианта исполнения Универсальный в диапазоне от 10 мм до 130 мм, шаг 5 мм. Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Длина канавы варианта исполнения Универсальный не менее половины ширины наполнителя, при этом отступы от края по ширине наполнителя могут быть предусмотрены и быть не менее 15 мм с каждой стороны или отсутствовать полностью.

Геометрические размеры секции:

Для двухсекционного матраца длина в диапазоне от 200 мм до 1950 мм, шаг 5 мм.

Ширина и высота секции должны соответствовать ширине и высоте матраца.

Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Для трехсекционного матраца, длина в диапазоне от 200 мм до 1750 мм, шаг 5 мм.

Ширина и высота секции должны соответствовать ширине и высоте матраца.

Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Для четырехсекционного матраца, длина в диапазоне от 200 мм до 1550 мм, шаг 5 мм.

Ширина и высота секции должны соответствовать ширине и высоте матраца.

Предельное допустимое отклонение ± 2 мм.

Матрац, в зависимости от варианта исполнения, выпускается со следующими наполнителями:

☐ пенополиуретан (ППУ); ☐ поролон вторичного вспенивания (ПВВ).

Матрац выпускается со следующими застежками чехла:

☐ П-образная форма; ☐ Г-образная форма.

Матрац выпускается со следующими материалами водонепроницаемого чехла:

☐ Материалы текстильные одежные из синтетических нитей: ткани курточные, марки "Оксфорд 210D WR PU1000";

☐ Материалы текстильные одежные из синтетических нитей Tafetta 190T;

☐ Искусственная кожа Skaden B 353.

Матрац выпускается ☐ с отверстием для судна подкладного и ☐ без отверстия.

Масса матраца в диапазоне от 1,5 кг до 20,5 кг. Предельное допустимое отклонение $\pm 5\%$

5. Комплектность.

5.1. Матрац одного артикула в соответствии с Таблицей (Таблица 1) –

1 шт.; Паспорт/Инструкция – 1 экз.;

6. Хранение, транспортировка.

6.1. Транспортировать матрац следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

6.2. Условия транспортирования матраца должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

6.3. Матрац в транспортной упаковке должен храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 5 лет.

6.4 В процессе хранения матрац в транспортной упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер.

7 Указания по эксплуатации.

7.1 Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-19398005-2019» – медицинское изделие многократного применения.

7.2 Матрац предназначен для повседневного многократного применения пациентами только в сочетании с постельным бельем. Ремонту не подлежит.

7.3 Показания к применению: размещения на опорной платформе для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой пациент может лежать, отдыхать и спать; а также для распределения веса тела по большой площади поверхности с целью обеспечения уменьшения давления для удобства и улучшения кровообращения, для профилактики пролежней.

7.4 Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

7.5 Матрац поставляется в сборе. Дезинфекции подлежит только чехол матраца. Перед дезинфекцией необходимо временно удалить наполнитель из чехла.

7.6 Перед началом эксплуатации рекомендуется провести процедуру дезинфекции.

7.7 Чехол матраца обладает устойчивостью к воздействию агрессивной биологической жидкости (пота, мочи) в соответствии с МУ 25.1-001.

7.8 Химическая чистка и стирка чехлов по ГОСТ 25652-83.

7.9 Дезинфекция чехла матраца производится по МУ-287-113 обработкой в воздушном стерилизаторе при температуре не более 120 ± 3 °С, время выдержки не более 45 мин.

7.10 Допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов.

7.11 Чистки и дезинфекцию изделия рекомендуется производить по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в месяц.

8 Утилизация

8.1 Утилизация изделий осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010.

8.2 Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями (после дезинфекции), утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010, относящимися к медицинским отходам класса Б.

8.3 Изделия с истекшими сроками годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010, относящимися к медицинским отходам класса А.

9 Маркировка и размеры изделия.

Таблица 1

		КАТЕГОРИЯ ПРИЗНАКА			
		А	В	С	Д
		Вариант исполнения	Материал чехла	Форма застежки чехла	Наличие отверстия для судна
НОМЕР СТРОКИ	1	Односекционный ППУ	Материалы текстильные одежные из синтетических нитей: ткани курточные, марки "Оксфорд 210D WR PU1000";	П-образная	Есть
	2	Двухсекционный ППУ	Материалы текстильные одежные из синтетических нитей Tafetta 190T;	Г-образная	Нет
	3	Трехсекционный ППУ	Искусственная кожа Skaden B 353.	—	—
	4	Четырехсекционный ППУ	—	—	—
	5	Универсальный ППУ	—	—	—
	6	Односекционный ПВВ	—	—	—
	7	Двухсекционный ПВВ	—	—	—
	8	Трехсекционный ПВВ	—	—	—
	9	Четырехсекционный ПВВ	—	—	—
	10	Универсальный ПВВ	—	—	—

Пример условного обозначения матраца по таблице №1:

При заказе или записи матраца в другой документации используется артикул вида Аа.Вв.Сс.Дд», где:

Аа – вариант исполнения матраца. Первый символ – признак варианта исполнения. Второй символ – номер строки в таблице идентификации артикула;

Вв – материал чехла матраца. Первый символ – признак материала чехла. Второй символ – номер строки в таблице идентификации артикула;

Сс – форма застежки чехла. Первый символ – признак формы застежки чехла. Второй символ – номер строки в таблице идентификации артикула;

Dd – отверстие для судна подкладного. Первый символ – признак отверстия для судна подкладного. Второй символ – номер строки в таблице идентификации артикула.

Пример записи при заказе или в другой документации для матраца двухсекционного, длина 1600 мм, ширина 700 мм, высота 120 мм, чехол из искусственная кожа, ППВ наполнитель, застежка П-образной формы, без выреза для судна подкладного:

«Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-19398005-2019

-A7.B3.C1.D2 1600x700x120»

Маркировка матраца должна быть постоянно нанесенной и несмываемой, прикрепленную в соответствии с ГОСТ 16371 и содержать: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; адрес места производства; наименование медицинского изделия; дата изготовления; обозначение настоящих технических условий; артикул, вариант исполнения, размеры; условия хранения (или символ); номер и дата регистрационного удостоверения.

10 Свидетельство о приемке.

Матрац изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями госуда рственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ 32.50.50-001-19398005-2019, сертификат соответствия № РОСС) и признан годным к эксплуатации.

Артикул изделия с размерами

A4.B1.C1.D1 1600x680x80мм

Дата выпуска
ОТК.

02.04.2020



11 Свидетельство об упаковке.

Матрац упакован на предприятии Изготовителя согласно требованиям, ТУ 32.50.50-001-19398005-2019

Упаковщик
должность


подпись

Иванов И.В.
расшифровка дата

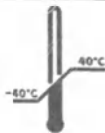
12 Гарантийные обязательства

12.1 Изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода с момента ввода в эксплуатацию.

12.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, изготовитель ответственности не несет.

12.3 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

13 Расшифровка маркировки

№	Описание	Символ
Условия хранения и транспортировки		
1	Необходима защита изделия от воздействия влаги	
2	Диапазон температуры, при котором следует хранить изделие и манипулировать с ним от - 40°C до 40 °C	
Маркировка символами по уходу		
1	Максимальная температура стирки 95°C Обычный режим	
2	Не отбеливать. При стирке не использовать средства, содержащие отбеливатели (хлор)	
3	Глажение запрещено	
4	Сушить при высокой температуре	
5	Отжим, выкручивание запрещено	

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью 8 листа(ов).

Генеральный директор

ООО «СКС»



/Проничев Д.С.

20__ года