

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ИНТЕРОН"



Пархоменко А.А

« 22 » 09 2021 г.

Кушетка медицинская
по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021

Руководство по эксплуатации
ИНТН.942819.001 РЭ

г. Саратов
2021

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ Версия: 1.1 Страница: 2 из 35
--	---

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	6
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	16
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	17
7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	18
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	20
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	20
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	21
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	24

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 3 из 35

Настоящее руководство распространяется на Кушетку медицинскую по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021 (в дальнейшем – кушетка) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках кушетки, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения кушетки отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал, детально изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования кушетки, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОН»
 Россия, 410015, Саратовская обл, Саратов г, им. Орджоникидзе Г.К. ул, дом № 6А, офис 7
 Тел: 8-927-120-77-87
 E-mail: interonmed@mail.ru

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 4 из 35

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Кушетка медицинская предназначена для организации рабочего места во время осмотра пациентов, а также для проведения терапевтических манипуляций и массажных процедур.

Область применения: в условиях лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждений и медико-диагностических центров различного профиля.

Изделие нестерильное для многократного использования.

Вид контакта с организмом человека – кратковременный с неповрежденной кожей.

В зависимости от потенциального риска применения кушетка относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид кушетки в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 116990 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Код ОКПД2 – 32.50.30.110.

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям кушетка относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.2 Показания к применению:

- осмотр пациентов,
- уход за пациентом;
- для введения пациенту инъекций;
- для забора анализов у пациентов;
- осуществление массажных процедур.

1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей руководства по эксплуатации, показаний и противопоказаний.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 5 из 35

1.5 Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте кушетку только в соответствии с данным руководством.
- Уход за кушеткой осуществлять в соответствии с данным руководством.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы и химические средства, не предназначенные для ухода за кушеткой.
- Не следует ставить на поверхность кушетки горячие предметы.
- Не использовать для транспортировки (переноски и перевозки) пациентов.
- Запрещается передвигать, переносить кушетку при нахождении на ней пациента.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 6 из 35

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Кушетка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ТУ 32.50.30–003-24933245-2021 и комплекту конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

Таблица 1 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

Наименование	Обозначение документа ИНТН.942819.002	№ Рисунка
Кушетка медицинская К-100	ИНТН.942819.002-001	Рис. А.1
Кушетка медицинская К-101	ИНТН.942819.002-002	Рис. А.2
Кушетка медицинская К-102	ИНТН.942819.002-003	Рис. А.3
Кушетка медицинская К-103	ИНТН.942819.002-004	Рис. А.4
Кушетка медицинская К-104	ИНТН.942819.002-005	Рис. А.5
Кушетка медицинская К-105	ИНТН.942819.002-006	Рис. А.6

2.1.2 Габаритные размеры и масса кушетки соответствуют значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2– Массогабаритные характеристики

Наименование	Габаритные размеры* (Д x Ш x В), мм.	Габаритные размеры подголовника (Д x Ш), мм	Угол наклона подголовника в пределах °	Масса не более, кг.
Кушетка медицинская К-100	1990x660x550±5	450x650±5	от 0 до 30	30
Кушетка медицинская К-101	1990x660x550±5	450x650±5	от 0 до 30	35
Кушетка медицинская К-102	2000x700x550±5	450x700±5	от 0 до 30	39
Кушетка медицинская К-103	2000x700x550±5	450x700±5	от 0 до 30	39
Кушетка медицинская К-104	2000x700x750±5	450x700±5	от 0 до 30	41
Кушетка медицинская К-105	2000x700x750±5	450x700±5	от 0 до 30	45

2.1.3 Каркас имеет сборную конструкцию. В зависимости от варианта исполнения, каркас, стоевые (ножки) и элементы усиления выполнены из профильной стальной трубы размером:

- 25x25x1,5±0,2 мм.;
- 25x50x1,5±0,2 мм.

2.1.4 Покраска каркаса всего номенклатурного перечня изделий, осуществляется порошковой краской.

2.1.5 В зависимости от исполнения кушетки, ложе изделия изготовлено:

- основание, из плиты древесно-стружечной, толщиной не менее 16 мм.;
- наполнение, из пенополиуритана, толщиной не менее 20 или 50 мм.;
- покрытие, из поливинилхлоридной (PVC) винилискожи обивочной.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 7 из 35

2.1.6 Высота стоевых (ножек) составляет:

- Кушетка медицинская **К-100** - 520 ± 5 мм.;
- Кушетка медицинская **К-101** - 520 ± 5 мм.;
- Кушетка медицинская **К-102** - 520 ± 5 мм.;
- Кушетка медицинская **К-103** - 520 ± 5 мм.;
- Кушетка медицинская **К-104** - 720 ± 5 мм.;
- Кушетка медицинская **К-105** - 720 ± 5 мм.

2.1.7 Изделие выдерживают номинальную равномерно распределенную нагрузку.

За номинальную принимают нагрузку массой:

- Кушетка медицинская **К-100** - 150 ± 10 кг.;
- Кушетка медицинская **К-101** - 200 ± 10 кг.;
- Кушетка медицинская **К-102** - 150 ± 10 кг.;
- Кушетка медицинская **К-103** - 200 ± 10 кг.;
- Кушетка медицинская **К-104** - 150 ± 10 кг.;
- Кушетка медицинская **К-105** - 200 ± 10 кг.

2.1.8 На видимой поверхности изделия не допускаются дефекты, клеевые пятна, потертость, загрязнение поверхности, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки краски, заусенцы и морщины.

2.1.9 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для группы условий 1.

2.1.10 Наружные поверхности кушетки устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении кушетки, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве кушетки, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3 Для изготовления кушетки используются сырье, материалы и покупные изделия, контактирующие с телом человека, согласно таблице 3.

ООО "ИНТЕРПОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 8 из 35

Таблица 3 – Сырье, материалы и покупные изделия

№	Вариант исполнения	Наименование	Материалы
1	Кушетка медицинская К-100, Кушетка медицинская К-102, Кушетка медицинская К-104	Каркас, стоевые (ножки)	Труба стальная электросварная мерной длины, размер 25х25х1,5 мм., сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050. Изготовитель: ООО «Волжский трубопрофильный завод», г. Волжский, Россия.
			Покрытие элементов каркаса, стоевых (ножек): Порошковая краска, марки S090. Изготовитель: ООО «Порошковая краска», г. Новосибирск, Россия.
		Покрытие ложе	Винилискожа обивочная, марки VENEZIA. Изготовитель: «NATROYAL Group ROTO SCREENTECH Pvt.Ltd» Индия или Винилискожа обивочная, марки SAPPO. Изготовитель: ООО "Чеховские Мануфактуры", г. Чехов, Россия
2	Кушетка медицинская К-101, Кушетка медицинская К-103, Кушетка медицинская К-105	Каркас, стоевые (ножки) и элементы усиления	Труба стальная электросварная мерной длины, размер 25х25х1,5 мм. и 25х50х1,5 мм, сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050. Изготовитель: ООО «Волжский трубопрофильный завод», г. Волжский, Россия.
			Покрытие элементов каркаса и усиления, стоевых (ножек): Порошковая краска, марки S090. Изготовитель: ООО «Порошковая краска», г. Новосибирск, Россия
		Покрытие ложе	Винилискожа обивочная, марки VENEZIA Изготовитель: «NATROYAL Group ROTO SCREENTECH Pvt.Ltd» Индия или Винилискожа обивочная, марки SAPPO Изготовитель: ООО "Чеховские Мануфактуры", г. Чехов, Россия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средний срок службы кушетки не менее 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям. Решение о дальнейшей эксплуатации после достижения этого срока принимается потребителем после проведения технического обслуживания, исходя из экономической целесообразности и состояния изделия.

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30–003-24933245-2021, в вариантах исполнения.

I. Варианты исполнения:

1 Кушетка медицинская К-100

1.1 Ложе – 1 шт.;

1.2 Основание ложе – 1 шт.;

1.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 9 из 35

- 1.4 Элемент усиления – 2 шт.;
- 1.5 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 1.6 Болт – 8 шт.;
- 1.7 Гайка – 10 шт.;
- 1.8 Шайба – 30 шт.;
- 1.9 Шуруп – 18 шт.;
- 1.10 Болт – 8 шт.;
- 1.11 Болт – 2 шт.;
- 1.12 Гайка – 2 шт.;
- 1.13 Шайба – 2 шт.;
- 1.14 Шуруп – 4 шт.;
- 1.15 Болт – 2 шт.;
- 1.16 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2 Кушетка медицинская К-101

- 2.1 Ложе – 1 шт.;
- 2.2 Основание ложе – 1 шт.;
- 2.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;
- 2.4 Элемент усиления – 2 шт.;
- 2.5 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 2.6 Болт – 8 шт.;
- 2.7 Гайка – 10 шт.;
- 2.8 Шайба – 30 шт.;
- 2.9 Шуруп – 8 шт.;
- 2.10 Болт – 8 шт.;
- 2.11 Шуруп – 10 шт.;
- 2.12 Болт – 2 шт.;
- 2.13 Гайка – 2 шт.;
- 2.14 Шайба – 2 шт.;
- 2.15 Шуруп – 4 шт.;
- 2.16 Болт – 2 шт.;
- 2.17 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3 Кушетка медицинская К-102

- 3.1 Ложе – 1 шт.;
- 3.2 Основание ложе – 1 шт.;
- 3.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;
- 3.4 Элемент усиления – 2 шт.;
- 3.5 Элемент усиления – 1 шт.;
- 3.6 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 3.7 Болт – 8 шт.;
- 3.8 Гайка – 14 шт.;
- 3.9 Шайба – 38 шт.;
- 3.10 Шуруп – 18 шт.;

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 10 из 35

- 3.11 Шуруп – 4 шт.;
- 3.12 Болт – 2 шт.;
- 3.13 Гайка – 2 шт.;
- 3.14 Шайба – 2 шт.;
- 3.15 Регулируемая опора – 4 шт.;
- 3.16 Болт – 12 шт.;
- 3.17 Болт – 2 шт.;
- 3.18 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4 Кушетка медицинская К-103

- 4.1 Ложе – 1 шт.;
- 4.2 Основание ложе – 1 шт.;
- 4.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;
- 4.4 Элемент усиления – 2 шт.;
- 4.5 Элемент усиления – 1 шт.;
- 4.6 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 4.7 Болт – 8 шт.;
- 4.8 Гайка – 14 шт.;
- 4.9 Шайба – 38 шт.;
- 4.10 Шуруп – 8 шт.;
- 4.11 Шуруп – 4 шт.;
- 4.12 Шуруп – 10 шт.;
- 4.13 Болт – 2 шт.;
- 4.14 Гайка – 2 шт.;
- 4.15 Шайба – 2 шт.;
- 4.16 Регулируемая опора – 4 шт.;
- 4.17 Болт – 2 шт.;
- 4.18 Болт – 12 шт.;
- 4.19 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5 Кушетка медицинская К-104

- 5.1 Ложе – 1 шт.;
- 5.2 Основание ложе – 1 шт.;
- 5.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;
- 5.4 Элемент усиления – 4 шт.;
- 5.5 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 5.6 Элемент усиления – 1 шт.;
- 5.7 Болт – 8 шт.;
- 5.8 Гайка – 30 шт.;
- 5.9 Шайба – 54 шт.;
- 5.10 Шуруп – 18 шт.;
- 5.11 Шуруп – 4 шт.;
- 5.12 Болт – 20 шт.;
- 5.13 Болт – 2 шт.;

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 11 из 35

- 5.14 Гайка – 2 шт.;
- 5.15 Шайба – 2 шт.;
- 5.16 Регулируемая опора – 4 шт.;
- 5.17 Болт – 2 шт.;
- 5.18 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6 Кушетка медицинская К-105

- 6.1 Ложе – 1 шт.;
- 6.2 Основание ложе – 1 шт.;
- 6.3 Стоевые (ножки) – 4 шт.;
- 6.4 Элемент усиления – 4 шт.;
- 6.5 Элемент усиления – 1 шт.;
- 6.6 Подъемный механизм – 2 шт.;
- 6.7 Болт – 8 шт.;
- 6.8 Гайка – 30 шт.;
- 6.9 Шайба – 54 шт.;
- 6.10 Шуруп – 8 шт.;
- 6.11 Шуруп – 4 шт.;
- 6.12 Болт – 20 шт.;
- 6.13 Болт – 2 шт.;
- 6.14 Гайка – 2 шт.;
- 6.15 Шайба – 2 шт.;
- 6.16 Регулируемая опора – 4 шт.;
- 6.17 Шуруп – 10 шт.;
- 6.18 Болт – 2 шт.;
- 6.19 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка изделия соответствует ГОСТ Р 50444 и настоящих технических условий.

2.5.2 На каждом изделии должен быть маркировочный ярлык, нанесенный на нижнюю часть ложа (рисунок 1), в виде этикетки, на котором указано:

- наименование изделия, вариант его исполнения;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- заводской номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя;
- наименование и местонахождение производителя;
- дата изготовления: месяц и год;

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 12 из 35

- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- условия транспортирования и хранения.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на транспортную упаковку в виде двух бумажных ярлыков, расположенных по двум сопряженным боковым сторонам и закрепленных с помощью клея, обеспечивающего надежное крепление на всех этапах транспортировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

- «Хрупкое. Осторожно»;
- «Беречь от влаги»;
- «Верх».



Юридический адрес: Россия, 410015, область Саратовская, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д.6А, офис 7 Тел./Факс 8(927)120-77-87	Кухонка медицинская К-XXX по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	Изготовитель: ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Заводской номер: XXXXXXXXXXXX	ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 32.50.30-003-24933245-2021	РУ № ____ / ____ от ____
Дата изготовления: XXXXXXXX	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации ИНТН.942819.001 РЭ	Гарантийный срок хранения: 3 месяца Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев Срок службы: не менее 8 лет
Транспортировать изделие при температуре от -50 до +50 С и относительной влажности до 100%. Хранить изделие в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		

Рисунок 1 – шаблон маркировки

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 13 из 35

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

2.6.2 Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в упаковку.

2.6.3 Готовое изделие должно быть упаковано в короб из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 и обвязано полипропиленовой лентой.

2.6.4 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту кушетки от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 14 из 35

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям кушетка соответствует требованиями стандартов серии ГОСТ ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 15 из 35

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения



Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем.

Проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

При обнаружении повреждений, обратитесь к Поставщику.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.4 настоящего руководства по эксплуатации.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

4.3 Порядок работы с изделием, поставляемым в разобранном виде

- Аккуратно распакуйте комплект кушетки, утилизируйте упаковочный материал.
- Элементы необходимые для сборки кушетки, упакованы в отдельный упаковочный пакет и уложены в упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.



Внимательно изучите инструкцию по сборке

Инструкция по сборке кушетки приведена в приложении А.



Перед первым использованием рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п. 2.1.9).

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 16 из 35

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

При эксплуатации изделие не требует особого технического обслуживания.

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений при внешнем осмотре.

Подтянуть все гайко-резьбовые соединения до достаточного усилия.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящего руководства.

5.1 Внешние доступные поверхности кушетки протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644 или иные средства согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за кушеткой.

 Не следует ставить на поверхность кушетки горячие предметы.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 17 из 35

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение изделия должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 100%)

6.3 Условия хранения изделия в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 °С).

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 18 из 35

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.3684–21. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.3684–21 изделие относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией изделия должны быть подвергнуты санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Изделие должны подлежать утилизации в случае:

– окончания срока эксплуатации;

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 19 из 35

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование кушетки должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации кушетки допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 20 из 35

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30–003-24933245-2021 производства ООО «ИНТЕРОН»

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30–003-24933245-2021

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ИНТЕРОН» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 21 из 35

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок после непосредственного получения рекламации.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин несоответствия (повреждений) необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия от поставщика, и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание несоответствия (повреждения);
- предполагаемая причина несоответствия (повреждения);
- наименование несоответствия (повреждения) частей и т.д.

Все рекламации должны быть подтверждены фото- и/или видеоматериалами.

Все рекламации визируются руководителем организации, получившим данный Товар, или лицом, уполномоченным руководителем данной организации.

Изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя, транспортно-экспедиционной компании или посредника (торгующей организацией) в возникновении дефекта в изделии.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 22 из 35

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления.

12.4 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт изделия.

12.5 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящем руководстве и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

– Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

– Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 23 из 35

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-003-24933245-2021

Исполнение _____ **Артикул** _____ **Заводской номер** _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец

(подпись, печать)

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 24 из 35

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Инструкция по сборке кушетки
Кушетка медицинская К-100



Рисунок А.1 – Общий вид изделия

Таблица А.1 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложe	1	-
2	Основание ложe	1	-
3	Стoевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	2	-
5	Подъемный механизм	2	-
6	Болт	8	6x40
7	Гайка	10	M6
8	Шайба	30	6
9	Шуруп	18	4x40
10	Болт	8	6x60
11	Болт	2	8x70
12	Гайка	2	M8
13	Шайба	2	8
14	Шуруп	4	4x16
15	Болт	2	6x70

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 25 из 35

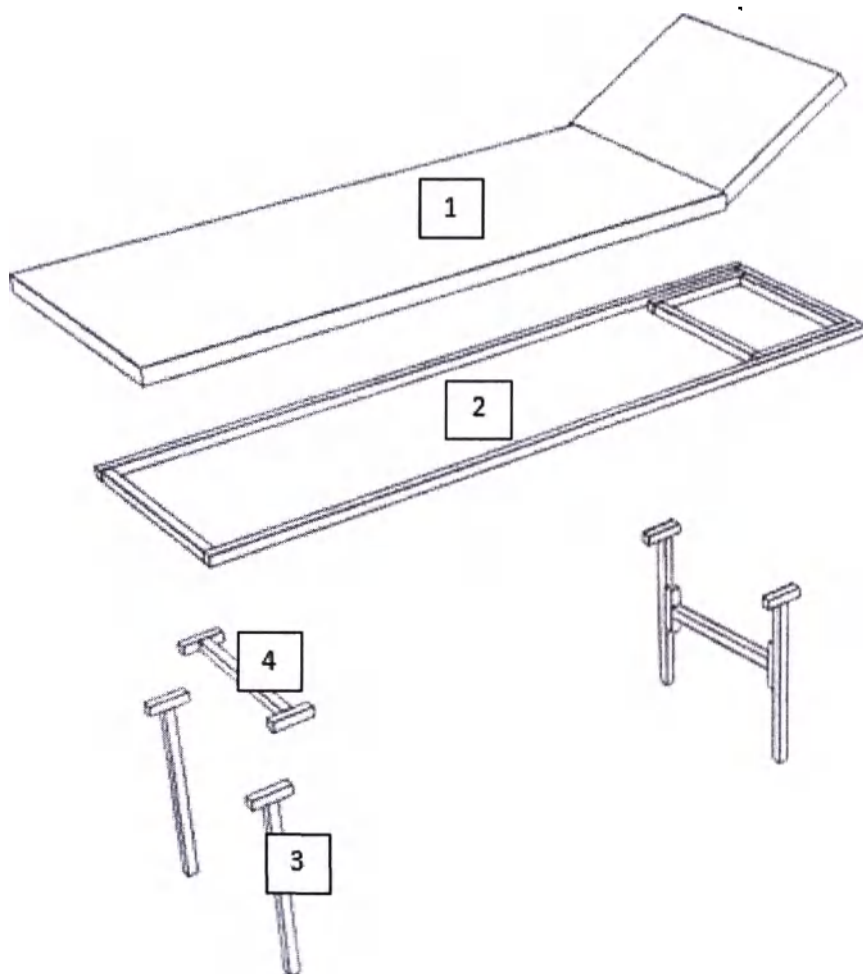


Рисунок А.1.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
 - Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №6, шайб №8.
 - Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 при помощи болтов №10, гаек №7, шайб №8.
 - После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №9.
 - Установите подъемный механизм №5, используя болты №11, гайки №12, шайбы №13.

Кушетка медицинская К-101



Рисунок А.2 – Общий вид изделия

Таблица А.2 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложe	1	-
2	Основание ложe	1	-
3	Стоевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	2	-
5	Подъемный механизм	2	-
6	Болт	8	6x40
7	Гайка	10	M6
8	Шайба	30	6
9	Шуруп	8	4x40 *
10	Болт	8	6x60
11	Шуруп	10	4x65
12	Болт	2	8x70
13	Гайка	2	M8
14	Шайба	2	8
15	Шуруп	4	4x16
16	Болт	2	6x70

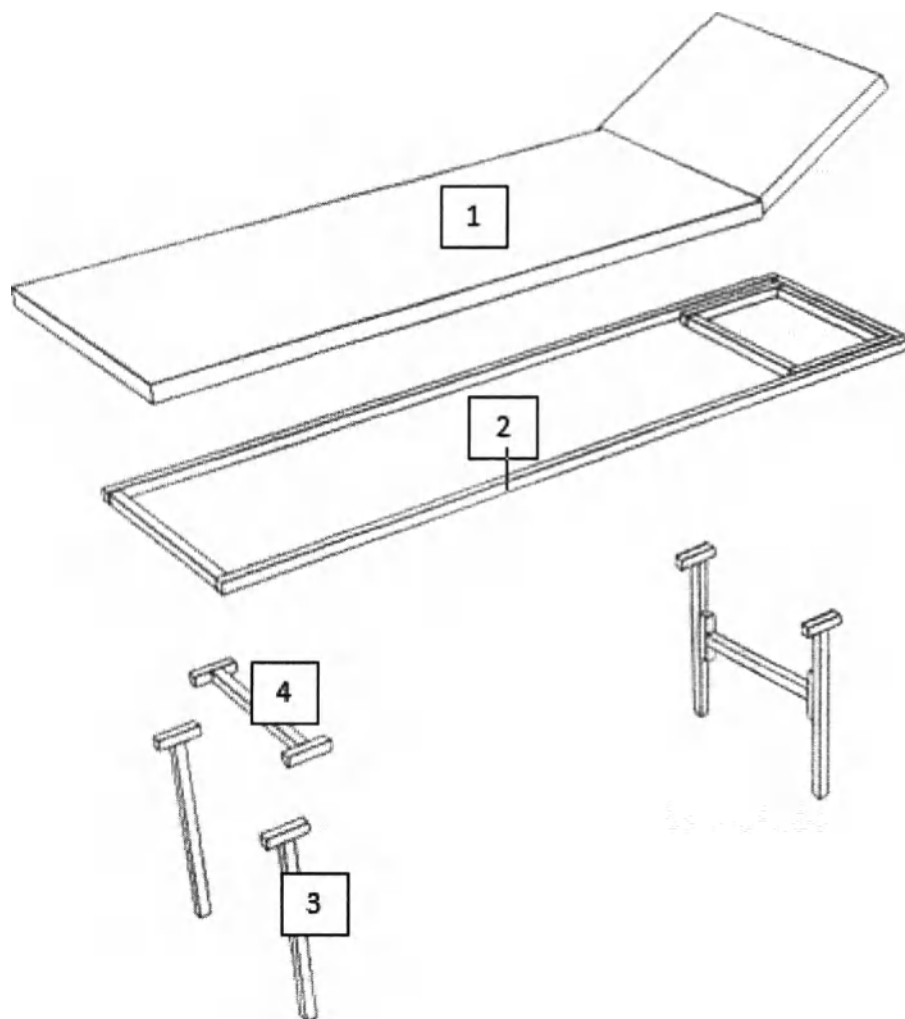


Рисунок А.2.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
- Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №6, шайб №8.
- Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 при помощи болтов №10, гаек №7, шайб №8.
- После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №9 и шурупы №11.
- Установите подъемный механизм №5, используя болты №12, гайки №13, шайбы №14.

Кушетка медицинская К-102

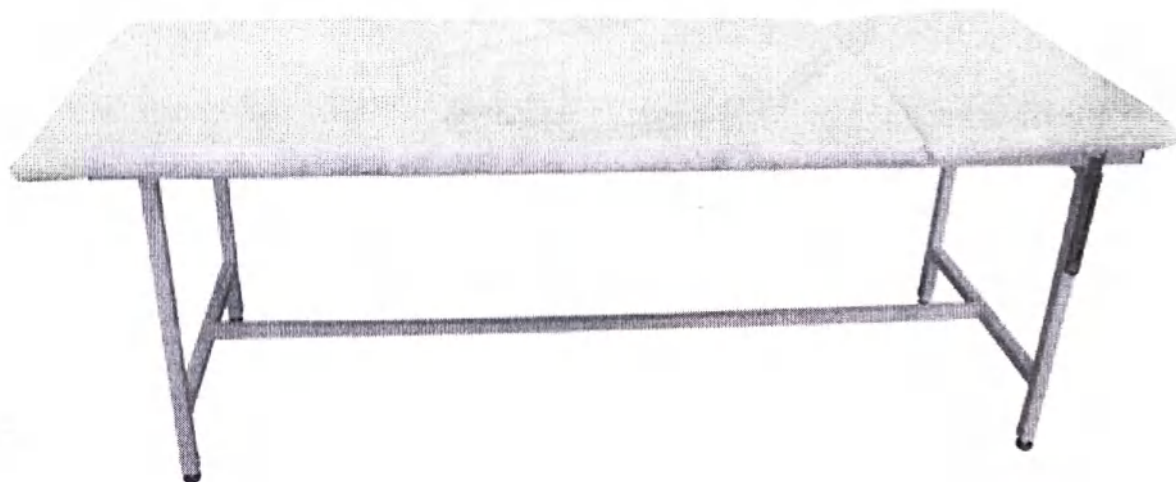


Рисунок А.3 – Общий вид изделия

Таблица А.3 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложе	1	-
2	Основание ложе	1	-
3	Стыевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	2	-
5	Элемент усиления	1	-
6	Подъемный механизм	2	-
7	Болт	8	6x40
8	Гайка	14	M6
9	Шайба	38	6
10	Шуруп	18	4x40*
11	Шуруп	4	4x16
12	Болт	2	8x70
13	Гайка	2	M8
14	Шайба	2	8
15	Регулируемая опора	4	M10
16	Болт	12	6x60
17	Болт	2	6x70

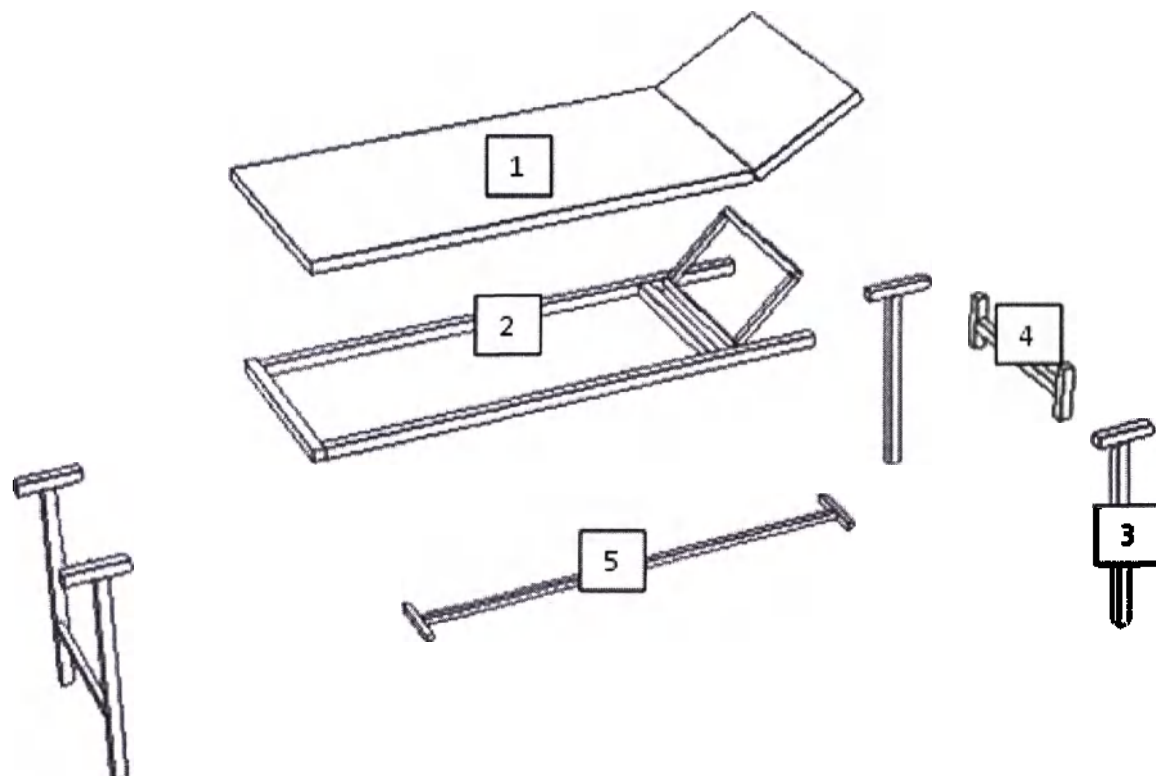


Рисунок А.3.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
- Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №7, гаск №8, шайб №9. Вкрутите регулируемые опоры №15.
- Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 и №5 при помощи болтов №16, гаск №8, шайб №9.
- После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №10.
- Установите подъемный механизм №6, используя болты №12, гайки №13, шайбы №14.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 30 из 35

Кушетка медицинская К-103

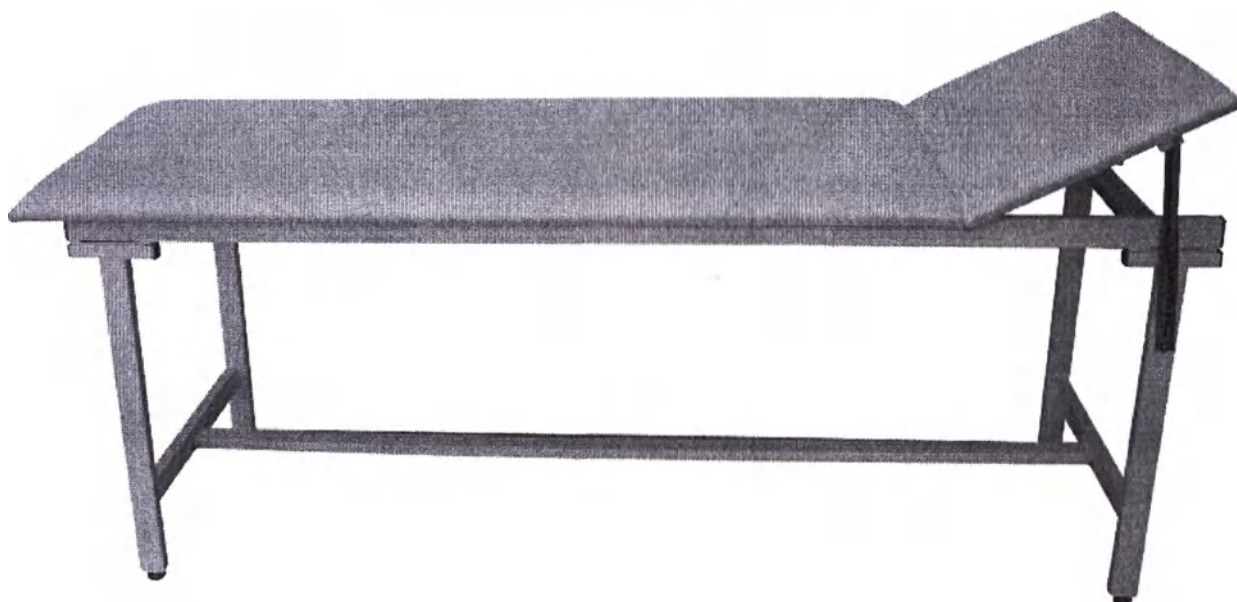


Рисунок А.4 – Общий вид изделия

Таблица А.4 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложе	1	-
2	Основание ложе	1	-
3	Стыевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	2	-
5	Элемент усиления	1	-
6	Подъемный механизм	2	-
7	Болт	8	6x40
8	Гайка	14	M6
9	Шайба	38	6
10	Шуруп	8	4x40
11	Шуруп	4	4x16
12	Шуруп	10	4x65
13	Болт	2	8x70
14	Гайка	2	M8
15	Шайба	2	8
16	Регулируемая опора	4	M10
17	Болт	2	6x70
18	Болт	12	6x60

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ Версия: 1.1 Страница: 31 из 35
---	---

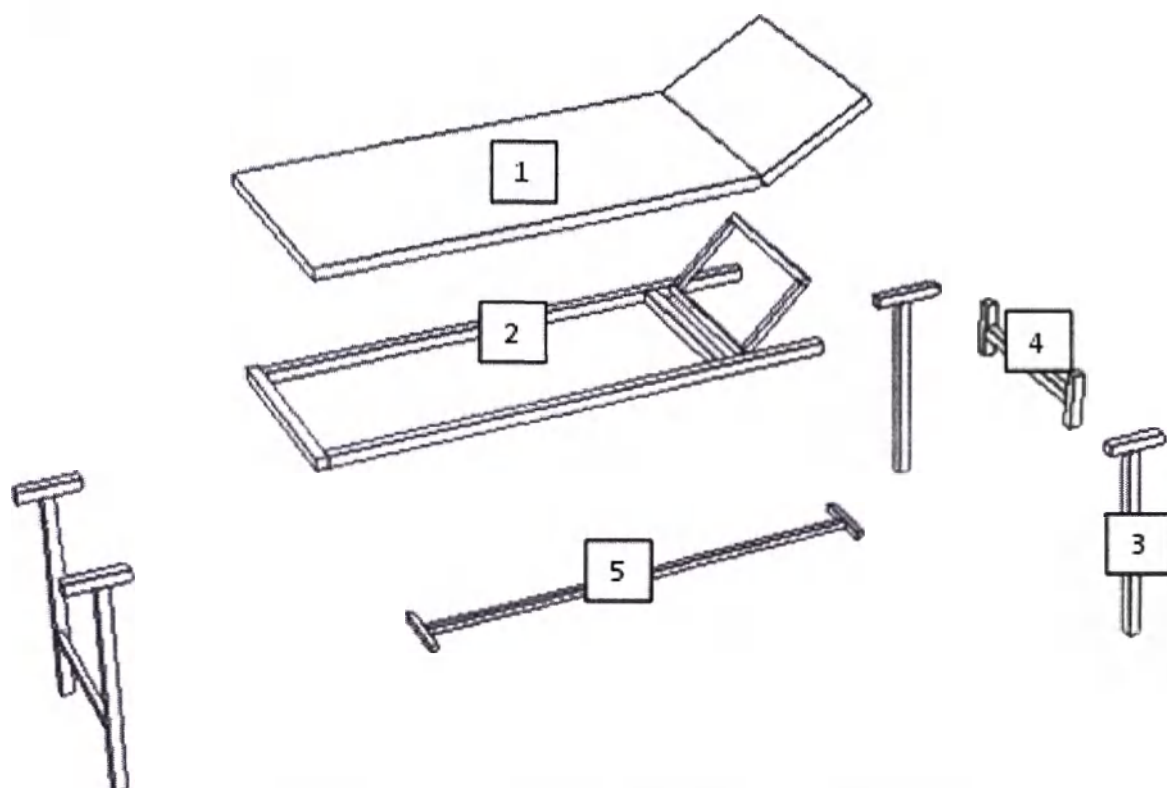


Рисунок А.4.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
 - Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №7, гаек №8, шайб №9. Вкрутите регулируемые опоры №16.
 - Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 и №5 при помощи болтов №18, гаек №8, шайб №9.
 - После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №10 и шурупы №12.
 - Установите подъемный механизм №6, используя болты №13, гайки №14, шайбы №15.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 32 из 35

Кушетка медицинская К-104

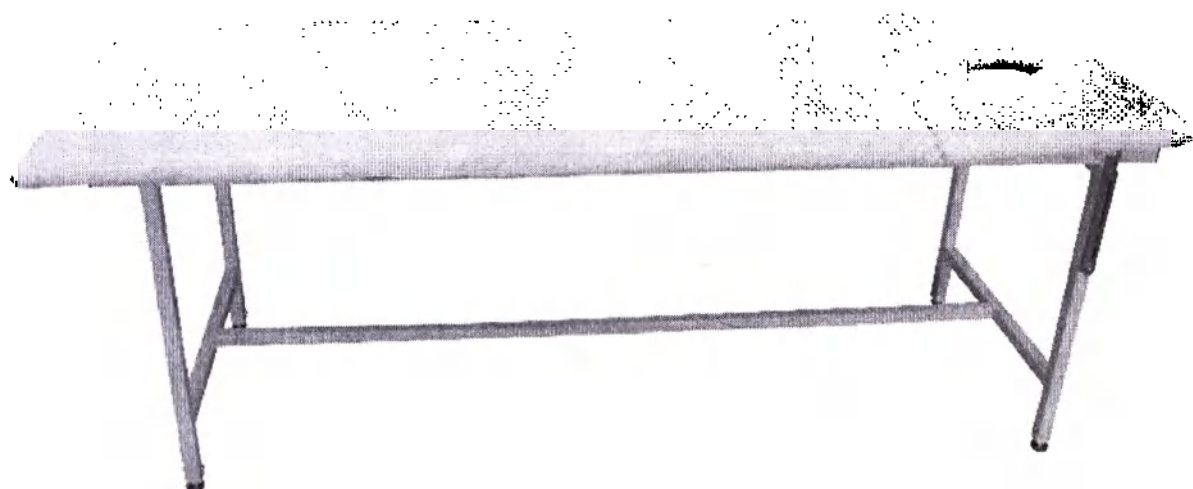


Рисунок А.5 – Общий вид изделия

Таблица А.5 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложe	1	-
2	Основание ложe	1	-
3	Стоевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	4	-
5	Подъемный механизм	2	-
6	Элемент усиления	1	-
7	Болт	8	6x40
8	Гайка	30	M6
9	Шайба	54	6
10	Шуруп	18	4x40
11	Шуруп	4	4x16
12	Болт	20	6x60
13	Болт	2	8x70
14	Гайка	2	M8
15	Шайба	2	8
16	Регулируемая опора	4	M10
17	Болт	2	6x70

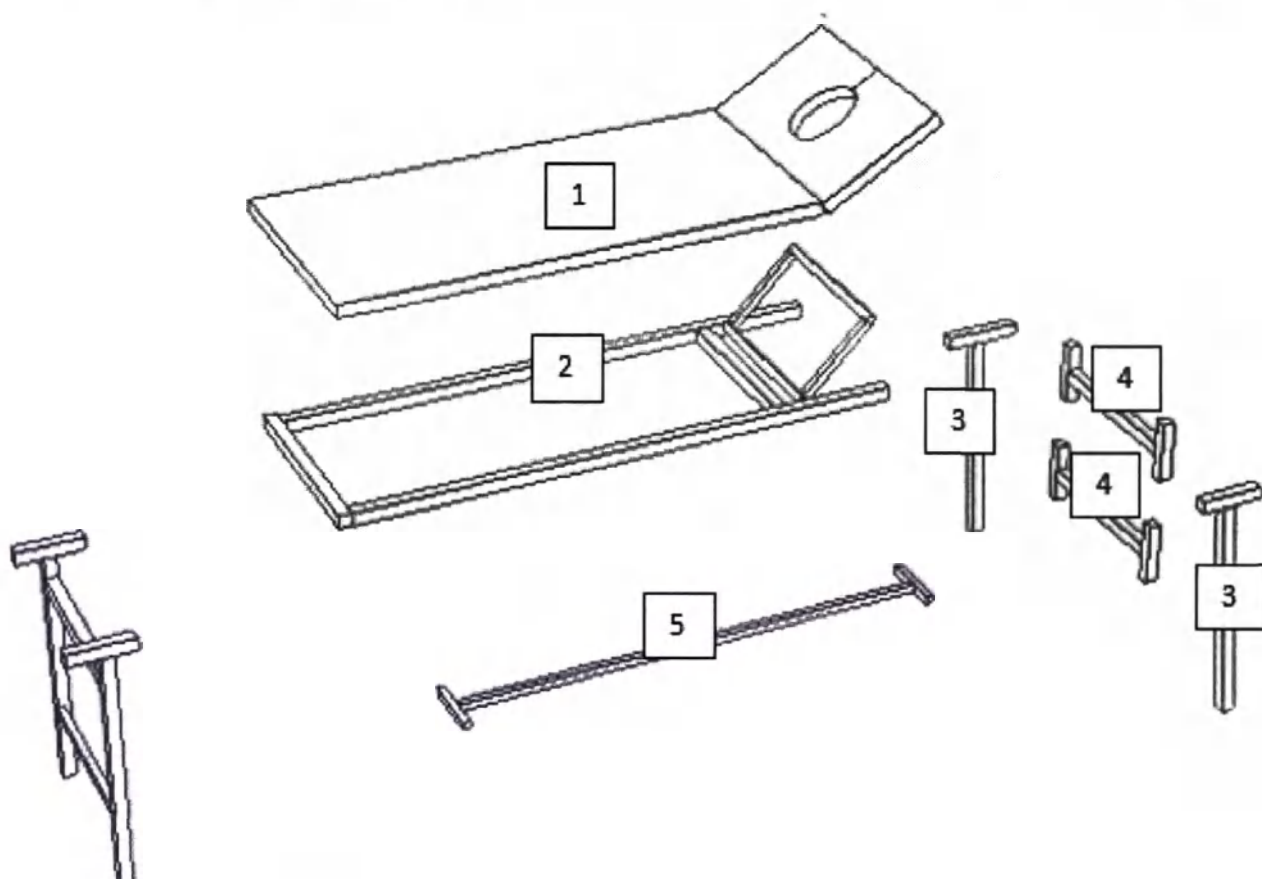


Рисунок А.5.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
- Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №7, шайб №9. Вкрутите регулируемые опоры №16.
- Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 и №5 при помощи болтов №12, гаек №8, шайб №9.
- После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №10.
- Установите подъемный механизм №6, используя болты №13, гайки №14, шайбы №15.

ООО "ИНТЕРОН" Россия, 410015, г. Саратов, ул. им Орджоникидзе Г.К., д. 6А, офис 7 Тел: 8-927-120-77-87 E-mail: interonmed@mail.ru	Документ: ИНТН.942819.001 РЭ
	Версия: 1.1
	Страница: 34 из 35

Кушетка медицинская К-105

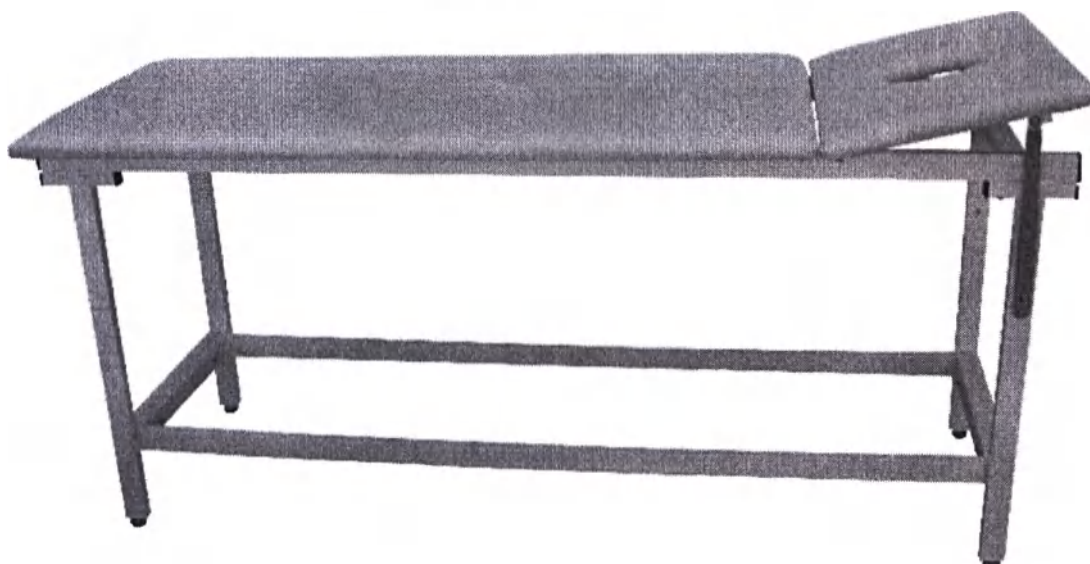


Рисунок А.6 – Общий вид изделия

Таблица А.6 – Параметры комплектующих изделия

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Тип
1	Ложе	1	-
2	Основание ложе	1	-
3	Стоевые (ножки)	4	-
4	Элемент усиления	4	-
5	Элемент усиления	1	-
6	Подъемный механизм	2	-
7	Болт	8	6x40
8	Гайка	30	М6
9	Шайба	54	6
10	Шуруп	8	4x40
11	Шуруп	4	4x16
12	Болт	20	6x60
13	Болт	2	8x70
14	Гайка	2	М8
15	Шайба	2	8
16	Регулируемая опора	4	М10
17	Шуруп	10	4x65
18	Болт	2	6x70

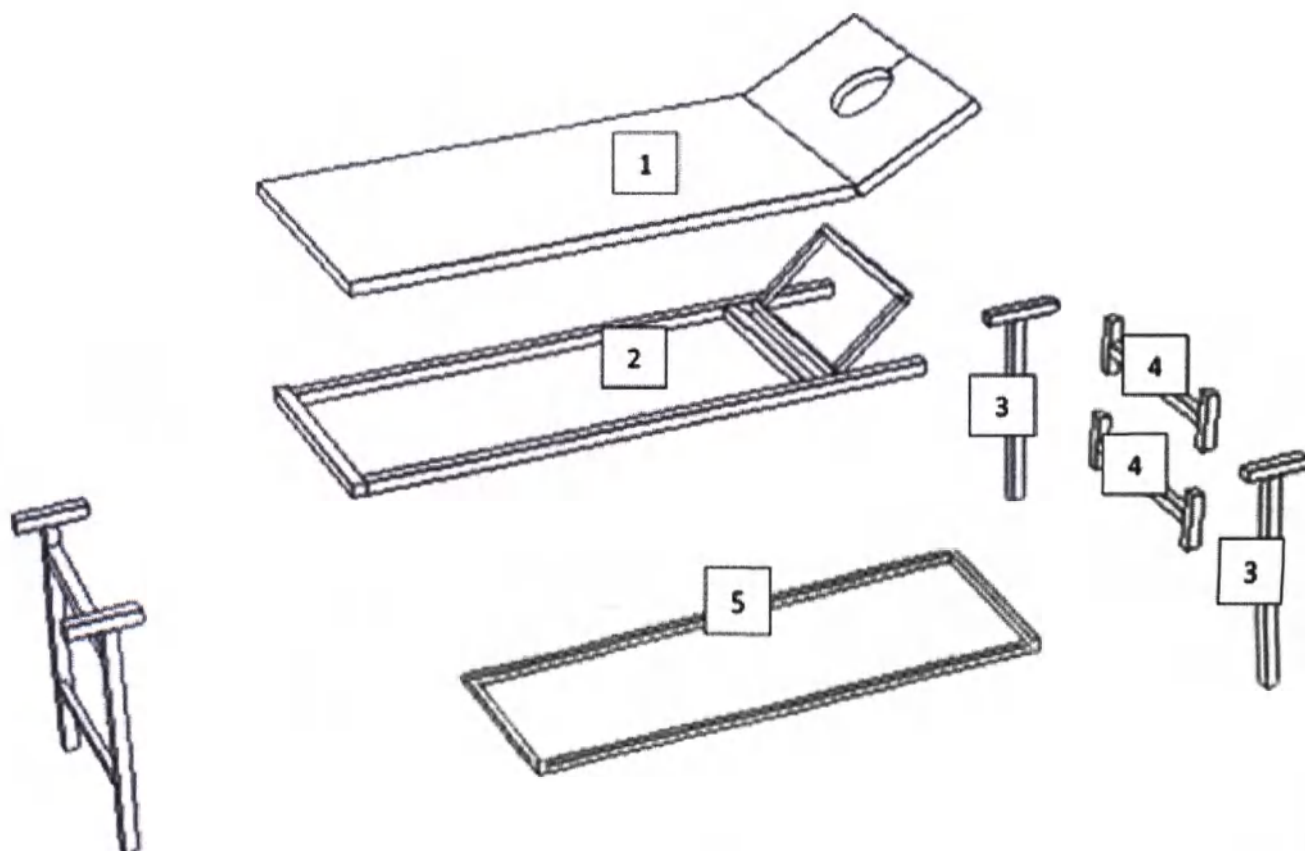


Рисунок А.6.1 – Схема комплектующих изделия

- Аккуратно распакуйте кушетку. Утилизируйте упаковку.
- Сборка кушетки выполняется на ровной чистой поверхности с помощью ручного инструмента.
 - Стоевые (ножки) №3 закрепите к основанию ложе №2 при помощи болтов №7, шайб №9. Вкрутите регулируемые опоры №16.
 - Соедините стоевые (ножки) №3 с элементом усиления №4 и №5 при помощи болтов №12, гаек №8, шайб №9.
 - После сборки установите ложе №1 на каркас, используя шурупы №10 и шурупы №17.
 - Установите подъемный механизм №6, используя болты №13, гайки №14, шайбы №15.

прошито, прошнуровано, скреплено
печатью 3 лист(ов)

Директор ООО «ИНТЕРОН»

Дархоменко А.А
« 28 » августа 20 21 г

прошито, прошнуровано, скреплено