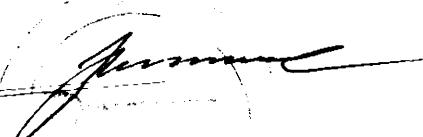



«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Представительства компании
Дентсплай Россия Лимитед


Олег Нижник

 Олег Нижник

« » _____ 20__ г.

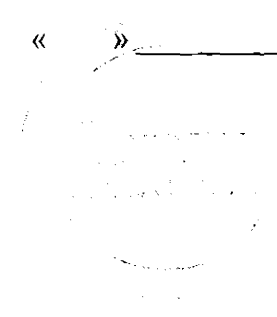

Инструкция по применению:
Инструменты стоматологические эндодонтические для obturation с принадлежностями.

Измерительные инструменты используются для измерения эндодонтических инструментов и штифтов, а так же для укорачивания инструментов и штифтов в соответствии с длиной корневого канала для создания оптимального доступа в эндодонтическую полость.

Боксы стерилизации, подставки и контейнеры для эндоинструментов используются для хранения, эксплуатации и стерилизации. В целях гигиены и санитарной безопасности все инструменты, не имеющие маркировки «стерильно», должны перед использованием проходить очистку, дезинфекцию и стерилизацию во избежание любых видов загрязнений. Это относится как к инструментам, используемым впервые, так и к повторно используемым инструментам.

Инструменты для подготовки к работе: Мандрель используется для полировочных губок. Каналорасширители, перетрационные и калибровочные дрели для расширения устья канала и прохождения прямого отрезка коронковой части корневого канала. Спиральные буры используются для обрезания штифтов. Ключ используется для установки штифтов, а калибраторы для контроля расположения штифта.

Уплотнители гуттаперчи для вертикальной и латеральной конденсации:

Спредер - ручной инструмент для проведения латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов в корневом канале. Выпускается серией с размерами 010, 020, 030, 040 и 025, 030, 040, 050, 060 и длиной рабочей части 21 и 25 мм.

Конденсор - инструмент для конденсации гуттаперчи в канале или работы наконечником. Длина рабочей части 21 и 25 мм, размеры - 025, 030, 035, 040, 045, 060, 070, 080.

Плагер - ручной инструмент для проведения вертикальной конденсации. В отличие от конусного спредера он имеет цилиндрическую форму и тупую верхушку. Выпускается в двух вариантах - ручной и машинный.

Показания к применению:

Данные вспомогательные изделия для стоматологии должны использоваться только в клинических условиях квалифицированным персоналом.

Предосторожности

При обеззараживании изделий строго следуйте инструкциям от производителя.

Отрицательные реакции

В настоящем техническом состоянии не отмечено отрицательных реакций.

Хранение

Приспособления необходимо хранить в сухом чистом месте.

Храните приспособления в стерильной упаковке в сухом и чистом месте.

-Стерильность приспособлений не гарантируется, если упаковка раскрыта, повреждена или увлажнена.

-Перед использованием медицинских приспособлений проверяйте упаковку (ее целостность, отсутствие влаги и срок гарантии стерильности).