

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭлСиМед»
Беликова Ю.С.
02 мая 2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
**«Гель противовоспалительный стерильный РЕФОРМ (REFORM)
в шприцах по ТУ 9398-003-01370391-2016»**

REFORM

Произведено
ООО «ЭлСиМед»

Хранить при температуре от
+5°C до +25°C

Не замораживать! Стерильно! В случае
нарушения целостности и-д-вид упаковки
использовать запрещено! Только
для однократного применения!

Предохранять от солнечного света!
Выполняйте требования инструкции по
применению! Разрешено к применению
только квалифицированным врачом!

Lot №
Партия № Rf 1705001-01
MFG Date
Произведено: 02.05.2017
Exp. Date
Использовать до: 02.05.2019

REFORM

РЕФОРМ (REFORM)

Гель противоспаечный стерильный в шприцах, 5,0 мл

Состав:

Натрия гиалуронат 2,5 мг/мл
Натрия карбоксиметилцеллюлоза 5,0 мг/мл
Натрия хлорид 8,0 мг/мл
Дигидрофосфат натрия 0,2 мг/мл
Гидрофосфат натрия 1,15 мг/мл
Вода для инъекций q.s до 1,0 мл/мл

Производитель: ООО «ЭлСиМед»

143300, Россия, Московская область, Наро-Фоминский р-н,
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 9Ж,
тел.: +7(499)709-16-99

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до 25°C

Предохранять от солнечного света!

Не замораживать! Стерильно! В случае нарушения
целостности упаковки использовать запрещено!

Только для однократного применения!

Выполняйте требования инструкции по применению.

**Разрешено к применению только
квалифицированным врачом!**

STERILE



Комплектность:
шприц наполненный 5,0 мл – 1, инструкции по применению – 1,
стикер-вкладыш с номером партии и сроком годности – 2.

ГОСТ ISO 13485-2011

Регистрационное удостоверение №
ТУ 9398-003-01370391-2016

www.nmtclub.ru

по применению медицинского изделия
«Гель противоспаечный стерильный REFORM (REFORM) в шприцах»

Описание

Гель противоспаечный стерильный REFORM (REFORM) в шприцах – это асперсифный, бесцветный, прозрачный гель
однородного применения, содержащий ионизированную натриевую соль гиалуроновой кислоты и натрия
карбоксиметилцеллюлозу. Является биосовместимым, биотрадируемым продуктом.

Пронумеровано и прошито

2 (две)

листов

Генеральный директор ООО «ЭлСиМед»

Беликова Ю.С.

