

ФР ЛК

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь медицинский бактерицидный в вариантах исполнения

Разработчик: «PharmLine s.r.o.» (Фармлайн ООО)
Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Телефон +420608196035
info@Pharmline.cz

Производитель: «PharmLine s.r.o.» (Фармлайн ООО)
Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Телефон +420608196035
info@Pharmline.cz

Адрес места производства:
1. «PharmLine s.r.o.» (Фармлайн ООО)
Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
2. «Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,LTD» (Джежианг
Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед)
NO.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area
322002 Yiwu City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

Уполномоченный представитель на
территории РФ ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина,
дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.

Утверждено

«PharmLine s.r.o.» (Фармлайн ООО)

(Подпись)

(Расшифровка)

Běžné číslo ověřovací knihy: O V - 1742/2022

Ověřuji, že:-----
Ing. Denis Gerasimenko, nar. 13.8.1985, bytem Praha 3,
Žižkov, Olšanská 2898/4H-----
jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, tuto
listinu před notářem vlastnoručně podepsal.
V Praze dne 7.6.2022
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

SVHLK
JUDr. Kristina Švihlíková
notářská kandidátka
zástupce notáře
JUDr. Miloslav Peterka
notář v Praze



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Česká republika
Czech Republic

Tato veřejná listina
This public document

JUDr. Kristina Švihlíková

2. byla podepsána
has been signed

notářská kandidátka, zástupce notáře

3. jehož funkce
acting in the capacity of

JUDr. Miloslav Peterka

4. opatřena razítkem
bears the seal/stamp of

notář v Praze

OVĚŘENO CERTIFIED

5. v Praze
at Prague

6. dne 14.6.2022.....
date

7. Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministry of Justice of the Czech Republic

8. čís. 6531 / 2022.....
N°

9. kolek/razítko:
duty stamp/stamp:

10. Podpis:
Signature
Diana Homoláčová

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Назначение медицинского изделия	4
3. Условия применения	4
4. Показания/Область применения	4
5. Потенциальный пользователь	4
6. Противопоказания	4
7. Побочные действия	5
8. Риски применения медицинского изделия	5
9. Классификация медицинского изделия	5
10. Вид контакта с организмом человека	5
11. Описание медицинского изделия: общее описание	5
12. Описание медицинского изделия: конструкция и внешний вид	5
13. Технические характеристики	12
14. Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения	14
15. Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие	14
16. Данные о содержащихся в медицинском изделии лекарственных препаратах и фармацевтических субстанциях	15
17. Меры предосторожности при применении медицинского изделия	15
18. Предупреждения, связанные с использованием медицинского изделия	15
19. Способ применения	16
20. Информация о техническом обслуживании	16
21. Клинический обзор	16
22. Стерилизация, очистка, дезинфекция	16
23. Срок годности	16
24. Критерии непригодности медицинского изделия для применения, возврат медицинского изделия	16
25. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации	16
26. Упаковка	17
27. Маркировка	33
28. Расшифровка маркировочных символов	35
29. Гарантийные обязательства	35
30. Порядок осуществления утилизации и уничтожения МИ	35
31. Требования по охране окружающей среды	35
32. Перечень международных нормативных документов/стандартов	35

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь медицинский бактерицидный в вариантах исполнения:

На полимерной основе:

1.1 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.2 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.3 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.4 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2 x 1,9; 7,6 x 1,9; 5,6 x 1,9; 3,8 x 3,8; 7,2 x 2,3; 7,2 x 2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5 x 2,5; 6 x 2; 7,2 x 2,5; 9,5 x 3,8; 3,8 x 5,6; 5,5 x 1,9; 4x1; 4x10; 6x10; 6x7; 10x10; 10x15; 10x20.

1.5 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.6 FineLife лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 1x4; 1,9x7,2; 1,9x7,6; 1,9x5,5; 1,9x5,6; диаметр 2,2; 2,2x7,2; 2,3x7,2; диаметр 2,5; 2x6; 2,5x6,5; 2,5x7,2; 3,8x3,8; 3,8x9,5; 3,8x5,6; 4x10; 6x10.

1.7 Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 1,9x7,2; 2,2x7,5; 2,5x5,6; 4x1; диаметр 2,3;

На нетканой основе:

1.8 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.9 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2 x 1,9; 7,6 x 1,9; 5,6 x 1,9; 3,8 x 3,8; 7,2 x 2,3; 7,2 x 2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5 x 2,5; 6 x 2; 7,2 x 2,5; 9,5 x 3,8; 3,8 x 5,6; 5,5 x 1,9; 4 x 1; 4x10; 6x10; 6x7; 10x10; 10x15; 10x20.

1.10 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.11 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.12 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

На тканевой основе:

1.13 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.14 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.15 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.16 TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1; 6x7; 10x10; 10x15; 10x20.

1.17 Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.18 WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 7,6x1,9; 5,6x1,9; 3,8x3,8; 7,2x2,3; 7,2x2,2; диаметр 2,2; диаметр 2,5; 6,5x2,5; 6x2; 7,2x2,5; 9,5x3,8; 3,8x5,6; 5,5x1,9; 4x10; 6x10; 4x1.

1.19 Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,6x1,9; 7,2x1,9; 7,2x2,3.

1.20 Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,2x1,9; 2,2x7,5; диаметр 2,3;

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено:

- Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;
- Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов;

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях.

ПОКАЗАНИЯ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие применяется при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Медицинский персонал, пациенты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализ рисков для лейкопластыря медицинского выполнен согласно EN ISO 14971. Метод снижения риска, анализ доступных вариантов и реализация мер по управлению рисками

подробно описаны в Файле менеджмента рисков (Risk Management File) Pharmline s.r.o (Фармлайн ООО.), основные разделы которого представлены следующими документами:

- План менеджмента рисков (Risk Management Plan);
- Отчет по менеджменту рисков (Risk Management Report);
- Оценка рисков (Risk Assessment).

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь медицинский предназначен для одноразового использования и относится к классу 3 в соответствии с Правилom 4 Приложения IX Европейской Директивы 93/42/ЕЕС.

ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Кратковременный контакт (до 24 часов) с неповрежденной и поврежденной кожей.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Лейкопластырь медицинский состоит из впитывающей (абсорбирующей) подушки, основы, первичной обертки (кальки).

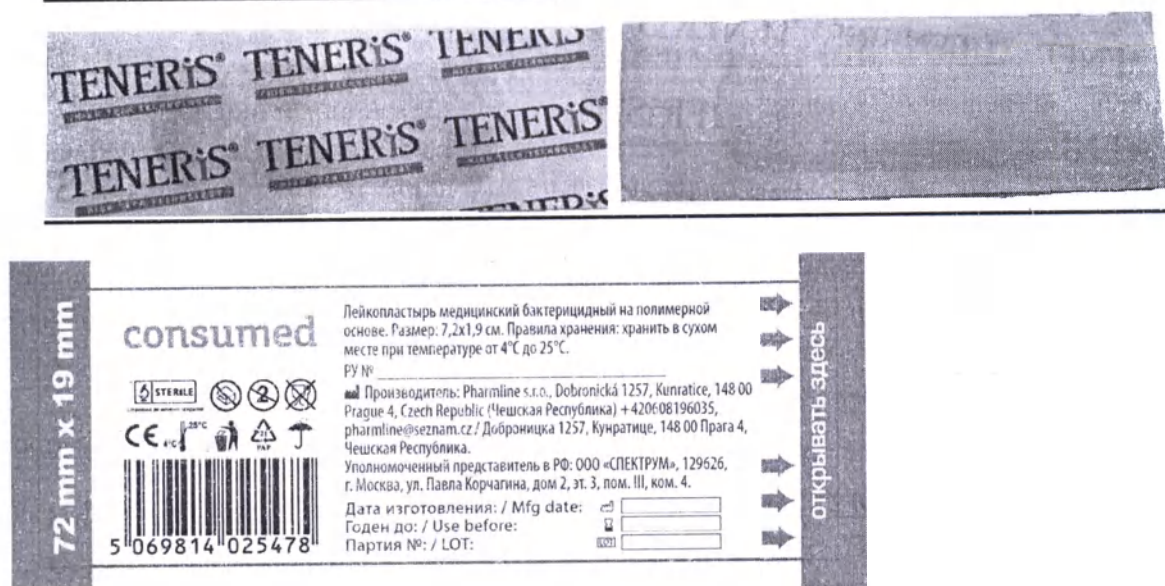
Абсорбирующая подушка, изготовленная из вискозы/полиэстера с содержанием антисептического лекарственного средства, и покрытая тонкой сеткой из полиэтилена, может поглощать выделения из раны, обладает хорошей впитывающей способностью и не срывается с раной, не воздействует на кожу и не вызывает гиперчувствительность кожи.

Основа лейкопластыря представлена тканевыми, неткаными, полимерными материалами.




Пластырь предназначен для краткосрочного использования. Рекомендуемый период составляет не более 24 часов.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД


Образец индивидуальной упаковки*




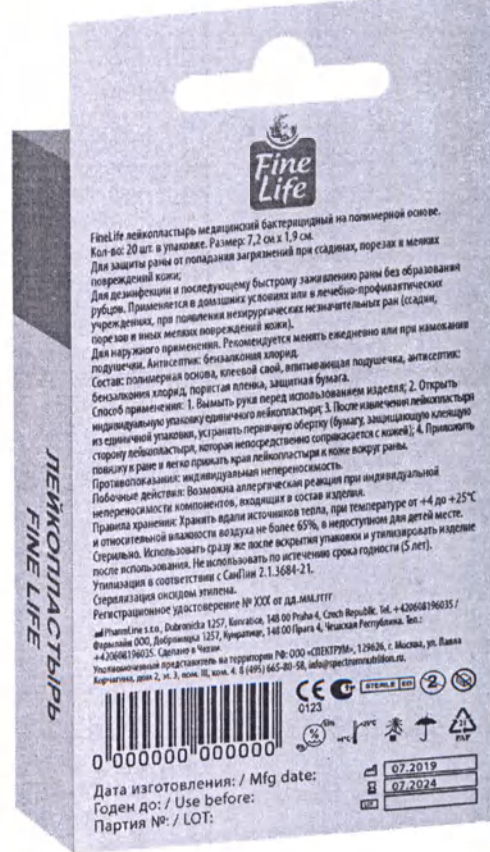
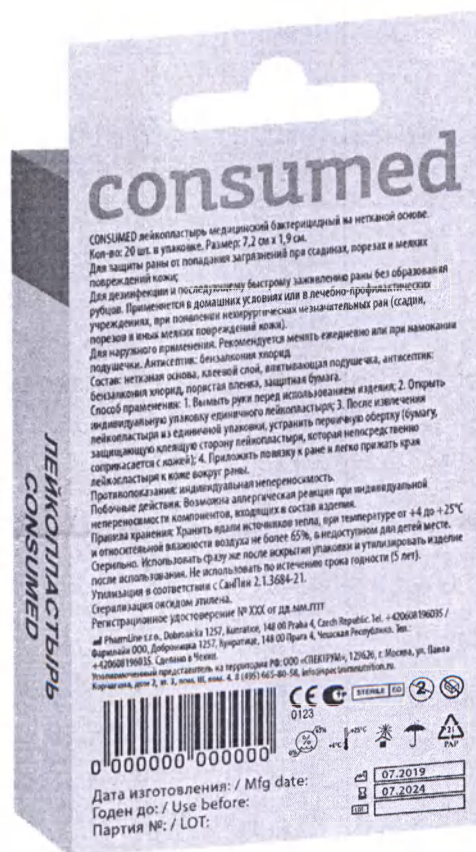
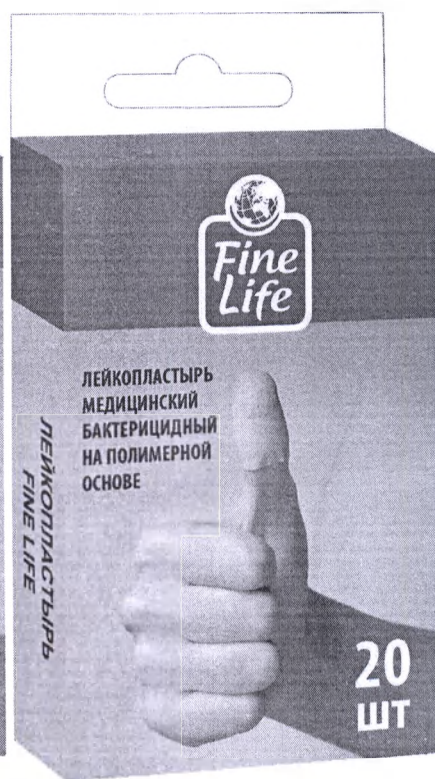
Образец маркировки на потребительской упаковке














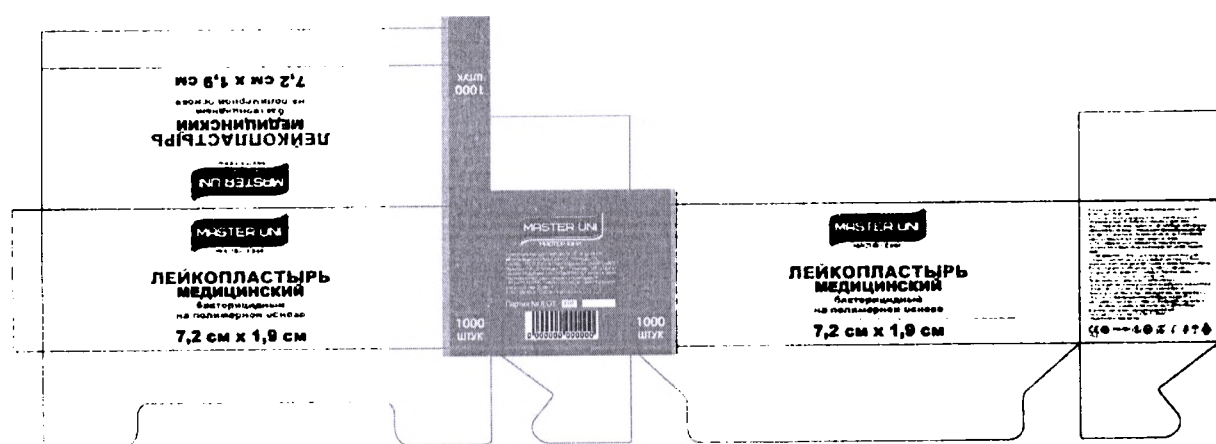
Образец маркировки на транспортной упаковке (middle box)




Лейкопластырь медицинский бактерицидный

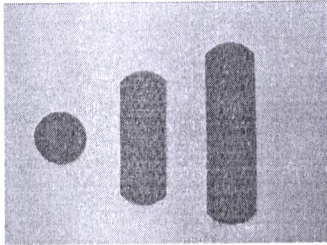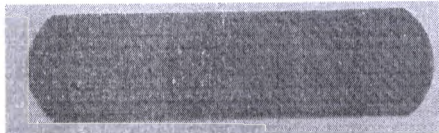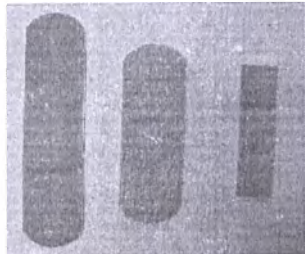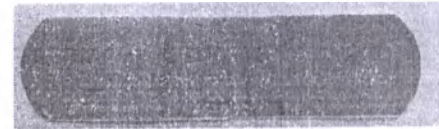Товарный знак	Образец лейкопластыря
Master Uni	<u>Тканевая основа</u> 
	<u>Нетканая основа</u> 
	<u>Полимерная основа</u> 
Teneris	<u>Тканевая основа</u> 
	<u>Нетканая основа</u> 
	<u>Полимерная основа</u> 

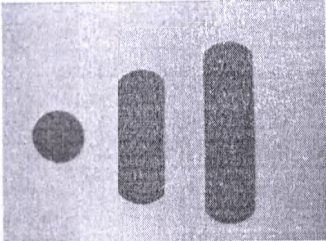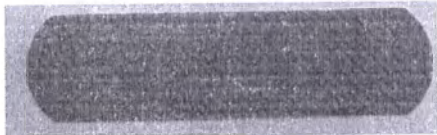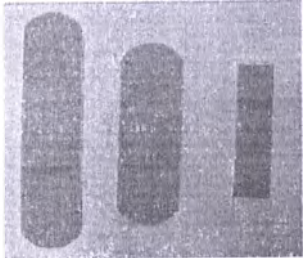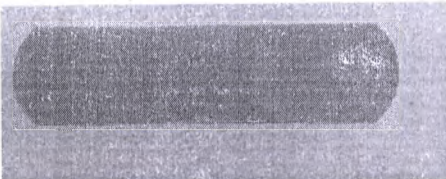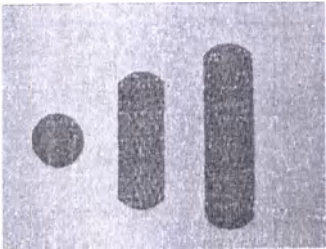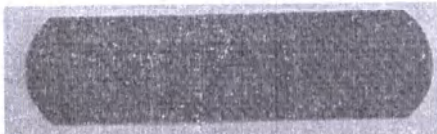Consumed	<u>Тканевая основа</u>  <u>Нетканая основа</u>  <u>Полимерная основа</u> 
	<u>Полимерная основа</u> 
	<u>Тканевая основа</u>  <u>Нетканая основа</u>  <u>Полимерная основа</u>

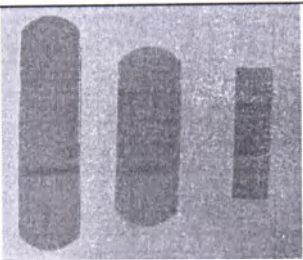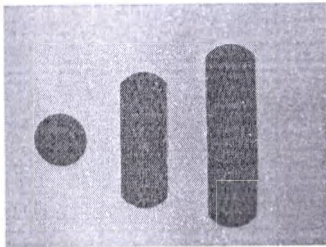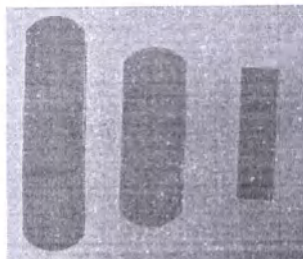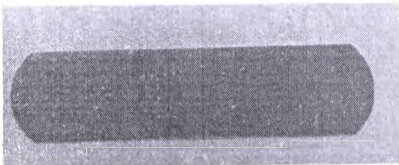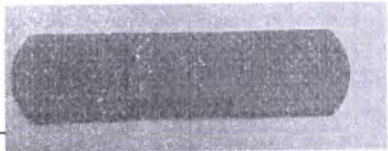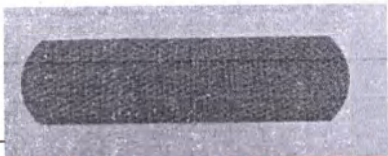	
Firstaid	<u>Тканевая основа</u>  <u>Полимерная основа</u> 
Wellfix	<u>Полимерная основа</u>  <u>Нетканая основа</u>  <u>Тканевая основа</u> 
Вкусвилл	<u>Тканевая основа</u> 

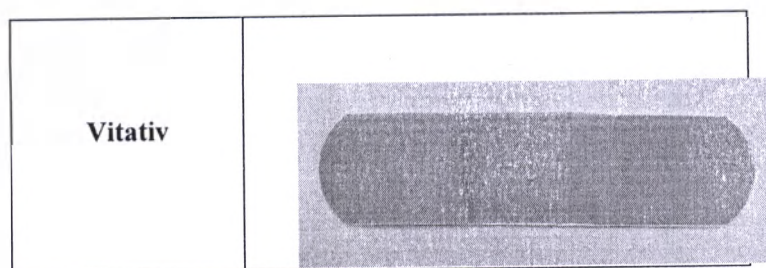

Схематическое описание основных функциональных элементов изделия


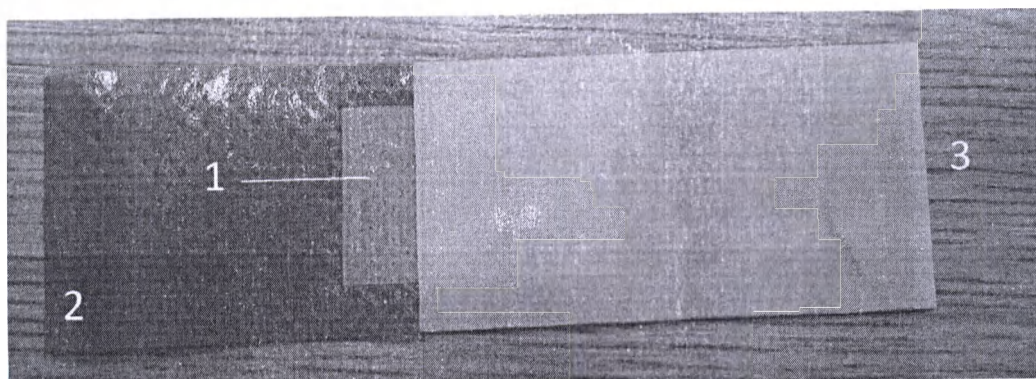


Рис. 1 Лейкопластырь медицинский

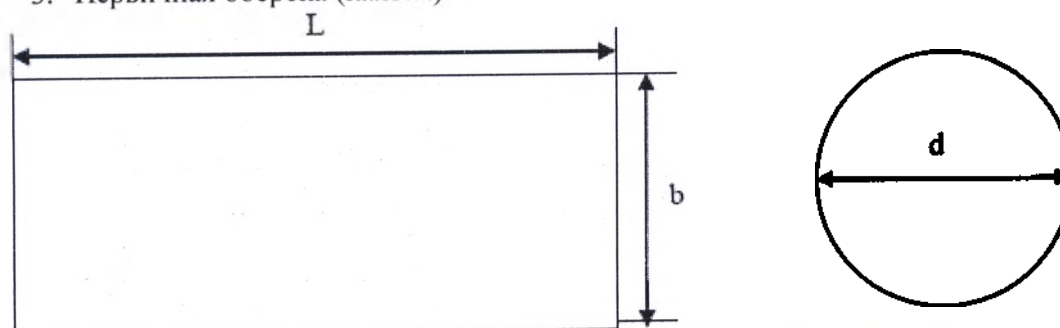1. Впитывающая подушка с антисептиком и нанесенной пористой пленкой
2. Основа с клеящим материалом
3. Первичная обертка (калька)



Лейкопластырь медицинский бактерицидный

Размеры (см)	b(см)	L(см)	d(см)	Масса(г)		
	Основные размеры (погрешность до 10 %)	Основные размеры (погрешность до 10 %)	Основные размеры (погрешность до 10 %)	Полимерная основа (погрешность до 10 %)	Нетканая основа (погрешность до 10 %)	Основные размеры (погрешность до 10 %)
2,2			2,2	0,07	2,2	
2,5			2,5	0,09	2,5	
3,8x3,8	3,8	3,8		0,26	3,8x3,8	3,8
3,8x5,6	3,8	5,6		0,29	3,8x5,6	3,8
4x1	1	4		0,08	4x1	1
4x10	4	10		0,84	4x10	4
5,5x1,9	1,9	5,5		0,17	5,5x1,9	1,9
5,6x1,9	1,9	5,6		0,17	5,6x1,9	1,9
6,5x2,5	2,5	6,5		0,19	6,5x2,5	2,5
6x10	6	10		1,28	6x10	6
6x2	2	6		0,19	6x2	2
7,2x1,9	1,9	7,2		0,23	7,2x1,9	1,9
7,2x2,2	2,2	7,2		0,27	7,2x2,2	2,2
7,2x2,3	2,3	7,2		0,29	7,2x2,3	2,3

7,2x2,5	2,5	7,2		0,31	7,2x2,5	2,5
7,6x1,9	1,9	7,6		0,31	7,6x1,9	1,9
9,5x3,8	3,8	9,5		0,36	9,5x3,8	3,8
6x7	6	7		1,12	6x7	6
10x10	10	10		2,27	10x10	10
15x10	10	15		3,63	15x10	10
20x10	10	20		5,55	20x10	10

Примечание: принцип работы, структура, состав, сырье, характеристики и объем продукта не изменяются, при условии, что специальные размеры могут быть настроены в соответствии с заказом клиента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лейкопластырь медицинский бактерицидный

Размер изделия, см*	Размер впитывающей подушечки, см*	Сопротивление с отслаиванию липкого слоя, Н/м не менее	Сорбционная ёмкость впитывающей подушечки, кап/см² не менее	Время смачивания впитывающей подушечки, с. не более	Водоупорность, мм вод.ст. не менее	Масса, г	Антимикробная бактерицидная активность, мм не менее
MASTER UNI/Доктор Пласт/ Consumed/Wellfix/ FineLife/Firstaid Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе							
2,2	1,2x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,07	1
2,5	1,2x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,09	1
3,8x3,8	1,8x1,8	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	330	0,26	1
3,8x5,6	1,8x1,8	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,29	1
4x1	1,2x1	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320-330	0,08	1
4x10	1x10	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,84	1
5,5x1,9	1,8x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,17	1
5,6x1,9	1,8x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320-330	0,17	1
6,5x2,5	2,3x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,19	1
6x10	2,4x10	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	1,28	1
6x2	1,8x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	310	0,19	1
7,2x1,9	2,3x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320-330	0,23	1
7,2x2,2	2,3x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,27	1
7,2x2,3	2,3x1,4	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,29	1
7,2x2,5	2,3x1,8	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,31	1
7,6x1,9	2,3x1,2	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320-330	0,31	1
9,5x3,8	2,3x1,8	4-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200-250	0,36	1
Teneris Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе							
2,2	1,2x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,07	1
2,5	1,2x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,09	1
3,8x3,8	1,8x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,26	1
3,8x5,6	1,8x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,29	1
4x1	1,2x1	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,08	1
4x10	1x10	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,84	1
5,5x1,9	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,17	1
5,6x1,9	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320	0,17	1
6,5x2,5	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,19	1
6x10	2,4x10	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	1,28	1
6x2	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,19	1
7,2x1,9	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,23	1
7,2x2,2	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,27	1
7,2x2,3	2,3x1,4	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,29	1
7,2x2,5	2,3x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	320	0,31	1
7,6x1,9	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,31	1
9,5x3,8	2,3x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	290	0,36	1
MASTER UNI/Доктор Пласт/Consumed/Wellfix Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе							
2,2	1,2x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,08	1
2,5	1,2x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,09	1
3,8x3,8	1,8x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,26	1
3,8x5,6	1,8x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,29	1
4x1	1,2x1	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,08	1
4x10	1x10	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,84	1

5,5x1,9	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,17	1
5,6x1,9	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,17	1
6,5x2,5	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,19	1
6x10	2,4x1,0	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	1,28	1
6x2	1,8x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,19	1
7,2x1,9	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,23	1
7,2x2,2	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,27	1
7,2x2,3	2,3x1,4	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,29	1
7,2x2,5	2,3x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,31	1
7,6x1,9	2,3x1,2	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,31	1
9,5x3,8	2,3x1,8	4,5-6N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	200	0,36	1
Teneris Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе							
2,2	1,2x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,08	1
2,5	1,2x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,09	1
3,8x3,8	1,8x1,8	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,26	1
3,8x5,6	1,8x1,8	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,29	1
4x1	1,2x1	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,08	1
4x10	1x10	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,84	1
5,5x1,9	1,8x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,17	1
5,6x1,9	1,8x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,17	1
6,5x2,5	2,3x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,19	1
6x10	2,4x1,0	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	1,28	1
6x2	1,8x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,19	1
7,2x1,9	2,3x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,23	1
7,2x2,2	2,3x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,27	1
7,2x2,3	2,3x1,4	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,29	1
7,2x2,5	2,3x1,8	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,31	1
7,6x1,9	2,3x1,2	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,31	1
9,5x3,8	2,3x1,8	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	0,36	1
6x7	3x4	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	1,14	1
10x10	5x5	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	2,57	1
10x15	9x5	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	3,88	1
10x20	5x14	4,5-5N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	220	4,85	1
Master Uni/Доктор Пласт/Consumed/ Vitativ/Wellfix/Firstaid							
Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе							
2,2	1,2x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,13	1
2,5	1,2x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,17	1
3,8x3,8	1,8x1,8	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,39	1
3,8x5,6	1,8x1,8	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,29	1
4x1	1,2x1	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,11	1
4x10	1x10	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	1,21	1
5,5x1,9	1,8x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,30	1
5,6x1,9	1,8x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,30	1
6,5x2,5	2,3x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,34	1
6x10	2,4x1,0	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	1,82	1
6x2	1,8x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,34	1
7,2x1,9	2,3x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,39	1
7,2x2,2	2,3x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,45	1
7,2x2,3	2,3x1,4	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,47	1
7,2x2,5	2,3x1,8	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,51	1
7,6x1,9	2,3x1,2	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,41	1
9,5x3,8	2,3x1,8	7-9N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,36	1
Teneris Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе							
2,2	1,2x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,13	1
2,5	1,2x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,17	1
3,8x3,8	1,8x1,8	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,39	1
3,8x5,6	1,8x1,8	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,29	1
4x1	1,2x1	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,11	1
4x10	1x10	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	1,21	1
5,5x1,9	1,8x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,30	1
5,6x1,9	1,8x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,30	1
6,5x2,5	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,34	1
6x10	2,4x1,0	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	1,82	1
6x2	1,8x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,34	1

7,2x1,9	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,39	1
7,2x2,2	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,45	1
7,2x2,3	2,3x1,4	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,47	1
7,2x2,5	2,3x1,8	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,51	1
7,6x1,9	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,41	1
9,5x3,8	2,3x1,8	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	0,36	1
6x7	3x4	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	Нет	1
10x10	5x5	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	Нет	1
10x15	9x5	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	Нет	1
10x20	5x14	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	180	Нет	1
Вкусвилл Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе							
7,2x1,9	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	170	0,39	1
7,2x2,3	2,3x1,4	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	170	0,47	1
7,6x1,9	2,3x1,2	7-10N/cm	Не менее 6 капель	Не более 5 с	170	0,41	1

* допустимое отклонение размеров: $\pm 10\%$

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Медицинское изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Компонент	Материал, марка	Производитель
Основа	Нетканая (полипропилен) Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
	Тканевая (вискоза и полиэстер) Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
	Полимерная (полиэтилен/полиуретан) Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
Впитывающая подушка	Вискоза и полиэстер Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
Пористая пленка	Полиэтилен Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
Клеящий материал	Изобутилакрилат, полиметилметакрилат Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
	Термоклей Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
Первичная обертка (калька)	Целлофан Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
Индивидуальная упаковка	Бумага Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)

	Полиэтиленовый пакет Smileplus	Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd./Pharmline s.r.o. (Джежнанг Хонгу Медикал Коммодити Ко, Лимитед/ Фармлайн С.Р.О.)
--	--------------------------------	---

ДАННЫЕ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЯХ.

Лейкопластырь медицинский бактерицидный в вариантах исполнениях содержит одно из лекарственных средств:

1. Хлорид бензалкония производства Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd (Джежнанг Хонгу медикал коммодити Ко, Лимитед).

Вес: 110 г/м²

2. Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушки производства Zhejiang Hongyu medical commodity Co., Ltd (Джежнанг Хонгу медикал коммодити Ко, Лимитед).

Состав:

Вес 18-24 гр/м², обычно 20 гр/м²

Толщина 0.126 мм

Содержание серебра 80 мг/кг

Проба серебра СВ21.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Изделие не предназначено для повторного использования.
- Изделие предназначено для наружного применения.
- Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены.
- Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом.
- Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.
- Не использовать по истечении срока годности (5 лет).
- Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Вымыть руки перед использованием изделия;

Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря;

В. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей);

Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Медицинское изделие не требует технического обслуживания.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Настоящий отчет о клинической оценке (CER) составлен в соответствии с Директивой ЕС о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Лейкопластырь медицинский бактерицидный в вариантах исполнения поставляются стерильными. Информация о стерильном состоянии, о методе стерилизации изделий отражена в Плане валидации процесса стерилизации PharmLine s.r.o (Фармлайн ООО). Очистка и дезинфекция не применима.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности составляет 5 лет с даты производства.

КРИТЕРИИ НЕПРИГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ВОЗВРАТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Если целостность упаковки повреждена или упаковка открыта, изделие должно быть непригодным для использования.
- Для возврата поврежденного изделия: верните медицинское изделие в оригинальной упаковке с номером партии (лота), ссылкой на покупку и причиной возврата.
- Запрещено использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортировка:

Упаковочные единицы пакуются в картонные коробки, которые предназначены для перевозок всеми типами транспорта. В одну транспортную тару упаковывают изделия одной партии.

Транспортировка изделия любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение:

Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Условия хранения и транспортировки:

Температура: +4°C до +25°C;

Влажность: 25-65%

Эксплуатация:

Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов для температурного режима от +4°C до +25°C при относительной влажности воздуха не более 65%.

УПАКОВКА

Лейкопластыри медицинские упаковываются следующим образом:

- В отдельную упаковку (по 1 шт.);
- В виде набора с использованием картонной или полимерной коробки с этикеткой, содержащей сопроводительную информацию (варианты исполнения представлены в Таблице 1 и Таблице 2).

Таблица 1

Полимерная основа

Наименование изделия	Размер (см)	Количество шт. в упаковке	Используемый антисептик
Master Uni			
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1x4	поштучно либо 5 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	1,9x7,2	поштучно, либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2	100 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,6	поштучно, либо 5/20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунками	1,9x5,6	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	3,8x3,8; 2,5x6,5	15 шт. в упаковке (3,8x3,8 см – 5 шт., 2,5x6,5 см – 10	Бензалкония хлорид

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed			
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	1,9x7,2	поштучно либо 15 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	3,8x3,8; 7,2x1,9	20 шт. в упаковке (3,8x3,8 – 5 шт; 7,2x1,9 – 15 шт)	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x3,8	Поштучно, либо 5 штук в упаковке	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид

лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе			
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Teneris			
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,6	поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,6	поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунками	1,9x5,6	20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности

основе			впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	4x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	6x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Wellfix			
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (телесный)	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности

основе			впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	4x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	6x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Firstaid			
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2; 2,2x7,5; 1,0x4,0; 2,3	20 шт. в наборе (1,9x7,2 – 8 шт.; 2,2x7,5 – 6 шт; 1,0x4,0 – 4 шт.; 2,3 – 2 шт.	Бензалкония хлорид
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе (прозрачный)	2,5x5,6	10 шт. в наборе	Бензалкония хлорид
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2;	6 шт. в наборе	Бензалкония хлорид
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2;	20 шт. в наборе	Бензалкония хлорид
Fine Life			
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2	поштучно либо 20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид

основе			
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	1,9x5,6	Поштучно либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2x6	Поштучно либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, прозрачный	2x6; 1,9x5,6	20 шт. в упаковке (2x6 – 10 шт.; 1,9x5,6 – 10 шт.)	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Fine Life лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид

Нетканая основа

Master Uni			
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе (телесного цвета)	1,9x7,2	20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид

Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Teneris			
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	Поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	4x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	6x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Доктор Пласт

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2x7,2	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed			
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Wellfix			
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	1,9x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	2,5x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	3,8x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	4x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе	6x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Тканевая основа

Master Uni

Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластыри медицинские бактерицидные на тканевой основе	2,2; 7,2x1,9; 5,6x1,9	20 шт. в упаковке (2,2 – 5 шт; 7,2x1,9 – 10 шт; 5,6x1,9 – 5 шт)	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Master Uni	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид

лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе			
Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт			
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	Поштучно, либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид

Consumed			
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2; 1,9x7,2; 1,9x5,6	20 шт. в упаковке (2,2 – 5 шт; 7,2x1,9 – 10 шт; 5,6x1,9 – 5 шт)	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	поштучно, либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	поштучно, либо 5 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	поштучно, либо 5 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид

основе			
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Consumed лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Teneris			
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	4x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6x10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Firstaid			
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2; 2,2x7,5; 2,3	16 штук в упаковке (1,9x7,2 – 8 шт.; 2,2x7,5 – 6 шт.; 2,3 – 2 шт.)	Бензалкония хлорид
Vitativ			
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	Поштучно либо 10 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	Поштучно либо 5 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	Поштучно либо 5 шт. в упаковке	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Бензалкония хлорид

Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x6,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5x7,2	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x3,8	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x9,5	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8x5,6	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	4x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6x10	поштучно	Бензалкония хлорид
Wellfix			
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1x4	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9x5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,2x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,3x7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2x6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5х6,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	2,5х7,2	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8х3,8	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8х9,5	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	3,8х5,6	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	4х10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Wellfix лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	6х10	поштучно	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Вкусвилл			
Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9х7,2	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	1,9х7,6	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки
Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе	7,2х2,0	Поштучно либо 20 шт. в упаковке	Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Образцы упаковок лейкопластыря медицинского бактерицидного в исполнениях





Материалы, используемые для упаковки, не оказывают вредных воздействий на содержимое. Материал и оформление упаковки обладают такими свойствами, чтобы:

- обеспечить сохранность изделия при хранении в сухих, чистых условиях;
- свести к минимуму опасность загрязнения содержимого в процессе открывания.

МАРКИРОВКА

На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

На упаковках продукции возможно нанесение информации рекламного характера.

Лейкопластырь медицинский бактерицидный

Макет маркировки упаковки (стерильные изделия) (антисептик: бензалкония хлорид):
тканевая основа:

Master Uni лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.	Кол-во: 20 шт. в упаковке Размер: 5,6 x 1,9 см – 5 шт.; 7,2x1,9 см – 10 шт.; 2,2 см – 5 шт.	CE ₀₁₂₃
Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид. Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ А. Вымыть руки перед использованием изделия; Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; В. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.		

Стерилизация оксидом этилена.

LOT XXXXX

XXXXXX

XXXXX

2

☀

☔

☞

STERILE EO

TP

21
PAP

☞



Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4

8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Макет маркировки индивидуальной упаковки (стерильные изделия) (антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки): полимерная основа:

Teneris лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе.	Кол-во: 20 шт. в упаковке Размер: 1,9х7,6 см	
Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ А. Вымыть руки перед использованием изделия; Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; В. После извлечения пластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.		
 xxxxx  xxxxxx  xxxxxx        		
	Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.	
Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.		

TENERIS®

SILVER TECHNOLOGY

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА ПОЛИМЕРНОЙ
ОСНОВЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ТЕНЕРИС



20
ШТ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ТЕНЕРИС

ТЕНЕРИС®

ГИЛЬДЕР ТЕХНОЛОДЖИ

TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размеры: 7,2 см х 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи.

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при выполнении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется мазать ежедневно или при намокании подувачки. Алтисептик: серебряная сетка на поверхности адгезивной подушечки. Состав: полимерная основа, клеевой слой, адгезивная подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности адгезивной подушечки, пористая лентка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из индивидуальной упаковки, устранив перфорацию, обернуть бумагу, закрывающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей; 4. Приложить ленточку к ране и легко прижать край лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

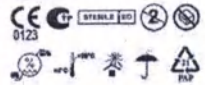
Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Стерилизация окислами этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

«PharmLine s.r.o.», Opatowitz 1257, Klatovy, 340 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +42060796035 /
Фирма ООО «Дабронита» 1257, Клатовце, 340 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел:
+42060796035. Саломея в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ТЕСТРАФ», 129436, г. Москва, ул. Вавилова
Корпус 2, эт. 3, пом. 30, код 4.8 (495) 645-80-58, info@testraf.ru



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:

07.2019
07.2024

Макет маркировки индивидуальной упаковки (стерильные изделия) (антисептик: бензалкония хлорид): нетканая основа:

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе.	Кол-во: 20 шт. в упаковке Размер: 2,2х7,2 см	
Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ А. Вымыть руки перед использованием изделия; Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; В. После извлечения пластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.		
 xxxxx  xxxxx  xxxxx        		
	Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.	
Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.		



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОЧНЫХ СИМВОЛОВ

Символ	Обозначение символа
	Изготовитель
	Запрет на повторное применение
	Использовать до (дата)
	Код партии
	Дата производства
	Европейское соответствие
	Стерильное изделие. Стерилизация оксидом этилена
	Знак соответствия СТР
	Не использовать при повреждении упаковки

Символ	Обозначение символа
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Предел температуры
	Диапазон влажности
	Символ утилизации картона

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует, что данный продукт был произведен и упакован с должной аккуратностью, предписанной в Директиве ЕС 93/42/ЕЕС для медицинского изделия. Каждый продукт был индивидуально протестирован и тщательно проверен до упаковывания. Компания заменит любое медицинское изделие, в случае обнаружения дефектов, допущенных в ходе производства и упаковки (доказательства должны быть предоставлены), и сообщения о таких дефектах в компанию или ее дистрибьюторам. Ответственность в отношении изделия прекращается, если возникло любое повреждение, вызванное транспортировкой, хранением или ненадлежащим обращением, а также другими факторами за пределами контроля производителя. Компания и ее дистрибьюторы не несут ответственности за повреждение или повторное использование. Пластыри предназначены для одноразового использования.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МИ

Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данное медицинское изделие при использовании, хранении и транспортировке безопасно для окружающей среды.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ

1. ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»
2. ISO 13485 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Требования для регулирующих целей»
3. Директива ЕС 93/42/ЕЕС с изменениями 2007/47/ЕС по медицинским изделиям;
4. YY0148: 2006 «Медицинский лейкопластырь: Общие требования»
5. ISO 10993.5: 2009 «Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 5: Испытания на цитотоксичность в искусственных условиях»
6. ISO 10993-10:2002 «Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 10: Испытания на раздражение и чувствительность кожи»

Текущий номер журнала заверок: О V – 1742 / 2022

Подтверждаю, что:

Денис Герасименко, род. 13.08.1985, проживающий Прага 3, Жижков, ул. Олшанска 2898/4Н

Чья личность была установлена по официальному документу, настоящий документ перед нотариусом собственноручно подписал.

Прага, 7.6.2022

Нотариус проведением легализации не несёт ответственности за содержание документа.

[Штамп:

Д-тор права Кристина Швихликова

кандидат нотариуса

представитель нотариуса

Д-тор права Милослава Петерка

нотариус в г. Прага]

/Подпись/

[Круглая гербовая печать:

Д-тор права Милослав Петерка

-5-

Нотариус в г. Прага]

[Гербовая марка на 100 чешских крон: Чешская Республика]

[Печать: Министерство Юстиции Чешской Республики 47]

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Чешская республика

Настоящий официальный документ

2. подписан

Д-ром права Kristina Svihlikova / Кристиной Швихликовой

кандидата нотариуса, заместитель нотариуса

3. действующим в качестве

Д-тора права Miloslav Peterka / Милослава Петерка

4. скреплен печатью/штампом нотариусом в Праге

УДОСТОВЕРЕН

5. в Праге

6. дата 14 июня 2022

7. Министерством Юстиции Чешской Республики

8. номер 6531/2022

9. Печать

[Печать: Министерство Юстиции Чешской Республики 47]

10. Подпись

Diana Homolacova / Диана Хомолакова

/подпись/

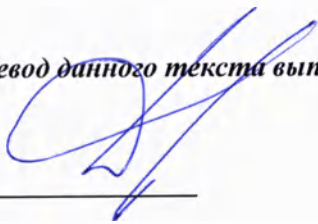
/Подпись/

**[Штамп: ООО ФармЛайн
ул. Доброничка 1257
148 00 Прага 4 – Кунратице
ИН: 27376851]**

/Подпись/

**[Штамп: ООО ФармЛайн
ул. Доброничка 1257
148 00 Прага 4 – Кунратице
ИН: 27376851]**

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.



Российская Федерация

Город Москва

Пятнадцатого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2022- 26-518

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 46 листов

Нотариус

