

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Мегатехника"



Котченко Р.Г.
01 декабря 2022 г.

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

«Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»»
по ТУ 32.50.50–012-49003903-2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий
«MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

«MGtest Азопирам-1»

Настоящая инструкция предназначена для использования индикатора одноразового контроля
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в

1. Назначение:
Индикатор предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий в кислотно-протравительных растворах, учреждениях, санитарно-эпидемиологических и хозяйственных станциях, где происходит обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамин, хлорной извести, хлорной смеси и др.), искривлений растительного

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР



"MGtest Азопирам-1"

ру №

количество: 1 комплект в составе: партия: 011020
амидопирин 10 г - 1 шт
анилин солянокислый 0,15 г - 1 шт дата изготовления: 10.2020
инструкция по применению 1 шт годен до: 10.2022

Производитель: ООО "Мегатехника"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.5,
лит.А, пом.ВН
sales@megatechnica.ru www.megatechnica-medical.ru
т/ф: +7 (812) 614-41-41

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

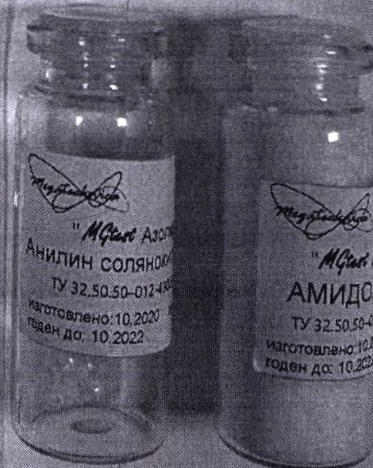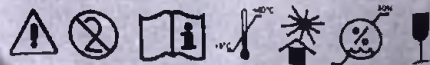

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


для одноразовых контролей эффективности

очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

«MGtest Азопирам-2»

применяется на Индикаторы одноразового контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 «Азопирам-2».

для контроля качества предстерилизационной обработки медицинских изделий в медицинских учреждениях, санитарно-эпидемиологических службах путем обнаружения остатков

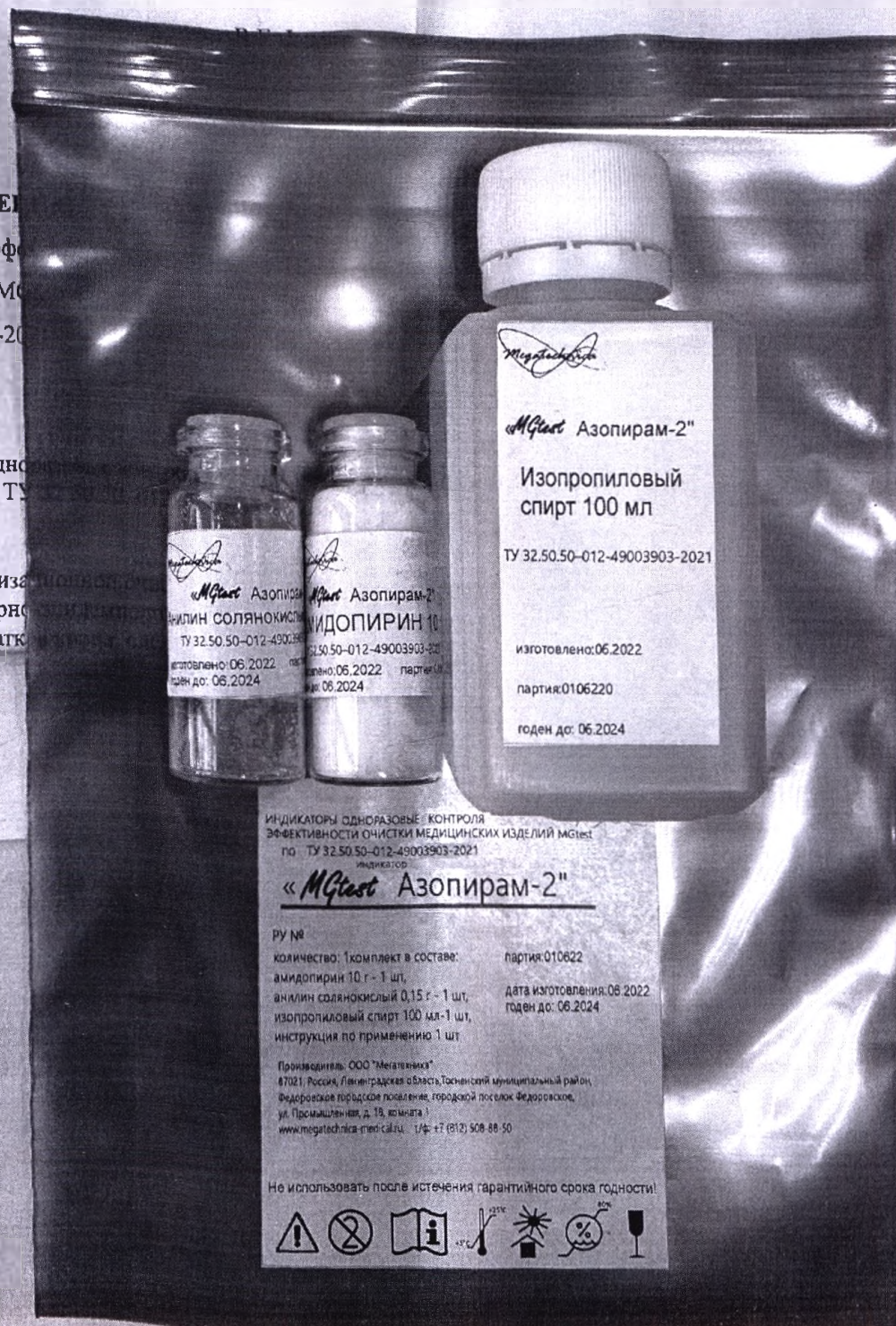

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

«MGtest Азопирам-2»

ру №

количество: 1 комплект в составе:
амидопирин 10 г - 1 шт,
анилин солянокислый 0,15 г - 1 шт,
изопропиловый спирт 100 мл - 1 шт,
инструкция по применению 1 шт

партия: 010622



дата изготовления: 06.2022
годен до: 06.2024

Производитель: ООО "Мегатехника"
67021, Россия, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение, городок поселок Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
www.megatechnika-medical.ru 1/4: +7 (812) 508 88 50

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!




Индикатор «MGtest Азопирам-3»

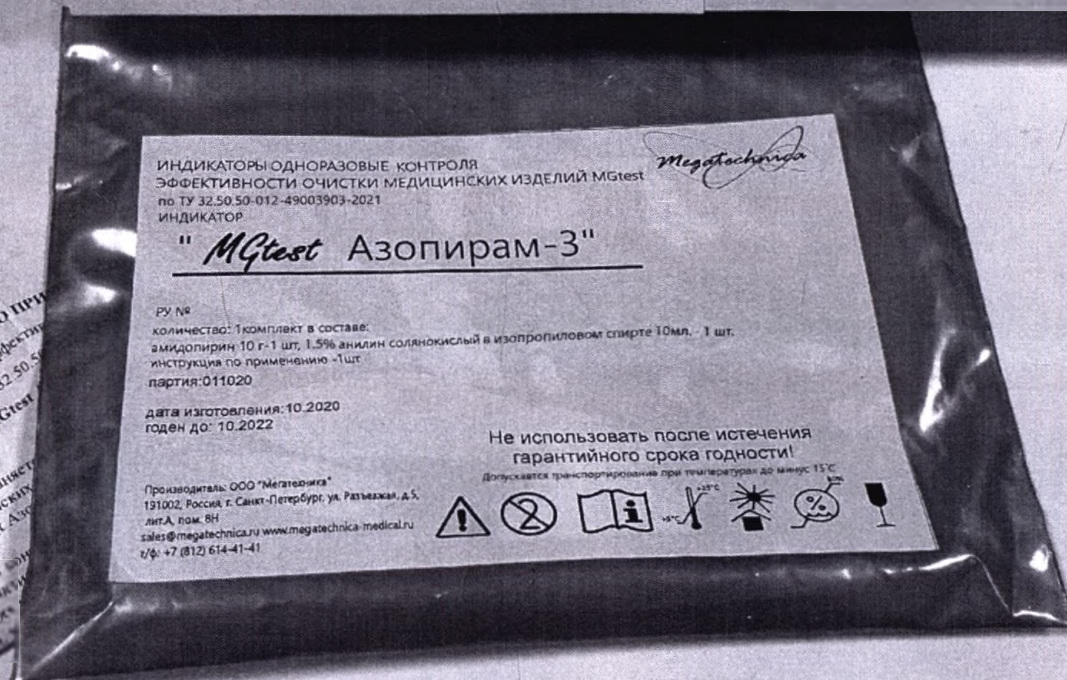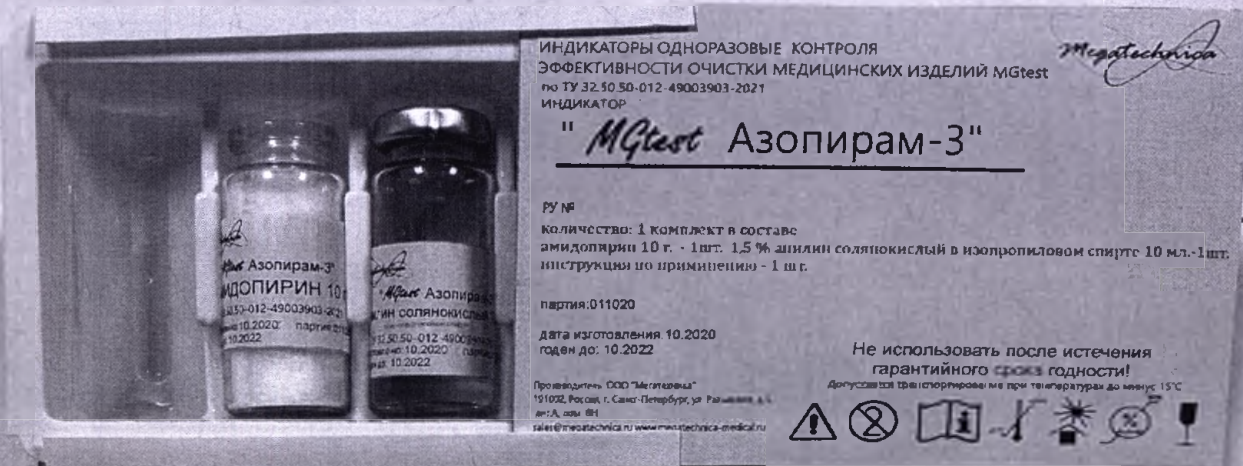

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикаторов «Азопирам-3» для контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest Азопирам-3» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Настоящая инструкция распространяется на эффективность очистки медицинских изделий. 1. Назначение. Индикатор предназначен для контроля эффективности очистки медицинских изделий в дезинфекционных станциях.

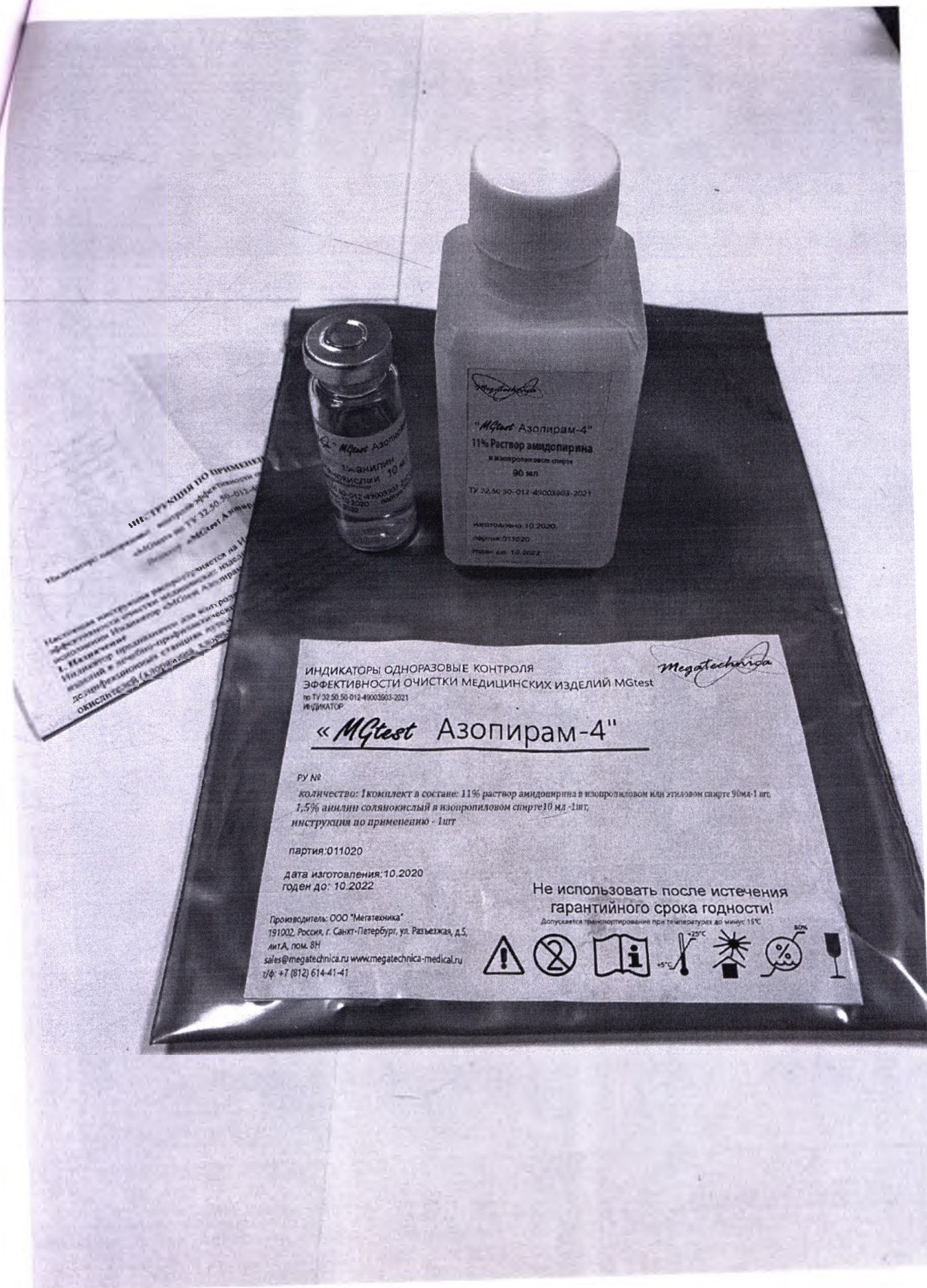

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

Megatechnica

«MGtest Азопирам-4»

РУ №

количество: 1 комплект в составе: 11% раствор амидопирина в изопропиловом или этиловом спирте 90 мл - 1 шт,
1,5% анилин солянокислый в изопропиловом спирте 10 мл - 1 шт,
инструкция по применению - 1 шт


партия: 011020

дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022


Производитель: ООО "Мегатеχνика"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5,
лит.А, пом. 8Н
sales@megatechnica.ru www.megatechnica-medical.ru
т/ф: +7 (812) 614-41-41

Не использовать после истечения
гарантийного срока годности!

Допускается транспортирование при температурах до минус 15°C

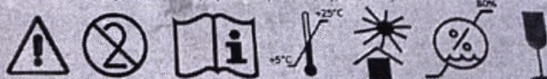

Индикатор «MGtest HEMA-1»

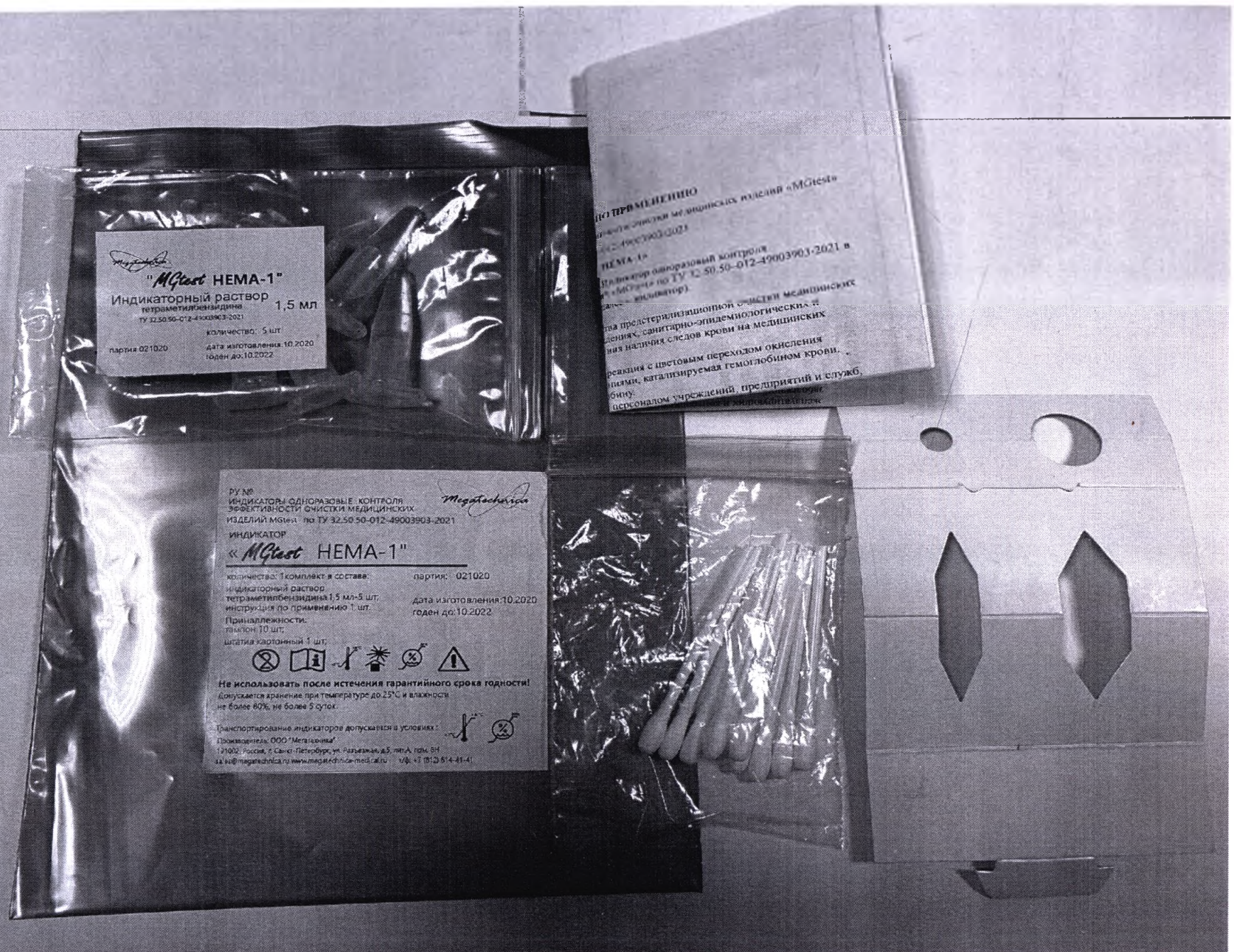

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки
медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

индикатор «MGtest HEMA-2»

данная инструкция распространяется на Индикатор
одноразовый контроля эффективности очистки
медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-
49003903-2021 в исполнении Индикатор «MGtest HEMA-2»
(индикатор).

«MGtest HEMA-2»

раствор 15 мл

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

партия: 021020

ТУ №
ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

ИНДИКАТОР

«MGtest HEMA-2»

количество 1 комплект в составе:

Индикаторный раствор

термометр медицинский 35 мм - 1 шт.

Пробирка с крышкой без калибра

ПУ МФСЗ 2011/1/0012 от 04.07.2011 - 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

Принадлежности:

Иглы картонный 1 шт.

ткань 10 шт.

партия: 021020

дата изготовления: 10.2020

годен до: 10.2022

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

Допускается хранение при температуре до 25°C и влажности

не более 80%, не более 5 суток.

Транспортирование индикатора допускается в упаковке:

Производитель ООО «Матрикс»

351002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Равенства, д.5, литера А, пом. 21Н

сайт: medtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru www.mgtest.ru

Индикатор «MGtest HEMA-3»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор «MGtest HEMA-3»

Настоящая инструкция распространяется на Индикатор одноразовый контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в исполнении Индикатор «MGtest HEMA-3» (далее – индикатор).

1. Назначение

Индикатор предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-гигиенических и дезинфекционных станциях путем обнаружения наличия следов органических веществ на медицинских изделиях.

Индикатор реагирует на окисление тетраметилбензидамина

ТУ №
ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021


MGtest

ИНДИКАТОР

«MGtest HEMA-3»

количество: 1 шт.
индикаторный раствор
тетраметилбензидамина 1,5 мл-5 шт;
перекись водорода 3%
стабилизированная 0,1 г-5 шт;
инструкция по применению 1 шт.
Прокладочность
таблетки 3 шт. в упаковке картонной 3 шт.

партия: 021020
дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

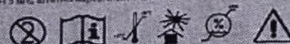

Не использовать после истечения гарантийного срока годности.
Допускается хранение при температуре до 25°C и влажности не более 80%, не более 5 лет.

Транспортирование индикаторов допускается в условиях:
Прокладочность: ООО "Медтехника"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Репина, д. 5, лит. А, пом. 6Н
info@medtech.ru, info@medtech.ru, t/ф +7 (812) 614-41-41

«MGtest HEMA-3»
Индикаторный раствор 1,5 мл
тетраметилбензидамина
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

количество: 5 шт

партия 021020

дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

«MGtest HEMA-3»


Перекись водорода 3%
стабилизированная 0,1 г
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

количество: 5 шт

партия 021020

дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

Индикатор «MGtest HEMA-4»

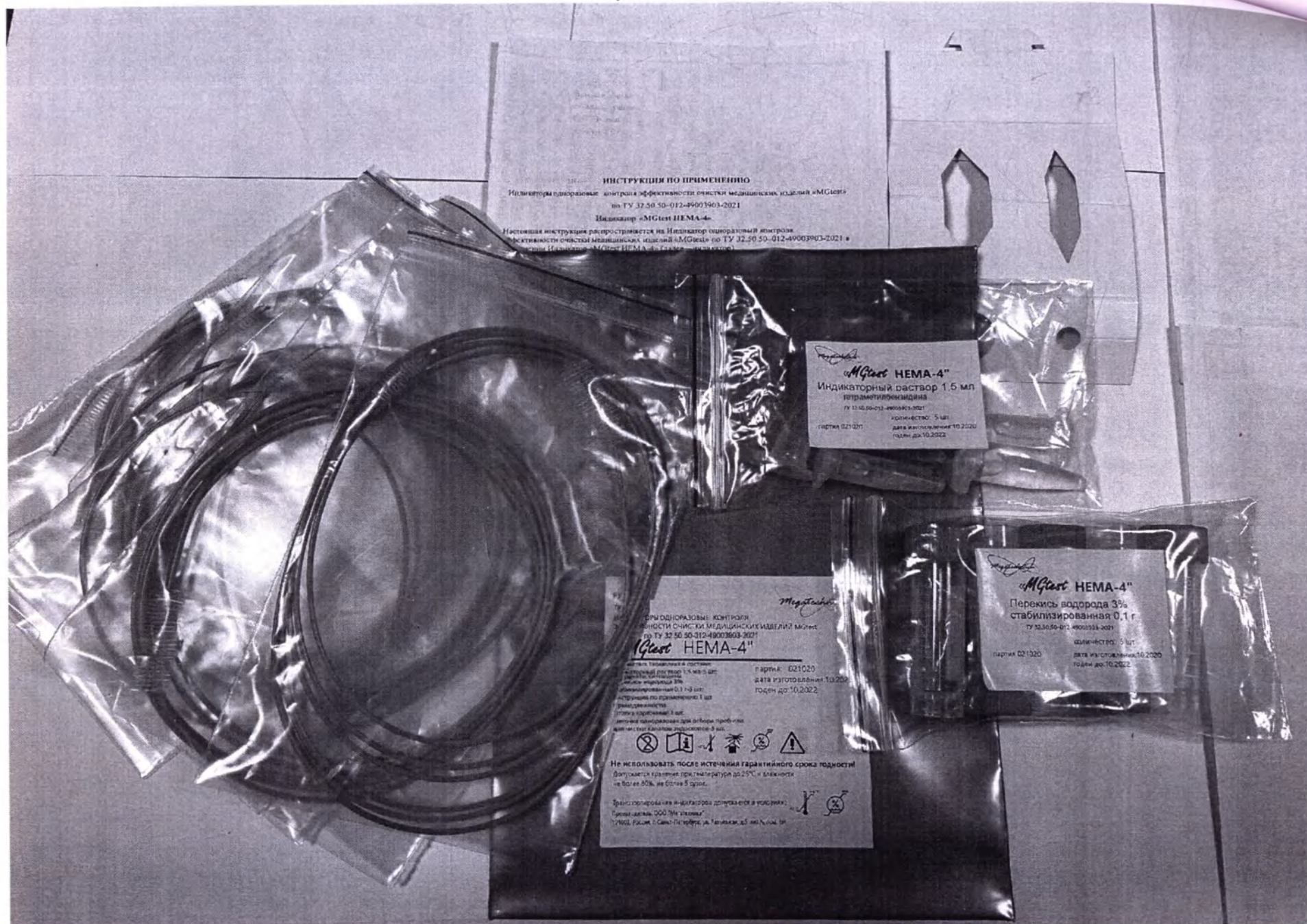

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021:
индикатор «MGtest Protein-1»

Настоящая инструкция распространяется на Индикатор одноразовый контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в исполнении Индикатор «MGtest Protein-1».

1. Назначение

Индикатор предназначен для контроля качества престерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях путем обнаружения наличия белковых загрязнений на медицинских изделиях.
В основе теста: химическая реакция с цистовым перекисью на определение наличия белков.

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

"MGtest Protein-1"


Р/Р

количество: 1 комплект в составе:
индикаторный раствор
гидроалюминатный краситель 1,5 мл; 5 шт.
инструкция по применению 1 шт.
Применяемость:
тампон 5 шт.
ватный тампонный 1 шт.

партия: 031020

дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

Не использовать после истечения гарантийного срока годности.

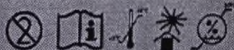

Допускается хранение при температуре до 25°C и влажности не более 80%, не более 5 суток.

Производитель: ООО "Медгеникс"
191402, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рязанская, д.5, лит.А, пом. 6Н
Сайт: medgenix.ru www.medicgenix-lab.ru t: +7 812 614-41-41

"MGtest Protein-1"

Индикаторный раствор 1,5 мл
гидроалюминатный краситель
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

количество: 5 шт

партия: 031020

дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикатор азотные комп. Эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
40-012-49003903-2021
«MGtest Protein-2»



ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest *Magtech*
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

"MGtest Protein-2"


количество: базовый комплект
индикаторный раствор перекисловодный
40 мл, 1 шт.
буферный раствор 15 мл, 1 шт.
профилированная беззубая лопатка
(ТУ 32.50.50-012-49003903-2021)
инструкция по применению, 1 шт.
Принадлежности:
тестовые картонные 1 шт.
шпатель картонный 1 шт.

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

картин. 031020


дата изготовления: 10.2020
годен до: 10.2022

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

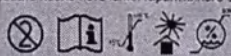


Производитель: ООО "Медтехника"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Развешка, д.5, лит.А, пом. 6Н
info@magtech.ru, www.magtech-medical.ru Т/ф: +7 (812) 614-41-41

Индикатор «MGtest Protein-3»

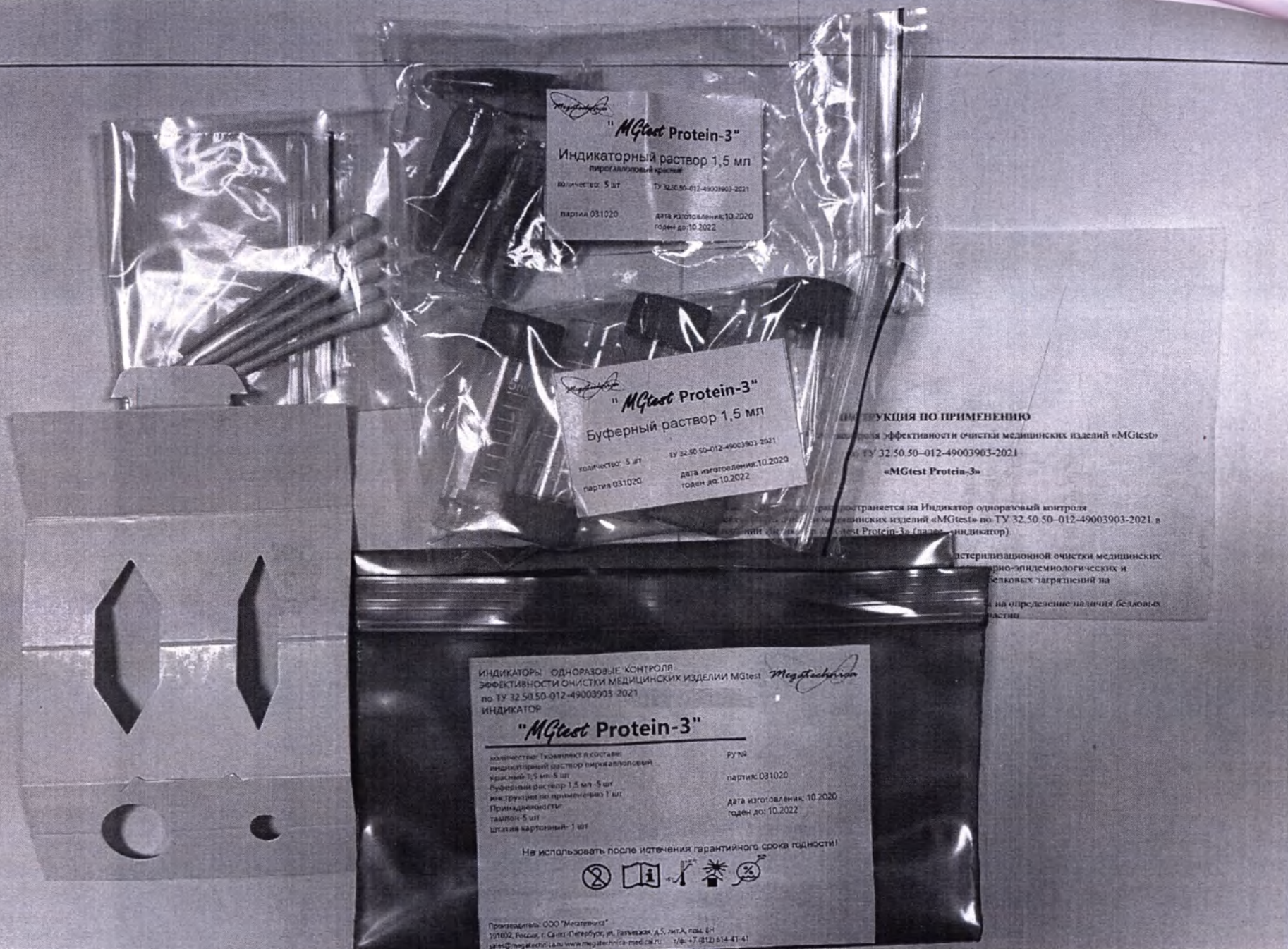

Индикатор «MGtest Protein-4»



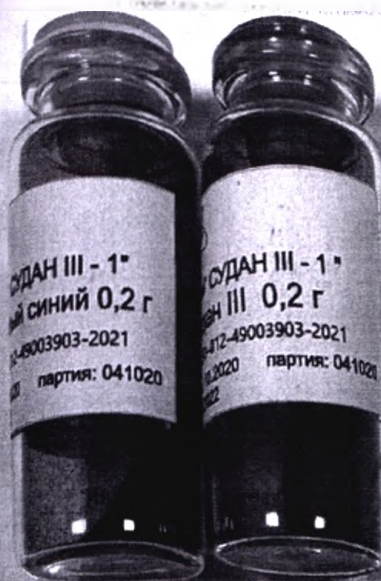

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор
«MGtest Судан III-1»

Индикатор предназначен для распыления на Индикатор одноразовый контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021. Использование индикатора «MGtest Судан III-1» (далее – индикатор).

Индикатор предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и лабораторных условиях путем обнаружения остаточных загрязнений на медицинских изделиях.

Индикатор предназначен для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих медицинское оборудование, для профилактики

ТУ №

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор

"MGtest Судан III - 1"

количество: партия: 041020

1 комплект в составе:


судан III - 0,2 г 1 шт

метиленовый синий 0,2 г 1 шт

инструкция по применению 1 шт

изготовлено: 10.2020

годен до: 10.2022

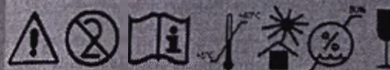

Не подвергать воздействию паров химических веществ!


Не использовать после истечения
гарантийного срока годности!

Производитель: ООО "Мегатехника"

191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рельефная, д.5, лит. А, кв. 201

sales@megatechnica.ru www.megatechnica.com

т/ф: +7 (812) 614-41-41

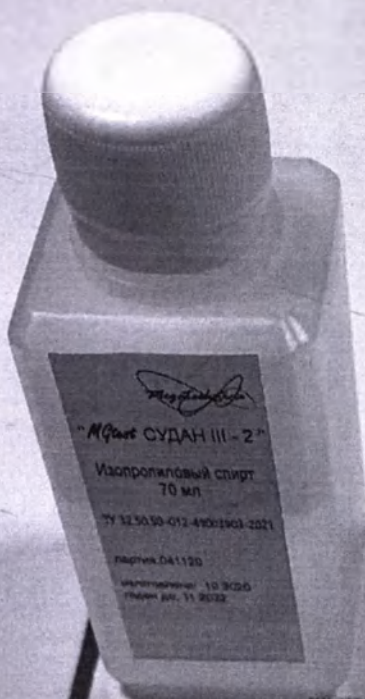

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикатора одноразового контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»

Настоящая инструкция рас-
крывает назначение, способ
эффективности очистки мед.
использования Индикатор «MGtest»

1. Назначение
Индикатор предназначен для
изделий в лечебно-профил.
дезинфекционных станциях
изделий.
Индикатор предназначен для
эксплуатирующих и контрол.

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022


Индикатор «MGtest СУДАН III - 2»
Индикатор «MGtest Метиленовый синий»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022

Индикатор «MGtest СУДАН III - 2»
Индикатор «MGtest Метиленовый синий»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022

Индикатор «MGtest СУДАН III - 2»
Индикатор «MGtest Метиленовый синий»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022



Индикатор «MGtest СУДАН III - 2»
Индикатор «MGtest Метиленовый синий»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022

Индикатор «MGtest СУДАН III - 2»
Индикатор «MGtest Метиленовый синий»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
партия: 041120
изготовлено: 10.2020
годен до: 11.2022

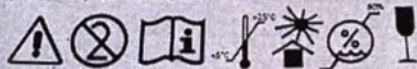

Не подвергать воздействию паров химических веществ!
Не использовать после истечения
гарантийного срока годности!

Производитель: ООО «Мегатехника»
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5, лит.А, пом. 8Н
т/ф: +7 (812) 614-41-41 www.megatechnica-medical.ru

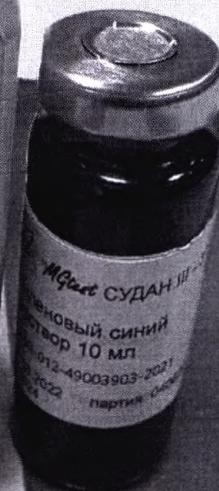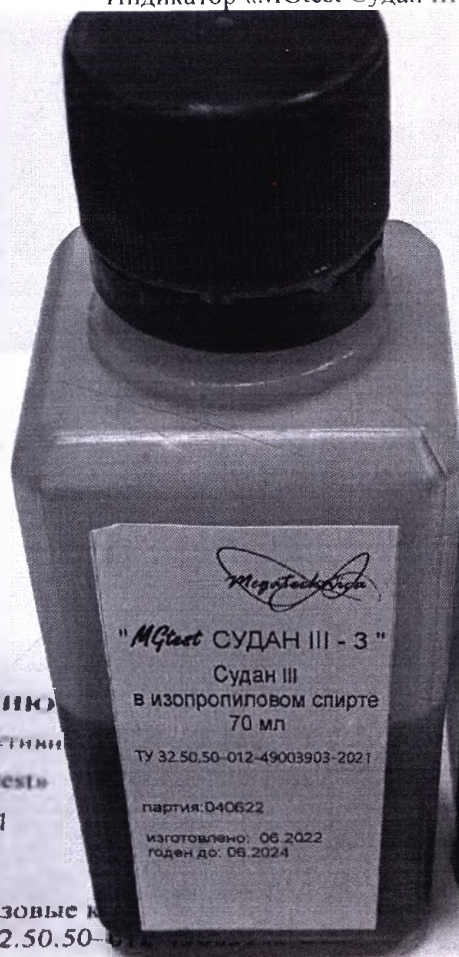


УКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
одноразовые контроля эффективности
медицинских изделий «MGtest»
32.50.50-012-49003903-2021

MGtest Судан III-3»

тятся на Индикаторы одноразовые
изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
III-3».

чества предстерилизационной очистки медицинских
еждениях, санитарно-эпидемиологических и
ужения жировых загрязнений на медицинских

РУ №

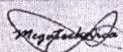

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

ИНДИКАТОР

"MGtest СУДАН III - 3"

количество:

1 комплект в составе:

Судан III в изопропиловом спирте 70 мл-1 шт,


Метиленовый синий раствор 10 мл- 1 шт,

инструкция по применению 1 шт

партия: 040622

дата изготовления: 06.2022

годен до: 06.2024

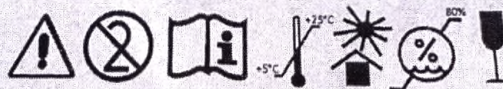

Не подвергать воздействию паров химических веществ!

Не использовать после истечения
гарантийного срока годности!

Производитель: ООО "Мегатехника"

87021, Россия, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение, городской поселок Федоровское,

ул. Промышленная, д. 18, комната 1 www.megatechnica-medical.ru, т/ф: +7 (812) 508-88-50

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикатор однократного контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»

по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор «MGtest Фенолфталеин-1»

Настоящая инструкция распространяется на Индикатор однократный контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

"MGtest Фенолфталеин - 1"

КОМПЛЕКТ

Комплект в составе:


Фенолфталеин 10 г - 1 шт

инструкция по применению 1 шт

партия: 051120

дата изготовления: 11.2020

годен до: 11.2022

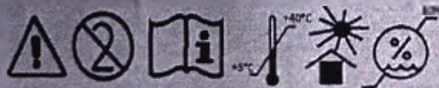

Не подвергать воздействию паров химических веществ!

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!


Производитель: ООО "МегаТехника"

191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5, лит.А, пом. 8Н

т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru

редстерилизационной очистки медицинских
изделий, санитарно-эпидемиологических и
медицинских изделий щелочных моющих средств на

основанием учреждений, предприятий и служб,

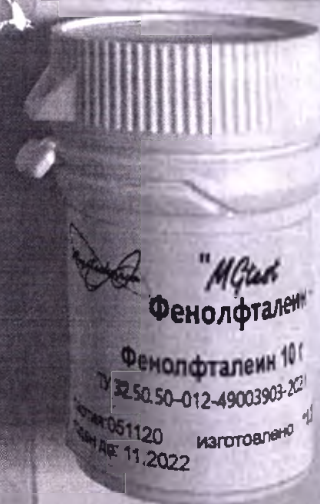

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикаторы одноразовые контроля эффективности
дезинфекции медицинских изделий «MGtest Фенолфталеин-2»
ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Используется на Индикаторы одноразовые контроля эффективности
дезинфекции медицинских изделий «MGtest Фенолфталеин-2».

для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских
изделий в учреждениях, санитарно-эпидемиологических и
лабораториях на обнаружения следов щелочных моющих средств на

MGtest
Фенолфталеин - 2

1% раствор фенолфталеина
в изопропиловом спирте
100 мл

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

партия: 050622

изготовлено: 06.2022
годен до: 08.2024

ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

MGtest Фенолфталеин - 2

количество

1 комплект в составе

1% раствор фенолфталеина

в изопропиловом спирте 100 мл + шт.

инструкция по применению 1 шт-1 шт

партия: 050622

дата изготовления: 06.2022

годен до: 06.2024



Не подвергать воздействию паров химических веществ!
Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

Производитель: ООО «Медгидрохим»
87021, Россия, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Федоровское городское поселение, городское поселение Федоровское,
ул. Промышленная, д. 18, комната 1
инн 4702013013, ОГРН 1044702013013, т/ф: +7 (812) 508-60-50

Индикатор «MGtest Ультра»

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Megatechnica

ИНДИКАТОР

"MGtest Ультра"

ру №

в составе:

Индикаторный раствор 5 мл - 20 шт

инструкция по применению 1 шт

партия: 061120

дата изготовления: 11.2020
годен до: 11.2022

Производитель: ООО "Мегатехника"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.5, лит.А, пом. 8Н

т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!


Не замораживать!



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор «MGtest Ультра»

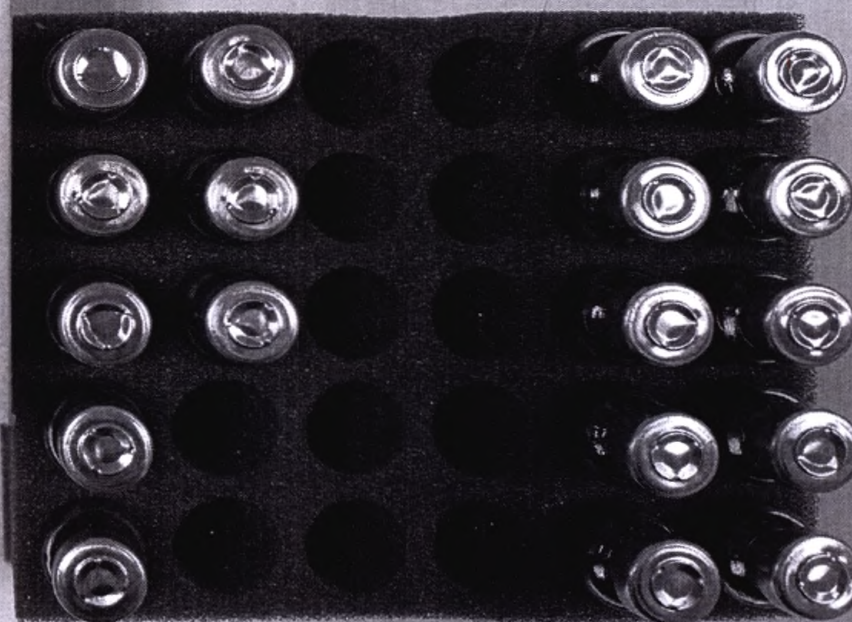

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

Megatechnica

"MGtest PCO-1"

РУ №

партия: 071220


дата изготовления: 12.2020
годен до: 12.2022

Производитель: ООО "Мегатехника"

191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5, лит.А, пом. 8Н
т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru


количество:
индикаторная система - 10 шт
инструкция по применению 1 шт

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

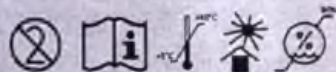


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

одноразового контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

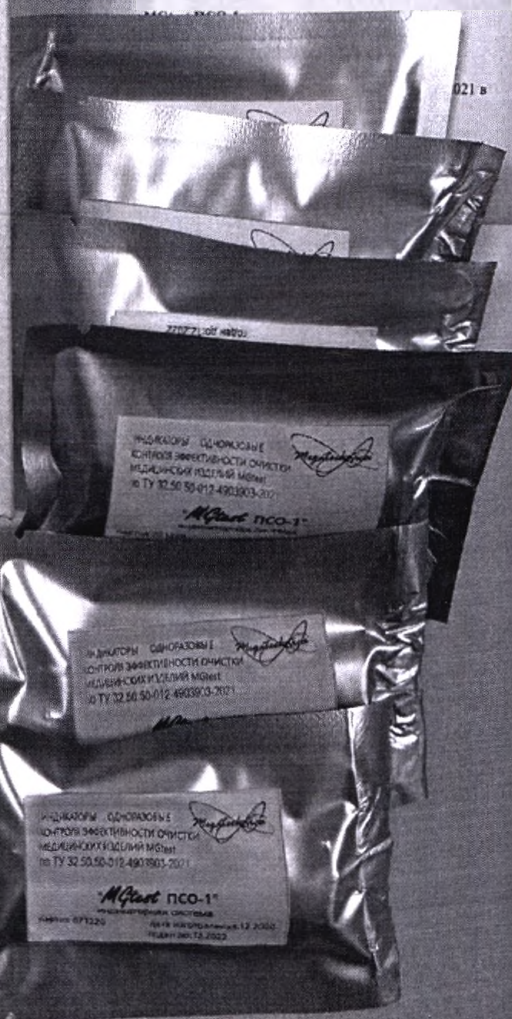

Индикатор «MGtest PCO-2»: 1-индикаторная пластина «MGtest PCO», 2- держатель М

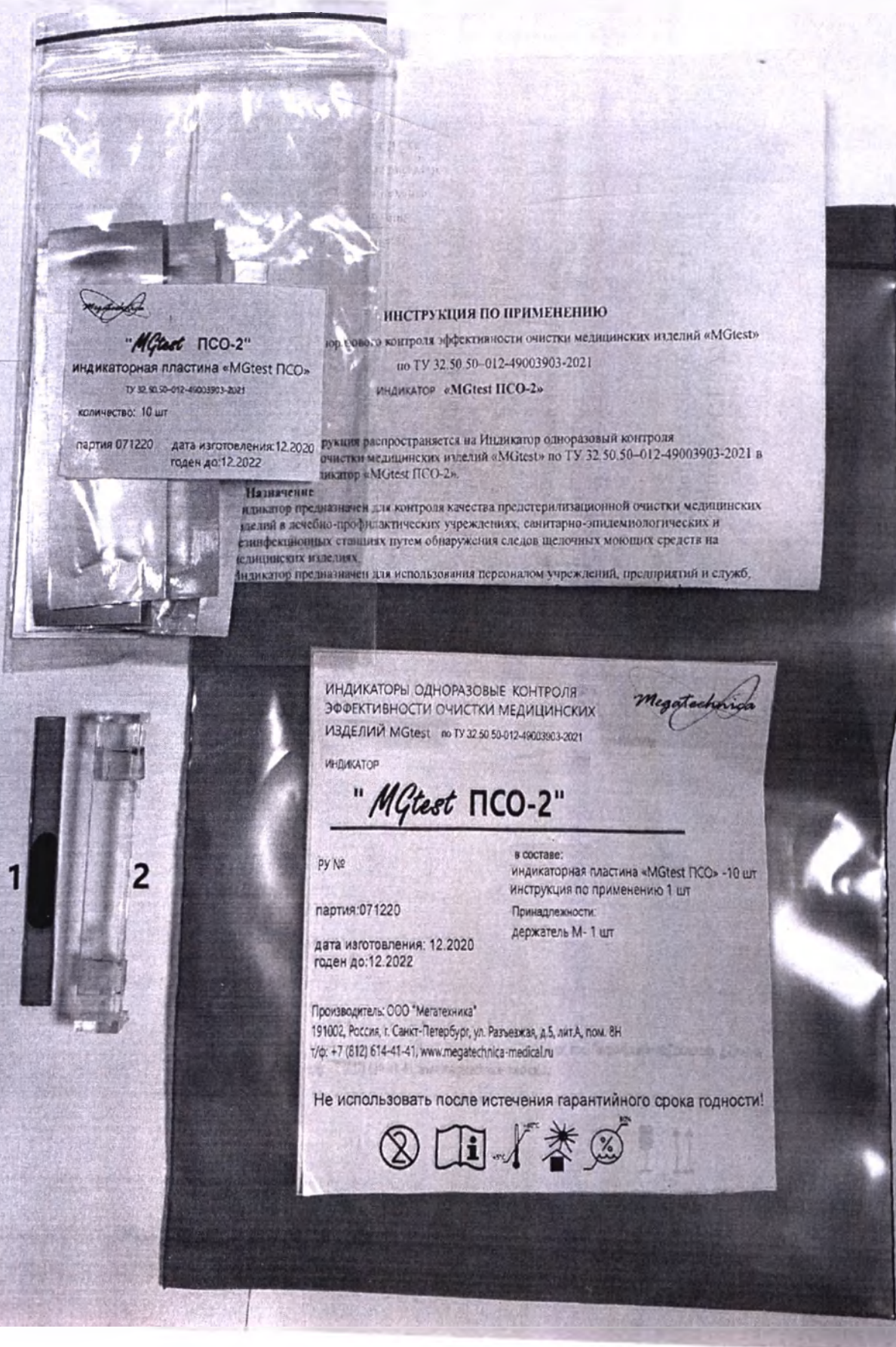

ИНДИКАТОР: ОДНОРАЗОВЫЕ
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ MGtest
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
Индикаторная пластина "MGtest ПСО"
количество: 10 шт
партия: 071220
дата изготовления: 12.2020
годен до: 12.2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР «MGtest ПСО-3»

Инструкция распространяется на Индикатор одноразовый контроля
эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в
Индикатор «MGtest ПСО-3».
Индикатор предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских
изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и
лабораторных станциях путем обнаружения следов щелочных моющих средств на
поверхности изделий.
Индикатор предназначен для использования персоналом учреждений, предприятий и служб.

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
ИНДИКАТОР

"MGtest ПСО-3"

ру №

партия: 071220

дата изготовления: 12.2020
годен до: 12.2022


количество: 1 комплект в составе:
индикаторная пластина «MGtest ПСО» 10 шт
инструкция по применению-1 шт

Принадлежности:
держатель П - 1 шт

Производитель: ООО "Мегатехника"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5, лит.А, пом. 8Н
т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!



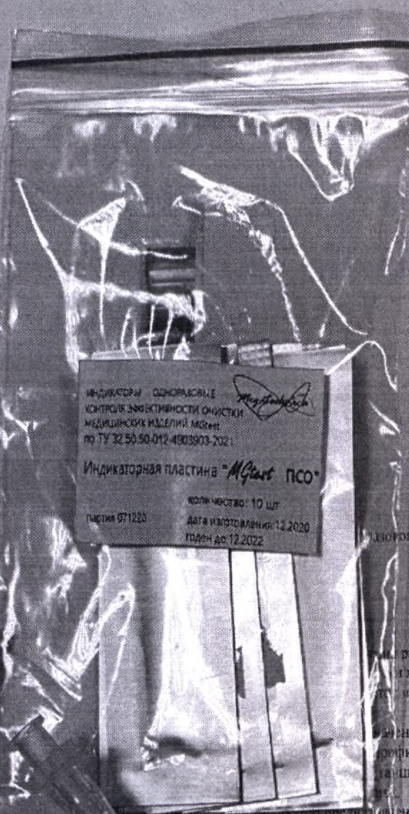

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021
Индикатор «MGtest ПСО-4»

распространяется на Индикатор одноразовый контроля
эффективности очистки медицинских изделий «MGtest» по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021 в
«MGtest ПСО-4».

Индикатор предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских
изделий в профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и
таких путем обнаружения следов щелочных моющих средств на

Индикатор предназначен для использования персоналом учреждений, предприятий и служб,
занимающихся очисткой и контролирующим дезинфекционное оборудование, для профилактики

Индикаторы - одноразовые контроля
эффективности очистки медицинских
изделий MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикатор

"MGtest ПСО-4"

РУ №

партия: 071220

дата изготовления: 12.2020
годен до: 12.2022

количество: 1 комплект в составе:

индикаторная пластина «MGtest ПСО» 10 шт


инструкция по применению - 1 шт

Принадлежности:
держатель Т - 1 шт

Производитель: ООО "Мегатехника"

191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.5, лит.А, пом. 8Н
т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!

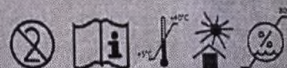

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторы одноразовые контроля эффективности очистки медицинских изделий «MGtest»
по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Индикаторная пластина «MGtest ПСО»

ИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ MGtest по ТУ 32.50.50-012-49003903-2021

Megatechnica

Индикаторная пластина "MGtest ПСО"

РУ №

в составе

партия: 071220

Индикаторная пластина "MGtest ПСО" 10 шт
инструкция по применению-1 шт

дата изготовления: 12.2020
годен до: 12.2022

Производитель: ООО "Мегатехника"

191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д.5, лит.А, пом. 8Н

Место производства: 196642, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Промышленная, д.2, лит. Б

т/ф: +7 (812) 614-41-41, www.megatechnica-medical.ru

Не использовать после истечения гарантийного срока годности!



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
И. Юрьев инженер
Должность Зам. дир.
Подпись И. Юрьев Р.Р.

