


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

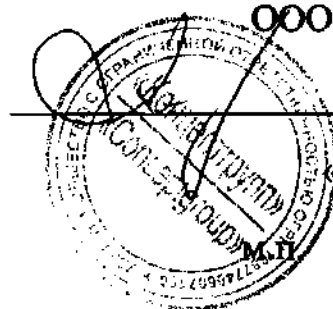

» _____ 2011 г.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструменты зондирующие, бужирующие:

Регулируемая игла с твердым кончиком, 35 см, 25G, Регулируемая игла с гибким кончиком, 70 см, 25G, Регулируемая игла с гибким кончиком, 50 см, 25G.

ВВЕДЕНИЕ

Инструменты зондирующие бужирующие предназначены для манипуляций исключительно высококвалифицированными в нужной медицинской области специалистами, в отношении пациентов специализированных клиник, в урологии и хирургии, для катетеризации мочевыводящих путей, свищей, пузырчатых новообразований и пр. вмешательств, связанных с введением/выведением жидкостей в/из организменной полости.

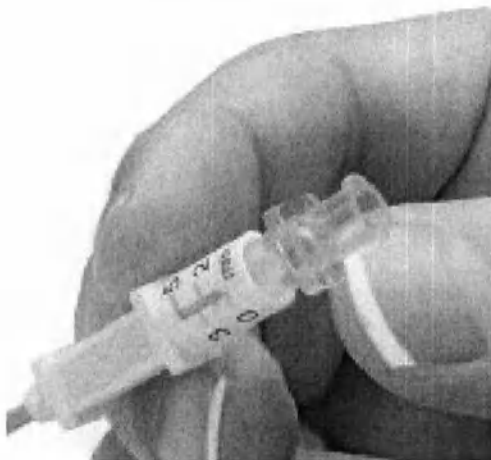

СОСТАВ

Инструменты зондирующие, бужирующие:

1. Регулируемая игла с твердым кончиком, 35 см, 25G.
2. Регулируемая игла с гибким кончиком, 50 см, 25G.
3. Регулируемая игла с гибким кончиком, 70 см, 25G.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструменты зондирующие, бужирующие предназначены к применению в урологии и хирургии, как самостоятельно, так и в сочетании с иными инструментами, только в условиях специализированных клиник.

Однопросветные одноразовые зонды, применяемые как в качестве бужирующего инструмента (канюли), так и в качестве микро-катетера изготавливаются из натурального латекса и отвечают всем международным нормам безопасности контактных медицинских изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Игла регулируемая с твердым кончиком, 35 см, 25G

Материал: натуральный каучуковый латекс

Просвет: регулируемый (возможность фиксации), одинарный

Наконечник: жесткий (25 G)

Длина 35 см

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Игла регулируемая с гибким кончиком, 70 см, 25G

Материал: натуральный каучуковый латекс

Просвет: регулируемый (возможность фиксации), одинарный

Наконечник: гибкий кончик (25 G)

Длина 70 см

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

Игла регулируемая с гибким кончиком, 50 см, 25G

Материал: натуральный каучуковый латекс

Просвет: регулируемый (возможность фиксации), одинарный

Наконечник: гибкий кончик (25 G)

Длина 50 см

Упаковка 10 x 100 шт / 1000 штук

Соответствует Европейской норме EN 455-1:

Содержание белка: очень низкое

Первичное раздражение кожи считается незначительным, согласно ISO 10993-10

Стерилизация: не применимо

СЕ-классификации класса I

ХРАНЕНИЕ

Инструменты должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Для обеспечения безопасности и эффективности применения инструментов зондирующих, бужирующих, эти изделия должны эксплуатироваться только специалистами с соответствующей подготовкой.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Данные изделия производства «Laborie Medical Technologies Inc.» поставляются стерильными. Стерильные инструменты стерилизованы в соответствии с соответствующим утвержденным методом. Информация о стерилизации приведена на этикетках изделий; все стерильные изделия промаркированы надписью **STERILE**.

Все изделия, поставляемые стерильными, подлежат однократному использованию до истечения срока годности, указанного на этикетке изделия. Не используйте стерильные изделия, если упаковка содержит следы повреждения или вскрытия. Не стерилизуйте изделия повторно и не подвергайте изделия автоклавной обработке, кроме тех случаев, когда это указано в инструкциях, в хирургическом руководстве, руководстве по проведению реставрации или в какой-либо другой приложенной литературе.

Генеральный директор

ООО «Концептгрупп»

Хафизова М.В.

