

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПОРККА»

Кукушкин И.А.

« 16 » 2024 г.



Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов
по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021
в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации
ПОРК.942814.002 РЭ

г. Санкт-Петербург

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.001 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 2 из 24

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	7
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	13
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	14
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
6 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16
7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
8 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ	17
9 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	17
10 СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ	17
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	17
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	19
13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	20
14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	21
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	23

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 3 из 24

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на тележку анатомическую для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения и представляет собой документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках тележки, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения тележки отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации тележки допускается медицинский персонал, имеющий опыт работы с подъемными механизмами и детально изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация тележки не допускается!

 **ВНИМАНИЕ!** Подъем поддона и перемещение тележки всегда предполагает риск. Медицинский персонал всегда должен быть уверен, что используемое оборудование работает должным образом.

Тележка предназначена для подъема и опускания поддона строго в вертикальной плоскости, и ни в коем случае по диагонали или под углом.

 **ВНИМАНИЕ!** Тележку следует использовать исключительно для подъема и перемещения поддонов-тележек, используемых в медицинских камерах для кратковременного хранения трупов в моргах, лечебных заведениях и других учреждениях!

По всем вопросам, касающимся использования тележки, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ПОРРКА»

196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2.
Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 4 из 24

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения (далее – тележка) предназначена для перемещения и подъема на определенную высоту специальных поддонов-тележек, используемых в медицинских камерах для кратковременного хранения трупов.

Тележка выпускается в виде исполнения:

1. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе;
2. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе.

Область применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений, моргах.

Потенциальные потребители - медицинский персонал ЛПУ и моргов.

Изделие нестерильное для многократного использования.

Вид контакта с организмом человека – контакт не предусмотрен.

В зависимости от потенциального риска применения изделие относится к классу 1. (согласно приказа министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 293340.

Код ОКПД2 – 30.99.10.110

Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Изделие обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 3 по ГОСТ Р 50444.

Тележка в упаковке обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.

По требованиям безопасности изделие соответствует ГОСТ Р 50444.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610, ГОСТ 2.106.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 5 из 24

1.2 Показания к применению

Перемещение и подъем на определенную высоту специальных поддонов-тележек при транспортировании и временном хранении тел умерших или их частей.

1.3 Противопоказания

Противопоказания отсутствуют.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящего руководства, показаний, противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте тележку только в соответствии с данным руководством.
- Используйте только оригинальные комплектующие, входящие в комплект поставки тележки
- Перед каждым использованием всегда проверять тележку на предмет механических повреждений.
- Эксплуатация тележки не допускается в случае повреждения каких-либо ее частей, нарушения целостности соединительных элементов.
- Пользователи не должны применять методы очистки, отличные от методов, рекомендованных изготовителем, без предварительной консультации с изготовителем о том, что предлагаемые методы не нанесут вред изделию.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать компоненты тележки, это может привести к ее поломке, механическим травмам.
- Тележку следует использовать исключительно для перевозки и подъема поддонов;
- Обеспечьте достаточно свободного пространства для работы, чтобы исключить столкновения с другими предметами.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 6 из 24

1.6 Описание и конструкция изделия

1.6.1 Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе (Рисунок 1), состоит из загрузочной платформы, на которой расположены направляющие для колес. Для перемещения тележка оснащена ручкой и четырьмя самоориентирующимися, обрезиненными колесами. Каждое колесо имеет стопорный механизм.

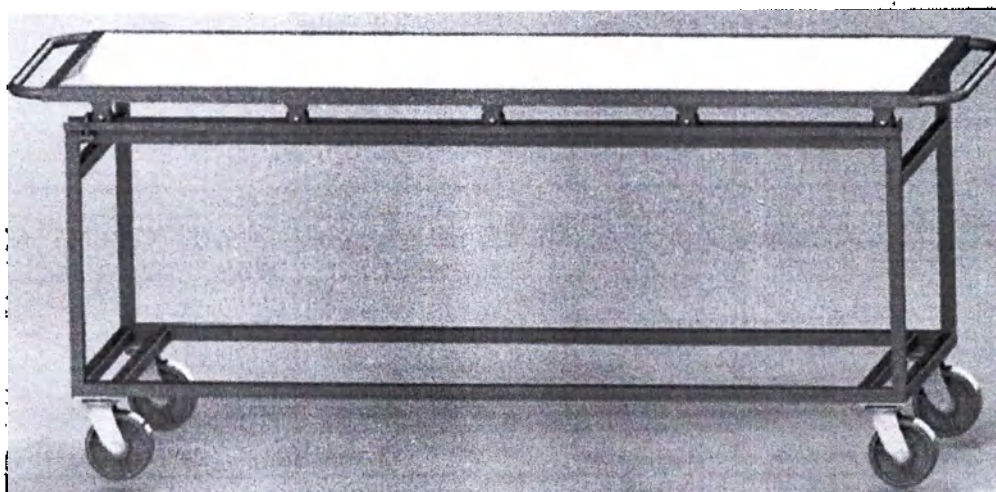


Рисунок 1. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе.

1.6.2 Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе (Рисунок 2), состоит из загрузочной платформы, на которой расположены направляющие для колес. Для перемещения тележка оснащена ручкой и четырьмя самоориентирующимися, обрезиненными колесами. Каждое колесо имеет стопорный механизм.

Подъем и спуск загрузочной платформы осуществляется с помощью гидравлического привода, который, в свою очередь, приводится в работу ножной педалью.

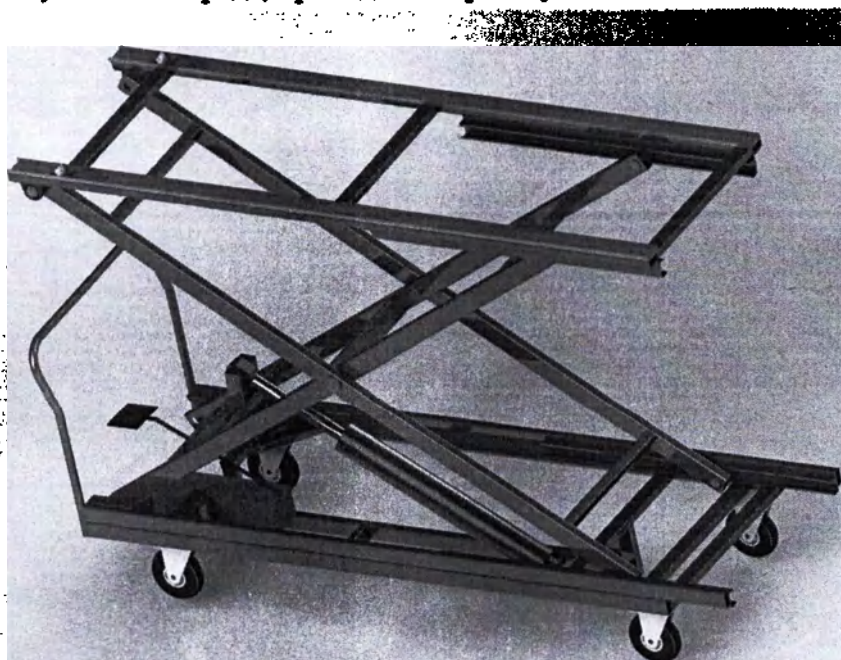


Рисунок 2. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 7 из 24

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Тележка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, технической и комплекту конструкторской документации изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

2.1.2 Технические характеристики тележек указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

№	Наименование параметра	Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов-Т150 в составе	Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов-ТПГ150 в составе
1	Габаритные размеры (длина*ширина*высота, мм.), не более	1900*700*800	2507*668*900
2	Масса тележки (кг.), не более	15	175
3	Максимальный вес для перемещения и подъема (кг.), не более	150	180
4	Высота подъема (мм.), не менее	-	400
5	Высота подъема (мм.), не более	-	1950
6	Усилие на педаль ножного гидравлического насоса (Н), не более	-	295
7	Максимальное усилие при перемещении загруженной тележки (Н), не более	150	200
8	Диаметр колес (мм.), не менее	150	150
9	Усилие срабатывания тормозного устройства (Н), не более	30	30
10	Усилие, вызывающее начало движения при включенных тормозах (Н), не более	400	400

2.1.3 На тележке расположена загрузочная платформа с направляющими для колес. Характеристики направляющих не более:

- высота – 20 мм.;
- длина – 2100 мм.;
- ширина – 50 мм.

2.1.4 Для подъема и спуска поддонов, на тележке установлен гидравлический механизм, с рабочим давлением не менее 0,5 МПа.

2.1.5 На поверхности изделия нет трещин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок, ухудшающих внешний вид, прочность и безопасность изделия.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 8 из 24

2.1.6 Декоративные окрашенные поверхности тележек имеют ровное глянцевое или матовое однородное покрытие, без пузырей и посторонних включений, не ниже IV класса по ГОСТ 9.032.

Допускаются отдельные малозаметные царапины длиной не более 15 мм.

2.1.7 Изделия устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.8 Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

2.1.9 Изделие обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 3 по ГОСТ Р 50444.

2.1.10 Изделие в упаковке должно обладать устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.

2.1.11 Изделие в упаковке обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 При изготовлении частей изделия допускается применение сырья, материалов и покупных изделий отечественного и иностранного производства, соответствующих нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством и иметь сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве тележки, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3 Для изготовления тележки допускается применение материалов изготовителя, после прохождения необходимых испытаний, а также при условии неизменности конструктивных и функциональных характеристик, требований безопасности.

2.2.4 Контакт изделия с кожей пользователя не предусмотрен. При работе с изделием, пользователю необходимо использовать средства индивидуальной защиты в виде перчаток.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 9 из 24

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ - не менее 8 000 часов.

2.3.2 Средний срок службы тележки - не менее 7 лет.

2.3.3 Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.4 Комплектность

2.4.1 В комплект поставки должен входить:

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения.

1. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе:

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150;

Руководство по эксплуатации.

2. Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе:

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150;

Руководство по эксплуатации.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка согласно требованиям, ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223.

2.5.2 На корпусе каждой тележки прикреплена табличка (рисунок 3), на которой указаны:

- наименование производителя и его адрес;
- наименования изделия, вариант его исполнения;
- номер регистрационного удостоверения;
- обозначение технических условий, ГОСТ 50444;
- месяц и год изготовления;
- заводской/серийный номер.
- символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Требуется особая утилизация».



ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 10 из 24

2.5.3 Транспортная маркировка (рисунок 4 и 5) выполнена согласно требованиям ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки и должна содержать:

- наименования изделия, вариант его исполнения;
- обозначение технических условий, ГОСТ 50444;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса брутто в килограммах;
- масса нетто в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в метрах (длина, ширина и высота);
- наименование и адрес предприятия-производителя;
- месяц и год изготовления;
- заводской/серийный номер;
- символ «Осторожно. Хрупкое»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Предел по количеству ярусов в штабеле»;
- символ «Правильное вертикальное положение груза».



ООО «ПОРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 11 из 24

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения Вариант исполнения: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ООО «ПОРКА», 196626, Санкт-Петербург г, поселок Шушары, Ленина ул, дом № 1К, литера А, оф.2. Тел.: +7 (812) 309-45-95. E-mail: sales@porkka.ru	ГОСТ 50444-2020 РУ № ____/____     XXXXXX  XXX/XX
---	---

Рисунок 3 – Шаблон маркировки изделия.

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения Вариант исполнения: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ООО «ПОРКА», 196626, Санкт-Петербург г, поселок Шушары, Ленина ул, дом № 1К, литера А, оф.2. Тел.: +7 (812) 309-45-95. E-mail: sales@porkka.ru	ГОСТ 50444-2020 РУ № ____/____  XXXXXX  XX/XXX Масса брутто: XXX кг. Масса нетто: XXX кг. Габарит упаковки: длина – XXX м.; ширина – XXX м.; высота – XXX м.
---	--

Рисунок 4 – Шаблон маркировки транспортной упаковки.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 12 из 24

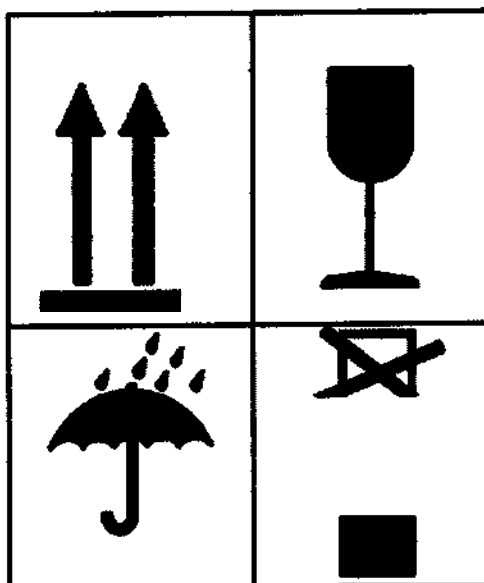


Рисунок 5 – Шаблон маркировки транспортной упаковки.

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка тележки соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

2.6.2 Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.6.3 Изделие, в собранном виде, упаковано в защитную стрейч-пленку, установлено на деревянный поддон и закреплено к нему стреп лентой в двух местах. При этом колеса заблокированы от перемещения тормозами и ограничительными деревянными планками.

2.6.4 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, герметично заварена и уложена вместе с изделием.

2.6.5 По согласованию допускается упаковка изделия в деревянный ящик.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 13 из 24

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством тележки.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния компонентов тележки, чтобы убедиться в отсутствии различных вмятин, сколов, порезов и повреждений от ударов. Если вы обнаружите повреждения, обратитесь в сервисную службу изготовителя.

3.2 Правила техники безопасности

Перед первым использованием, убедитесь, что:

- прочитали и поняли указания по использованию тележки;
- на элементах тележки нет никаких признаков износа или повреждения;
- все комплектующие оборудования правильно и надежно фиксированы.

3.3 Подготовка к работе

⚠ ВНИМАНИЕ! Полный монтаж и проверку тележки осуществляет специализированная организация. Медицинский персонал производит только рутинные (повседневные) функции, связанные с использованием тележки.

- Убедитесь в том, что все элементы тележки надежно закреплены, нет признаков повреждения или износа.

3.4 Порядок работы с тележкой

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе.

- Для использования тележки переместите ее как можно ближе к холодильной камере или столу. Установить тележку необходимо в таком положении, что бы рельсы совпадали с колесами поддона.
- Зафиксируйте колеса с помощью оборудованного стопора, с целью избежать отката или опрокидывания тележки.
- Установите поддон на тележке.
- Убедитесь в том, что поддон надежно, без смещения стоит на направляющих и зафиксируйте его элементом крепления.
- Можно осуществлять перевозку.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 14 из 24

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе.
Для использования тележки переместите ее как можно ближе к холодильной камере или столу. Установить тележку необходимо в таком положении, чтобы рельсы тележки совпадали с рельсами камеры.

- Для подъема загрузочной платформы тележки на нужную высоту, необходимо привести в движение гидравлический насос, нажав на педаль.

- Зафиксируйте колеса с помощью оборудованного стопора колес, с целью избежать отката или переворота тележки.

- Выкатить поддон на рельсы тележки до фиксации стопорным элементом.

- Убедитесь в том, что поддон надежно, без смещения стоит на направляющих

- Для того, чтобы опустить загрузочную платформу тележки, нажмите ногой на педаль и удерживайте ее, при этом платформа будет опускаться. После того как платформа опустилась на необходимую высоту, отпустите педаль

- Можно осуществлять перевозку.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4.1 Техническое обслуживание и ремонт

Тележка при эксплуатации не требует особого технического обслуживания. Тем не менее, для продления среднего срока эксплуатации и безопасной работы необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений частей, надежности соединений при внешнем осмотре.

4.2 Уход и дезинфекция

Внешние поверхности протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644 или иные средства согласно МУ 287-113.

4.3 Ремонт

Если в процессе подготовки тележки к работе, ее эксплуатации или обслуживания выявлены дефекты или неполадки, то необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для проверки или ремонта.

 Ремонт тележки может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров, имеющим лицензию на ремонт медицинской техники.

 Во время ремонта должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 15 из 24

Персоналу сервисного центра необходимо заносить в таблицу ниже сведения о проведенном ремонте.

Таблица 3. Сведения о проведенном ремонте

№	Дата проведения	Организация, должность, исполнитель	неисправность, замечания, проведенные работы	Подпись исполнителя

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 16 из 24

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение тележки должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование тележки может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

5.2 Условия транспортирования тележки должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%)

5.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и относительной влажности до 98%)

6 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 изделие относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы.

6.3 Тележка, загрязненная биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

6.4 Тележка подлежит утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

6.5 Перед утилизацией тележка должна быть подвергнута санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113.

6.6 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 17 из 24

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Использование тележки должно осуществляться в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

7.2 К эксплуатации тележки допускается медицинский персонал, имеющий опыт работы с подъемными механизмами и детально изучивший настоящее руководство по эксплуатации.

7.3 Условия эксплуатации:

температура – от плюс 1 до плюс 35°C.

относительная влажность – до 80% при 25°C.

8 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

8.1 Изделие не содержит материалов животного или человеческого происхождения.

9 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1 Изделие не включает в себя лекарственные средства для медицинского применения и фармацевтические субстанции.

10 СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

10.1 Данное требование не применимо, изделие нестерильно и не должно подвергаться стерилизации.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, приведенным в настоящем Руководстве по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.3 Гарантийный срок хранения – 3 месяца.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие вышло из строя в гарантийный период, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porrka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 18 из 24

Гарантийный срок изделия указан в руководстве по эксплуатации и исчисляется с даты продажи. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.
- Несовпадения номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Обнаружения следов самостоятельного вскрытия, изменения конструкции или ремонта изделия неуполномоченным на это лицом.
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия.
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости, насекомых, пыли и др.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 19 из 24

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тележка анатомическая для перевозки трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе»

заводской номер _____,

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе»

заводской номер _____,

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 20 из 24

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тележка анатомическая для перевозки трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - Т150 в составе»

заводской номер _____

упакована на предприятии-изготовителе ООО «ПОРРКА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе»

заводской номер _____

упакована на предприятии-изготовителе ООО «ПОРРКА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 21 из 24

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют в случае невозможности ремонта тележки на ремонтном предприятии, обслуживающем изделие.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин поломки необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому он получен;
- количество часов работы с начала эксплуатации;
- детальное описание неисправности;
- предполагаемая причина поломки;
- наименование поврежденных деталей и узлов и т.д.;

Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 22 из 24

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка анатомическая для перевозки трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки трупов – Т150 в составе»

заводской номер _____

Приобретена _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием:

Руководитель ремонтного предприятия _____
(подпись, печать)

Руководитель учреждения-владельца

(подпись, печать)

Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов по ТУ 32.50.50-002-79813060-2021 в вариантах исполнения: «Тележка анатомическая для перевозки и подъема трупов - ТПГ150 в составе»

заводской номер _____

Приобретена _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием:

Руководитель ремонтного предприятия _____
(подпись, печать)

Руководитель учреждения-владельца

(подпись, печать)

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 23 из 24

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ	Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 2.601-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
МУ 287-113 от 30 декабря 1998 г.	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. (ЕСЗКС). Покрyтия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ООО «ПОРРКА» 196626, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ленина, дом 1К литера А, оф. 2 Тел +7 (812) 309-45-95; e-mail: sales@porkka.ru	Документ: ПОРК.942814.002 РЭ
	Версия: 1.2
	Страница: 24 из 24

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью И.А. Кукушкин (ов)

Генеральный директор
ООО «ПОРККА»

Кукушкин И.А.

« 19 / 02 » 2024

