

ИНСТРУКЦИЯ
по применению стоматологического материала на основе
цинк-сульфатного цемента для временного
пломбирования «ТЕМПОПРО»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Темпопро» (дентин-паста) – временный пломбировочный материал, предназначен для покрытия лекарственных препаратов в полости зуба при лечении кариеса и его осложнений.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Темпопро» - готовая к применению паста на основе порошка цинк-сульфатного цемента с добавлением пастообразователя и отдушек. Паста твердеет под действием влаги в течение 2 часов. «Темпопро» обеспечивает герметичное закрытие любых полостей зуба на необходимый срок, хорошо переносится зубными тканями, не вызывает реакции десен, легко выводится из полости зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Темпопро» вносится гладилкой в хорошо сформированную, заранее подготовленную и высушенную полость зуба слоем толщиной 1-2 мм.

Пациенту рекомендуется не принимать пищу в течение 2-3 часов. Выводится затвердевшая паста легко рычагообразным движением экскаватора или зонда. Общие рекомендации: при работе с данным материалом следует пользоваться только сухим инструментарием, при этом на пасту не должна попадать влага. Необходимо тщательно закрывать баночку после каждого использования.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (гвоздичная, цитрусовая, мятная, анисовая или без отдушки) – 50г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от + 4 до + 25⁰С в плотно закрытой банке. **Избегать попадания влаги!**

Срок годности 2 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Радуга Р», Россия, 394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, 24
тел/факс: (4732) 78-50-45, 72-89-98



Зам. директора

ООО "Радуга"

М.В. Семенов