



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика» Филиппова Н.А.

«13» сентября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система офтальмологическая 3D визуализации NGENUITY, с принадлежностями

Система офтальмологическая 3D визуализации NGENUITY, с принадлежностями




Модуль захвата изображения (трехмерная стереоскопическая цифровая видеокамера) - 1 шт.




Консоль со встроенным блоком обработки (специализированным компьютером с установленным программным обеспечением NGENUITY) - 1 шт.



3D дисплей – 1 шт.

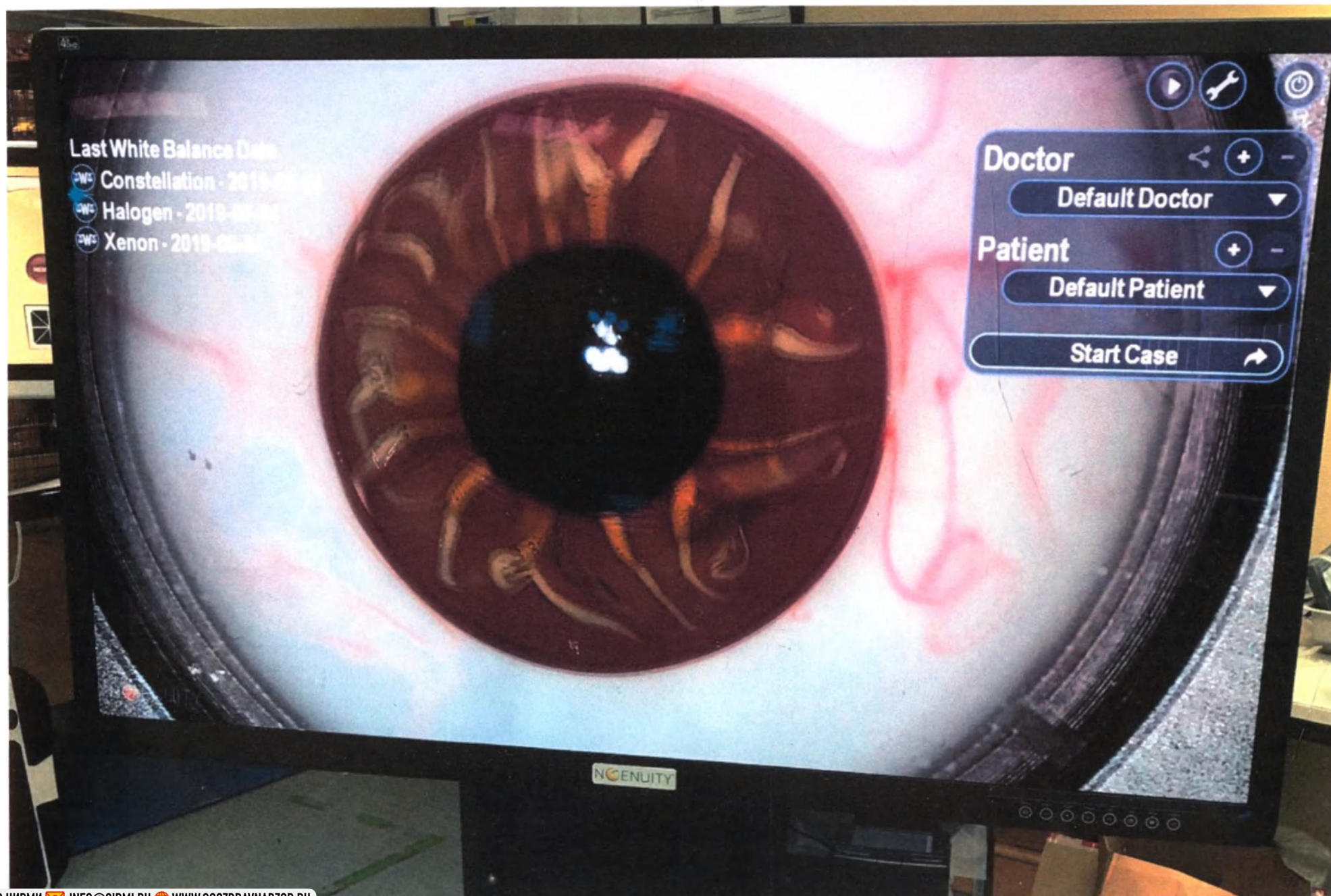


Беспроводная клавиатура – 1 шт.

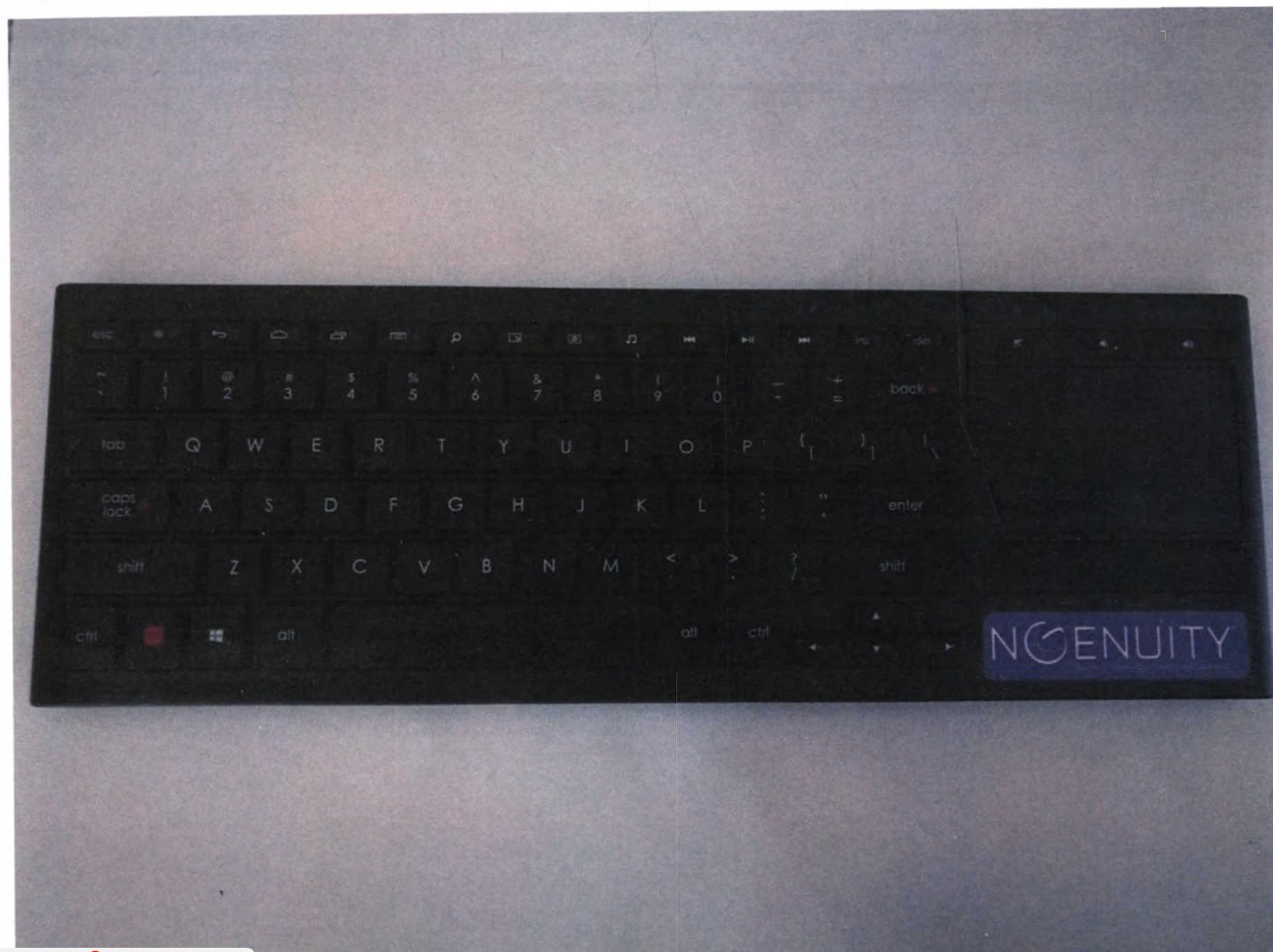

Набор аксессуаров для беспроводной клавиатуры:

- USB кабель
- удлинитель USB кабеля
- интерфейс передачи данных

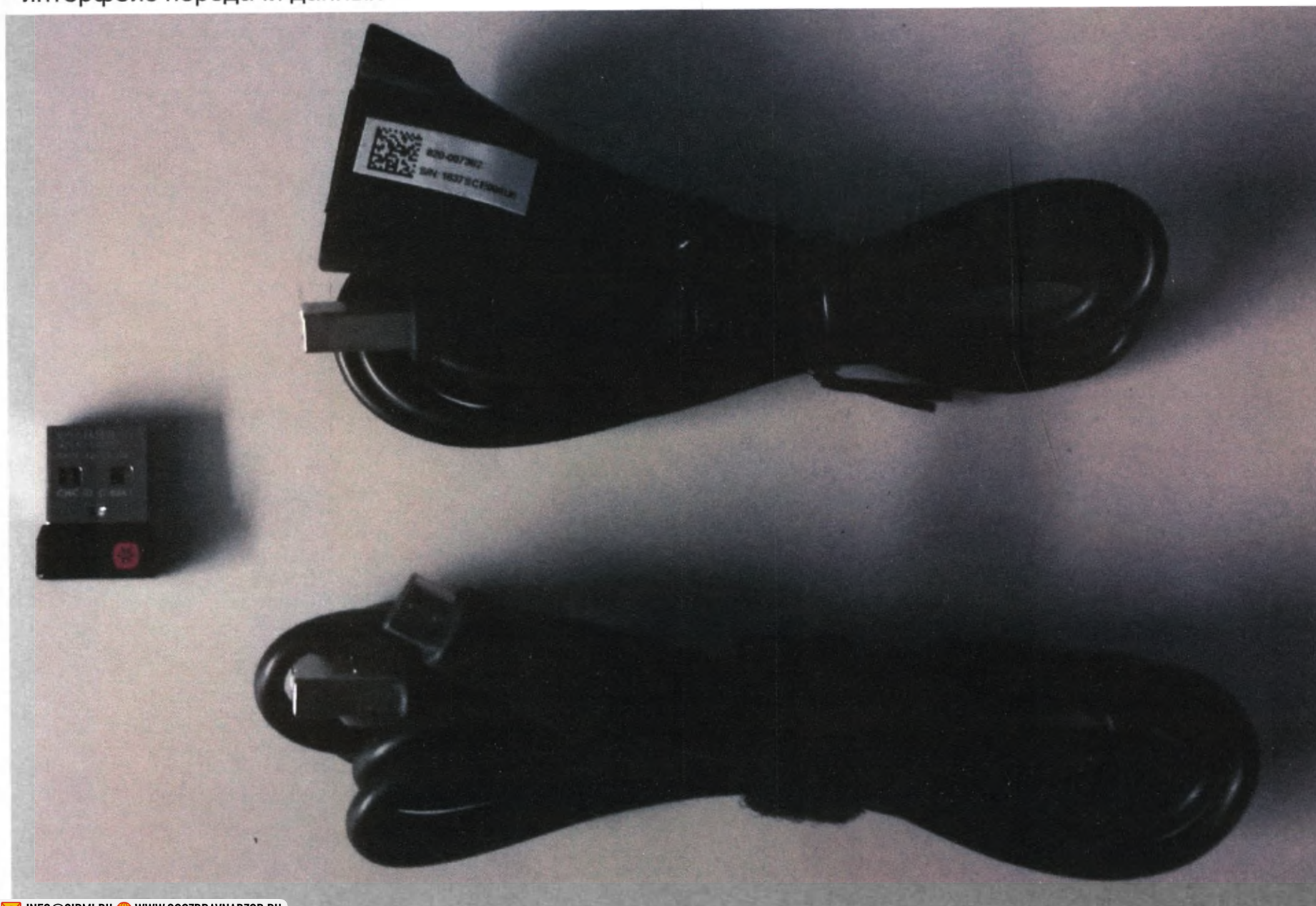

Устройство ввода – 1 шт.




3D очки для хирурга - 2 шт.



3D очки стандартные - 10 шт.



3D очки с креплением - 2 шт.

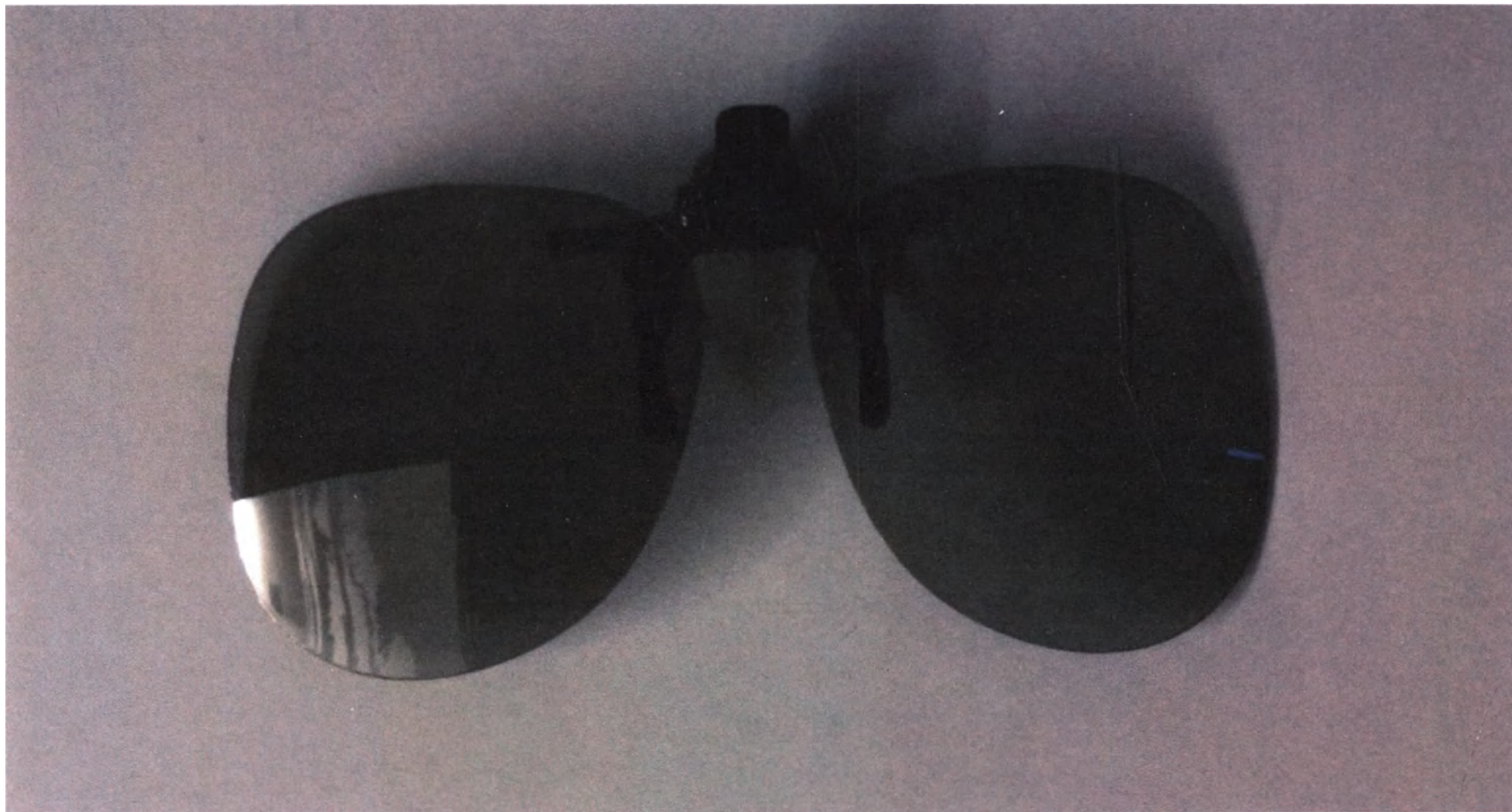

Эксплуатационная документация:

инструкция по эксплуатации системы офтальмологической 3D визуализации NGENUITY

Руководство пользователя



**Система офтальмологическая 3D
визуализации NGENUITY, с
принадлежностями
Версия ПО 1.4**



Alcon

-инструкция по эксплуатации программного обеспечения TrueMedia

Руководство пользователя



Программа TrueMedia

Версия ПО 4.0

Краткое руководство пользователя с креплением - 1 шт. (по необходимости)

NGENUITY/1.4. СИСТЕМА офтальмологическая 3D визуализации NGENUITY. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

В настоящем руководстве описывается как настроить и использовать Систему офтальмологическую 3D визуализации NGENUITY с принадлежностями. Подробное руководство пользователя NGENUITY поставляется в специальном ящике в верхней части передвижной консоли. Перед использованием системы обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя NGENUITY. В нем содержится важная информация по технике безопасности и нормативные требования.

1 Передовой опыт применения визуализации

- Открыть диафрагму на 30 % для оптимальной глубины фокуса.
- Проверьте световую калибровку, проверив световую температуру или настройки баланса белого
- Установите дисплей на расстоянии 1,2–1,8 м от глаз врача для оптимального бинокулярного восприятия изображения
- Проверьте парфокальное расстояние для визуализации (микроскоп, без широкоугольной системы, с широкоугольной системой), чтобы сфокусироваться на месте проведения операции
- Приблизьте изображение, чтобы оно заполнило весь дисплей, что позволит максимально повысить качество обзора операционного поля

2 Установка модуля захвата изображения (трехмерной стереоскопической цифровой видеокамеры)

Прикрепите модуль захвата изображения (трехмерную стереоскопическую цифровую видеокамеру) (далее – модуль захвата изображения) к хирургическому микроскопу также надежно, как и окуляры.


ПРИМЕЧАНИЕ. Перед прикреплением модуля захвата изображения следует убедиться в чистоте и отсутствии пыли во всей оптической части. Важно разместить модуль захвата изображения с соблюдением указанной ориентации.


При установке модуль захвата изображения должен быть расположен таким образом, чтобы ползунок диафрагмы был направлен в сторону врача. Для получения максимально качественного изображения рекомендуется устанавливать диафрагму в положение, открытое на 30 %.



ПРИМЕЧАНИЕ. Перед включением системы убедитесь, что модуль захвата изображения подключен.


Адаптер L типа для микроскопа

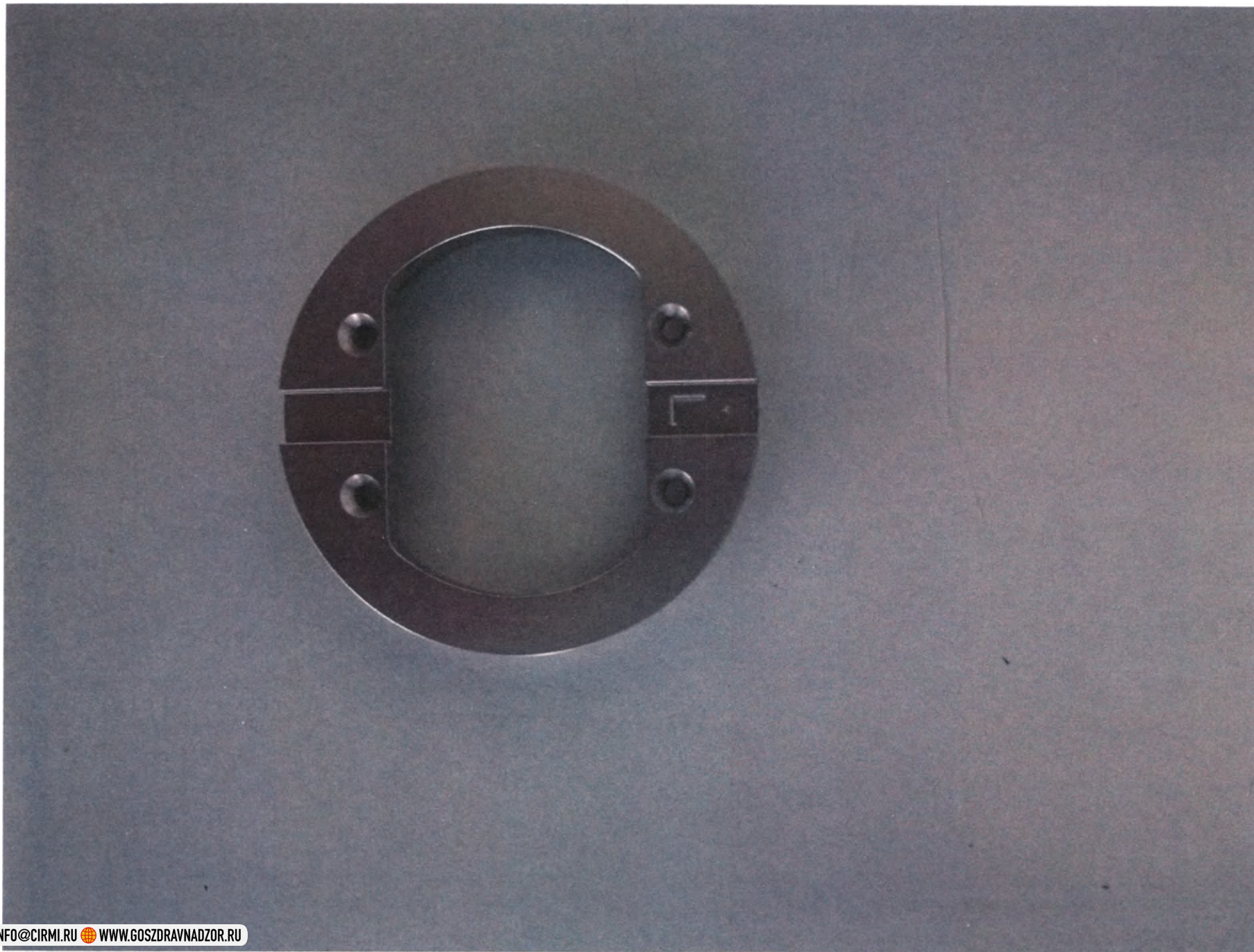

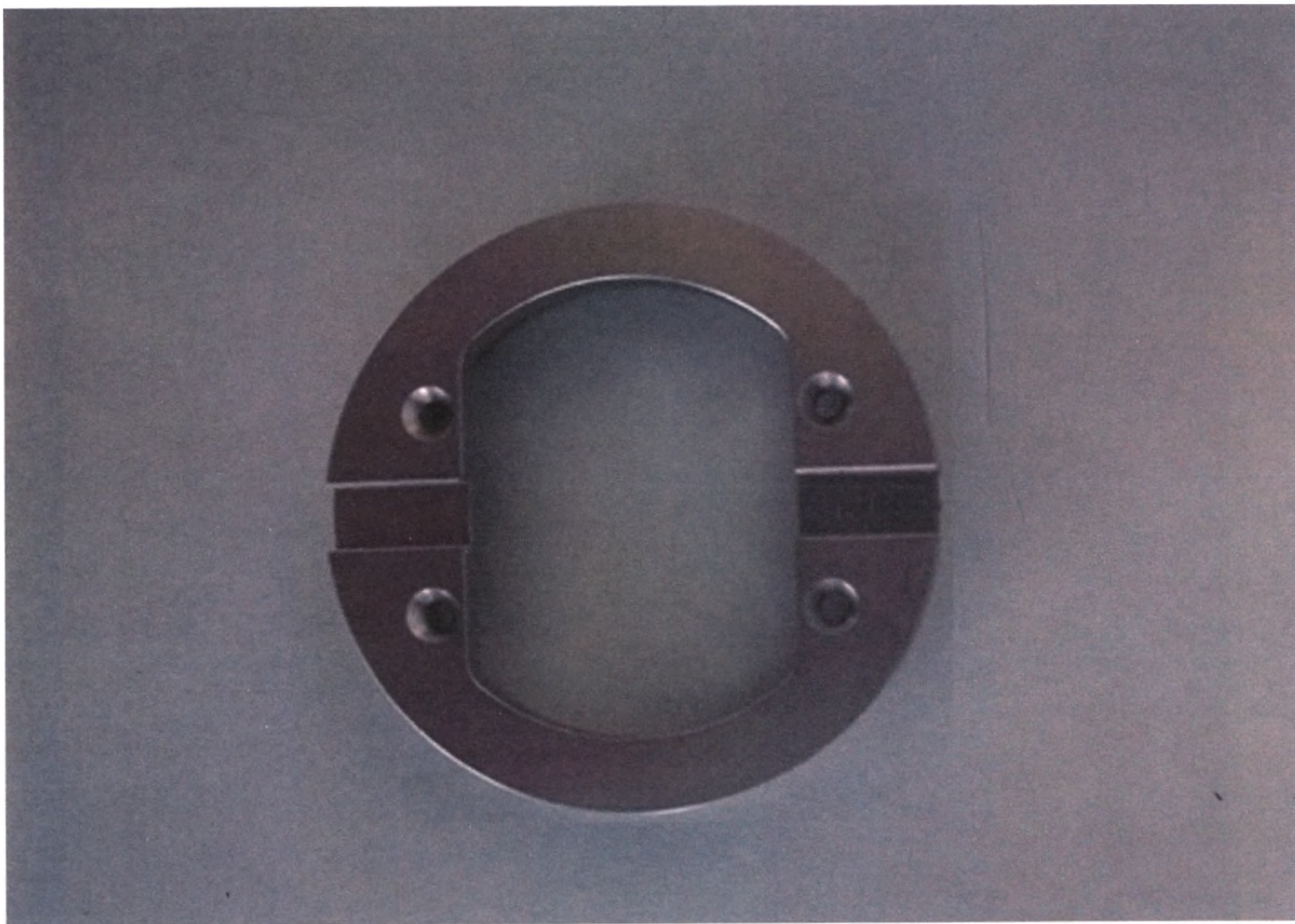

Принадлежности:

Защитная крышка для модуля захвата изображения – 1 шт. (по необходимости)

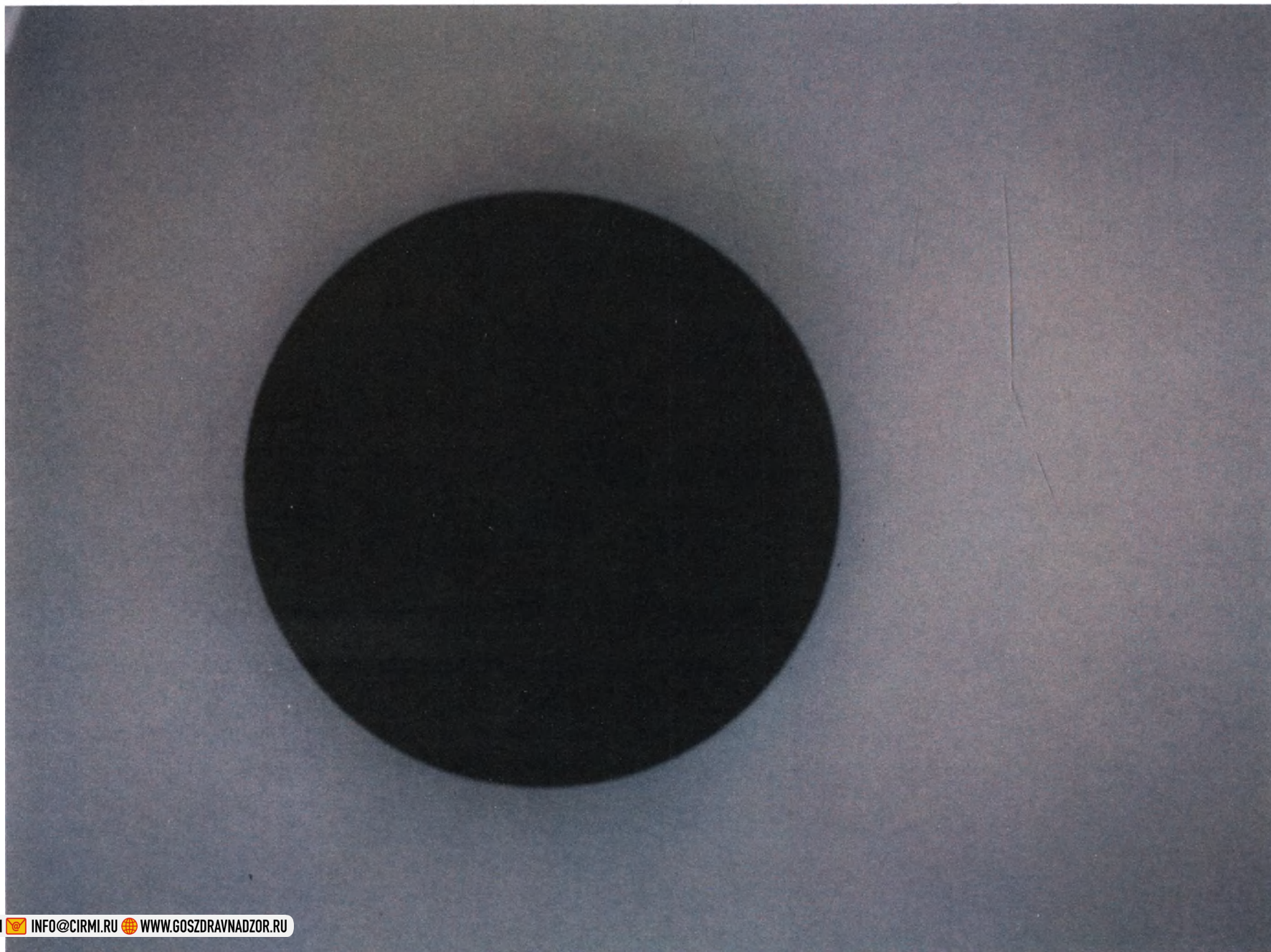


Кабельные стяжки - 4 шт. (по необходимости)




Пульт дистанционного управления – 1 шт.



Защитный экран для дисплея – 1 шт.

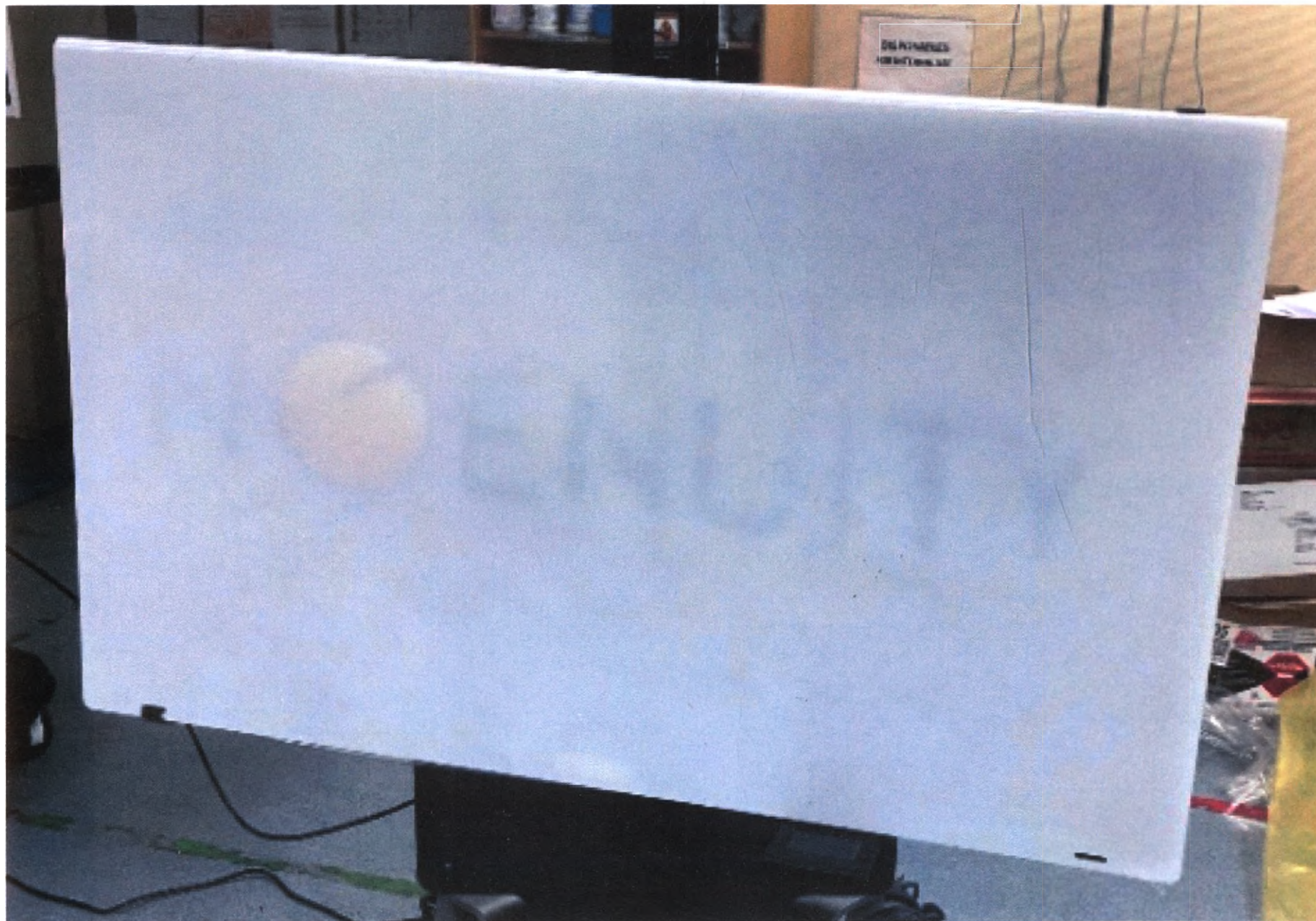

проводная клавиатура – 1 шт. (по необходимости)

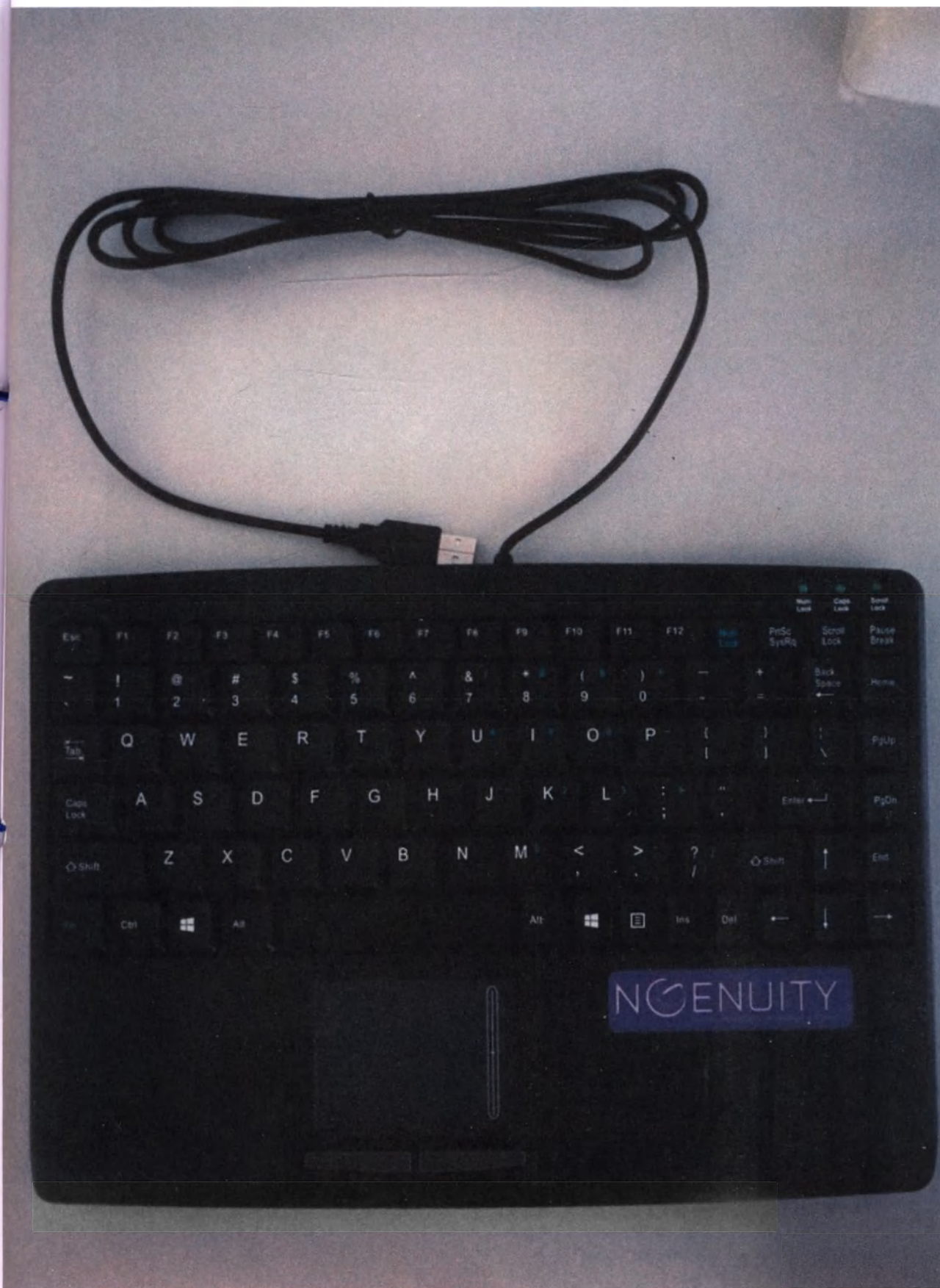

Удлинитель кабеля USB – 1 шт. (по необходимости)



Калибровочная материя




White Balance Card

N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y
N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y N G E N U I T Y

Please follow the onscreen White Balance procedure. Alcon REF 8065830008 p/n 204-1012-001

Регулировочный винт для микроскопа – 1 шт

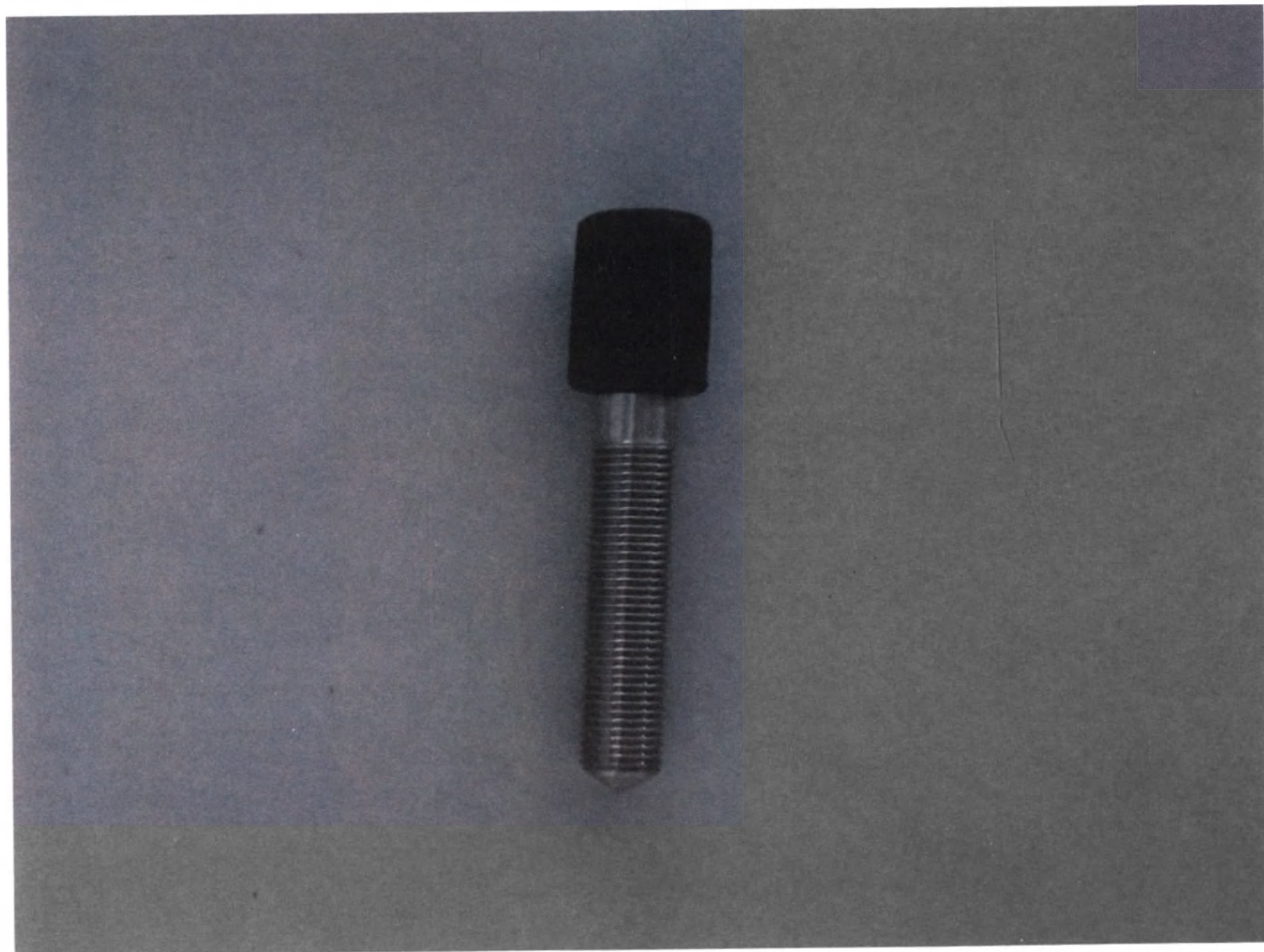


Кабель Ethernet - 2 шт. (по необходимости)




дискета дополнительная - 1 шт. (по необходимости)



Крюк для кабеля педали - 1 шт. (по необходимости)

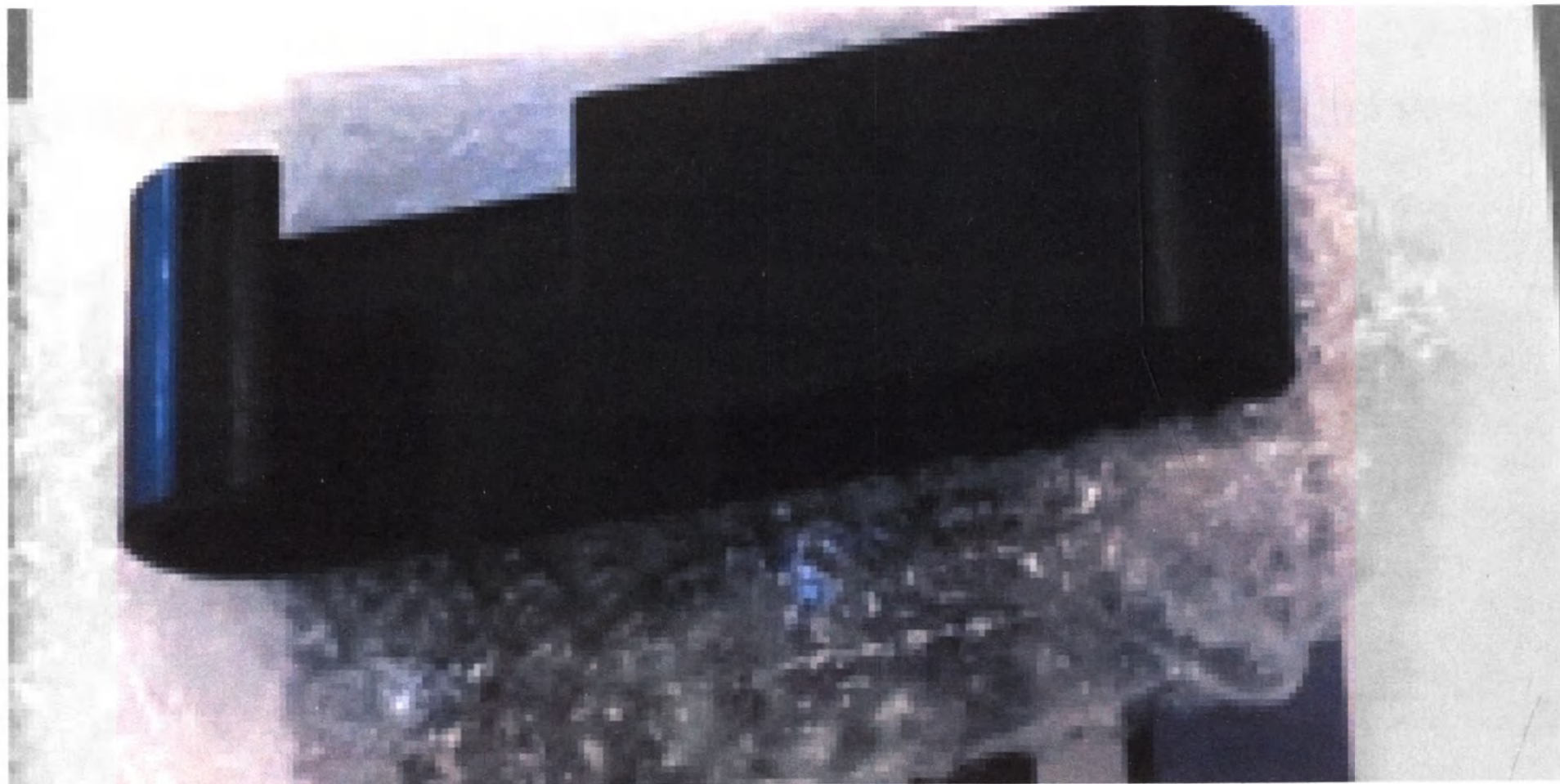

Крюк для кабеля Ethernet - 1 шт. (по необходимости)

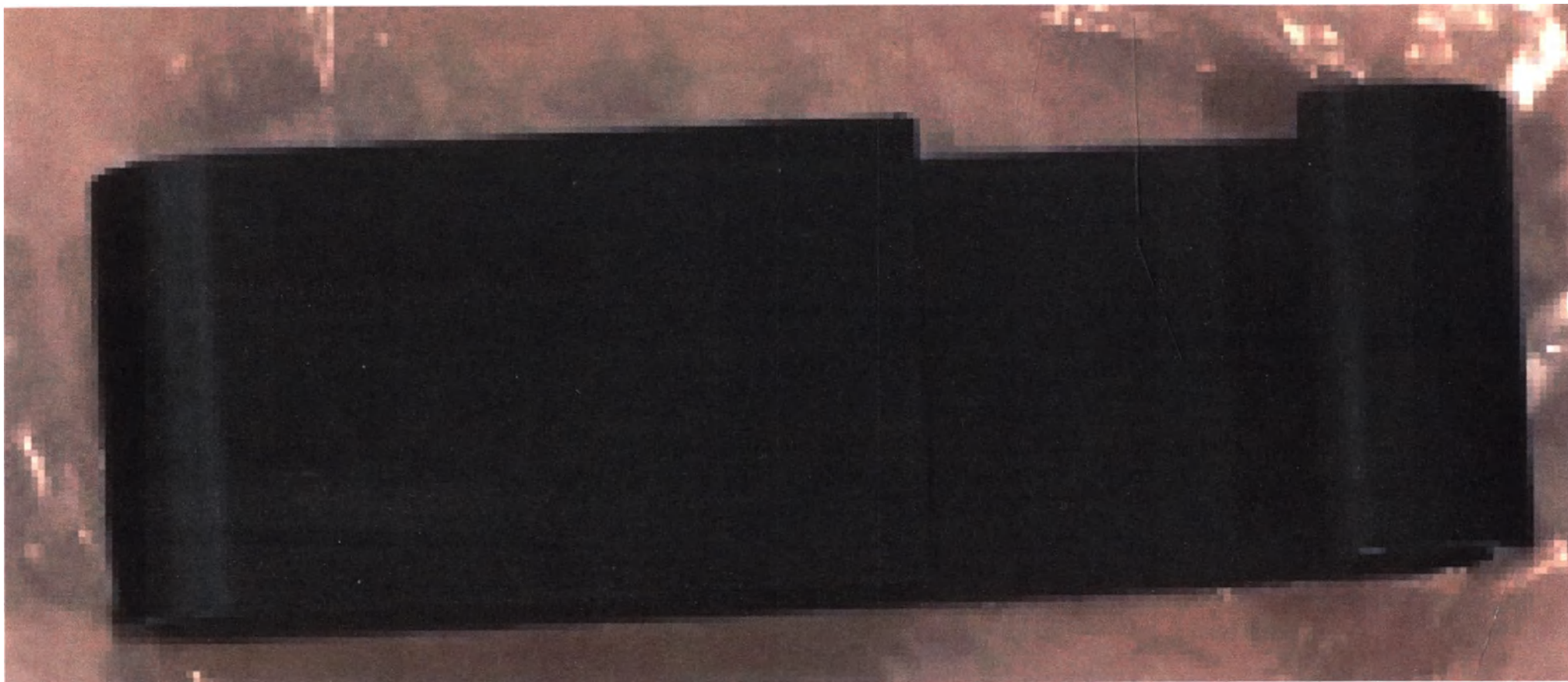

Батарейки для пульта – не более 4 шт. (по необходимости)




Кабель питания - 1 шт. (по необходимости)






ВИНТ – не болт 2 шт.


хомут для кабеля – 40 шт.

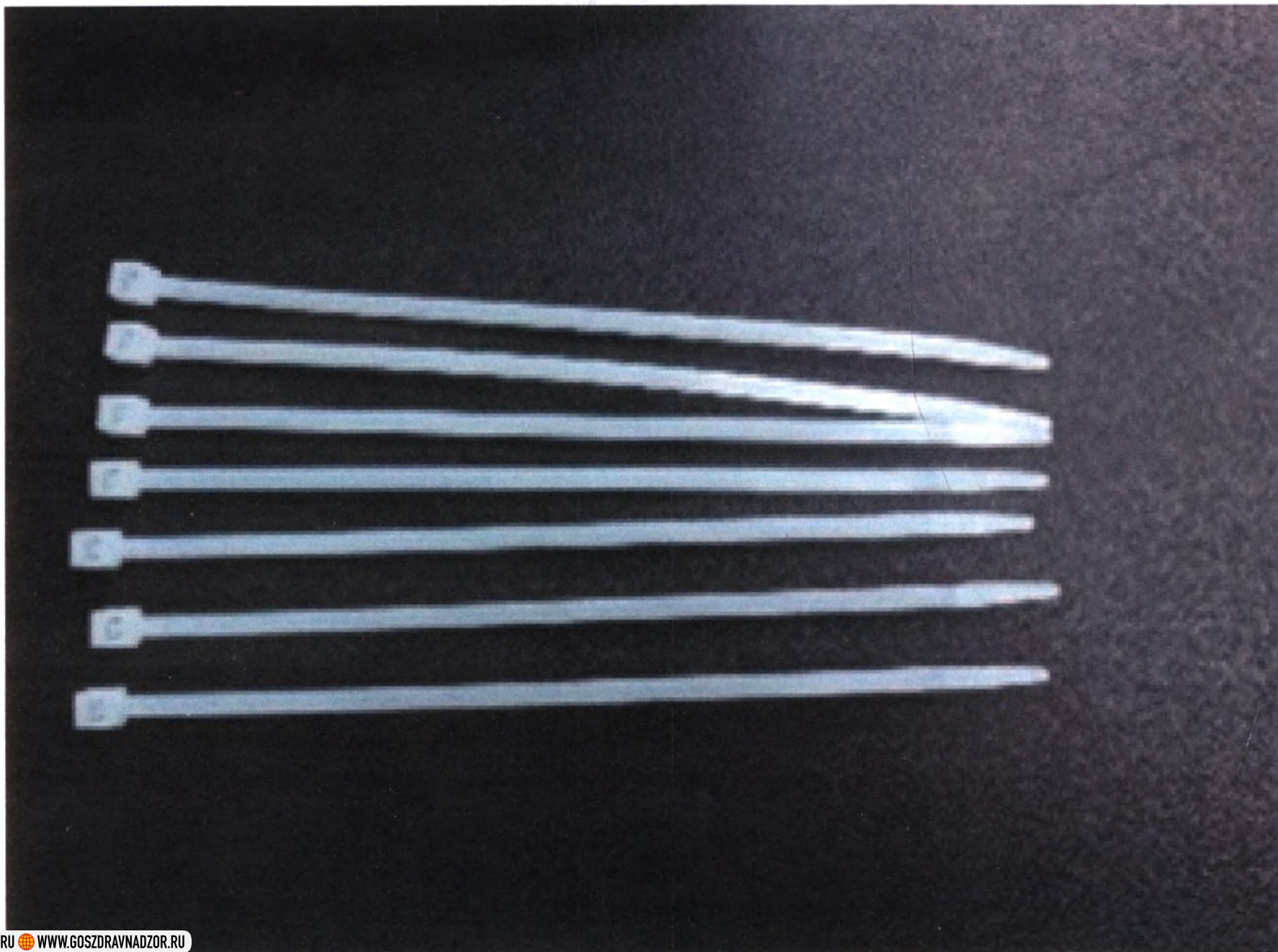


Безопасная крышка для разъема HDMI

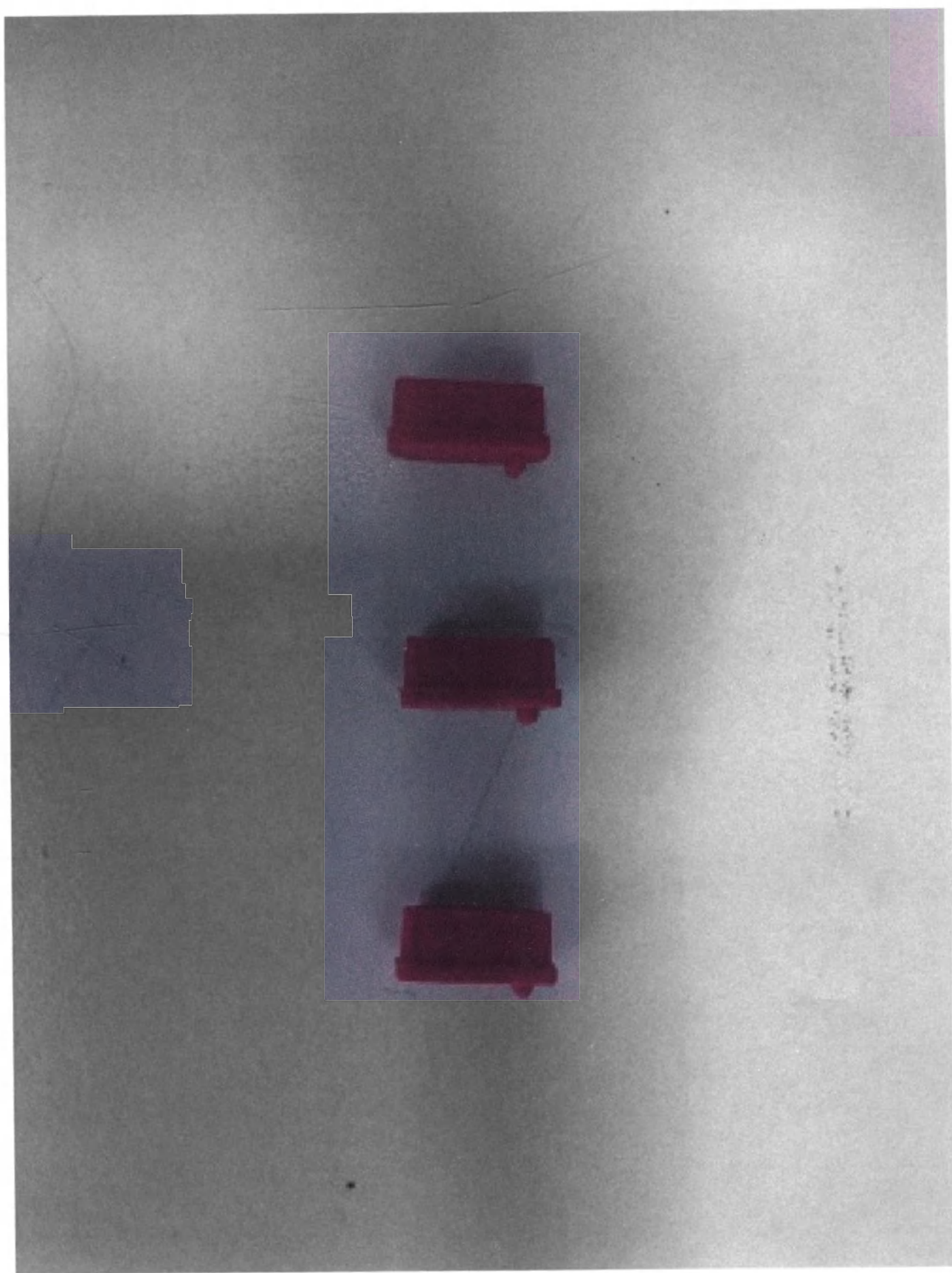

крюк для кабеля

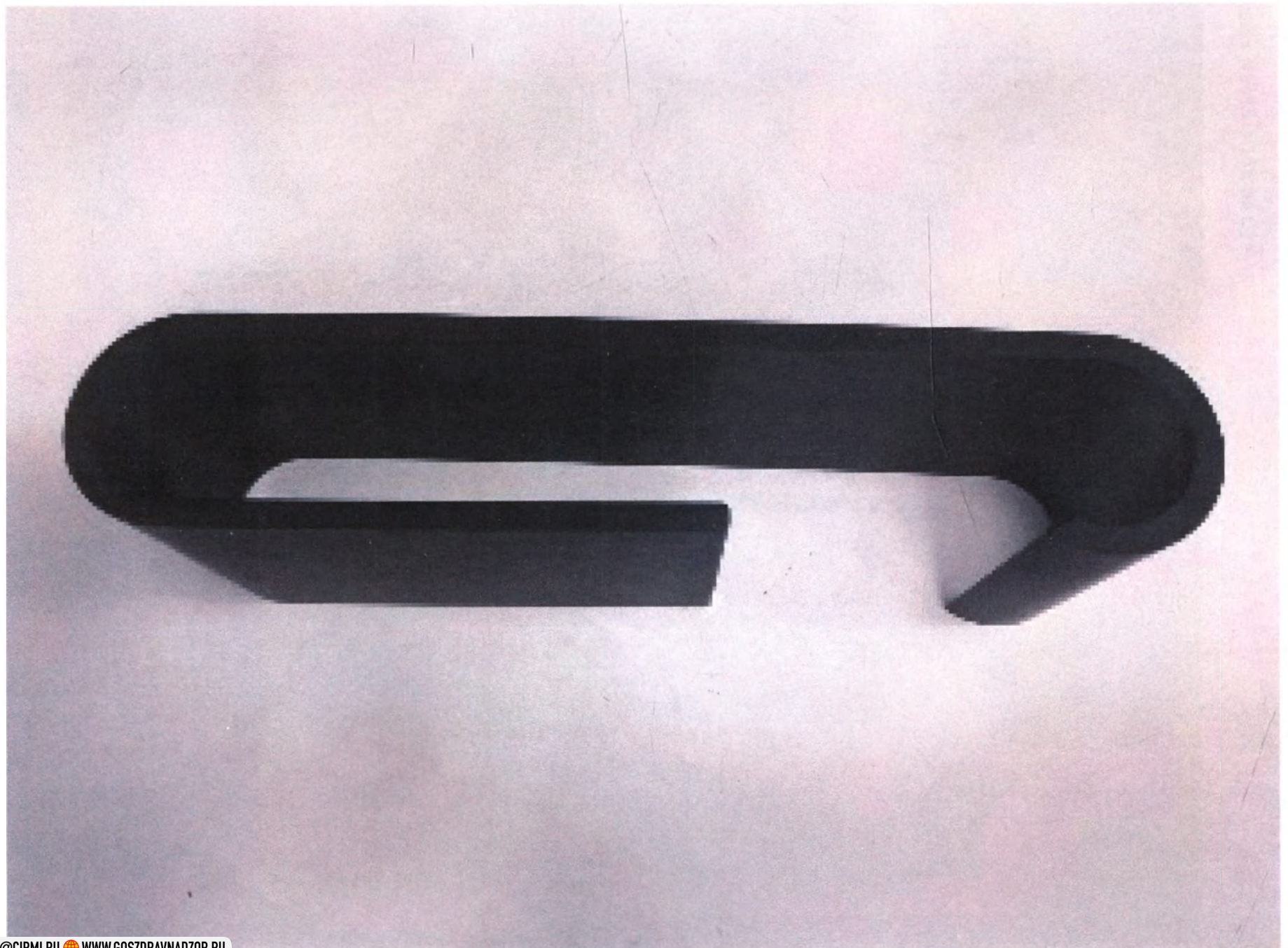


переходник NEMA 5-15R на C14

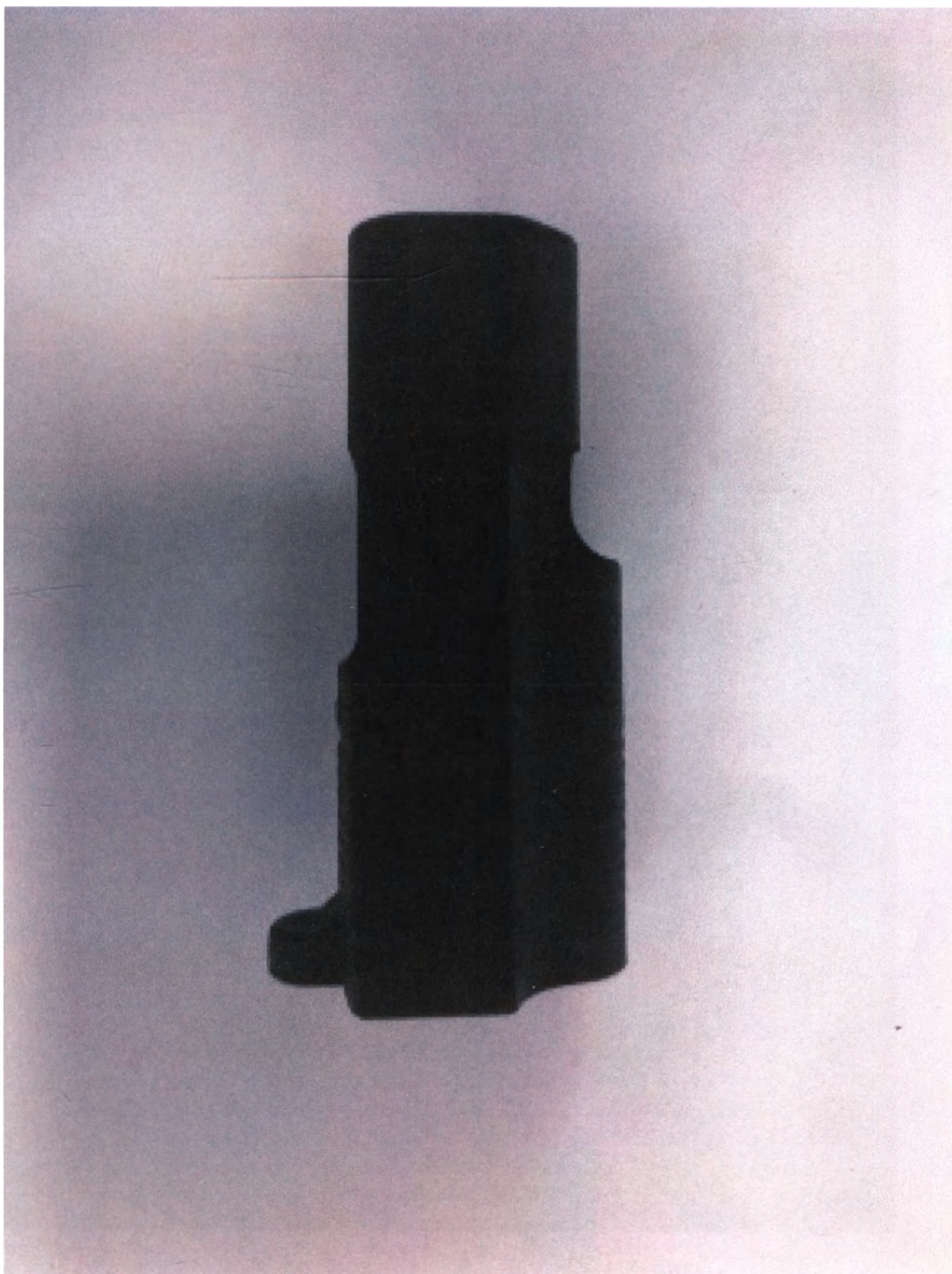

КОЛЬЦО




лента с защелками

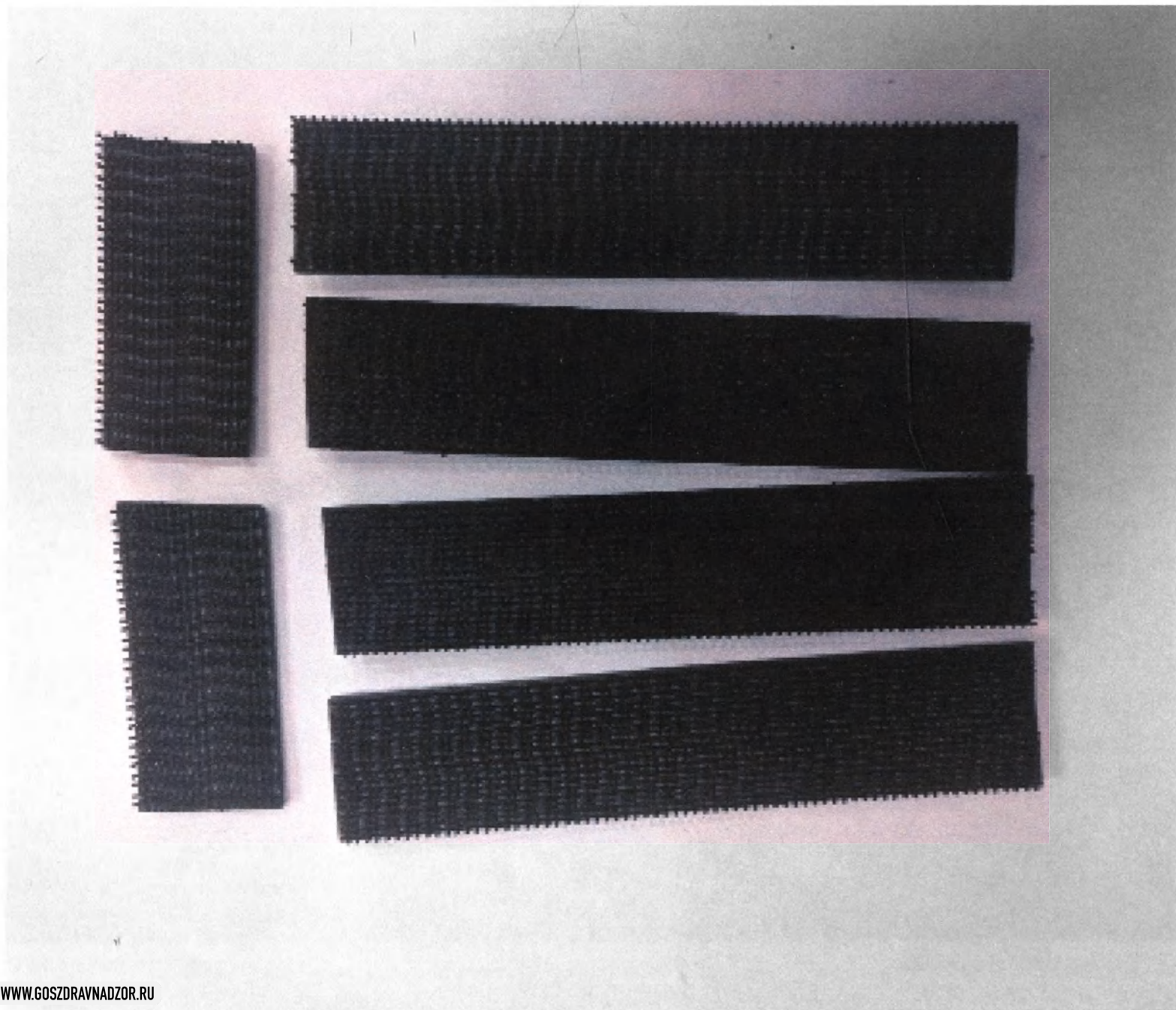

кабель NGEN 1.4 HDMI



коммутатор HDMI с блоком питания

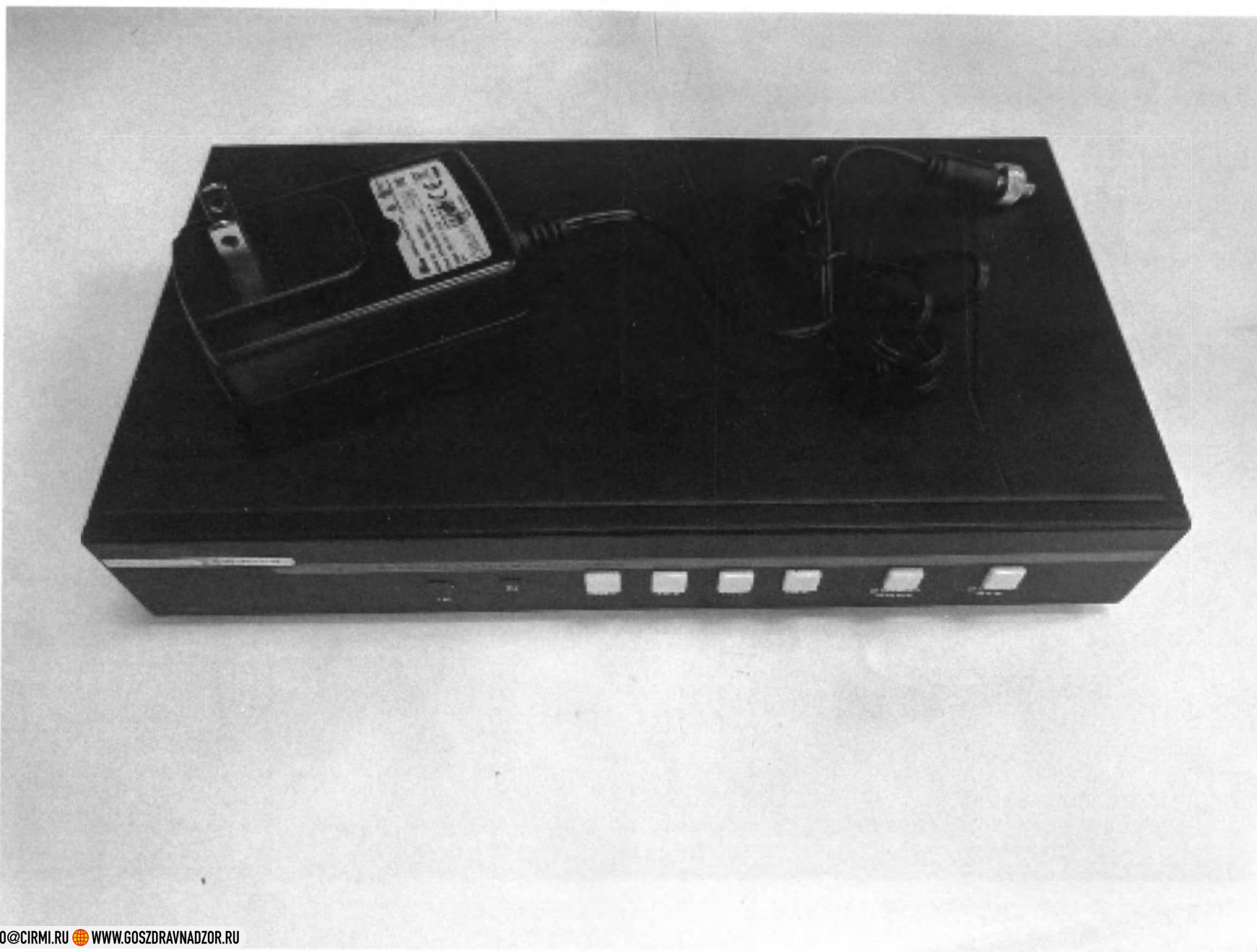

кольцо для ключей





ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

43 ЛИСТА(ОВ)

Менеджер по регистрации
ООО «Алкон Фармацевтика»
Филиппова Н.А.

