

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «МЕДОРТ РУ»

Миодушевская-Войталик Йоанна
М.П.

«01» ноября 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделия медицинского назначения

**Подушки ортопедические: под голову (MDQ00110, MDQ0011, DRQE3C),
под спину (DRQE3D), противопролежневая на сидение (DRVCT).**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2011

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подушки ортопедические: под голову (MDQ00110, MDQ0011, DRQE3C), под спину (DRQE3D), **противопролежневая на сидение (DRVCT)** применяются в ортопедии - благодаря анатомической форме, обеспечивают мягкую устойчивую поддержку головы, шеи, спины и других частей тела в наиболее удобном и функционально правильном положении во время сна, отдыха или работы.

Подушки ортопедические изготовлены из 100%-ного пенополиуретана с «эффектом памяти», за счет способности под воздействием тепла тела принимать его индивидуальные формы. Подушки ортопедические позволяют минимизировать давление тела на соприкасающиеся поверхности.

Подушки помещены в съемные чехлы из текстильного материала (75% хлопок, 25% полиэстер) с застежкой «молния».

Подушки ортопедические в зависимости от особенностей применения выпускаются следующих исполнений:

MDQ00110 и MDQ0011 представляют собой подушки ортопедические под голову. Рекомендованы для применения во время сна в положении «лежа». Подушка имеет валик для шейного отдела, обеспечивающий наиболее «правильное» положение позвоночника во время сна. MDQ00110 и MDQ0011 отличаются между собой размерным рядом и плотностью пенополиуретана.

- Поддерживает естественные изгибы шеи и шейный отдел позвоночника в правильном и стабильном положении;
- Приводит к расслаблению мышц шеи и спины;
- Снимает боль и усталость в области позвоночника и шеи;
- Предупреждает появление морщин, благодаря использованию уникального материала, принимающего форму головы;
- Предотвращает искривление позвоночника;
- Не препятствует кровообращению мозга при вертебробазилярной недостаточности;
- Повышение качества сна во время реабилитации после травм шеи;

DRQE3C – подушка ортопедическая под голову рекомендована для применения во время сна и отдыха в положении «сидя», например, в самолете или других транспортных средствах. Подушка обеспечивает мягкую поддержку головы и шеи.

- Сохраняет оптимальное положение шеи, разгружает мышцы шейно-воротниковой зоны.
- Реабилитация после травм шейного отдела позвоночника,
- Профилактика остеохондроза, сколиоза, головных болей, головокружений и онемений в руках.
- Улучшает кровообращение (за счет мягкого массажного эффекта).

DRQE3D – подушка ортопедическая под спину рекомендована для применения во время работы, отдыха или управления транспортным средством. Подушка обеспечивает поддержку поясничного отдела позвоночника и его естественного изгиба, а также компенсацию статических нагрузок на нижний грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника.

- Профилактика поясничных сколиозов, радикулита, остеохондроза и межпозвонковых грыж при длительной "сидячей" работе и вождении автомобиля;
- Предупреждение боковых смещений отделов позвоночника;
- Снижение статической нагрузки на мышцы в положении «сидя»;
- Формирование и поддержка правильной осанки;
- Обеспечение максимальной площади опоры спины в поясничном отделе позвоночника.

DRVCT – подушка ортопедическая противопрележневая на сидение рекомендована для применения при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также для предотвращения появления пролежней. Подушка обеспечивает наиболее анатомически «правильное» положение позвоночника и способствует сохранению правильной осанки в положении «сидя», снижает давление на ягодичную область.

- Уменьшает нагрузку на поясницу и спину
- Обеспечивает надлежащее тазовое положение, которое предотвращает боль, связанную с перегрузкой позвоночника при длительном вынужденном положении сидя.
- Профилактика пролежней в области седалищных бугров и задней поверхности бедра у длительно сидячих пациентов (инвалиды-колясочники);
- Подушка используется в инвалидном кресле-коляске, в рабочем кресле, на стуле, на сиденье водителя транспортного средства.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	MDQ00110	MDQ0011	DRQE3C	DRQE3D	DRVCT
Характеристика фото					
Размер, длина x ширина x толщина	S: 57 x 33 x 9/5 см, M: 57 x 33 x 12/7 см, L: 57 x 33 x 15/10 см	52 x 32 x 11,5/9,5 см	33 x 29 x 9 см	38 x 34 x 9 см	45 x 40 x 4,5/7,5 см
Вес	S: 1 кг, M: 1,2 кг, L: 1,6 кг	0,8 кг	0,2 кг	0,4 кг	0,84 кг
Кажущаяся плотность	не менее 80 кг/м ³	не менее 55 кг/м ³	не менее 55 кг/м ³	не менее 80 кг/м ³	не менее 60 кг/м ³
Остаточная деформация при сжатии,	не более 5 мм	не более 5 мм	не более 5 мм	не более 5 мм	не более 5 мм

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подушку освободить от упаковки и, в зависимости от варианта исполнения, подложить под голову, под спину или на сидение.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

MDQ00110 и **MDQ0011** представляют собой подушки ортопедические под голову.

Рекомендованы для применения во время сна в положении «лежа».

DRQE3C – подушка ортопедическая под голову рекомендована для применения во время сна и отдыха в положении «сидя», например, в самолете или других транспортных средствах.

DRQE3D – подушка ортопедическая под спину рекомендована для применения во время работы, отдыха или управления транспортным средством.

DRVCT – подушка ортопедическая противопротезная используется на сидении и рекомендована для применения при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также для предотвращения появления пролежней.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подушки ортопедические транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Подушки ортопедические должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре от +5 до 25°C и относительной влажности 80 %.

Правила ухода за изделием:

Возможна ручная стирка чехла при температуре не выше +60°C, а подушки DRVCT при температуре не выше + 35 °C. Не применять хлорсодержащие и отбеливающие моющие средства. Не применять машинную стирку, не отжимать, Сушить вдали от нагревательных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не гладить.

Сшито и заверено печатью 4

(гепт) лист 6



Мядушевская Войцалік

Іоанна