



- Коррекция сутулости, нарушений осанки (например, при болезни Шейермана-Мау),
- Остеопороз грудного и/или пояснично-крестцового отдела позвоночника,
- Для реабилитации после травм и операций в области грудного и поясничного отделов позвоночника.
- Начальные проявления дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового и/или грудного отдела позвоночника,
- Ослабление (гиподинамия) мышц живота;
- Анкилотическое воспаление суставов позвоночника;

Показания к применению варианта исполнения DRQH0L:

- Нарушение осанки (сутулость, «вялая» осанка),
- Искривление позвоночника в грудном отделе (кифоз, кифосколиоз, сколиоз),
- Легкий, умеренный или выраженный болевой синдром в грудном отделе позвоночника,
- Для реабилитации после травм и операций в области грудного отдела позвоночника,
- Для профилактики остеопоротических переломов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

2.1. Корсет мягкий DRQH0A:

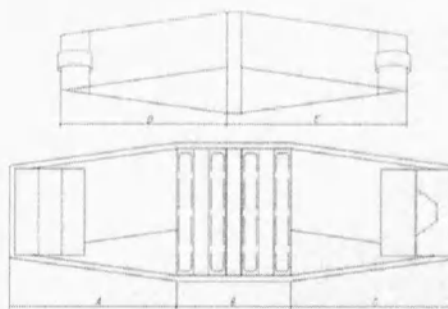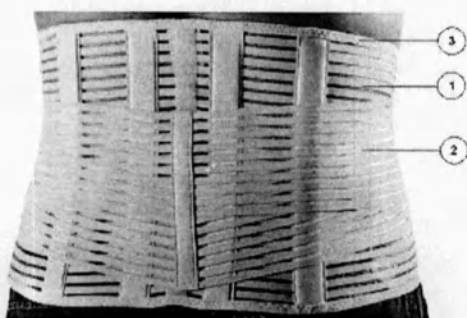

№пп	Наименование	Состав (материал)	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н
1	Основа	Полипропилен 60% Эластодиен 30% Полиамид 10%	не менее 400, но не более 500	не менее 300
2	Лента фиксирующая	Полипропилен 60% Эластодиен 30% Полиамид 10%	не менее 400, но не более 500	не менее 300
3	Окантовка эластичная	Полиэстер 75% Латекс 24% Полиамид 1%	не менее 200, но не более 300	не менее 150

2.2. Корсет мягкий DRQH0B:

