



Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «АКВИКОМП»

М.В. Андресонов
«03» сентября 2018 г.

Переработана
«10» июня 2019 года

Инструкция по эксплуатации

Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ 9398-001-13382032-2008


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г предназначены для сбора хранения и утилизации отходов в отделениях лечебно-профилактических учреждениях.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Варианты исполнения пакетов, габаритные и основные размеры пакетов соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

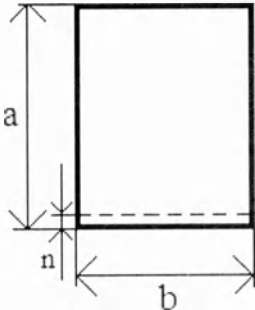
Обозначение размера	Значения
Термосваренный с открытым верхом (прямой шов*)	
	
a - длина	От 300мм до 1800мм с шагом 1мм
b - ширина	От 300мм до 700мм с шагом 5 мм
n - высота шва	От 0мм до 20мм
h - толщина пленки	От 5мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм

Термосваренный с открытым верхом с фальцами (прямой шов*)

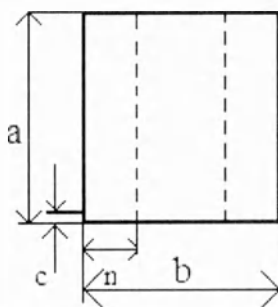


a - длина	От 300мм до 1800мм с шагом 1мм
b - ширина	От 300мм до 1100мм с шагом 5мм
c - высота шва	От 0мм до 20мм
n - размер фальца	От 20мм до 500мм
h - толщина пленки	От 5мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм

Термосваренный с открытым верхом с фальцами (шов «звезда»)

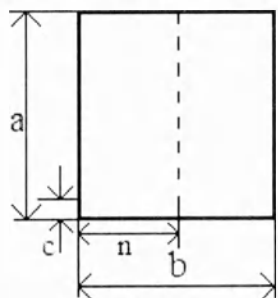


a - длина	От 300мм до 1815мм с шагом 1мм
b - ширина	От 300мм до 1300мм с шагом 5мм
c - высота шва	От 0мм до 10мм
n - размер фальца	½ от ширины пакета
h - толщина пленки	От 5мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм

Термосваренный с открытым верхом с боковыми швами

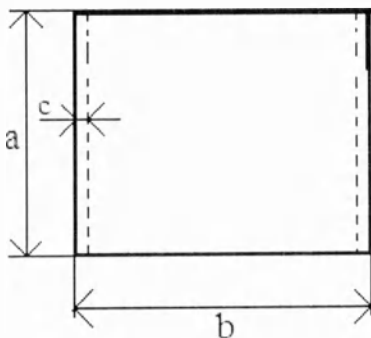

a - длина	От 380мм до 1000мм с шагом 1мм
b - ширина	От 300мм до 700мм с шагом 10мм
c - высота шва	От 0мм до 10мм
h - толщина пленки	От 10мкм до 40 мкм с шагом 1 мкм

Термосваренный с лентой завязкой

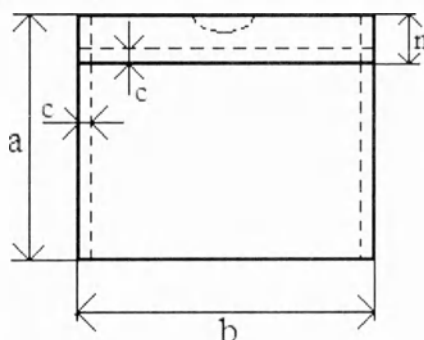

a - длина	От 330мм до 960мм с шагом 1мм
b - ширина	От 300мм до 960мм с шагом 10мм
c - высота шва	От 0мм до 10мм
n - глубина подворота	От 40 мм до 60 мм
h - толщина пленки	От 10мкм до 40мкм с шагом 1мкм

* Донные швы могут быть как одинарными, так и двойными.

ПЕРЕЧЕНЬ

вариантов исполнений изделия

Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г.

Наименование изделия	Вариант исполнения	Тип	Диапазон размеров		Диапазон толщин
			Ширина	Длина	
Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г	Термосваренный с открытым верхом (прямой шов*)	пласт	От 300мм до 700мм с шагом 5 мм	От 300мм до 1800мм с шагом 1мм	от 5мкм до 80мкм с шагом 1мкм
		рулон			
	Термосваренный с открытым верхом с фальцами (прямой шов*)	пласт	От 300мм до 1100мм с шагом 5мм	От 300мм до 1800мм с шагом 1мм	
		рулон			
	Термосваренный с открытым верхом с фальцами (шов «звезда»)	пласт	От 300мм до 1300мм с шагом 5мм	От 300мм до 1815мм с шагом 1мм	
		рулон			
Термосваренный с открытым верхом с боковыми швами	рулон	От 300мм до 960мм с шагом 10мм	От 380мм до 1000мм с шагом 1мм	от 10мкм до 40мкм с шагом 1мкм	
Термосваренный с лентой завязкой	рулон	От 300мм до 960мм с шагом 10мм	От 330мм до 960мм с шагом 1мм		

2.2 Ширина сварного шва пакетов не превышает (4+2) мм.

3. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Требования к персоналу, эксплуатирующему изделия:

- К использованию пакетов допускается только персонал, ознакомленный с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

- Эксплуатировать изделия только с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халат, маска (при необходимости)).

3.2. Показания к применению

Пакеты полиэтиленовые одноразовые, белого цвета используются для сбора и утилизации неопасных медицинских отходов класса А.

Пакеты полиэтиленовые одноразовые, желтого цвета используются для сбора и утилизации опасных медицинских отходов класса Б.

Пакеты полиэтиленовые одноразовые, красного цвета используются для сбора и утилизации чрезвычайно опасных медицинских отходов класса В.

Пакеты полиэтиленовые одноразовые, черного цвета используются для сбора и утилизации отходов близких к промышленным, медицинских отходов класса Г.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 4.1. Повторное использование пакетов – не допускается.
- 4.2. Нагрузка на пакет более 18 кгс – не допускается.
- 4.3. Пересыпание медицинских отходов из пакетов - не допускается.
- 4.4. Применение пакетов, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхности пакетов) – не допускается.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Достаньте пакет нужного вам типоразмера и класса опасности из упаковки.
2. Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
3. Руками придайте ему округлую форму.
4. Вставьте его в подходящую по размеру тару (бак) или закрепите на стойке-тележке фиксаторами.
5. Для фиксации пакета на баке, загните его края по краю тары.
6. Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
7. Заполните пакет на $\frac{3}{4}$ отходами выбранного класса опасности. Следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментальный.
8. Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
9. Перекрутите горловину пакета, промаркируйте и загерметизируйте пакет стяжкой.
10. Пакет готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 6.1. Использование пакетов допускается только с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.2790-10.
- 6.2. Хранение пакетов должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях, исключая воздействие прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред.
- 6.3. Гарантийный срок годности пакетов не более 5 лет со дня продажи.
- 6.4. Утилизация пакетов осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05513 от 03.09.2015 года

Символы, применяемые для маркировки:



- знак одноразового использования;



- работать в защитных перчатках;



- работать в защитных очках;



- знак добровольной сертификации.

ООО «АКВИКОМП»

адрес: 142402, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, строение 2, этаж 1, помещение 1

Тел. (факс): 8(496)519-20-10

E-mail: www.avikomp.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 5 (пять) листов

Должность ДИРЕКТОР

ООО «АКВИКОМП»

Подпись

М.В.АНДРЕСОНОВ

