

Руководство по применению медицинского изделия «КВИКС» спрей назальный, вариант исполнения:

«КВИКС», спрей назальный с Эвкалиптом («КВИКС» Эвкалипт)

Описание изделия медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт.

«КВИКС» Эвкалипт применяется для облегчения симптоматики при заложенности носа и околоносовых пазух и дополнительно обладает освежающим эффектом. Действие изделия не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека, а только благодаря физическим свойствам изделия. Изделие имеет кратковременный контакт с полостью носа.

«КВИКС» Эвкалипт – это природный гипертонический спрей, содержащий очищенную воду из Атлантического океана с добавлением небольшого количества очищенного эвкалиптового масла. Концентрация соли в **изделии медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт** выше, чем в слизистой оболочке носа (гипертонический солевой раствор), благодаря чему возникает осмотическое давление, благоприятно воздействующее на снятие отека.

Состав изделия медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт.

В пересчете на 100 мл, изделие содержит воду из Атлантического океана, 0,015 мл эвкалиптового масла и очищенную воду для доведения объема до 100 мл. Концентрация соли в «КВИКС» Эвкалипт соответствует около 26 г NaCl на литр раствора или 2,6% (гипертоническая). Не содержит химических добавок и консервантов. Состав не содержит консервантов, каких-либо химических добавок или концентратов.

Форма выпуска.

«КВИКС» Эвкалипт выпускается во флаконах из полиэтилена высокой плотности объемом 30 мл. Каждый флакон снабжен распыляющим насосом и защитным колпачком, который защищает содержимое флакона при хранении и транспортировке. Конструкция упаковки (включая встроенную систему антибактериальной защиты) гарантирует отсутствие загрязнения содержимого в течение всего периода использования.

Свойства изделия медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт.

Изделие медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт:

- Снимает отек и заложенность носа и носовых пазух, способствуя физическому удалению избытка жидкости из слизистой носа, таким образом уменьшая отек.
- Размягчает скопившуюся слизь и облегчает процесс сморкания.
- Дает ощущение чистого и «свободного» носа и носовых пазух, облегчая дыхание, благодаря ощущаемому физически освежающему эффекту эвкалиптового масла.

Показания к применению изделия медицинского назначения «КВИКС» Эвкалипт.

- Облегчение отека носа и носовых пазух при простудах и гриппе
- Активная очистка носовых ходов
- Сильный ощущаемый физически освежающий эффект

- Облегчение сморкания при заложенности носа.

Медицинское изделие предназначено для детей (с шести месяцев) и взрослых.

Способ применения

Дети с шести месяцев до шести лет: одно орошение каждого носового хода до 4х раз в день.

Дети с шести лет и взрослые: 1-3 орошения каждого носового хода несколько раз в день.

Снять колпачок подготовить спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника до достижения мелкого аэрозольного распыления (рис. 1). После этого спрей готов к использованию. Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету с обеих сторон наконечника (рис. 2). После использования очистить наконечник и закрыть наконечник колпачком. Наконечник обеспечивает дозированный поток и равномерное распределение спрея.



Рис. 1



Рис. 2

Медицинское изделие можно применять перед применением других назальных спреев. Продолжительность использования не ограничена. Не вызывает привыкания.

Противопоказания

Особых противопоказаний для применения не выявлено. Пациентам с повышенной чувствительностью к морской воде, эвкалиптовому маслу (или Алоэ вера), применение медицинского изделия не рекомендуется.

Использовать с осторожностью.

После оперативных вмешательств и травм в области носа медицинское изделие следует применять только после консультации врача.

Взаимодействие с другими препаратами

До настоящего времени проблем взаимодействия с другими препаратами выявлено не было.

Побочные эффекты.

До настоящего времени побочных эффектов не выявлено.

Условия хранения. Защита окружающей среды. Утилизация.

Хранение в сухом месте при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. Спрей назальный «Квикс» (в вариантах исполнения), при использовании, транспортировке и хранении, не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду. Спрей назальный «Квикс» (в вариантах исполнения) должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями, в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами».

В начале применения может возникнуть небольшое жжение.

Условия хранения.

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Не использовать изделия медицинского назначения после истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия упаковки, следует использовать в течение 6 месяцев.

Описание упаковки.

Флакон «КВИКС» Эвкалипт содержит 30 мл раствора. В каждом флаконе содержится приблизительно 220 доз. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает проникновение микробов на протяжении всего периода использования.

«КВИКС» Эвкалипт является изделием медицинского назначения.

Знак CE

Производитель:

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия


Адрес для предъявления претензий:


Пресненская набережная 10, Бизнес-центр
«Башня на Набережной», Блок В,
123317, Москва.
Телефон: (495) 785-01-00

Дата последней редакции 04.2013 г.

21.11.2013

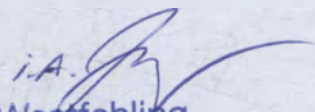


I. Westfehling
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Germany

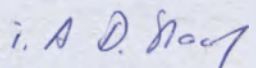
D. Stoof
Berlin Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Germany