



ООО «Медтехника Реботек»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ходунки (ролаторы)

Назначение

Опорные ходунки предназначены для лиц, которые не могут длительное время находиться в положении стоя, служат для обеспечения надежности при ходьбе, а также идеальны для помощи при подъеме/вставании. Опорные ходунки, имеют алюминиевую раму с порошковым покрытием, очень легкие и не ржавеют. Нескользящие ручки обеспечивают надежную поддержку. При транспортировке опорные ходунки можно легко сложить. Высоту ходунков можно регулировать для различного роста пациентов.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Ролаторы - ходунки на 4 колесах предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения надежности при ходьбе.

Прочная конструкция алюминиевой трубки способствует устойчивости против опрокидывания. Небольшой вес облегчает не только транспортировку ролатора, но и помогает преодолеть бортовые кимы тротуара путем подтягивания ручки к верхней части туловища. Спинка может быть снабжена специальной подушкой для мягкости, которая делает сидение даже в максимально высоком положении удобным. При транспортировке ролатор складывается, а для установки размера нужно регулировать по высоте ручку

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Опорные ходунки уже готовы к использованию. При пуске в эксплуатацию следует придерживаться следующих указаний:

Раскладывание ходунков

Поставьте ходунки на задние ножки и развинтите раму с ручкой. Опорные ходунки сами примут правильное положение.

Только для ходунков с сиденьем: перед использованием откиньте крышку сиденья.

Установка ручек ходунков

Отвинтите обе грибовидные ручки. Затем выберите подходящую высоту и установите ручки к близлежащему болтовому отверстию. Снова закрутите грибовидные ручки и затем крепко их затяните.

Складывание ходунков

Выньте оба болта и одновременно приподнимите ходунки. Ходунки сложатся.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно. Меняйте наконечники попарно, чтобы обеспечить равномерную устойчивость.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Раскладывание роллатора

Поставьте роллатор на передние колеса и раздвиньте раму с задними колесами (рис. 1).

Роллатор примет правильное положение самостоятельно (рис. 2).

Установка рукояток роллатора

Сначала отогните обе грибовидные ручки (С) – рис. 3. Затем выберите подходящую высоту (D) – рис. 3 и установите ручки к ближайшему болтовому отверстию. Снова закрутите грибовидные ручки (С) и затем крепко их затяните.

Крепление сумки роллатора

К раме роллатора уже прикреплены липучками сумка из искусственного материала – рис. 4. Сумка открывается замком-молнией. Для того чтобы наполнить сумку откройте крышку и после этого снова закройте.

Использование тормозов роллатора

Путем поднятия, поворачивания влево и вправо тормозного рычага (G) – Рис. 5 происходит торможение задних колес. Стояночный тормоз фиксируется путем опускания тормозного рычага вниз (H). Подняв его вверх (G), Вы вернете его в исходное положение.

Раскладывание роллатора

Тяните красный шнур (J) – рис. 2 вверх до тех пор, пока фиксация не ослабится, а другой рукой поднимайте ручку (скобу).

Использование сиденья роллатора

Приведите сиденье в складное положение (N) – рис. 4.

• Укрепите перед использованием сиденья стояночный тормоз (H)

• При попадании солнца возможно сильное нагревание сиденья. Для того чтобы оно было пригодным для использования, температура сиденья не должна превышать температуру рук.

Установка тормозов роллатора

Ослабьте контргайку (L) и настройте тормоз при помощи винта (K). Учитывайте то, что при ослабленных тормозах колеса вращаются свободно, а при «затянутой» тормозной системе они не двигаются совсем. Снова затяните контргайку (L).

Техническое обслуживание

Уход

Все части из синтетических материалов очищайте при помощи специальных средств – следуйте указаниям из информации о товаре.

Алюминиевую или стальную раму с порошковым покрытием достаточно в большинстве случаев протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо.

Ремонт

Опорные ходунки отличаются длительным периодом службы и надежностью. Однако, если однажды произойдет какая-то поломка, не пытайтесь устранить ее сами. Обязательно обратитесь за помощью к дилеру или в ближайший магазин, торгующий товарами для больных. Небрежный уход или его недостаток приводит к тому, что срок службы прибора сокращается. По причинам техники безопасности нужно использовать только оригинальные запасные части.

Наставления по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте опорные ходунки на наличие повреждений. Если Вы сомневаетесь, лучше не используйте продукт.

 Вниманию – риск падения! Следя, не наклоняйтесь далеко вперед.

- Опасность скольжения! Соблюдайте осторожность при использовании ходунков с колесиками на гладком полу или незакрепленном ковровом покрытии.
- Обеспечьте устойчивое положение ходунков во время пользования ими.
- Убедитесь, что тормоза и стояночный тормоз функционируют.
- Не нагружайте сумку или корзину, ролятора более чем на 4 кг., при использовании ролятора. Опасность переворачивания!
- Никогда не используйте в качестве сиденья планшет в положении М. Опасность переворачивания!

