


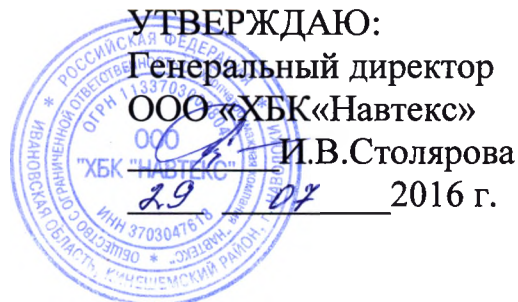

ИНСТРУКЦИЯ по применению марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной по ТУ 9393-001-10715071-2014

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная ТУ 9393-001-10715071-2014
 арт.6498/22, арт. 6498/21, арт. 6498/8.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Марля может применяться в клинических, поликлинических условиях, в условиях промышленных предприятий, а также при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Марля предназначена для изготовления марлевых медицинских перевязочных средств.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Марля изготавливается из пряжи хлопчатобумажной по ОСТ 17-362-85.

4.2 Марля выпускается в рулонах шириной от 68 см до 2000 см, длиной от 50 до 2500 м или в куске не менее 20 м, в количестве не более 10% от партии или по согласованию с потребителем, куски марли длиной менее 10м.

4.3 Рулоны обертывают бумагой по ГОСТ 8273-75 и упаковывают в упаковочный мешок из полипропиленовой ткани по ГОСТ 30090. Куски марли упаковывают в пленку полиэтиленовую по ГОСТ 103354.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеет.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки марли.
- 6.2 Вскрыть упаковку, приступить к изготовлению перевязочных средств.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Марля может транспортироваться всеми видами транспортных средств, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Марля должна храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 при температуре от 0° до +30°С.

8. СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности марли – 5 лет с даты изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованная марля относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной ТУ 9393-001-10715071-2014, производства фирмы

ООО «ХБК«Навтекс», страна Россия.

обращаться по адресу: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

Юр. Адрес: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

тел (49332) 9-74-79 адрес электронной почты E-mail: navtex@mail.ru

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах

