

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХБК «Навтекс»

И.В.Столярова

2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Салфеток марлевых медицинских нестерильных
ТУ 9393-007-10715071-2014

1. НАИМЕНОВАНИЕ

салфетки марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-007-10715071-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в машинных условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

салфетки предназначены как впитывающая основа для антисептиков при обработке различных поверхностей (неповреждённая кожа, медицинские изделия и мебель), а также для использования в качестве вложения в комплекты хирургические, а после стерилизации в качестве готового перевязочного средства.

салфетки с рентгеноконтрастной нитью и салфетки с Y-образным вырезом предназначены для использования в качестве вложения в комплекты хирургические, после стерилизации в качестве готового перевязочного средства.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки марлевые медицинские нестерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров, см:

$100 \pm 0,2 \times 150 \pm 0,2$; $250 \pm 0,2 \times 250 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,2 \times 150 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,2 \times 140 \pm 0,2$; $400 \pm 0,2 \times 150 \pm 0,2$; $400 \pm 0,2 \times 250 \pm 0,2$; $400 \pm 0,2 \times 280 \pm 0,2$; $400 \pm 0,2 \times 350 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,5 \times 50 \pm 0,5$;
 $100 \pm 0,5 \times 150 \pm 0,2$; $550 \pm 0,5 \times 250 \pm 0,2$; $550 \pm 0,5 \times 350 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,5 \times 350 \pm 0,2$; $750 \pm 0,5 \times 50 \pm 0,5$; $750 \pm 0,5 \times 750 \pm 0,5$; $750 \pm 0,5 \times 950 \pm 0,5$;
 $100 \pm 0,5 \times 150 \pm 0,2$; $800 \pm 0,5 \times 175 \pm 0,2$; $800 \pm 0,5 \times 250 \pm 0,2$; $800 \pm 0,5 \times 350 \pm 0,2$; $800 \pm 0,5 \times 450 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,5 \times 70 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,5 \times 350 \pm 0,2$;
 $100 \pm 0,5 \times 50 \pm 0,5$; $1000 \pm 0,5 \times 60 \pm 0,5$; $1000 \pm 0,5 \times 750 \pm 0,5$; $1000 \pm 0,5 \times 1000 \pm 0,5$;
 $100 \pm 0,5 \times 250 \pm 0,2$; $1150 \pm 0,5 \times 290 \pm 0,2$; $1150 \pm 0,5 \times 350 \pm 0,2$; $1150 \pm 0,5 \times 500 \pm 0,5$; $1150 \pm 0,5 \times 600 \pm 0,5$;
 $100 \pm 0,5 \times 725 \pm 0,5$; $1150 \pm 0,5 \times 850 \pm 0,5$; $1150 \pm 0,5 \times 950 \pm 0,5$; $1150 \pm 0,5 \times 1150 \pm 0,5$; $1150 \pm 0,5 \times 1450 \pm 1,0$;
 $100 \pm 0,5 \times 850 \pm 0,5$;
 $100 \pm 1,0 \times 350 \pm 0,2$; $1500 \pm 1,0 \times 500 \pm 0,5$; $1500 \pm 1,0 \times 750 \pm 0,5$; $1500 \pm 1,0 \times 1000 \pm 0,5$; $1500 \pm 1,0 \times 1450 \pm 1,0$;
 $100 \pm 1,0 \times 70 \pm 0,5$; $1600 \pm 1,0 \times 140 \pm 1,0$;
 $100 \pm 1,0 \times 550 \pm 0,5$; $1750 \pm 1,0 \times 680 \pm 0,5$; $1750 \pm 1,0 \times 850 \pm 0,5$; $1750 \pm 1,0 \times 1150 \pm 0,5$; $1750 \pm 1,0 \times 1350 \pm 0,5$;
 $100 \pm 1,0 \times 170 \pm 1,0$;
 $100 \pm 1,0 \times 1000 \pm 0,5$;
 $100 \pm 1,0 \times 350 \pm 0,2$; $2250 \pm 1,0 \times 450 \pm 0,5$; $2250 \pm 1,0 \times 725 \pm 0,5$; $2250 \pm 1,0 \times 950 \pm 0,5$; $2250 \pm 1,0 \times 1450 \pm 1,0$;
 $100 \pm 1,0 \times 850 \pm 0,2$; $2350 \pm 1,0 \times 1150 \pm 0,5$; $2350 \pm 1,0 \times 1700 \pm 1,0$;

$\pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 8,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 11,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 17,0 \pm 1,0$; $35,0 \pm 1,0 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 34,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 14,5 \pm 0,5$; $45,0 \pm 1,5 \times 29,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 34,0 \pm 1,0$; $70,0 \pm 1,5 \times 68,0 \pm 1,5$;

лентки марлевые медицинские нестерильные в развернутом виде, см:

$\pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 15,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $15,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 2,0 \times 14,0 \pm 2,0$;
 $\pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 1,0 \times 12,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0 \times 18,0 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $22,5 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $30,0 \pm 1,0 \times 12,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $40,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 25,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $45,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $45,0 \pm 2,5 \times 29,0 \pm 2,0$;
 $\pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 36,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 37,5 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 68,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $75,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 25,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 36,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 37,5 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 50,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $\pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 1,0$; $90,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $90,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $90,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $\pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $100,0 \pm 2,0 \times 24,0 \pm 1,0$; $100,0 \pm 2,0 \times 30,0 \pm 1,5$; $100,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $120,0 \pm 2,0 \times 24,0 \pm 1,0$; $120,0 \pm 2,0 \times 30,0 \pm 1,5$; $120,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 2,0 \times 50,0 \pm 1,5$; $120,0 \pm 2,0 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $\pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $\pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $\pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;

лентки марлевые медицинские нестерильные с рентгеноконтрастной нитью в готовом (сшитом) виде, см:

$0,5 \times 5,0 \pm 0,5$;
 $0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $7,5 \pm 0,5 \times 7,5 \pm 0,5$; $7,5 \pm 0,5 \times 9,5 \pm 0,5$;
 $0,5 \times 4,5 \pm 0,2$; $8,0 \pm 0,5 \times 7,0 \pm 0,5$;
 $\pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 6,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 7,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 10,0 \pm 0,5$;
 $\pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 6,0 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 7,25 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 8,5 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 9,5 \pm 0,5$;
 $\pm 0,5 \times 11,5 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 14,5 \pm 1,0$;
 $\pm 0,5 \times 8,5 \pm 0,5$;
 $\pm 1,0 \times 5,0 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 14,5 \pm 0,5$;
 $\pm 1,0 \times 7,0 \pm 0,5$; $16,0 \pm 1,0 \times 14,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 5,5 \pm 0,5$; $17,5 \pm 1,0 \times 6,8 \pm 0,5$; $17,5 \pm 1,0 \times 8,5 \pm 0,5$; $17,5 \pm 1,0 \times 11,5 \pm 0,5$; $17,5 \pm 1,0 \times 13,5 \pm 0,5$;
 $\pm 1,0 \times 17,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$;
 $\pm 1,0 \times 7,25 \pm 0,5$; $22,5 \pm 1,0 \times 9,5 \pm 0,5$; $22,5 \pm 1,0 \times 14,5 \pm 0,5$;
 $\pm 1,0 \times 8,5 \pm 0,2$; $23,5 \pm 1,0 \times 11,5 \pm 0,5$; $23,5 \pm 1,0 \times 17,0 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 8,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 11,5 \pm 0,5$; $35,0 \pm 1,0 \times 17,0 \pm 1,0$; $35,0 \pm 1,0 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $\pm 1,0 \times 34,0 \pm 1,0$;

лентки марлевые медицинские нестерильные с рентгеноконтрастной нитью в свернутом виде, см:

$\pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 15,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 20,0 \pm 1,0$;

$15,0 \pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $15,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $20,0 \pm 1,0 \times 14,0 \pm 2,0$;
 $20,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 1,0 \times 12,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0 \times 18,0 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $22,5 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $22,5 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $30,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $30,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$; $30,0 \pm 1,0 \times 12,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 15,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $30,0 \pm 1,0 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $40,0 \pm 1,0 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $45,0 \pm 1,0 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $40,0 \pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $40,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$;
 $40,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 25,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $40,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $45,0 \pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $45,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $45,0 \pm 2,5 \times 29,0 \pm 2,0$;
 $45,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $45,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$;
 $50,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $50,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $60,0 \pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $60,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 36,0 \pm 1,0$; $60,0 \pm 1,5 \times 37,5 \pm 1,0$;
 $60,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$; $60,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $75,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 0,5$;
 $75,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $75,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $80,0 \pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 0,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 18,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $80,0 \pm 1,5 \times 22,5 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 24,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 25,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 36,0 \pm 1,0$;
 $80,0 \pm 1,5 \times 37,5 \pm 1,0$; $80,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 45,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 50,0 \pm 1,5$; $80,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $90,0 \pm 1,5 \times 10,0 \pm 0,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 12,0 \pm 0,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 15,0 \pm 0,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 20,0 \pm 1,0$; $90,0 \pm 1,5 \times 30,0 \pm 1,0$;
 $90,0 \pm 1,5 \times 40,0 \pm 1,5$; $90,0 \pm 1,5 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $100,0 \pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $100,0 \pm 2,0 \times 24,0 \pm 1,0$; $100,0 \pm 2,0 \times 30,0 \pm 1,5$; $100,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $120,0 \pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$; $120,0 \pm 2,0 \times 24,0 \pm 1,0$; $120,0 \pm 2,0 \times 30,0 \pm 1,5$; $120,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $120,0 \pm 2,0 \times 50,0 \pm 1,5$; $120,0 \pm 2,0 \times 60,0 \pm 1,5$;
 $150,0 \pm 2,0 \times 20,0 \pm 1,0$;
 $150,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;
 $150,0 \pm 2,0 \times 40,0 \pm 1,5$;

Салфетки марлевые медицинские нестерильные с Y-образным вырезом в готовом (пожарном) виде:

$7,5 \pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$;
 $7,5 \pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $7,5 \pm 0,5 \times 7,5 \pm 0,5$; $7,5 \pm 0,5 \times 9,5 \pm 0,5$;
 $8,0 \pm 0,5 \times 4,5 \pm 0,2$; $8,0 \pm 0,5 \times 7,0 \pm 0,5$;
 $10,0 \pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 6,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 7,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5 \times 10,0 \pm 0,5$;
 $11,5 \pm 0,5 \times 5,0 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 6,0 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 7,25 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 8,5 \pm 0,5$; $11,5 \pm 0,5 \times 9,5 \pm 0,5$;
 $11,5 \pm 0,5 \times 11,5 \pm 0,5$;
 $15,0 \pm 1,0 \times 5,0 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 7,5 \pm 0,5$; $15,0 \pm 1,0 \times 10,0 \pm 0,5$;

2 Салфетки выпускаются в нестерильном виде в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 и 48 слоев.

3 Салфетки представляют собой многослойные сорбционные изделия из марли медицинской в трех исполнениях:

салфетки марлевые медицинские нестерильные;

салфетки марлевые медицинские нестерильные с рентгеноконтрастной нитью;

салфетки марлевые медицинские нестерильные с Y-образным вырезом.

4 Салфетки изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412 или по ТУ 001-10715071-2014.

5 Салфетки нестерильные одного исполнения, типоразмера, количества слоев выпускаются в количестве 1, 2, 3, 4 или кратном 5, но не более 150 штук в упаковку,

ненную из пергаменты по ГОСТ 1341 или из подпергаменты по ГОСТ 1760 или из
и полиэтиленовой по ГОСТ 10354 или из пленки полипропиленовой по ТУ 2245-
0378591-2007 или по ТУ 2245-003-70378591-2007, или из бумаги ламинированной
ТУ 2245-010-21683836-2009 или из бумаги термо влаго устойчивой или жиростойкой
АСК, производства Чехия .

6 Салфетки изготовлены для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ 4.2
С 15150.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки салфеток.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в
открытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на
расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от
солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80 при
температуре от 0° до +30°С.

8. СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности салфеток – 5 лет с даты изготовления.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные салфетки относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

а территории Российской Федерации

вопросам, касающимся качества Салфеток марлевых медицинских нестерильных
ТУ 9393-007-10715071-2014, производства фирмы

ООО «ХБК«Навтекс», страна Россия.

обращаться по адресу: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

т.р. Адрес: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

т. (49332) 9-74-79 адрес электронной почты E-mail: navtex@mail.ru

В данном документе приобщен
скреплено печатью на листе

и. д. д. д.

Иванов

