

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Навтекс»

И.В. Столорова

2014 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Салфеток марлевых медицинских стерильных
ТУ 9393-006-10715071-2014

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Салфетки марлевые медицинские стерильные ТУ 9393-006-10715071-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Стерильные салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств для наложения на раны и осушения операционного поля.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Салфетки выпускаются в стерильном виде, различных типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоев.

4.2 Салфетки представляют собой многослойные сорбционные изделия из марли медицинской в двух исполнениях – с рентгеноконтрастной нитью или без неё.

4.3 Салфетки изготавливаются из марли медицинской по ГОСТ 9412 или по ТУ 9393-001-10715071-2014.

4.4 Салфетки стерильные одного исполнения, типоразмера, количества слоев упаковываются в количестве 1, 2, 3, 4 или кратном 5, но не более 150 штук в упаковку, выполненную из пергаменты по ГОСТ 1341 или из подпергаменты по ГОСТ 1760 или из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354 или из пленки полипропиленовой по ТУ 2245-003-70378591-2007 или по ТУ 2245-003-70378591-2007, или из бумаги ламинированной по ТУ 2245-010-21683836-2009 или из бумаги термо влаго устойчивой или жиростойкой КН РАСК, производства Чехия .

4.5 Стерилизация салфеток осуществляется радиационным методом.

4.6 Салфетки изготовлены для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Проверить целостность упаковки салфеток.
- 6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности салфеток – 5 лет со дня стерилизации.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные салфетки относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества Салфеток марлевых медицинских стерильных ТУ 9393-006-10715071-2014, производства фирмы

ООО «ХБК«Навтекс», страна Россия.

обращаться по адресу: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

Юр. Адрес: 155830 Ивановская обл. г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1

тел (49332) 9-74-79 адрес электронной почты E-mail: navtex@mail.ru

В данном документе прошито
скреплено печатью на

М. Бур. Мед. ...

