

Квикс®

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. «Квикс®» снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС®» И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ

В 100 мл спрея «Квикс®» содержится 84,6 мл воды Атлантического океана и 15,4 мл очищенной воды. Раствор прозрачный, без цвета и запаха.

«Квикс®» представляет собой назальный спрей, содержащий воду Атлантического океана в оптимальной концентрации (содержание соли 2,6%). Эта вода обладает уникальной комбинацией целебных минералов и микроэлементов. Микроэлементы океанической воды, такие как медь, марганец, золото и серебро, ценятся за свои противомикробные, противовоспалительные и антиаллергические свойства.

«Квикс®» оказывает естественную помощь заложенным носовым ходам и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

КАКИМ ОБРАЗОМ «КВИКС®» ОБЛЕГЧАЕТ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа
- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря своим свойствам «Квикс®» восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (ринит, синусит) и облегчает дыхание.

«КВИКС®» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания

2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Взрослые и дети от 3 месяцев.

«Квикс®» может применяться у беременных и кормящих женщин.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Всегда используйте «Квикс®» в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

В начале применения возможно возникновение чувства жжения.

Дозировка:

Детям от 3 месяцев:

1-2 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Взрослым:

1-3 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Длительность применения не ограничена.

Пользование спреем:

Снимите колпачок. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника (рис. 1). Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету (рис. 2). Протрите наконечник салфеткой и оденьте колпачок.



Рис. 1



Рис. 2

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность (аллергические реакции) к морской воде.

5. КАК ХРАНИТЬ «КВИКС®»

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

После вскрытия упаковки спрей «Квикс®» следует использовать в течение 6 месяцев.

Не используйте «Квикс®» после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

6. ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

Флакон спрея «Квикс®» содержит 30 мл раствора. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает загрязнение содержимого на протяжении всего периода использования, но не более 6 месяцев.

Каждый флакон содержит около 220 доз.



Производитель:

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(МЕНАРИНИ ГРУП)
Глиникер Вег, 125
12489 Берлин
Германия

Дистрибьютор:

ЗАО «Берлин-Фарма»
ул. Шаболовка, 31, стр.Б
115162 Москва
Россия
тел.: (495) 797-59-55

CE

ООО "МедТехКомплект"

Россия, 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д.11, оф. 73, тел. 198 8109,
E-mail: info@medtestconsult.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Согласовано

Главный врач ФГУЗ

Клиническая больница № 119

ФМБА России

В.К. Агапов

Руководитель организации-
заявителя Генеральный директор
ООО МедТехКомплект»

Колосова Г.Б.

« 09 »

2008 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

«КВИКС» 30мл Спрей назальный
«Гипертонический раствор морской воды
для очищения и увлажнения носа»

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КВИКС®

Нос можно назвать воротами дыхательных путей, а также их защитой. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. «Квикс»® снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

Инструкция по применению

1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС» И КАК ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

«Квикс»® представляет собой назальный спрей, содержащий концентрированную воду Атлантического океана со всеми его целебными минералами и микроэлементами. Микроэлементы морской воды, такие как медь, марганец, золото и серебро, ценятся за свои противомикробные, противовоспалительные и антиаллергенные свойства.

«Квикс»® оказывает естественную помощь заложенным носовым полостям и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

ЧТО ДЕЛАЕТ «КВИКС»® ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа
- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря этим качествам «Квикс»® восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (ринит, синусит) и облегчает дыхание.

«КВИКС»® ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания

2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС»

Взрослые, дети и младенцы от 3 месяцев.

«Квикс»® может применяться у беременных и кормящих женщин.

Не используйте «Квикс»®, если у вас наблюдается аллергия (гиперчувствительность) к морской воде.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС»

Всегда используйте «Квикс»® в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Дозировка:

Младенцы от 3 месяцев и дети:

1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

Взрослые:

1–3 впрыскиваний в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

BERLIN-CHEMIE AG

Product: Quixx®

Product No.: V 0xxxxx/01

Language: Russian

Size: 120 x 180 mm

xx g/m²

Colours: 1. P282

Datum: 11.03.08

Kamenir

BC 08-0xxx

Lauffat

Re-proofing

Ready for printing

Signature

Квикс®

Нос можно назвать воротами дыхательных путей, а также их защитой. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. «Квикс» снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

Инструкция по применению

1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС» И КАК ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

«Квикс» представляет собой назальный спрей, содержащий концентрированную воду Атлантического океана со всеми его целебными минералами и микроэлементами. Микроэлементы морской воды, такие как медь, марганец, золото и серебро, ценятся за свои противомикробные, противовоспалительные и антиаллергенные свойства.

«Квикс» оказывает естественную помощь заложенным носовым полостям и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

ЧТО ДЕЛАЕТ «КВИКС» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа
- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря этим качествам «Квикс» восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (ринит, синусит) и облегчает дыхание.

«КВИКС» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания

2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС»

Взрослые, дети и младенцы от 3 месяцев.

«Квикс» может применяться у беременных и кормящих женщин.

Не используйте «Квикс», если у вас наблюдается аллергия (гиперчувствительность) к морской воде.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС»

Всегда используйте «Квикс» в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Дозировка:

Младенцы от 3 месяцев и дети:

1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в день.

Взрослые:

1-3 впрыскиваний в каждый носовой ход 2-3 раза в день.

BERLIN-CHEMIE AG		Leaflet
Product:	Quixx®	
Product No.:	V 0xxxxx/01	
Language:	Russian	
Size:	120 x 180 mm	xx g/m²
Colours:	1. P282	
Date:	11.03.08	Kamenir BC 08-0xxx

Re-proofing
Ready for printing
Signature

Генеральный директор



Колосова Г.Б.
расшифровка подписи

